


このたびは、ファミリーメディカルチェア Smartをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この製品は、疲労の回復・改善を目的としたさまざまなマッサージが楽しみいただけます。皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして末永くご愛用ください。



**ファミリーメディカルチェア  
スマート**

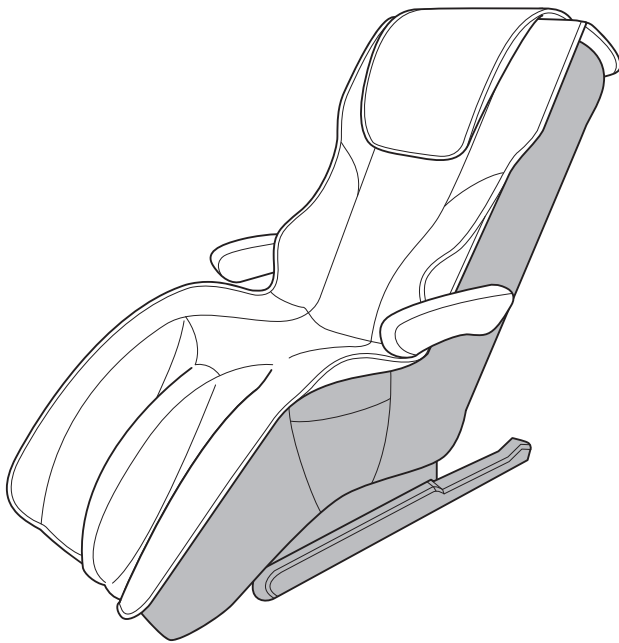

もくじ

■ 安全上のご注意	1
■ おもな特長と使用目的または効果	4
■ 各部の名前とはたらき	5
■ ご使用の前に	7
■ 椅子の調節	10
■ 使い終わったら	12
■ コースの種類と特長	13
■ 自動コース	14
■ お好みコース	15
■ Q&A	17
■ 故障かな?と思ったら	18
■ 保管とお手入れの仕方	19
■ アフターサービスについて	20
■ 仕様	21
■ 安全のために商品の点検を	22
■ お問い合わせ窓口・保証書	裏表紙

ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

日本国内専用	この製品は日本国外への輸出と使用を禁止しています。 PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE PRODUCT OUTSIDE OF JAPAN.
<p>この製品に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。 よってこの製品を国外に持ち出した場合、保証及び修理対応はできませんのでご了承ください。 JAPANESE EQUIPMENT SPECIFICATION WARRANTY APPLIES ONLY IN JAPAN. WARRANTY INCLUDING REPAIRS BY THE MANUFACTURER DOES NOT APPLY IF THE PRODUCT IS TAKEN OUT OF JAPAN.</p>	

- ◎「取扱説明書」は、いつでも見られるように大切に保管してください。
- ◎この製品は、日本国内の弊社工場にて企画・開発・設計から最終組み立て、及び品質保証まで全てをおこなっております。
- ◎この製品は、一般家庭用として設計されていますので、一般家庭以外（業務用等）でご使用の場合は、お買い上げの販売店または「製品に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。

添付文書  
取扱説明書

Massage  
+  
Medical





# 安全上のご注意

ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。








次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。なお、各部の名前については5～6ページをご覧ください。

**お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。**






## 表示の種類

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。

## 図記号の種類と意味



 禁止	禁止の行為であることを示しています。
 分解禁止	分解してはいけないことを示しています。
 ぬれた手禁止	ぬれた手で扱ってはいけないことを示しています。
 禁止	風呂・シャワー室等で使用してはいけないことを示しています。
 強制	行為を強制したり指示したりするものです。
 プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
 アース取り付け	アースを取り付けることを示しています。

## ご使用場所の注意



 <b>注意</b>	
 禁止	●浴室やサウナ、湿気の多い場所では使用しないでください。 →感電や故障の原因になります。
 強制	●床面が水平な場所に置いて使用してください。 →不安定な場所では本体が転倒し事故の原因になります。
 アース取り付け	●万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。 詳しくは、8ページをご覧ください。
 禁止	●アース線はガス管・水道管・電話線・避雷針には絶対に接続しないでください。

## ご使用前の注意点

### 警告




 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 次の人は使用しないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]等。</li> <li>○ 急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人</li> </ul> </li> <li>● 電源は交流100V以外では使用しないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 火災や感電の原因になります。</li> </ul> </li> <li>● 変圧器を用いた使用はしないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 故障や感電の原因になります。</li> </ul> </li> <li>● 電源コードや電源プラグがいたんだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいとき等は使用しないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 感電やショート・発火の原因になります。</li> </ul> </li> <li>● マッサージの前には必ず施療部の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、「修理等に関するお問い合わせ窓口」(裏表紙に記載)にご連絡ください。施療部の布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 布地が破れた状態で使用すると、ケガや感電のおそれがあります。</li> </ul> </li> </ul>
 強制	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 次の人は、使用前に医師に相談してください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 心臓に障害のある人</li> <li>○ 糖尿病等による高度な末梢循環障害による知覚障害のある人</li> <li>○ 骨粗しょう(鬆)症の人やせきつ(脊椎)の骨折、急性[とつ(疼)痛性]疾患の人</li> <li>○ 施療部位に創傷のある人</li> <li>○ 体温38℃以上(有熱期)の人 例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動等]の強い時期、衰弱しているとき</li> <li>○ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人</li> <li>○ ペースメーカー等の電磁障害を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人</li> <li>○ 背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人</li> <li>○ かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人</li> <li>○ 悪性のしゅよう(腫瘍)のある人</li> <li>○ 安静を必要とする人</li> <li>○ 内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)等の急性症状のある人</li> <li>○ 医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人</li> <li>○ リウマチ症、痛風等により関節が変形している人</li> <li>○ めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人</li> <li>○ 捻挫、肉離れ等の炎症性の人</li> <li>○ 腱鞘炎、またはそのおそれのある人</li> </ul> </li> <li>● 特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。</li> <li>● 使用しても、効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。</li> </ul>

### 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● この取扱説明書の使用法以外の使い方をしないでください。また、本機と他の治療器や電気毛布等を併用しないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。</li> </ul> </li> <li>● 人をのせたまま移動しないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 本体の転倒により、事故やケガの原因になります。</li> </ul> </li> <li>● リクライニングを倒したままで椅子に座らしないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 故障の原因となります。また、本体の転倒により事故やケガの原因になります。</li> </ul> </li> <li>● 付属品以外のものを用いて本機を使用しないでください。</li> </ul>
 強制	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグをコンセントに差し込む前に主電源スイッチが切れていることを確認してください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 故障や感電の原因になります。</li> </ul> </li> <li>● 電源プラグおよびコネクタは確実に最後まで差し込んでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 感電やショート・発火の原因になります。</li> </ul> </li> <li>● ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。</li> <li>● ご使用前にはリクライニングを完全に起こし体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。</li> </ul> </li> <li>● 安全のために、メカの位置を確認し、収納位置にない場合は、主電源スイッチを入れ、機器が正常に動作することを確認してからゆっくり座ってください。</li> <li>● 椅子に腰掛けたり、椅子から立ち上がる時以外は、フットレストの上の、立つ、座る等の行為はしないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 転倒による事故やケガ、故障の原因になります。</li> </ul> </li> <li>● しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。</li> </ul>

## ご使用時の注意点




### 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードやリモコンのコードを本体に巻きつけたり、本体の脚で踏んだりしないでください。また、電源コードやリモコンのコードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ コードが破損し、火災や感電の原因になります。</li> </ul> </li> <li>● 本体やリモコンに水等をこぼさないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 感電やショート・発火の原因になります。</li> </ul> </li> <li>● お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを、本体の上や本体の周辺(背もたれの後ろや座・フットレストの下部)で遊ばせたり、本体の上ののせたり、座らせたりしないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 事故やケガの原因になります。</li> </ul> </li> <li>● 椅子に2人以上座ってのご使用はおやめください。特に小さなお子様(乳児等)を抱きかかえてのご使用はおやめください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 事故やケガの原因になります。</li> </ul> </li> <li>● 布地が破れた状態では使用せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 事故やケガ・感電の原因になります。修理は「修理等に関するお問い合わせ窓口」(裏表紙に記載)にご相談ください。</li> </ul> </li> <li>● 本体を手で持ち上げた状態で急に手をはなさないでください。</li> </ul>
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ぬれた手で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 感電や故障の原因になります。</li> </ul> </li> </ul>
 強制	<ul style="list-style-type: none"> <li>● マッサージコース開始前やリクライニングを倒すときや起こすとき、必ず周囲に人(特にお子様)やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろやフットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 事故やケガの原因になります。</li> </ul> </li> <li>● 体や物がはさまりこまれた場合、リクライニングボタンを押して安全な位置まで戻してください。</li> </ul>

# 安全上のご注意



## ご使用時の注意点

### ⚠️ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●素肌では使用しないでください。</li> <li>●マッサージおよび椅子としての目的以外には使用しないでください。 →事故やケガの原因になります。</li> <li>●頭部、胸部、腹部、関節部(ひじ、ひざ等)には使用しないでください。 →気分が悪くなったり、ケガの原因になります。首筋等には柔らかいタオルを当てて強い刺激を避けてご使用ください。</li> <li>●もみ玉が上下する部分、リクライニング等の可動部に手や足を入れしないでください。また、髪飾り、ネックレス、腕時計、プレスレット、指輪などのかたい物をつけて使用しないでください。</li> <li>●アームレスト可動部に手を入れしないでください。</li> <li>●アームレストに着座しないでください。</li> <li>●フットレストは脚部以外には使用しないでください。</li> <li>●マッサージチェアを無人で動作させないでください。 →事故やケガの原因になります。</li> </ul>
 強制	<ul style="list-style-type: none"> <li>●緊急時や動作中に異常を感じたときは、リモコンの[急停止]ボタンを押して、動作を停止させてください。</li> <li>●使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください。</li> <li>●マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し「製品に関するお問い合わせ窓口」(裏表紙に記載)にご相談ください。 →強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。</li> <li>●マッサージ中は眠らないように注意してください。 →ケガの原因になります。</li> <li>●マッサージは、1回以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。 →長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。1日当たりのマッサージは、通常30分程度を目安にして時間をあけてご使用ください。</li> <li>●脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れしないでください。 →無理に入れようとすると、故障の原因になります。</li> </ul>
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> <li>●停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止して主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。</li> <li>●落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止して、主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。</li> <li>●動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、「修理等に関するお問い合わせ窓口」(裏表紙に記載)に点検・修理を依頼してください。 →感電や漏電・ショート等による火災のおそれがあります。</li> </ul>



## ご使用後や使用しないときの注意点

### ⚠️ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用後は必ず主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。</li> <li>●電源コードは本機以外では使用しないでください。</li> <li>●本機を使用後は、必ずリクライニングを完全に起こしてください。</li> <li>●使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。</li> <li>●本機に物を載せないでください。</li> </ul>
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。 →感電やショートによる火災の原因になります。</li> <li>●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。</li> <li>●ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 →ホコリや湿気が絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。</li> </ul>

## その他の注意点

### ⚠️ 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体の上に立たないでください。座部以外に座る等して、上から強い衝撃を与えないでください。</li> <li>●アームレストに手をかけて移動させないでください。 →転倒による事故やケガ、故障の原因になります。</li> </ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●機器が故障した場合は、勝手に修理せず、販売店または「修理等に関するお問い合わせ窓口」(裏表紙に記載)に連絡してください。</li> <li>●電源コードが破損した場合、危険ですので電源コードの交換は「修理等に関するお問い合わせ窓口」(裏表紙に記載)に交換の依頼をしてください。</li> <li>●機器は改造しないでください。 →火災や感電、ケガの原因になります。</li> </ul>

### ⚠️ 注意

 強制	<ul style="list-style-type: none"> <li>●他の人に譲渡、貸与するときは、本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡しください。</li> </ul>
---	--

### お願い

- 製品及び付属品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

# おもな特長と使用目的または効果

## 特長

### アジャストセンサーによる 自動指圧点検索機能

マッサージ前に、その人の体型に応じて指圧点を自動的に検索。体型や目的に合わせて効果的なマッサージがおこなえるようになっています。

### 無重力姿勢をイメージ ゼログラビティ角度でマッサージ

マッサージ時のリクライニング角度を筋肉に負担が少ない角度に自動設定します。まるで無重力のような楽な姿勢でマッサージをおこないます。

### 設置箇所に悩まない コンパクト設計

全身マッサージ機で搬入幅64cm、マンション等でも設置しやすいサイズ。

### 横から乗り降りできる 可動式アームレストで安全な乗降姿勢

乗り降りの際に不安定な体勢にならないように、アームレストを上跳到横からの乗降ができます。前向きに座り直してご利用ください。  
※アームレストに乗ったり、寄りかかったり、強い衝撃を掛けないでください。また、横方向からは負荷をかけないでください。

### ひとそれぞれの強さに合わせる 人工知能搭載

ブラシレスモーターを使用し、特殊なパルス制御をおこなうことで、それぞれの体型に合ったマッサージを実現

### 2つに分かれて同時にマッサージ Wメカシステム

上半身、下半身に専用のマッサージメカを搭載。動きを連動させることで、全身をくまなくマッサージ。血流に沿ったマッサージなど、効果的にマッサージをおこないます。

### 充実の全身施術 プロコース搭載

松浦鍼灸大学堂院長 松浦氏監修のプロの施術を徹底的に模したマッサージ手順でもみほぐすマッサージコース。じっくりと全身くまなくもみほぐします。

### ただしい姿勢を支える ランバーサポート機能

腰のサポート機能をもった座面は、正しい姿勢を保つことで腰への負担を和らげます。

【おもな特長と使用目的または効果】

## 使用目的または効果



あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用するごと。

- 疲労回復 ● 筋肉の疲れをとる ● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- 血行をよくする ● 筋肉のこりをほぐす

※本機のリモコン、付属品の名称等に「指圧」の文言を使用しておりますが、使用目的または効果に指圧の代用は含まれておりません。

# 各部の名前とはたらき

【各部の名前とはたらき】

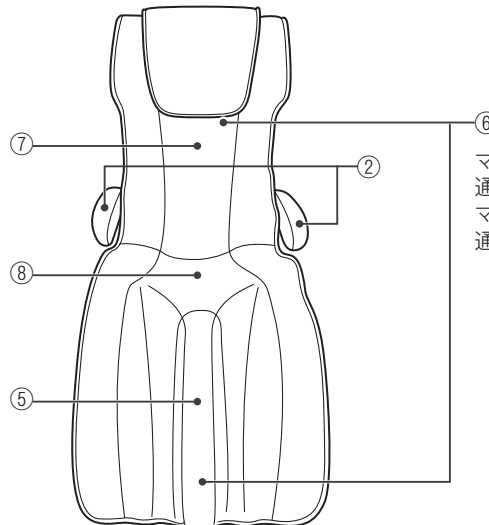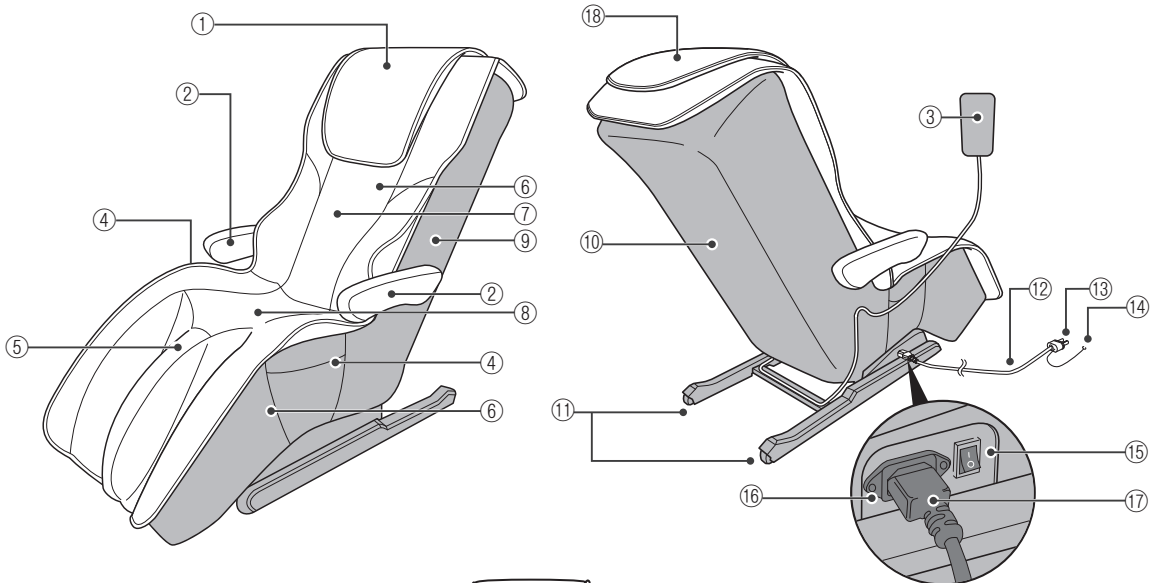


マッサージメカ（上部）は、通常は上部に収納されています。マッサージメカ（下部）は、通常は最下部に収納されています。

①	枕(可動式)
②	アームレスト / 左右各 1 個
③	リモコン
④	リモコンポケット (左右)
⑤	フットレスト
⑥	マッサージメカ (背・脚) (内部に収納されています)
⑦	背パッド
⑧	座
⑨	背もたれ
⑩	裏カバー

⑪	キャスター
⑫	電源コード
⑬	電源プラグ
⑭	アース線
⑮	主電源スイッチ
⑯	インレット
⑰	コネクタ
⑱	スピーカーヘッドレスト (別売) 取付用ファスナー (枕の下にあります)



## リモコン

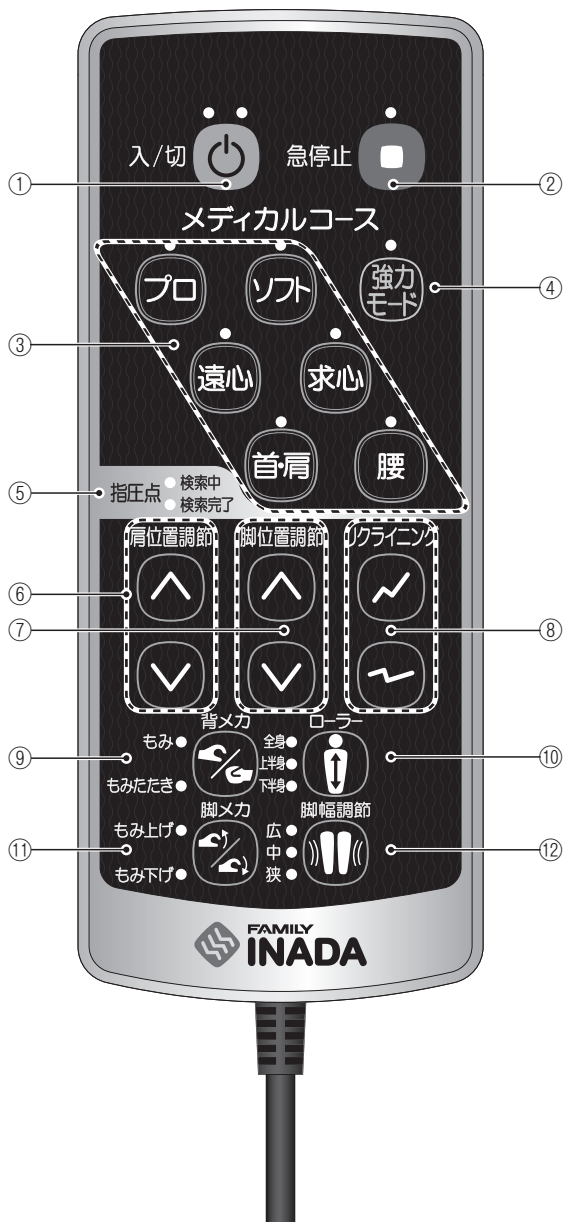

①	入/切ボタン	リモコンの電源の「入」「切」をおこないません。リモコンの電源が「入」の状態では緑色、「切」の状態ではオレンジ色に点灯します。動作中に押すと、もみ玉が収納位置まで戻ってから停止します。
②	急停止ボタン	緊急時や動作中に異常を感じたときに押してください。その場で動作が停止します。急停止中は入/切ボタンのランプが赤色に点滅します。
③	自動コースボタン (メディカルコース)	各ボタンでコースを選択できます。
④	強力モードボタン	マッサージ中に選択することで、強力モードを選択し、マッサージを強くすることが出来ます。
⑤	指圧点検索表示ランプ	指圧点の検索中と検索完了をランプでお知らせします。
⑥	肩位置調節ボタン	指圧点検索時の肩位置や、手動コース中のもみ玉の位置の調節に使用します。(首から尻にかけて)
⑦	脚位置調節ボタン	お好みコース中のマッサージの位置の調節に使用します。(尻から脚にかけて)
⑧	リクライニングボタン	リクライニング角度を調節します。
⑨	背メカマッサージボタン	上半身のマッサージ(もみ、もみたたき)を選択できます。
⑩	ローラーマッサージボタン	ローラーマッサージを選択できます。(全身、上半身、下半身)
⑪	脚メカマッサージボタン	下半身のマッサージ(もみ上げ、もみ下げ)を選択できます。
⑫	脚マッサージ幅調節ボタン	脚マッサージの幅を調節できます。(広・中・狭) 三段階調節

【各部の名前とはたらき】

<b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンに水等をこぼさないでください。</li> <li>●ぬれた手で操作しないでください。</li> </ul>
<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンの上に座ったり、落としたり、踏んだり、コードを強くひっぱったりしないでください。</li> <li>●先のとがったものやかたいものでボタンを押さないでください。 →破損の原因になります。</li> </ul>

# ご使用前に

- この製品は、背もたれが倒された状態で梱包してお届けしています。ご使用前には、必ず背もたれを起こしてください。
- 冷えきった室内の温度を上げて使用するとき、室温を急に上げず、徐々に上げてください。本機を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1時間ほど待ってから使用してください。  
→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。

## 設置場所について


リクライニングをしたときに壁や物に当たらないように、本体前後のスペースを約50cm以上確保してください。



注意

- 浴室やサウナなど、湿気が多い場所では使用しないでください。
- 床面の水平な場所に置いて使用してください。
- ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所(40℃以上)では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。
- タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。

- 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。(ホットカーペットは敷かないでください。)
- 重量物ですので、下ろすとき床面を傷つけないように注意してください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。
- 体重100kgの人が座った状態で1cmあたり約3.0 kgの荷重がかかります。

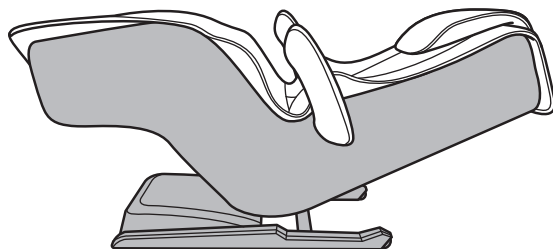


← 171 cm →

## 同梱物の確認

梱包箱には本体と同梱物が入っていることを確認してください。

本 体

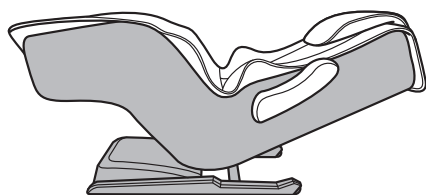

本体

同 梱 物



取扱説明書(本誌)



電源コード




## 搬入/移動の仕方

移動の際は、主電源スイッチを切り、電源プラグ及びアース線をコンセントから抜き、電源コードのコネクタもインレットから抜いてください。

### キャスターで移動するとき


リクライニングを倒し、フットレストの側面から持って前側を浮かせ、キャスターで移動してください。

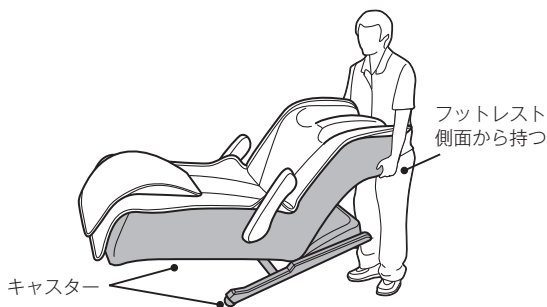

床を傷つけるおそれがありますので、マット等を敷いて移動してください。

### 持ち上げて運ぶとき

リクライニングを倒し、背もたれうしろ側とフットレストの側面から持って、持ち上げて移動してください。

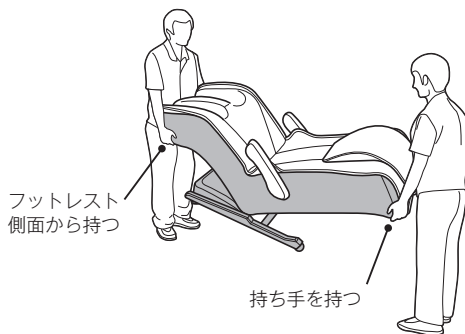

本体を落とすと床を傷つけたり、ケガをしたりするおそれがありますので、しっかり持ってください。

- 重量物ですので搬入移動時に、製品を落としたり、ケガ等しないよう、運搬用手袋を装着してください。
- 重量物ですので搬入移動時には腰等を痛めないようご注意ください。
- リモコンがついていますので、移動時に落とさないよう注意してください。

## 注意

- フットレスト底面は絶対に持たないでください。  
→ 床面保護用のシートが破損する恐れがあります。
- 人をのせたまま移動させないでください。
- アームレストに手をかけて移動させないでください。
- 電源コード、アース線をコンセントからはずし、電源コードのコネクタもインレットから抜いて移動してください。  
→ 電源コード、アース線が破損し、火災や感電の原因になります。

## アースの取付け方

万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。


### ①電源コンセントにアース端子がある場合

電源プラグから出ているアース線を、電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでないかときどき点検してください。

### ②電源コンセントにアース端子がない場合

お買い上げの販売店にご相談ください。


**電源コードは、必ず本機器に付属のものをご使用ください。とくに、電源コードのプラグ部にアース線がついていないものは万一の感電を防ぐことができませんので絶対に使用しないでください。**

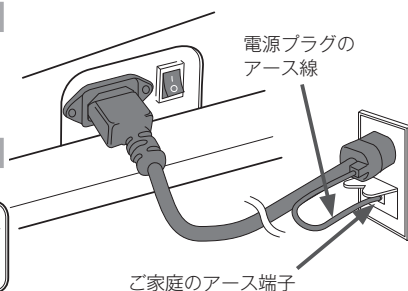


# ご使用前に

## 主電源の入れ方

- ① 電源をオフして、電源コードのコネクタを本体右部のインレットに差し込みプラグをコンセントに差し込みます。

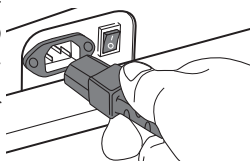

- ② 本体右部の主電源スイッチを入れます。

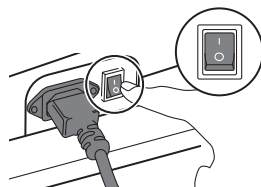

※もみ玉が途中で止まっているとき主電源スイッチを入れると、もみ玉は自動的に収納位置(背もたれ上部とフットレスト下部)まで移動して停止します。

### 警告

- 変圧器を用いた使用はしないでください。  
→故障や感電の原因になります。
- 日本国外では使用しないでください。  
→故障や感電の原因になります。

### 注意

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に主電源スイッチが切れていることを確認してください。
- 電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。
- ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。

【ご使用前に】

## 布地の確認

ご使用前には布地の破れがないか確認してください。

### 注意

- ご使用前には必ず本体布地が破れていないか確認してください。またその他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、「修理等に関するお問い合わせ窓口」(裏表紙に記載)にご連絡ください。本体布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。

## リモコンの取り回し方

リモコンポケットは、左右のアームレスト下にあります。梱包の段階では、右側のポケットを使用する想定で右側に回して設置してあります。

### ● 左のポケットを使用する場合は、…


- ① リクライニングを起こした状態で、リモコンコードに付いているマジックテープを取り外します。
- ② 1番右のコードホルダから、リモコンコードを取り外してください。(3カ所中1カ所のみ)
- ③ コードを左側に取り回して、マジックテープで固定して、使用してください。



コードホルダは、3カ所ありますが1番右のコードホルダからのみ取り外します。



リモコンコードについているマジックテープで固定します。

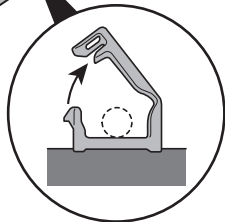

コードホルダを外します。

# 椅子の調節

## 椅子の座り方

もみ玉は通常、背もたれの上部和フットレストの下部にそれぞれ左右に広がって引っ込んだ状態になっています(収納状態)。安全のため、もみ玉の位置を確認し、上記以外の場所にもみ玉がある場合はすぐに座らず主電源スイッチを入れて、もみ玉を収納状態に戻してから、ゆっくりと椅子の中央に座ってください。



**注意**

- リクライニングを倒したまま椅子に座らないでください。  
→フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本体の転倒により、事故やケガの原因となります。
- ご使用前はリクライニングを完全に起こし、体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。

## 椅子への乗り降りの際の注意点

### 【前から乗り降りする場合】

アームレストの上、または座面手前に手を置いて支えながら乗り降りしてください。  
(アームレスト上方向からの耐荷重：80kg)



### 【横から乗り降りする場合】

アームレストは可動式です。上へはね上げてから乗り降りしてください。



**警告**

- アームレストに乗ったり、寄りかかったり、強い衝撃を掛けないでください。また、横方向からは負荷をかけないでください。  
→アームレスト片側に強い負荷(約80kg以上)がかかると破損する恐れがあります。  
→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。  
→ケガや故障の原因になります。

# 椅子の調節

リクライニングの使い方

## ■リクライニングを起こす場合

リクライニングボタンの上側のボタンを押すことでリクライニングを起こすことができます。

リクライニング



## ■リクライニングを倒す場合

リクライニングボタンの下側のボタンを押すことでリクライニングを倒すことができます。



## ■ゼログラビティ角度に注目！

マッサージチェアにおける理想の施術は、いかに施術時の負担を減らしながら、リラックスできるかということ。さらに、いかに身体のS字ラインに合わせて適切にマッサージできるかということ。ファミリーイナダは独自の研究により、「脱・重力負担」のゼログラビティ角度に着目。イス全体で均等に身体を支え、全身の筋肉の負担を減らすことで、無重力のような楽な姿勢でリラックスしてマッサージすることを可能にしました。



### 長押し機能

ボタンをおよそ2秒間長押しするとリクライニングの起こす（倒す）の動作を自動でおこないます。

途中で止める時は再度ボタンを押してください。




警告

●リクライニングを倒すときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろに体や物をはさまないようにしてください。

# 椅子の調節

## 枕の使い方と調節

枕は裏側についているマジックテープで、位置を上下に調節してください。

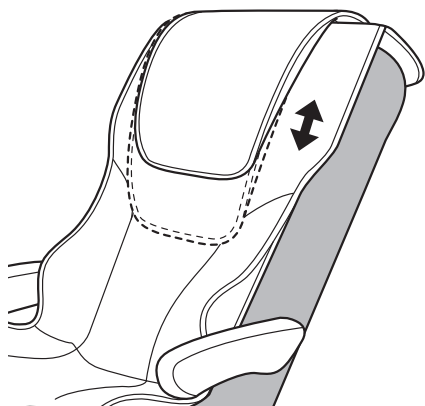

### 正しい枕の位置



枕にしっかりと後頭部がのっていない。



枕にしっかりと後頭部を置きます。

- 枕は正しい位置でご使用ください。位置によっては、自動指圧点検索がうまくいかない場合があります。

## 使い終わったら

周囲に注意しながら、リクライニングを完全に起こす！

もみ玉が収納位置に移動し、完全に停止したことを確認してから、本体右側の主電源スイッチを切りましょう！

### ⚠注意

- コース終了後は、もみ玉が収納位置に移動します。移動中には、緊急の時を除いて、主電源のスイッチをきらないでください。
- 使用後は必ず主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
→お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。
- 使用後は、必ずリクライニングを完全に起こしてください。
- 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- コード類に引っかかって転倒しないようにしてください。

# コースの種類と特長

## 自動コース

あらかじめ設定されたメニューにより、目的・用途に応じたコースが簡単に選べます。

## メディカルコース

筋肉の疲労回復を目的としたコースです。

### プロコース

プロの施術を模した充実のマッサージコースです。

ゆっくりとしたもみほぐしにくわえて、リズムカルなたたきをおこなうことで、たっぷりとマッサージを味わっていただけます。

首から脚まで全身をじっくりマッサージするコースで、全体的に身体が疲れている人におすすめです。

### ソフトコース

からだの疲れを短時間で優しくもみほぐすコースです。

軽めの刺激でテンポよくもむことで、身体全体を短時間でリフレッシュさせます。

### 首・肩コース

肩こりの原因といわれる首から肩にかけてもみとローラ動作で、下半身メカはふくらはぎ中心に、くり返しもみほぐします。

### 腰コース

上半身メカが腰上部から仙骨部へ何度もくり返しもみ、下半身メカで太もも周辺を刺激することで腰の疲れをほぐします。

### 求心コース

身体の末端から血流を心臓に送り返す求心法で、静脈の流れに沿ってマッサージを行います。

身体をリフレッシュしたいとき、身体を目覚めさせたいときにおすすめです。

### 遠心コース

心臓から血流を身体の末端に促す遠心法で、動脈の流れに沿ってマッサージを行います。

身体をリラックスさせたいとき、おやすみ前におすすめのコースです。

## お好みコース


お好みの機能を組み合わせることができます。  
また、上下調節など、マッサージ動作の調節もおこなえます。



# 自動コース

- 疲労の回復、改善などを目的とした6種類のコースを用意しています。
- 各コースボタンで目的に合わせてコースを選ぶことにより、あらかじめ設定されたメニューにもとづいてマッサージをおこないます。

## 操作方法

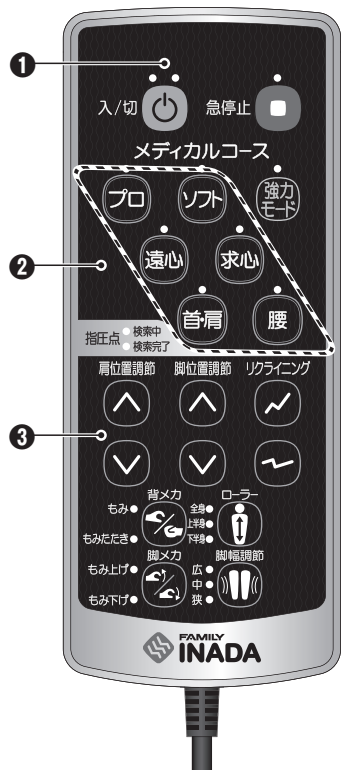

### ①「入/切」ボタンを押す。

5分間入力がなければ自動的に電源が切れて、オレンジ色のランプが点灯します。

### ②好きなコースのボタンを押します。

メディカルコースからお好みのコースをお選びください。  
リクライニングが少しの間動きません。

### ③肩位置調節ができます。

指圧点の検索中ランプが点灯し、指圧点の検索をおこないます。  
指圧点検索後、ランプが点滅している間に、肩の位置を調節できます。  
調節しなくてよい場合は、そのままにしておきます。

### ④コースが始まります。

指圧点の検索が完了すると、検索完了ランプが点灯し、コースが始まります。


### ⑤コースが終了します。

リクライニングが自動で起き上がり、もみ玉が収納位置まで戻ります。その後リモコンの電源が切れますが、リクライニングの上下調節はご使用になれます。

## 肩位置の調節

肩位置が合っていないときは肩位置調節ボタンで、肩位置を調節してください。

肩位置調節 	▲ 押している間もみ玉が上に動き続けます。
	▼ 押している間もみ玉が下に動き続けます。

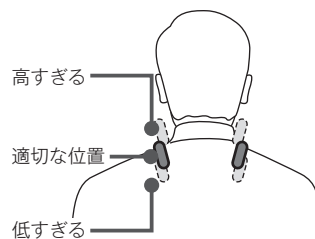

- もみ玉の位置が最上部(最下部)もしくは指圧点検索した肩位置にあるときに、さらに上昇(下降)を選択しても動きません。※「プブブ」と警告音が鳴ります。
- 一度も基本動作やローラーを選択していない場合はもみ位置調節ボタンを押しても動作しません。


## 注意

- 肩位置が高すぎる場合は後頭部にあたらぬように調節してください。  
→ケ方のおそれがあります。
- 体調に合わせて強さを調節してください。  
→強い刺激のままで使用を続けるとケ方のおそれがあります。

# お好みコース

お好みのマッサージメニューを選択できます。また、それぞれのマッサージを組み合わせることができます。

## 操作方法

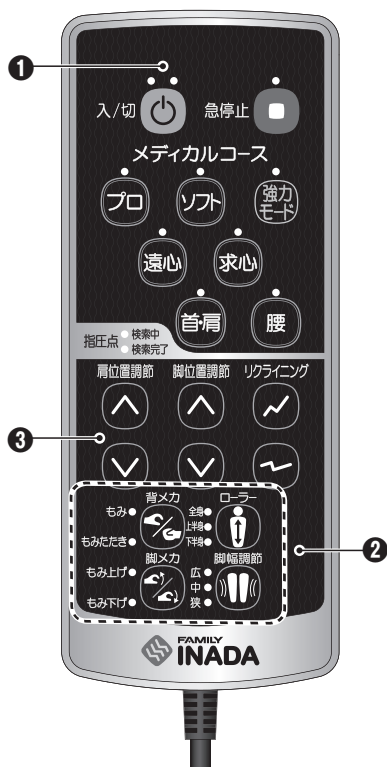

### ①「入/切」ボタンを押す。

5分間入力がない場合は自動的に電源が切れて、オレンジ色のランプが点灯します。

### ②お好きなマッサージのボタンを押します。

背メカのみ、もみたたき、脚メカのみみ上げ、もみ下げ、ローラーの中から好みの動作を組み合わせでお選びください。

※ただし、ローラーは他の動作と組み合わせることはできません。

### ③肩位置・脚位置調節ができます。

ローラーをお選びの際は指圧点検索のランプが点灯し、指圧点の検索をおこないません。指圧点検索後ランプが点滅します。

点滅している間、肩の位置を調節できます。

調節しなくてもよい場合はそのままにしておきます。

### ④コースが始まります。

コース動作中でも基本動作の変更や解除ができます。

※ローラーのみ、はじめに指圧点の検索が始まります。

### ⑤コースが終了します。

もみ玉が収納位置まで戻ります。その後リモコンの電源が切れますが、リクライニングの上下調節はご使用になれます。

## コース変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切りかえられます。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

### 自動コース→自動コース

自動コース実行中に他の自動コースボタンを押すと、もみ玉が一度検出した肩位置に戻り、肩位置の再確認をおこなってから開始します。肩位置再確認中は、肩の位置を調節できます。

### 自動コース→お好みコース

自動コース実行中にお好みコースのボタンを押すと、押した時点で自動コースは中断し、選択した動作が開始します。肩位置検出する動作を選択した場合は、肩位置の再確認をおこなってから開始します。

### お好みコース→自動コース

お好みコース中に他の自動コースボタンを押すと、自動コースに切りかえられます。ただし、コースの途中でも30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

## コースの途中終了

途中で終了する場合は、動作中に「入/切」ボタンを押してください。収納動作をおこなった後で停止します。**緊急時**や動作中に**異常を感じたときは**、「急停止」ボタンを押してください。その場で動作が停止します。安全確認後、「入/切」ボタンを押してください。収納動作をおこなった後で停止します。



注意

- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し「製品に関するお問い合わせ窓口」(裏表紙に記載)にご相談ください。  
→強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れしないでください。  
また、髪飾り、ネックレス、腕時計、ブレスレット、指輪などのかたい物をつけて使用しないでください。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れしないでください。
- マッサージの使用は1回以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。  
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。  
1日当たりのマッサージは通算して30分程度を目安にしてください。

## お好みコース


①と②は組み合わせることができます。

### ① 背メカマッサージボタン



ボタンを押して、もみ、もみたたきをお選びください。  
肩位置調節ボタンで、メカの位置をお好みの位置に合わせて下さい。  
(強力モード)マッサージをより強くすることができます。  
15分でコースは終了します。

### ② 脚メカマッサージボタン

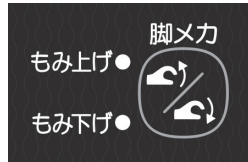

ボタンを押して、もみ上げ、もみ下げをお選びください。  
脚位置調節ボタンで、メカの位置をお好みの位置に合わせて下さい。  
脚幅調節ボタンで、体型やお好みに合わせてマッサージの幅を調節して下さい。  
15分でコースは終了します。

### ③ ローラーマッサージボタン



ボタンを押して、全身、上半身、下半身をお選びください。  
指圧点検索の検索中ランプが点灯し、自動指圧点検索をおこないます。検索完了のランプが点滅している間、肩の位置が調節できます。肩位置調節ボタンで調節して下さい。調節しなくてもよい場合はそのままにしておきます。検索完了ランプが点灯すると、ローラーマッサージが始まります。  
15分でコースは終了します。

## マッサージを強くするためには…

### 強力モードボタン



自動コースとお好みコース中にお好みに合わせてマッサージを強めることができます。

### 脚マッサージ幅調節ボタン



自動コースとお好みコース中に体型やお好みに合わせてマッサージの幅を変更することができます。  
ボタンを押すと、中⇒狭⇒広と変わります。(マッサージ開始時は中に設定されています。)

**Q** ホットカーペットの上に椅子を置いてもいいですか？

**A** 火災のおそれがありますのでホットカーペットの上に置くのはおやめください。

椅子は重量物ですのでホットカーペットの発熱体を痛め、そこから発火するおそれがあります。

**Q** フローリングや床暖房の上に設置しても大丈夫ですか？

**A** 設置しても大丈夫です。

ただし、床を傷つけることがあるかもしれませんので、カーペットなどを敷き、その上に椅子を設置することをおすすめします。(畳等も同様です)

**Q** 誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか？

**A** 感電のおそれがあります。ただちに使用を中止し、次の内容に従ってください。

- 本体右部の主電源スイッチを切る。
- 電源プラグをコンセントから抜く。

以上のことをおこなった上、お買い上げの販売店またはお近くのサービスセンターにご相談ください。

**Q** マッサージをより強くするにはどうすればいいですか？

**A** 次のことをおこなってみてください。

- 強力モードを選択する。
- 深く腰かけ背もたれに体重がかかるように座る。
- リクライニングを倒す。
- 枕をはずす。

以上の方法でより強くマッサージをおこなうことができます。

**Q** マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか？

**A** 次のことをおこなってみてください。

- リクライニングを起こす。
- 以上の方法でより弱くマッサージをおこなうことができます。

**Q** 体重が重くても大丈夫ですか？

**A** 体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。

**Q** 身長が150cm未満の人や180cm以上の人でも使えますか？

**A** お使いいただけます。

指圧点検索の際に肩位置が合わない場合がありますので、以下の方法でご使用することをおすすめします。

- 身長の高い人…リクライニングを倒す。
- 身長の高い人…リクライニングを倒す。
- 指圧点検索後に肩の位置を調節する。

**Q** 1ヶ月の電気代はいくらですか？

**A** 1日15分、毎日ご使用いただいた場合、1ヶ月で約30円です。

27円/kwで計算した場合。ご契約地域や条件により変動する場合がございます。(2016年5月現在 当社調べ)

# 故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお近くの『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）までご相談ください。

状態	原因と直し方	
左右のもみ玉の位置がずれている。	交互たたき機構を採用しているため、構造上発生するもので、故障ではありません。	構造上発生するもので異常ではありません。
もみ玉が上部へ移動して止まってしまった。	オートタイマー機能により、マッサージ終了時にもみ玉が体に干渉しないように上部または下部へ移動するようになっています。	
マッサージ中にもみ玉が途中で止まる。	もみ玉に必要以上の力が加わると、動きが止まることがあります。体を浮かせぎみにするか、リクライニングを軽く起こしてご使用ください。（特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。）	
マッサージ中にガタンと音がし、もみ玉に大きな振動が感じられる。	もみ玉が移動する際に、体や布地を乗り越えた位置から元の位置に戻る際の現象です。	
リモコンの急停止ボタンとコースのボタンが点滅している。	本体右部の主電源スイッチを切り、5秒ほどしてから主電源スイッチを入れ直してください。	点検後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。
指圧点自動検索がうまくいかない。 (もみ玉が肩の高さに合っていない。)	椅子に深く腰かけて頭を枕にあててください。指圧点検索直後にもみ位置調節ボタンで肩位置を調節できます。	
リモコンのボタンを押しても正常に動作しない。または電源が入らない。	次の点検をおこなってください。 ①電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。 ②本体右部の主電源スイッチは入っていますか。 ③ボタンを2つ同時に押しませんか。	
電源コード、プラグが異常に熱い。	ただちに使用を中止してください。	

お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』までご相談ください。

サービスマン以外の人は分解や修理はおこなわないでください。

【故障かな？と思ったら】

# 故障かな？と思ったら

## 動作時の音

構造上やむを得ず発生するもので、性能などに影響はありません。

## 動作中は下記のような作動音がします。

たたきを伴う動作時の音	ゴトゴト音 カタカタ音
もみ動作時のもみ玉と布のすれる音	キュッキュツ音 ギュウギュウ音
もみ玉の昇降、もみ動作時の音	ウィーン音 ゴロゴロ音 コトツ音
エアーマッサージ中の音	コツコツ音
エアープンプの音	ブーン音
エアの排気音	シュー音
リクライニング昇降時の音	ウィーン音

※上記の音について、性能等に影響はありません。

# 保管とお手入れの仕方

## 保管の仕方

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない場所に保管してください。
- ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないようにしてください。



●直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

## お手入れの仕方



●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

### 【背パッド・各カバーのお手入れ】

汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取ってください。



●ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。

### 【リモコンのお手入れ】

リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

- 絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。→故障の原因になります。

### 【その他のプラスチックのお手入れ】

少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

- アルコール、その他の溶剤やみがき粉などのお手入れは傷、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

適しているもの	適していないもの
<p>水 ぬるま湯 中性洗剤</p>	<p>シナ アルコール その他溶剤 みがき粉</p>



# アフターサービスについて

## 1.保証書について


この製品の保証書は取扱説明書についております。保証書はお買い上げの販売店にて「販売店・購入日」などの所定事項を記入してお渡ししていますので、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。(修理の際、必要となります。)保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、この製品は日本国内専用ですので、日本国外でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外(業務用など)でご使用の場合は、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。

## 2.修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、18、19ページの「故障かな?と思ったら」をよくお読みください。点検後、まだ異常がありましたらお買い上げの販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

- 1) お名前・ご住所・お電話番号
- 2) 販売名…この取扱説明書の21ページの仕様欄、または、本体右部に貼ってある社銘板をご覧ください。
- 3) 製造番号…本体右部に貼ってある社銘板をご覧ください。
- 4) お買い上げ日
- 5) 故障の状態(できるだけ詳しくお知らせください。)

例) リモコンのボタンが右図のように点滅している場合は、点滅しているコースの名称をお知らせください。

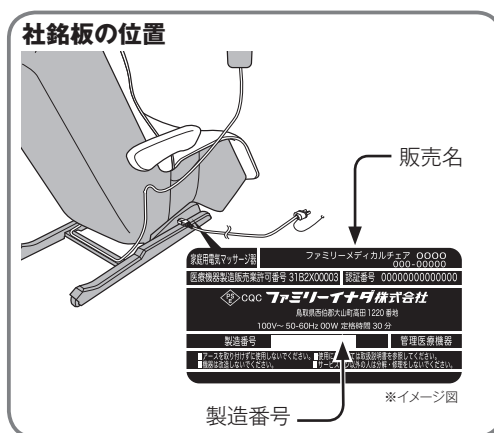

### ● 保証期間中は

修理の際、保証書をご提示ください。保証期間中でも有償になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### ● 保証期間が過ぎている場合は

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有償で修理させていただきます。

### ● 補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの電気マッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。(ただし、縫製部品は除きます。)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ● 日本国外でご使用になられた場合、修理をお断りする場合があります。

### ● アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』にお問い合わせください。

### ● 販売店にご依頼にできない場合は

『修理等に関するお問い合わせ窓口』にご連絡ください。

# 仕様

販売名	ファミリーメディカルチェア Smart FMC-GS100
使用電源	AC100V
定格消費電力	110W
定格周波数	50-60Hz
定格時間	30分
電撃に対する保護の形式	クラス0 I 機器
もみ速さ	最小約5回/分、最大約24回/分
たたき速さ	最小約210回/分、最大約525回/分（背メカのみ）
上下移動速さ	最小約1.3cm/秒 最大約4.0cm/秒
マッサージ範囲	約150cm（部分ローラーのとき約15cmの範囲で自動反復）
自動コース	メディカルコース：6種類
お好みコース	3種類（一部自動指圧点検索機能付き）
エア圧力	約30kPa
オートタイマー	約15分（自動コース時は異なります）
リクライニング角度	水平面に対して約115°～約160°無段階（電動リクライニング）
本体の寸法	幅約64cm×奥行約150（171）cm×高さ約116（81）cm 奥行・高さの（ ）内の数字は最大リクライニング
重量	約50kg
外装布地	合成皮革
付属品	電源コード
包装	1梱包/1台
類別	機械器具（77）バイブレーター
一般的名称	家庭用電気マッサージ器（JMDNコード34662000）管理医療機器
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003
医療機器認証番号	228AKBZX00055000
製造販売元	ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地
製造元	ファミリーイナダ株式会社

# 安全のために商品の点検を

## 長期ご使用の場合は商品の点検を

こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、動作しないときがある。
- 電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
- 自動的にタイマーが切れないときがある。
- その他の異常や故障がある。

左記のような症状があれば、故障や事故の防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店または、『修理等に関するお問い合わせ窓口』に点検をご依頼ください。

愛情点検



## 安全にお使いいただくために

本体布地(もみ布)は消耗品であり、耐用年数は3年です(使用条件：1日15分コースを2回、毎日使用した場合)。安全にお使いいただくために、お買い上げ後、耐用年数が過ぎる前にお買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』に定期点検をご依頼ください。

※ただし使用条件が上記と異なる場合には、耐用年数が変わります。

※お買い上げ後5年ほど経ちましたら、安全のために椅子全体の点検をおすすめします。

点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』にご相談ください。

〈キリトリ線〉

## 保証規定

- 保証期間内に万一発生した故障については修理料金を無償といたします。
  - ・修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
  - ・お買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(0120-772-294)にご連絡ください。
  - ・ご転居の場合やご贈答品等で本保証書に記入のお買い上げ店で無償修理をお受けになれない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(0120-772-294)にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
  - (1) お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合
  - (2) 火災・天災・異常電圧等による故障・損傷の場合
  - (3) 機器を改造や修理された場合
  - (4) 取扱説明書に記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって発生した故障・損傷の場合
  - (5) 本保証書を提示されない場合
  - (6) 本保証書のお買い上げ店名、およびお買い上げ年月日の未記入あるいは字句を訂正された場合
  - (7) 一般家庭以外(業務用等)でご使用されていた場合
- 本保証書は日本国内において有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書の記載内容については『修理等に関するお問い合わせ窓口』(取扱説明書に記載)にご相談ください。

修理メモ

※This warranty is valid only in Japan

〒532-0004  
大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号  
ファミリーイナダ株式会社  
電話 06-4807-9111 (代)

【安全のために商品の点検を】

製品に関するお問い合わせ窓口  
0120-129-011

修理等に関するお問い合わせ窓口  
0120-772-294

土・日・祝を除く平日9:00 ~ 17:00

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員  
健康空間を創造する

 **ファミリーチャイア株式会社**

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3(ソラ新大阪2114階)

<http://www.family-chair.co.jp>

2016年7月(第2版) 779082901  
2016年6月(第1版)

〈キリトリ線〉

## ファミリーチャイア 保証書

品番	FMC-GS100		製造番号	
お客様	お名前 様			
	ご住所 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
電話 ( )				
お買い上げ店名 住所・電話番号				
お買い上げ日	保証期間	1年間		
	保証対象	本機		

- 正常なご使用状態(取扱説明書に記載)で万一発生した故障については、お買い上げ日から上記の期間、裏面の保証規定により、その故障の修理料金を無償といたします。
- 本保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 製造番号は、かならずご記入ください。
- お買い上げ時の領収書またはお買い上げ証明書は、本書にかならず貼り付け、大切に保管してください。