

# FAMILY MEDICALCHAIR V.1

## ファミリーメディカルチェア V.1

FMC-1112

このたびは、ファミリーメディカルチェアV.1をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この製品は、疲労の回復・改善を目的としたさまざまなマッサージがお楽しみいただけます。皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして末永くご愛用ください。



### もくじ

- 安全上のご注意 ..... 1
- 各部の名前とはたらき ..... 5
- おもな特長と効能・効果 ..... 7
- ご使用の前に ..... 8
- 椅子の調節 ..... 11
- 使い終わったら ..... 14
- マッサージの種類と特長 ..... 15
- 自動コースのマッサージ ..... 16
- 自由選択コースのマッサージ ..... 17
- 保管とお手入れの仕方 ..... 21
- 故障かな?と思ったら ..... 22
- Q&A ..... 24
- アフターサービスについて・安全のために商品の点検を ..... 25
- 仕様 ..... 26

※保証書は、お買い上げの際必ずお受け取りの上、「取扱説明書」とともに大切に保管してください。

添付文書

**取扱説明書**  
保証書別途添付

ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。(取扱説明書のイラストと本体は細部が異なる場合があります。)

**日本国内専用** この製品は日本国外への輸出と使用を禁止しています。  
PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.

この製品に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。よってこの製品を国外に持ち出した場合、保証及び修理対応はできませんのでご了承ください。

JAPANESE EQUIPMENT SPECIFICATION WARRANTY APPLIES ONLY IN JAPAN.  
WARRANTY INCLUDING REPAIRS BY THE MANUFACTURER DOES NOT APPLY IF THE CHAIR IS TAKEN OUT OF JAPAN.

- ◎「取扱説明書」は、いつでも見られるように大切に保管してください。
- ◎保証書はお買い上げの際必ずお受け取りの上、「取扱説明書」とともに大切に保管してください。
- ◎この製品は、部品調達および部品組立てを中国にある弊社工場で行っており、日本国内の弊社工場にて企画／開発／設計から最終組立て、および品質保証を行っております。
- ◎この製品は一般家庭用として設計されていますので、一般家庭以外（業務用など）でご使用の場合は、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご相談ください。

**ファミリー株式会社 サービスセンター**

受付時間 土・日・祝を除く平日 9:00~17:00

**全国共通フリーダイヤル**

**0120-772-294**



札幌営業所	〒060-0006 札幌市中央区北6条西18丁目1-17(メタスタジオ1階)	TEL.(011)640-6655(代)
仙台営業所	〒984-0047 仙台市若林区木ノ下3丁目1-2	TEL.(022)291-3484(代)
東京支店	〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目16-14(武蔵館ビル4階)	TEL.(03)3392-7100(代)
名古屋営業所	〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目35-18(一光大須ビル1階)	TEL.(052)223-1641(代)
大阪支店	〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3(ソーラ新大阪21 14階)	TEL.(06)4807-9191(代)
広島営業所	〒733-0033 広島市西区観音本町1丁目21-5	TEL.(082)231-0227(代)
福岡営業所	〒810-0071 福岡市中央区那ノ津2丁目6-4(九産ビル3階)	TEL.(092)711-1567(代)

2008年 2月15日 (新様式第2版) 776760701  
2007年11月15日 (新様式第1版) 776760700





# 安全上のご注意

ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方やほかの人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。なお、各部の名前については5～6ページをご覧ください。

## 表示の種類と意味






	<b>警告</b> 誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
	<b>注意</b> 誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。

## 図記号の種類と意味



	 記号は、禁止行為であることを示しています。（左図の場合は分解禁止）
	 記号は、行為を強制したり指示したりするものです。（左図の場合はプラグを抜く）

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。



## ご使用場所の注意点

	<b>注意</b>
	<b>禁止</b> ●浴室やサウナ、湿気の多い場所では使用しないでください。 →感電や故障の原因になります。
	<b>強制</b> ●床面の水平な場所に置いて使用してください。 →不安定な場所では本体が転倒し事故の原因になります。
	<b>アース取り付け</b> ●万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。 詳しくは、8ページをご覧ください。
	<b>禁止</b> ●アース線はガス管・水道管・電話線・避雷針には絶対に接続しないでください。



## ご使用前の注意点

	<b>警告</b>
	<b>禁止</b> ●次の人は使用しないでください。 ◎医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓（塞栓）症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症 [皮下組織の炎症を含む] など。 ◎急性の頸椎ねんざ（むちうち症）の疑いのある人

## 警告

	<b>強制</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●次の人は、使用前に医師に相談してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◎心臓に障害のある人 ◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人</li> <li>◎骨粗しょう（鬆）症の人やせきつい（脊椎）の骨折、急性 [とう（疼）痛性] 疾患の人 ◎治療部位に創傷のある人</li> <li>◎体温38℃以上（有熱期）の人 <ul style="list-style-type: none"> <li>例：急性炎症症状 [けん（倦）怠感、悪寒、血圧の変動など] の強い時期。衰弱しているとき</li> </ul> </li> <li>◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人</li> <li>◎ペースメーカーなどの電磁傷害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人</li> <li>◎背骨（脊椎）に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人</li> <li>◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人</li> <li>◎悪性のしゅよう（腫瘍）のある人 ◎安静を必要とする人 ◎内臓疾患（胃炎、腸炎、肝炎）などの急性症状のある人</li> <li>◎医師の治療を受けている人や、特に体に異常を感じている人 ◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人</li> <li>◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人</li> <li>◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人</li> </ul> </li> <li>●特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。</li> <li>●使用しても、効果が現れない場合、医師または専門家に相談してください。</li> </ul>
	<b>禁止</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源は交流100V以外では使用しないでください。 →火災や感電の原因になります。</li> <li>●変圧器を用いた使用はしないでください。 →故障や感電の原因になります。</li> <li>●電源コードや電源プラグがいたんだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいときなどは使用しないでください。→感電やショート、発火の原因になります。</li> <li>●マッサージの前には必ず本体の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、サービスセンター（裏表紙に記載）にご連絡ください。 →布地が破れた状態で使用すると、ケガや感電のおそれがあります。</li> </ul>

## 注意

	<b>強制</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグをコンセントに差し込む前にPOWER（主電源）スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。→故障や感電の原因になります。</li> <li>●電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。 →感電やショート、発火の原因になります。</li> <li>●ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。</li> <li>●ご使用前には背もたれを完全に起こし体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。 →はじめからマッサージを強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。</li> <li>●安全のために、もみ玉の位置を確認した上で、体をねじらず背骨が左右のもみ玉の間にくるようにゆっくりと座ってください。 →ケガの原因になります。</li> <li>●椅子に腰掛けたり、椅子から立ち上がる時以外は、フットレストの上ののる、立つ、座る等の行為はしないでください。 →転倒による事故やケガ、故障の原因になります。</li> <li>●しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。</li> </ul>
	<b>禁止</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●この取扱説明書の使用方法以外の使い方をしないでください。また、本機と他の治療器や電気毛布などを併用しないでください。 →体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。</li> <li>●人をのせたまま、移動しないでください。 →本体の転倒により、事故やケガの原因になります。</li> <li>●フットレストを上げたまま、椅子に座らないでください。 →フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。または、本体の転倒により事故やケガの原因になります。</li> <li>●付属品以外のものを用いて本機を使用しないでください。</li> </ul>



# 安全上のご注意

## ご使用時の注意点

### 警告



禁止

- 電源コードやリモコンのコードを体に巻き付けたり、本体の脚で踏んだりしないでください。また、電源コードやリモコンのコードを、傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじるなどの行為は絶対にしないでください。  
→コードが破損し、火災や感電の原因になります。
  - 本体やリモコンに水などをこぼさないでください。  
→感電やショート・火災の原因になります。
  - お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを、本体の上や本体の周辺（背もたれの後ろや座・フットレストの下など）で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせたりしないでください。  
→事故やケガの原因になります。
  - 布地が破れた状態では使用せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
→事故やケガ・感電の原因になります。修理はサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。
  - フットレストと本体の間に手や足、物をはさまないようにしてください。  
→手や足、物がはさまれ、事故やケガ、故障の原因になります。
  - フットレストを手で持ち上げた状態で急に手をはなさないでください。
  - ぬれた体で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。  
→感電や故障の原因になります。
- リクライニングを倒すときや、フットレストを下げるときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろや、フットレストの下に物をおかないようにしてください。
- フットレストスライド動作時、フットレストと本体の間に足や物をはさまないようにしてください。



強制

### 注意



禁止

- 素肌では使用しないでください。
- マッサージおよび椅子としての目的以外には使用しないでください。  
→事故やケガの原因になります。
- 頭部、胸部、腹部、間接部（ひじ、ひざなど）には使用しないでください。また、もみ玉の間に手や足、腕などを入れないでください。  
→気分が悪くなったり、ケガの原因となります。首筋などは柔らかいタオルを当てて強い刺激を避けてご使用ください。
- もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間、可動部などに手や足を入れないでください。髪飾りなどのかたい物をつけて使用しないでください。→ケガの原因となります。
- フットレストは脚部以外には使用しないでください。→ケガの原因となります。
- 腕エアユニットは腕や手以外使用しないでください。腕時計やブレスレット、指輪などのかたい物をつけて使用しないでください。→ケガの原因となります。
- 肩エアユニットは肩部（肩から腕）以外には使用しないでください。  
→ケガの原因となります。
- マッサージチェアを無人で動作させないでください。  
→事故やケガの原因となります。



強制

- 緊急時や動作中に異常を感じたときは、リモコンの「急停止」ボタンを押して、動作を停止させてください。
- 使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止して医師に相談してください。
- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい、刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止しサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。→強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- 背パッドをはずしてマッサージしないでください。  
→ケガの原因になります。
- マッサージ中は眠らないように注意してください。  
→ケガの原因になります。
- マッサージの使用は1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。  
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。1日当たりのマッサージは、通算30分程度を目安にしてください。
- 脚部や腕部のマッサージ中にユニットから脚や腕が抜けた場合、無理に入れないでください。  
→無理に入れようとすると、故障の原因になります。

### 注意



プラグを抜く

- 停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止してPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
→停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。
- 落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止してPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止しPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、サービスセンター（裏表紙に記載）に点検・修理を依頼してください。  
→感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

## ご使用後や使用しないときの注意点

### 注意



強制

- 使用後は必ずPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
→お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。
- 使用後は必ず背もたれを完全に起こしてください。
- 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
- 座、背もたれ、フットレストなどに物を載せないでください。



プラグを抜く

- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。  
→感電やショートによる火災の原因になります。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
→ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。

## その他の注意点

### 警告



禁止

- 本体の上に立たないでください。座部以外に座るなどして、上から強い衝撃を与えないでください。  
→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。
- 制御ボックスの上ののったり、物を置いたりしないでください。



分解禁止

- 機器が故障した場合は、勝手に修理せず、販売店またはサービスセンター（裏表紙に記載）に連絡してください。  
→火災や感電、ケガの原因になります。修理はサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。
- 機器は改造しないでください。  
→火災や感電、ケガの原因になります。

### 注意



強制


- 他の人に譲渡、貸与するときは、本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡しください。

### お願い



製品及び付属品を廃棄する場合は、最寄の市町村窓口で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

# 各部の名前とはたらき


## 本体

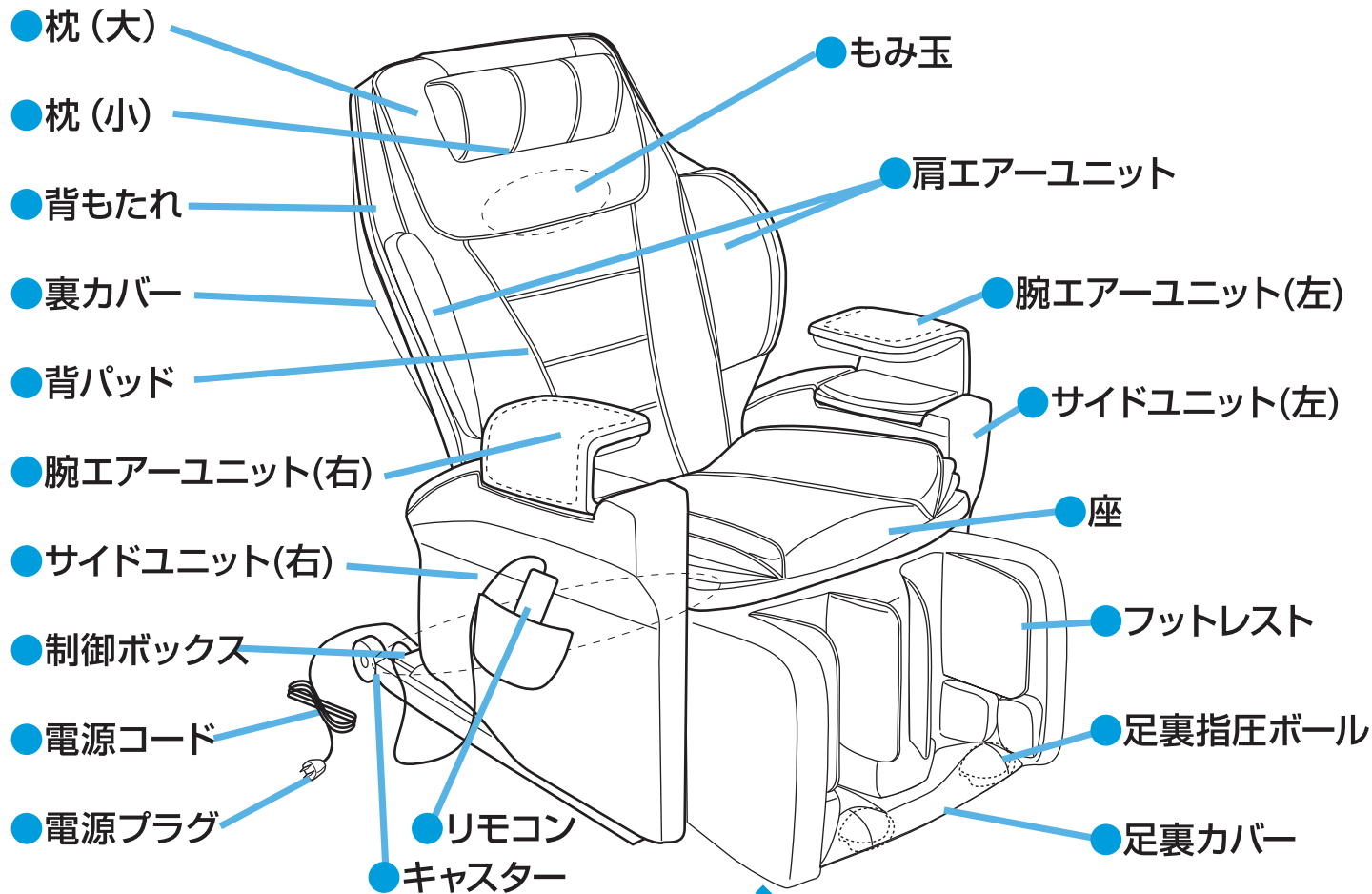


## 制御ボックス

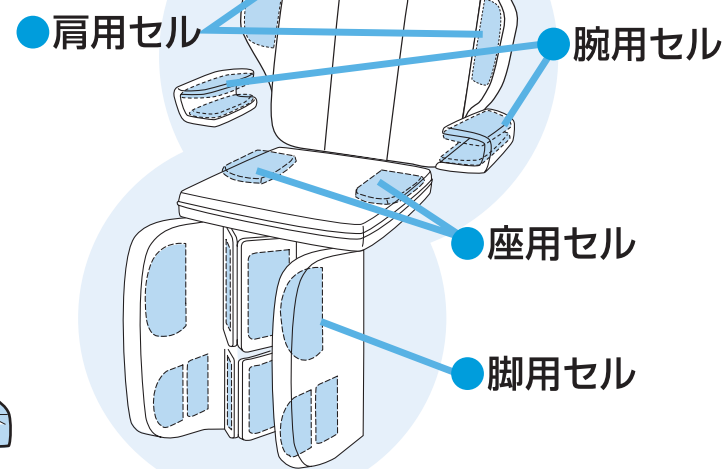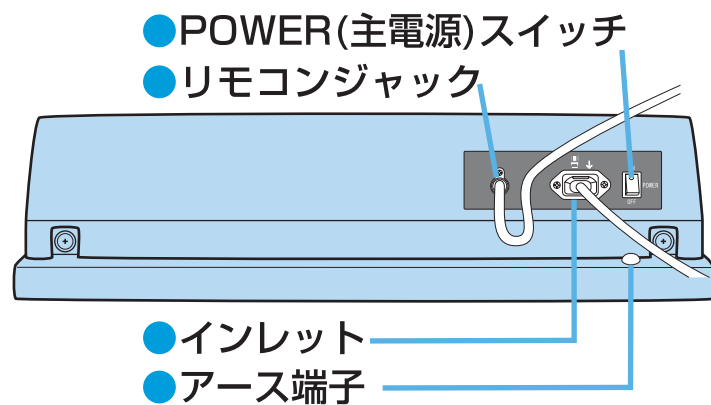

## リモコン

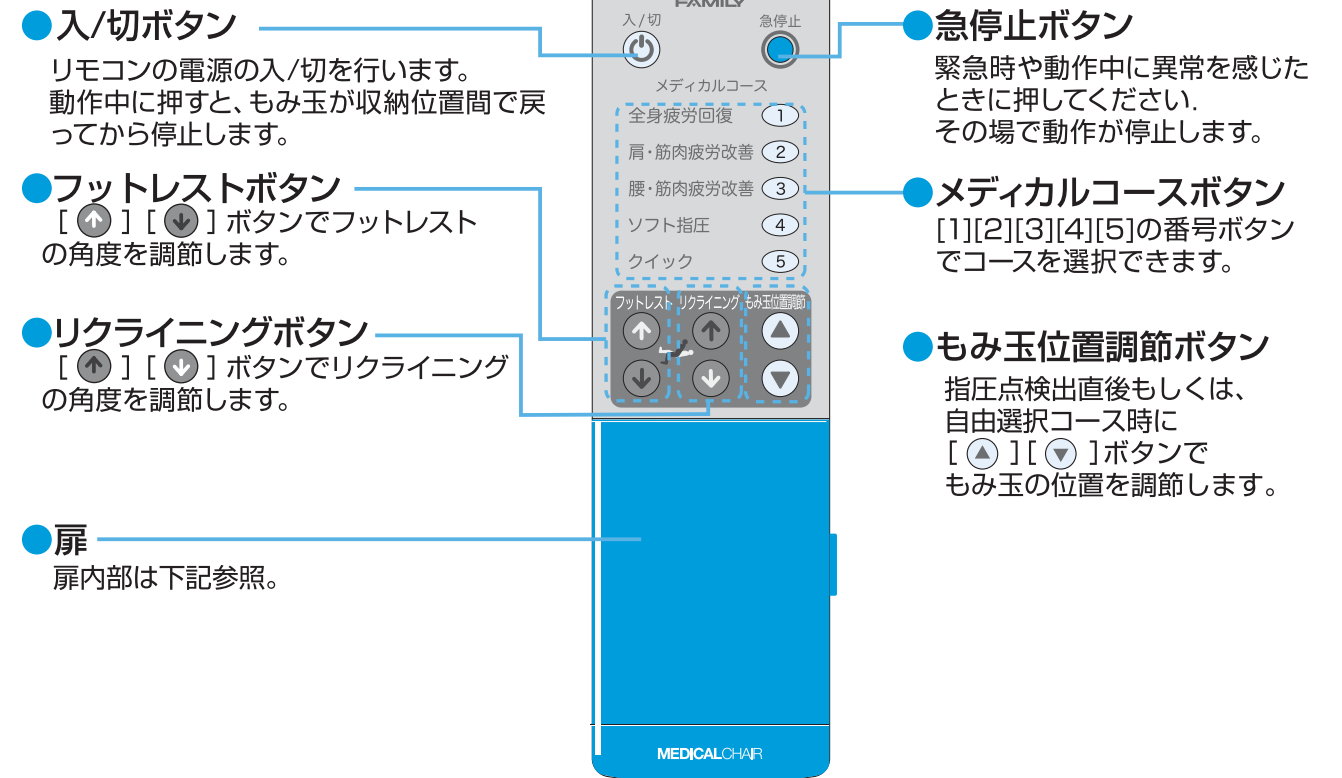

## リモコン/扉内部

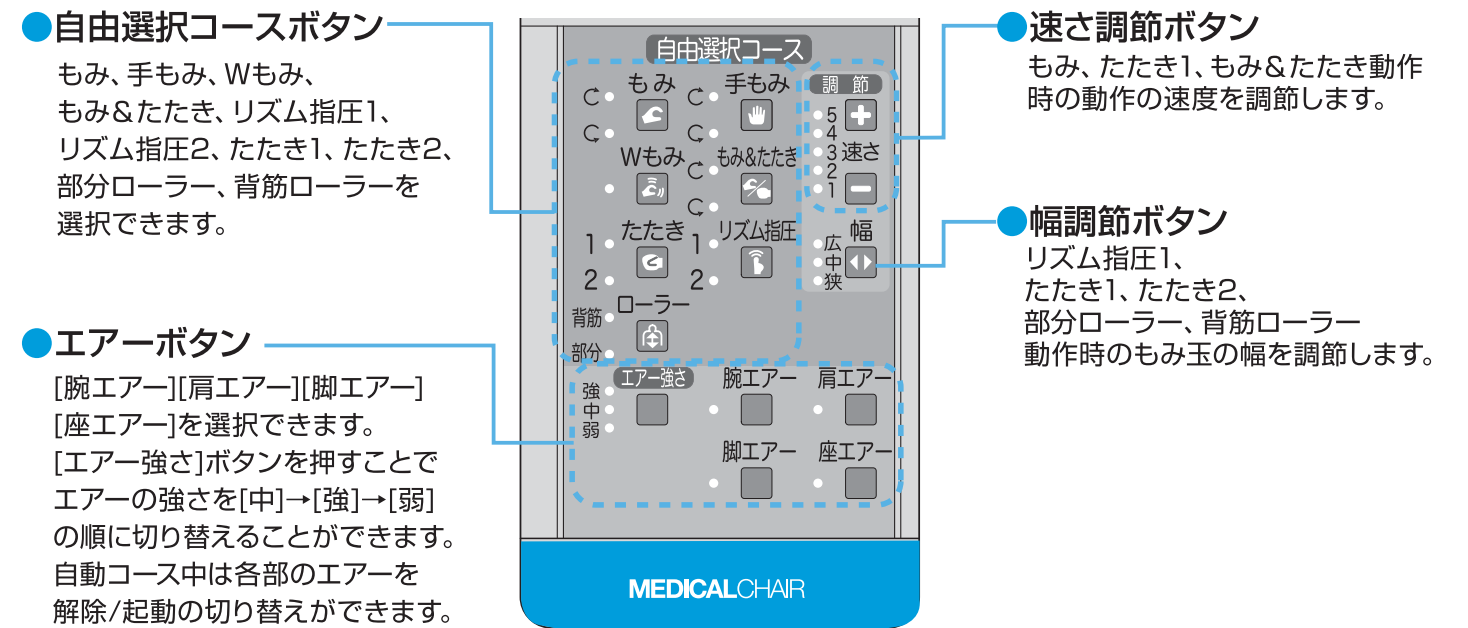

**警告**

- 本体やリモコンに水などをこぼさないでください。
- ぬれた体で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。

- リモコンの上に座ったり、リモコンを落としたり、踏んだり、リモコンのコードを強く引っ張ったりしないでください。
- 先のとがった物やかたいものでボタンを押さないでください。

# おもな特長と効能・効果

## 特長

### もみ玉、エアを組み合わせた ハイブリッドマッサージ機能

上半身の4つのもみ玉に加え、全身を優しく包み込むように配置されたエアセルが心地よいマッサージをおこないます。

### 心地よい姿勢を簡単調節できる 電動リクライニング機能

床面に対して約120°～170°の範囲内で、背もたれの角度を無段階で調節できます。

### 光センサーによる 自動指圧点検出機能

マッサージ前に、その人の体型に応じて指圧点を自動的に検出。体型や目的に合わせて効果的なマッサージがおこなえます。

### 技法にこだわった 多彩なコース機能

目的に合わせて最適なマッサージコースが選べるメディカルコース、お好みで選べる自由選択コースをご用意しております。

### 肩エアユニット搭載

肩から上腕にかけて包み込むようにエアセルでマッサージします。

### 腕エアユニット搭載

腕を優しく包み込むようにエアセルでマッサージします。リクライニングの角度を調節することで腕から指先のお好きなところのマッサージをおこなうことができます。

## 使用目的・効能効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

# ご使用前に

- この製品は、背もたれが倒された状態で梱包してお届けしています。ご使用前には、必ず背もたれを起こしてください。
- 冷えきった室内の温度を上げて使用するときは、室温を急に上げず、徐々に上げてください。本機を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1時間ほど待ってから使用してください。  
→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。

## 設置場所について

リクライニングをしたときに壁や物に当たらないように、本体後ろのスペースは50cm以上、本体前のスペースは40cm以上確保してください。

### ⚠ 注意

- 浴室やサウナなど、湿気の多い場所では使用しないでください。
- 床面の水平な場所に置いてください。
- ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所(40℃以上)では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。

- 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。(ホットカーペットは敷かないでください。)
- 重量物ですので、下ろすとき床面を傷つけないように注意してください。
- テレビやラジオなどAV機器から1m以上はなしてください。雑音が入ることがあります。



## アースの取り付け方


万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。

### ①電源コンセントにアース端子がある場合

本体後部のフレームにあるアース端子のネジに付属のアース線を接続し、他端部の先端の皮をむき、電源コンセントのアース線に確実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでいないか、ときどき点検してください。

### ②電源コンセントにアース端子が無い場合

お買い上げの販売店にご相談ください。

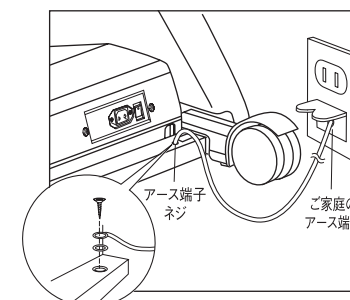



# ご使用前に

## 移動の仕方

本体に移動用キャスターがついています。背もたれを起こしPOWER（主電源）スイッチを「OFF」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いてから図のように前側を浮かせてキャスターで移動してください。



### ⚠ 注意

- 人をのせたま移動させないでください。
- 足裏指圧ボールをはずしてから移動させてください。

## 狭い場所の移動

廊下や扉など狭い場所の移動ではサイドユニットをはずして移動させてください。  
 (通路幅88cm以下の場合にはサイドユニットをはずしてください。ただし、通路幅が74cm以下ですとサイドユニットをはずしても移動させることができません。)

### 用意するもの

①T型レンチ  
 (付属品)



②ラジオペンチ




### サイドユニットのはずし方


※取り付け方は取り外し方の逆の手順で行ってください。

①サイドユニットを固定しているネジをT型レンチを使用してはずします。


フットレストを持ち上げた状態で前側のネジをはずします。

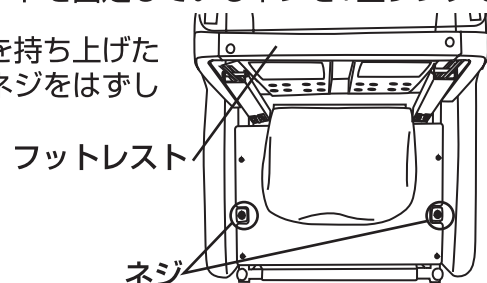


後ろ側のネジをはずします。

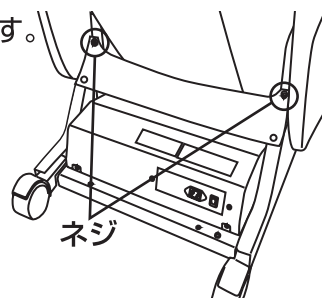

②サイドユニットの下を  
 ①矢印方向に引きながら  
 ②上方向に持ち上げてはずします。

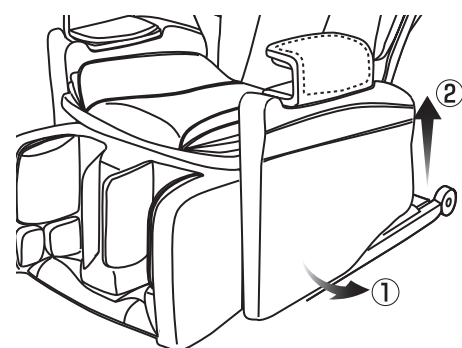


③サイドユニットと本体脚部につながっているホースを接続部からはずします。

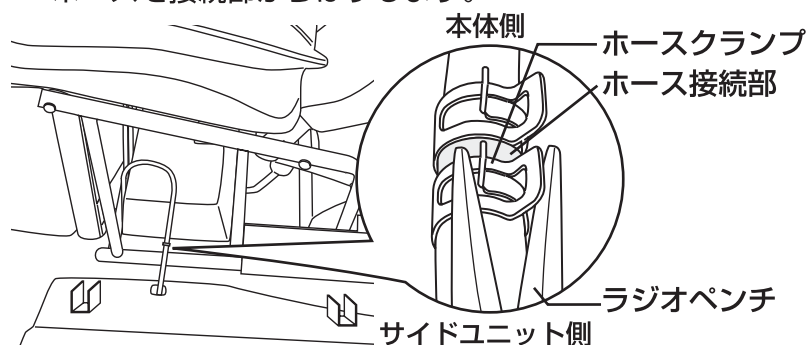

ラジオペンチでサイドユニット側のホースクランプをつまみはずし、ホースを抜きます

## 布地の確認


図のように、背パッドと背もたれの間を手を入れ、本体布地等の破れがないか確認してください。

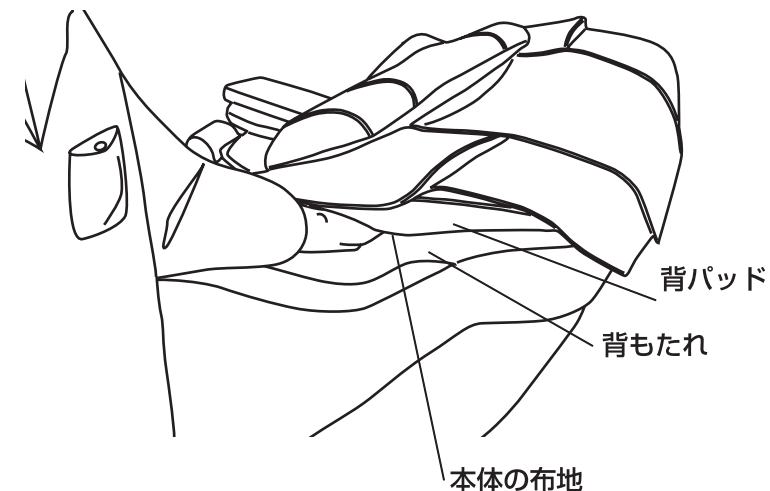


### ⚠ 注意

- 確認をするときはPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
 →感電やケガの原因になります。
- ご使用前には必ず図のようにして、本体布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないかどうか確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、サービスセンター（裏表紙に記載）ご連絡ください。

## 主電源の入れ方

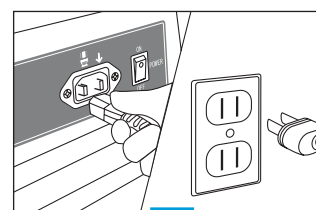

①電源コードのコネクターを本体後部のインレットに差し込み電源プラグをコンセントに差し込みます

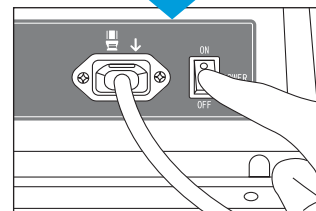

②本体後部のPOWER（主電源）スイッチを「ON」にします。

※もみ玉が途中で止まっているときPOWER（主電源）スイッチを「ON」にすると、もみ玉は自動的に収納位置（背もたれ上部）まで移動して停止します。

### ⚠ 警告

- 変圧器を用いた使用はしないでください。  
 →故障や感電の原因になります。
- 日本国外では使用しないでください。  
 →故障や感電の原因になります。

### ⚠ 注意

- 電源プラグをコンセントに差し込む前にPOWER（主電源）スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- 電源プラグおよびコネクターは確実に最後まで差し込んでください。
- ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい、全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。

# 椅子の調節

## 椅子への座り方

背もたれが完全に起きているのを確認してください。もみ玉は通常、背もたれの上部に左右に広がって引っ込んだ状態になっています（収納状態）。安全のため、もみ玉の位置を確認し、上記以外の場所にもみ玉がある場合はすぐに座らず、POWER（主電源）スイッチを入れてもみ玉を収納状態に戻してから、ゆっくりと椅子の中央にすわってください。

### ⚠ 注意

- ご使用前は背もたれを完全に起こし、体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。
- フットレストを上げたまま、椅子に座らないでください。  
→フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。または、本体の転倒により、事故やケガの原因となります。


## 足裏指圧ボールの使い方

足裏カバーの下には球形の足裏指圧ボール（A）が付いています。お好みにあわせて同梱の足裏指圧ボール（B）に付け替えてマッサージをおこなってください。


- 足裏指圧ボール裏側の突起をパイプの穴に合わせて取り付けてください。

→突起が穴からずれた状態で使用すると破損の原因となります。

- 足裏指圧ボールの付け換えは足裏カバーをはがして行ってください。

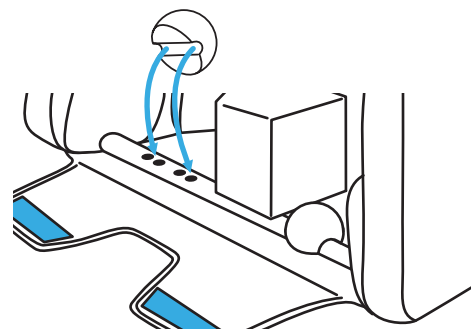

- 足裏指圧ボールを取り付ける穴が左右2箇所あります。取り付ける穴位置を変えることで、指圧位置を変えることができます。

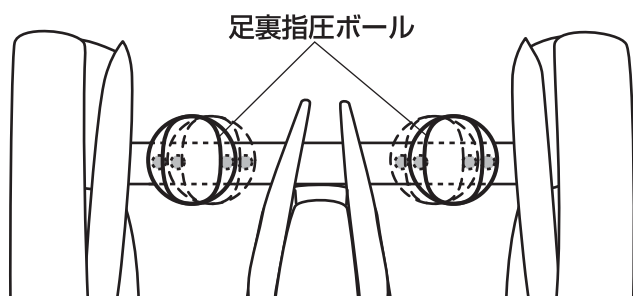

### 足裏指圧ボール



足裏指圧ボール（A）



足裏指圧ボール（B）

※足裏指圧ボール（B）の前後は自由です。お好みでお使いください。

### ⚠ 注意

- 足裏指圧ボールを取り付けているパイプと足裏ユニットとの間に手や足を入れないでください。  
→ケガの原因となります。


## リクライニングの使い方

### ■背もたれを起こす場合

リモコンのリクライニングボタンの [↑] をお好みの角度になるまで押し続けてください。フットレストが連動して下がります。

### ■背もたれを倒す場合

周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してからリモコンのリクライニングボタンの [↓] をお好みの角度になるまで押し続けてください。フットレストが連動して上がります。

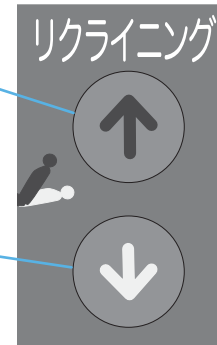

### ⚠ 警告

- 背もたれを倒すときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、背もたれを倒すときは、背もたれの後ろに体や物をはさまないようにしてください。
- フットレストと本体の間に手や足、物をはさまないようにしてください。

- 背もたれの角度調節は、リモコンの電源が入っていない場合でも、ご使用いただけます。ただし、本体後下部のPOWER（主電源）スイッチが「ON」になっている場合に限りです。

## フットレストの使い方


### 上下調節の仕方

### ■フットレストを上げる場合

リモコンのフットレストボタンの [↑] を押し続けてください。お好みの角度でボタンをはなすと固定されます。

### ■フットレストを下げる場合

リモコンのフットレストボタンの [↓] を押し続けてください。お好みの角度でボタンをはなすと固定されます。

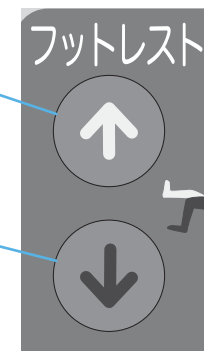

### 位置調節の仕方

フットレストを一定の高さまであげ、かかとに力を加えることでフットレストが自然に伸縮します。

### ⚠ 警告

- フットレストを下げるときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、フットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。
- フットレストと本体の間に手や足、物をはさまないようにしてください。
- フットレストを手で持ち上げた状態で急に手をはなさないでください。

### ⚠ 注意

- フットレストは脚部以外には使用しないでください。

- フットレストの角度調節は、リモコンの電源が入っていない場合でも、ご使用いただけます。ただし、本体後下部のPOWER（主電源）スイッチが「ON」になっている場合に限りです。


# 椅子の調節

## 枕 (小) の使い方

本機には大小2つの枕がついています。この2つの枕によってマッサージ中に頭を楽に、自然な位置にすることができます。




枕 (小) は裏側についているマジックテープで位置の調節ができます。あらかじめ、頭の位置に合わせてからマッサージを行ってください。

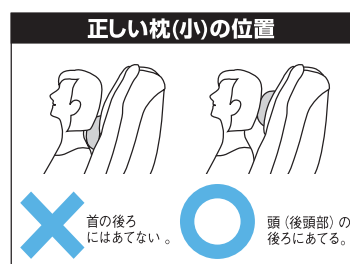

●枕 (小) は正しい位置でご使用ください。枕の位置によっては自動指圧点検出がうまくいかない場合があります。

## 緩衝パッドの使い方


背パッドの裏には緩衝パッド (薄) が入っています。マッサージが弱いと感じられる場合は緩衝パッドを抜き取ってマッサージを行ってください。強いと感じられる場合は同梱の緩衝パッド (厚) にいれかえてマッサージを行ってください。

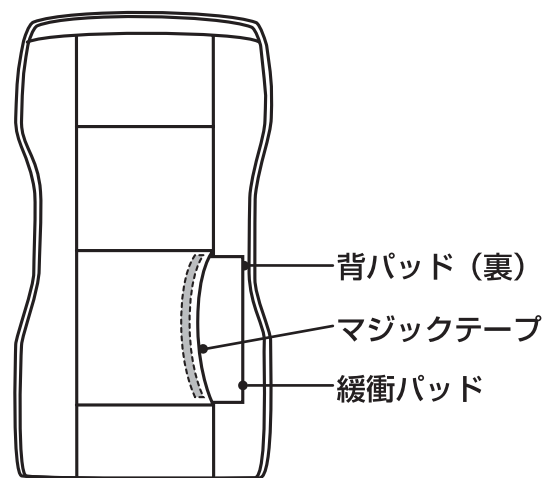

## 腕エアユニットの使い方

腕エアユニットに腕を入れた状態で、肘から肩にかけて楽な姿勢になるように向きを調節してご使用ください。

- 安全のため、腕エアユニットは交互に動作します。動作していないときに腕エアユニットの向きを調節してください。

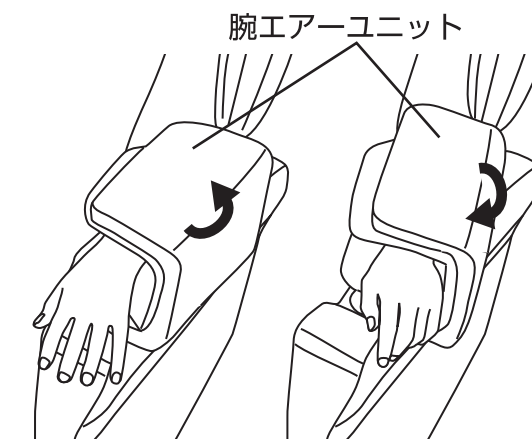

腕エアユニットは、向きを調節することができます。


### ⚠ 注意

- 時計や指輪、ブレスレットなどのかたい物をつけ使用しないでください。  
→ケガの原因になります。
- 腕エアユニットは腕や手以外使用しないでください。  
→ケガの原因になります。
- マッサージ中に腕を無理に抜いたり入れたりしないでください。  
→ケガの原因になります。

## 肩エアユニットの使い方

椅子に深く腰掛け、楽な姿勢でマッサージを行ってください。肩エアが弱いと感じられる方は以下の方法でご使用ください。

- 背パッドの裏には肩用緩衝パッドを取付けるためのマジックテープがありますので肩用緩衝パッドを左右に取付けてご使用ください。
- 肩用緩衝パッドを折り畳むことでさらに強さを強くすることができます。肩エアの強さに応じてご使用ください。

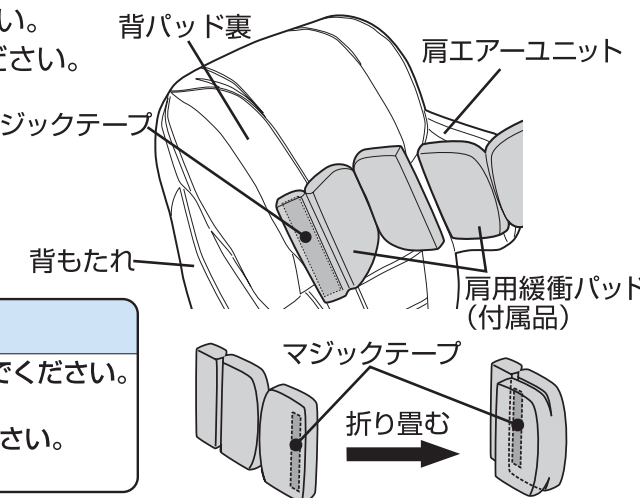

### ⚠ 注意

- 肩エアユニットは肩部 (肩から腕) 以外には使用しないでください。  
→ケガの原因になります。
- マッサージ中に肩を無理に抜いたり入れたりしないでください。  
→ケガの原因になります。

# 使い終わったら

### ⚠ 注意

- 使用後は必ずPOWER (主電源) スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
→お子様やペットのイタズラ等による事故やケガにつながるおそれがあります。
- 使用後は、必ず背もたれを完全に起こしてください。
- 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



# マッサージの種類と特長

## メディカルコース

疲労の回復・改善などを目的とした5つのコースを用意しています。

リモコンのコースボタンで、お好みのコースを選ぶことにより、あらかじめ設定されたメニューにもとづいて自動マッサージを行います。

※各コースの時間は身長や体格、リクライニング角度などによって異なります。

### 全身疲労回復コース

●元気がでない、疲れやすいなどの症状がある方におすすめするマッサージコースです。

### 肩・筋肉疲労改善コース

●首から肩にかけての筋肉が疲労した方におすすめするマッサージコースです。

### 腰・筋肉疲労改善コース

●腰の筋肉が疲労した方におすすめするマッサージコースです。

### ソフト指圧コース

●指圧動作に重点をおいた、疲労回復のためのマッサージコースです。

### クイックコース

●短時間で全身をくまなくマッサージをおこない、リフレッシュするのに最適なマッサージコースです。

## 自由選択コース

リモコンの扉内部のボタンにより、お好みのマッサージ機能を選んでお使いいただけます。また、速さや強さ、上下調節など、マッサージ動作の調節ができます。

### 扉内部のボタン機能

もみ 手もみ Wもみ

もみ&たたき リズム指圧(1・2)

たたき(1・2)

ローラー(部分・背筋)

エアーマッサージ(肩・腕・座・脚)

# 自動コースのマッサージ


- あらかじめ設定されたメニューで自動マッサージを行います。
- メディカルコース5種類があります。

### 自動コースの操作方法

- 1 入/切ボタンを押します。  
5分間入力がなければ、自動的に電源が切れます。
- 2 お好きなコースを選んでボタンを押します。  
選択したコースのボタンが点灯します。この後、指圧点を検索します。正確に検索するために、椅子に深く腰掛け、頭を枕の上に置いてください。
- 3 もみ玉位置を調節できます。  
もみ玉位置調節ボタンでもみ玉を上下に調節できます。調節しなくてもよい場合はそのままにしておきます。
- 4 腕エアユニットに腕を入れてください。  
腕時計、ブレスレット、指輪などのかたい物ははずしてください。
- 5 マッサージの終了  
動作が終了し、もみ玉が収納位置(背もたれ上部)まで戻ります。

### エアーマッサージの強さ調節とエアの解除

エアーマッサージの強さは、はじめは[中]に設定されていますが、お好みに応じて、リモコン扉内部のエア強さボタンで3段階に調節できます。また、エアの各部のボタンを押すことにより、エアの解除/起動を切り換えることができます。

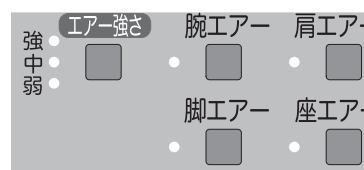

### コースの変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切り換えられます。ただし、コース途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

#### ●自動コース→自動コース

自動コース動作中に他の自動コースのボタンを押すと、もみ玉が一度収納状態にもどり、再度、自動指圧点検出動作から開始します。

#### ●自動コース→自由選択コース

自動コース動作中にリモコンの扉を開けて、自由選択コースのボタンを押すと、押した時点で自動コースを中断し、選択した動作を実行します。

### コース途中終了

途中で終了する場合、動作中に「入/切」ボタンを押してください。収納動作を行った後停止します。緊急時や動作中に異常を感じたときは、「急停止」ボタンを押してください。その場で動作が停止します。安全を確認後、「入/切」ボタンを押してください。収納動作を行った後で停止します。

### ⚠ 注意

- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい、刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止しサービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。→強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れしないでください。また、髪飾り、腕時計、ブレスレット、指輪などのかたい物をつけて本機を使用しないでください。
- 脚部や腕部のマッサージ中にユニットから脚や腕が抜けた場合、無理に入れないでください。



# 自由選択コースのマッサージ

- もみ、手もみ、Wもみ、もみ&たたき、リズム指圧1、リズム指圧2、たたき1、たたき2、部分ローラー、背筋ローラー、エアーマッサージ（腕・肩・脚・座）からお好みのマッサージを選ぶことができます。また、速さや強さ、上下調節など、マッサージ動作の調節もおこなえます。
- ローラーでは自動コース時のように自動指圧点検出をおこないますが、指圧点検出直後のもみ玉位置調節はできません。

## 基本動作

ボタン選択により、お好みのマッサージが行えます。動作の途中で別のボタンを押して、動作を変更することもできます。

動作	表示	内容
もみ	もみ C.O	もみ動作を行います。 ボタンを一度押すごとに正転⇒逆転⇒停止と切り換えることができます。
手もみ	手もみ C.O	手もみ感覚に近い動作を行います。 ボタンを一度押すごとに正転⇒逆転⇒停止と切り換えることができます。
Wもみ	Wもみ	自動的に、正逆転、速さ調節を繰り返すもみ動作を行います。
もみ&たたき	もみ&たたき C.O	もみとたたきを同時に行います。 ボタンを一度押すごとに正転⇒逆転⇒停止と切り換えることができます。
リズム指圧1	リズム指圧 1 2	指圧動作をリズムカルに繰り返します。 ボタンを一度押すごとに1⇒2⇒停止と切り換えることができます。
リズム指圧2	リズム指圧 1 2	指圧位置を変えながら指圧動作をリズムカルに繰り返します。 ボタンを一度押すごとに1⇒2⇒停止と切り換えることができます。
たたき1	たたき 1 2	たたき動作を行います。 ボタンを一度押すごとに1⇒2⇒停止と切り換えることができます。
たたき2	たたき 1 2	自動的に速さ調節を繰り返すたたき動作を行います。 ボタンを一度押すごとに1⇒2⇒停止と切り換えることができます。

## ローラーの種類

自動コース時のように自動指圧点検出を行います。指圧点検出直後のもみ玉位置調節はできません。

動作	表示	内容
背筋ローラー	背筋ローラー 部分	背筋のばしを行います。 ボタンを一度押すごとに背筋⇒部分⇒停止と切り換えることができます。
部分ローラー	背筋ローラー 部分	部分背筋のばしを行います。 ボタンを一度押すごとに背筋⇒部分⇒停止と切り換えることができます。



## もみ玉位置調節

基本動作と部分ローラーの動作中、[▼][▲]ボタンの操作でマッサージしたいところにもみ玉の位置を調節できます。

※部分ローラーは、部分ローラー範囲の中心位置が調節できます。背筋ローラー使用時にもみ玉位置調節ボタンを押した場合、上昇・下降が入れ替わります。

動作	ボタン	内容	動作	ボタン	内容
上	▲	もみ玉が上に	下	▼	もみ玉が下に

## 速さ調節

もみ、もみ&たたき、たたき1の動作中に、マッサージの速さを[+] [-]のボタンで段階的に調節できます。

動作	表示	内容
速さ	速さ 05 04 03 02 01	左の表示は、速さ4に設定した場合です。 ●速さ調節範囲：..... 5段階(速さ1～5)

## 幅調節

リズム指圧1・たたき1・たたき2・背筋ローラー・部分ローラーの動作中にもみ玉の幅を[狭][中][広]の3段階に調節できます。

※ただし、もみ・手もみ・もみ&たたき・Wもみ・リズム指圧2とローラーを組み合わせても幅調節はできません。

動作	表示
狭	幅 ○広 ○中 ●狭
中	幅 ○広 ●中 ○狭
広	幅 ●広 ○中 ○狭

## エアーマッサージ

腕・肩・脚・座のエアーマッサージが選べ、お好みの組み合わせでマッサージすることができます。

動作中でも、エア-強さボタンを押すことで、中⇒強⇒弱の順に強さを調節できます。

動作	表示	内容
腕	腕エア	腕部のエアーマッサージ動作を行います。
肩	肩エア	肩部のエアーマッサージ動作を行います。
脚	脚エア	脚部のエアーマッサージ動作を行います。
座	座エア	座部のエアーマッサージ動作を行います。

# 自由選択コースのマッサージ

## 自由選択コースの操作方法

- 1 入/切ボタンを押します。**  
5分間入力がなければ、自動的に電源が切れます。
- 2 お好きなマッサージのボタンを押します。**  
選択したコースのボタンのランプが点灯します。ローラーを選択した場合、指圧点を検索します。正確に検索するために、椅子に深く腰掛け、頭を枕の上に置いてください。
- 3 腕エアユニットに腕を入れてください。**  
腕時計、ブレスレット、指輪などのかたい物ははずしてください。  
※腕動作を選択した場合
- 4 15分経過するとマッサージ動作が終了します。**
- 5 動作が停止します。**  
もみ玉が収納位置（背もたれ上部）まで戻り停止します。

## コース変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切り換えられます。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

## ●自由選択コース→自動コース

自由選択コース動作中に自動コースのボタンを押すと、もみ玉が一度収納状態に戻り、自動指圧点検出動作から開始し、自動コースを行います。



## コース途中終了

途中で終了する場合、動作中に「入/切」ボタンを押してください。収納動作を行った後停止します。緊急時や動作中に異常を感じたときは、「急停止」ボタンを押してください。その場で動作が停止します。安全を確認後、「入/切」ボタンを押してください。収納動作を行った後で停止します。

## ⚠ 注意

- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたいが、刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止しサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。  
→強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れないでください。また、髪飾り、腕時計、ブレスレット、指輪などのかたい物をつけて本機を使用しないでください。
- マッサージの使用は1回15分以内にしてください。同一箇所へのご使用は5分以内にしてください。  
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。  
1日当たりのマッサージは通算して30分程度を目安にしてください。
- 脚部や腕部のマッサージ中にユニットから脚や腕が抜けた場合、無理に入れないでください。

## 動作メニューの組み合わせ方と調節可能項目一覧

- ①～③のマッサージメニューの中からそれぞれお好みのマッサージ動作を選択し、組み合わせることができます。
  - 実行中の動作調節が可能なものについては動作調節の欄に○印をつけています。
  - もみ・手もみ・もみ&たたき・Wもみ・リズム指圧2と、ローラーを組み合わせても幅調節はできません。
  - ローラー動作の際は、メディカルコース時のように指圧点自動検索を行います。もみ玉位置調節は行えません。

### ①基本動作（8種類の動作の中から1つを選んでください。）

動作	動作調節	正転/逆転変更	速さ調節	幅調節	上下調節	強さ調節
もみ	○	—	○速さ1～5 5段階	—	○	—
手もみ	○	—	—	—	○	—
Wもみ	—	—	—	—	○	—
もみ&たたき	○	—	○速さ1～5 5段階	—	○	—
リズム指圧1	—	—	—	○狭・中・広 3段階	○	—
リズム指圧2	—	—	—	—	○	—
たたき1	—	—	○速さ1～5 5段階	○狭・中・広 3段階	○	—
たたき2	—	—	—	○狭・中・広 3段階	○	—



### ②ローラー（2種類の動作の中から1つを選んでください。）

動作	動作調節	正転/逆転変更	速さ調節	幅調節	上下調節	強さ調節
背筋ローラー	—	—	—	○狭・中・広 3段階	○(上昇・下降入れ換え)	—
部分ローラー	—	—	—	○狭・中・広 3段階	○(中心位置調節)	—



### ③エアーマッサージ

動作	動作調節	正転/逆転変更	速さ調節	幅調節	上下調節	強さ調節
腕	—	—	—	—	—	○弱・中・強 3段階
肩	—	—	—	—	—	○弱・中・強 3段階
脚	—	—	—	—	—	○弱・中・強 3段階
座	—	—	—	—	—	○弱・中・強 3段階



# 保管とお手入れの仕方

## 保管の仕方

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない場所に保管してください。
- ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ほこりがつかないようにしてください。
- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないようにしてください。

**注意** ●直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

## お手入れの仕方

**注意** ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

### 背パッド・枕・各カバー

- 汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取ってください。

**注意** ●ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。  
●アイロンがけはしないでください。

### 本体

- プラスチック、パイプ、布部の汚れは少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取ってください。
- アルコール、その他の溶剤やみがき粉などでのお手入れはキズ、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

### リモコン

- リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。
- 絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。故障の原因となります。

# 故障かな?と思ったら



サービスマン以外の方は、分解や修理をしないでください。

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは、事故防止のためただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお近くのサービスセンター（裏表紙に記載）までご相談ください。

**状態** 動作時の音

- たたき動作と、もみ&たたき動作時（ゴトゴト音）
- エアープンプの音（ブーン音）
- もみ動作時のもみ玉と布のすれる音（キュッキュッ、ギュウギュウ音）
- リクライニング時の音（ウィーン音）
- エアーマッサージ中の音（コツコツ音）

**原因と直し方** 構造上やむを得ず発生するもので、性能等に影響はありません。

**状態** リモコンのボタンを押しても正常に動作しない。

**原因と直し方** 次の点検を行なってください

- ①電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。
- ②本体後下部のPOWER（主電源）スイッチは「ON」になっていますか。

**状態** 入/切ボタンが赤く点滅している。

**原因と直し方** 本体後下部のPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、5秒ほどしてからPOWER（主電源）スイッチを入れ直してください。

- ①正常に戻ればそのままお使いください。
- ②再度、ボタンが点滅する場合は、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜きお買い上げの販売店またはお近くのサービスセンター（裏表紙）に連絡してください。

**状態** 自動指圧点検出がうまくいかない。（もみ玉が肩の高さに合っていない。）

**原因と直し方** 椅子に深く腰をかけて頭を背もたれにあててください。また、指圧点検出後にもみ玉位置調節ボタンでもみ玉の位置を調節できます。

（自由選択コースでは部分ローラー・背筋ローラーで自動指圧点検出を行いますが、このときは指圧点検出後のもみ玉位置調節はできません。）

# 故障かな?と思ったら

**状態** マッサージ動作が途中で止まる。

**原因と直し方** 本体右側面のPOWER (主電源) スイッチを「OFF」にし、5秒ほどしてからPOWER (主電源) スイッチを入れ直してください。

- ①正常に戻ればそのままお使いください。
- ②正常に戻らない場合は事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、サービスセンター (裏表紙に記載) に連絡してください。

**状態** マッサージ中に、もみ玉が途中で止まる。


**原因と直し方** もみ玉に必要以上の力が加わると、動きが止まることがあります。故障ではありません。体を浮かせぎみにしてください。(特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。)

**状態** もみ玉が上部へ移動し止まってしまった。

**原因と直し方** オートタイマー機能によりマッサージ終了時に、もみ玉が体に干渉しないように上部へ移動する構造になっています。

**状態** 左右のもみ玉の位置がずれている。

**原因と直し方** 交互たたき機構を採用しているため、構造上やむを得ず発生するもので故障ではありません。

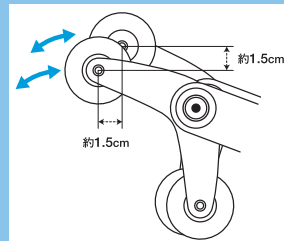

**状態** エアーマッサージ中、リクライニングさせるとエアーマッサージが止まってしまう。

**原因と直し方** 安全のため、背もたれの角度調節中はエアーマッサージが止まるようになっています。故障ではありません。

# Q&A

**Q** マッサージをより強くするにはどうすればよいですか?

**A** リクライニングを倒し、深く腰をかけ背もたれに体重がかかるようにしてください。それでも弱い場合は背パッド裏の緩衝パッドを抜き取ってマッサージしてください。

**Q** マッサージをより弱くするにはどうしたらいいですか?

**A** 背パッド裏の緩衝パッドを同梱の緩衝パッド (厚) に入れ換えてください。それでも刺激が強い場合は背もたれを起こして使用してください。

**Q** 誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか?

**A** ただちに本体後下部のPOWER (主電源) スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店またはお近くのサービスセンター (裏表紙に記載) にご相談ください。

**Q** 体重が重くてもだいじょうぶですか?

**A** 体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。体重100kg以上の方がご使用になる場合は、少し体を浮かせぎみにしてご使用ください。

**Q** 電気代はいくらぐらいかかりますか?

**A** 1日15分、毎日ご使用いただいた場合、1ヵ月で約31円です。(2007年10月現在、当社調べ)

# アフターサービスについて

## 1.保証書について

この製品には保証書を別途添付しております。

保証書は販売店にて「販売店・購入日」などの所定事項を記入してお渡ししていますので、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。（修理の際、必要となります）保証期間はご購入日より1年間です。ただし、この製品は日本国内専用ですので、日本国外でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外（業務用など）でご使用の場合は保証期間中でも有料修理とさせていただきます。

## 2.修理を依頼される時

修理を依頼される前に、22～23ページの「故障かな?と思ったら」をよくお読みください。

点検後、まだ異常がありましたらご購入の販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

- 1.お名前・ご住所・お電話番号
- 2.販売名…26ページをご覧ください。
- 3.製造番号…制御部に貼ってある社銘板をご覧ください。
- 4.ご購入日
- 5.故障の状態（できるだけ詳しくお知らせください。）

- 保証期間中は  
修理の際、保証書をご呈示ください。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間が過ぎている場合は  
ご購入の販売店にご相談ください。  
修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 販売店にご依頼にならない場合は  
サービスセンター（裏表紙に記載）にご連絡ください。
- 補修用性能部品の最低保有期間  
弊社はこの電気マッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。  
（ただし、縫製部品は除きます。）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は  
ご購入の販売店、またはサービスセンター（裏表紙に記載）にお問い合わせください。
- 日本国外でご使用になられた場合、修理をお断りする場合があります。

# 安全のために商品の点検を

## 長期ご使用の場合は商品の点検を

こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、動作しないときがある。
- 電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
- 自動的にタイマーが切れないときがある。
- もみ玉、エアセルのあたる所の布がやぶれている。
- その他の異常や故障がある。



■左記のような症状があれば故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ずご購入の販売店に点検をご依頼ください。

本体布地（もみ布）は消耗品であり、耐用年数は3年です（使用条件：1日15分コースを2回、毎日使用した場合）。安全にお使いいただくために、ご購入後、耐用年数が過ぎる前にお買い上げの販売店、またはサービスセンターでの定期点検をおすすめします。

※ただし使用条件が上記と異なる場合には、耐用年数が変わります。

※ご購入後5年ほど経ちましたら、安全のために椅子全体の点検をおすすめします。

点検・修理に要する費用につきましては、ご購入の販売店、またはサービスセンターにご相談ください。

# 仕様

販売名	ファミリーメディカルチェアV.1 FMC-1112	
使用電源	AC100V	
定格消費電力	160W	
定格周波数	50-60Hz	
定格時間	30分	
電撃に対する保護の形式	クラス0I機器	
上半身	もみ速さ	5段階 最小約14回/分、最大32回/分
	たたき速さ	5段階 最小約300回/分、最大600回/分
	もみ玉の幅	3段階（狭、中、広）
	上下移動速さ	50Hz：約34mm/秒 60Hz：約41mm/秒
	マッサージ範囲	約70cm（部分ローラーのとき約15cmの範囲で自動反復）
自動コース	メディカルコース 5種類（自動指圧点検機能付き）	
自由選択コース	14種類（一部自動指圧点検機能付き）	
エア圧力	約40kPa	
オートタイマー	約15分（自動コースは異なります）	
リクライニング角度	水平面に対し、約120°～170°無段階（電動リクライニング）	
本体の寸法	幅約88cm×奥行約122（185）cm×高さ約118（85）cm （ ）内の数字は最大リクライニングおよびフットレスト水平時	
重量	約75kg	
外装布地	合成皮革（抗菌・防汚加工）	
付属品	枕（小）、枕（大）、指圧ボールA、指圧ボールB、緩衝パッド（薄）、緩衝パッド（厚）、肩用緩衝パッド、電源コード、アース線、T型レンチ	
包装	1梱包/1台	
類別	機械器具（77）バイブレーター	
一般的名称	家庭用電気マッサージ器（JMDNコード34662000）（管理医療機器）	
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003	
医療機器認証番号	219AKBZX00157000	
製造販売元	ファミリー株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地 TEL. (0859) 54-4911 (代)	
製造元	ファミリー株式会社	