

見守りユーザーコードの取得方法 (ルピナスのタブレットを操作)



- [1] 利用者選択画面で見守りたいルピナス使用者 (見守りユーザー) を選択してください。
- [2] メインメニュー画面の<家族見守り> ボタンを押してください。
- [3] ユーザーコードが表示されますので、このコードを⑤見守りユーザー登録画面に入力してください。複数の見守りユーザーを登録する場合は、見守りユーザー毎に「見守りユーザーコード」を発行して登録する必要があります。

6 見守りたいルピナス使用者の登録完了画面



見守りたいルピナス使用者 (見守りユーザー) は続けて登録することができます。複数の見守りユーザーを登録する場合は、登録を続けてください。

見守りユーザーの登録を終了する場合は、<一覧表示に戻る>ボタンを押してください。登録済みの見守りユーザーを確認することができます。

画面の見方



画面左上のボタンを押すと各種設定をおこなうことができます。

- クラウドを通じて、見守りユーザーのデータを確認することができます。
- ・ルピナス付属のタブレットの登録データ
 - ・体組成計 (FBS-100) の測定データ
 - ・血圧計 (FBM-100) の測定データ
 - ・アクティブメジャー (FWW-100) の測定データ

また、各種データのアイコンを押すと履歴を確認することができます。

※見守りユーザーのデータを確認する際、画面の更新に時間がかかる場合があります。