

アクティブメジャーの設定方法

アクティブメジャーを利用するには、アプリ「ルピナスリンク365」が必要です。スマートフォンをお持ちでない方は、ルピナス本体と接続して使うことができます。ルピナス本体との接続方法は、ルピナスのタブレットのガイダンスをご確認ください。

<スマートフォン>



<アクティブメジャー>



1 アプリ「ルピナスリンク365」のダウンロード方法

方法1 QRコードを読み込む



iPhone(iOS)



Android



方法2 App Store、Google Playで「ルピナスリンク365」を検索する

ルピナスリンク365

検索

ダウンロード画面が表示されたら、アプリのダウンロードをおこなう

入手を押す

インストールを押す

iPhone



Android



● アプリ動作環境 iOS9.0以降、Android4.3以降に対応しています

2 アプリ「ルピナスリンク365」を起動

インストール終了後、「LupinusLink (ルピナスリンク)」のアイコンを押してアプリを起動してください。




3 認証画面 (認証コードを入力)



ルピナスのデータとアクティブメジャーを接続するためにコード認証 (ユーザー識別) が必要です。ルピナスのタブレットでコードを発行し入力後、コード認証ボタンを押してください。

認証コードの取得方法 (ルピナスのタブレットを操作)


[1] 使用者選択画面でアプリとデータを接続 (同期) させたいユーザーを選択してください。

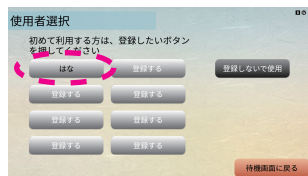


[2] メインメニュー画面の <健康管理> ボタンを押してください。



[3] <マイリンク> ボタンを押してください。

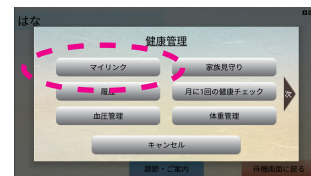


[4] <接続を開始する> ボタンを押してください。

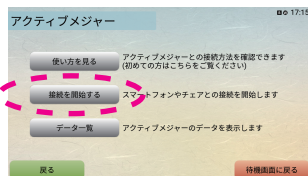

[5] <コード発行> ボタンを押してください。



[6] コードが表示されます。このコードを③の認証画面に入力してください。

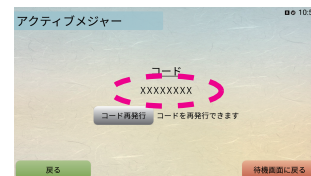

- スマートフォンを変更した場合は、アプリとアクティブメジャーの接続を切った上で認証コードを再発行し、改めてログインしてください。
- 本サービスで表示されるアドバイスは、利用者の健康管理の参考に役立てていただくことを目的としております。測定値は環境や測定機器の使い方、測定姿勢などの様々な要因で変化しますので参考値となります。不安のある方は専門機関や医師の診察・診断をおすすめします。
- Android、Google Play は、Google Inc. の商標です。 ● App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

4 アクティブメジャーとスマートフォンの接続 (ペアリング)

① アクティブメジャーの準備



アクティブメジャーのタッチキー を押して液晶画面に

「Open App to Connect」を表示させてください。しばらくすると消えますので、その後 30 分以内に手順②～⑤にしたがって接続 (ペアリング) をおこなってください。

② ホーム画面 (未接続状態)



ホーム画面が表示されます。画面右上のボタン を押してください。アクティブメジャーとスマートフォンの接続 (ペアリング) をおこないます。

③ 接続開始画面 (ペアリング開始画面)



QRコードを読み込むボタンを押してください。スマートフォンのカメラが起動します。


④ QRコードの読み取り




アクティブメジャー付属の登録用 QR コード用紙に印刷された QR コードを読み込みます。また、QR コードの下に記載されているシリアルナンバーの入力でも接続 (ペアリング) は可能です。

⑤ 接続中画面

iPhone

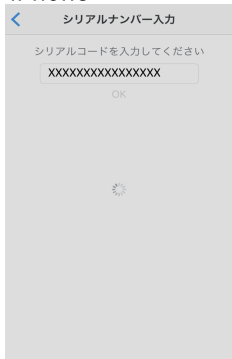

Android

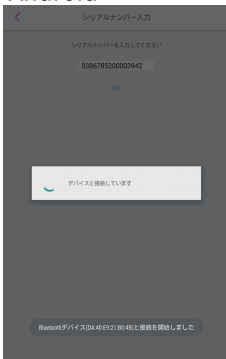

⑥ ホーム画面 (接続完了状態)



接続にはしばらく時間がかかる場合があります。

- スマートフォンの Bluetooth 設定が OFF の場合は、アクティブメジャーとの接続 (ペアリング) ができませんので、Bluetooth 設定を ON にしてください。
- アクティブメジャーとの接続 (ペアリング) 時にスマートフォンの位置情報のアクセスやカメラの使用許可を求められることがありますので、アプリを使用する際は「許可」を選択してください。
- iPhone の場合はペアリング要求画面が表示されることがありますので、「ペアリング」を選択して接続をおこなってください。

「アクティブメジャー (LSBand2) と接続されました」と表示されると接続 (ペアリング) 完了です。

アクティブメジャーとの接続は複数のスマートフォンで設定することはできません

画面の見方

画面左上のボタン を押すと、目標歩数の設定をおこなうことができます。

アドバイスが表示されます健康管理の参考にしてください。

アクティブメジャーのデータが分析され、最適なマッサージコースが提案されます。



設定ボタンを押すと、電池残量や接続状態の確認、ディスプレイの設定をおこなうことができます。



各項目の詳細なデータがグラフで表示されたり履歴を確認することができます。

※アクティブメジャーと接続する際 画面の更新に時間がかかる場合があります。

● お問い合わせ窓口

ご不明点がございましたらルピナスサポートセンターまでお問い合わせください。

0120-907-534

フリーコール (受付時間 土・日・祝を除く平日 9:00 ~ 17:00)