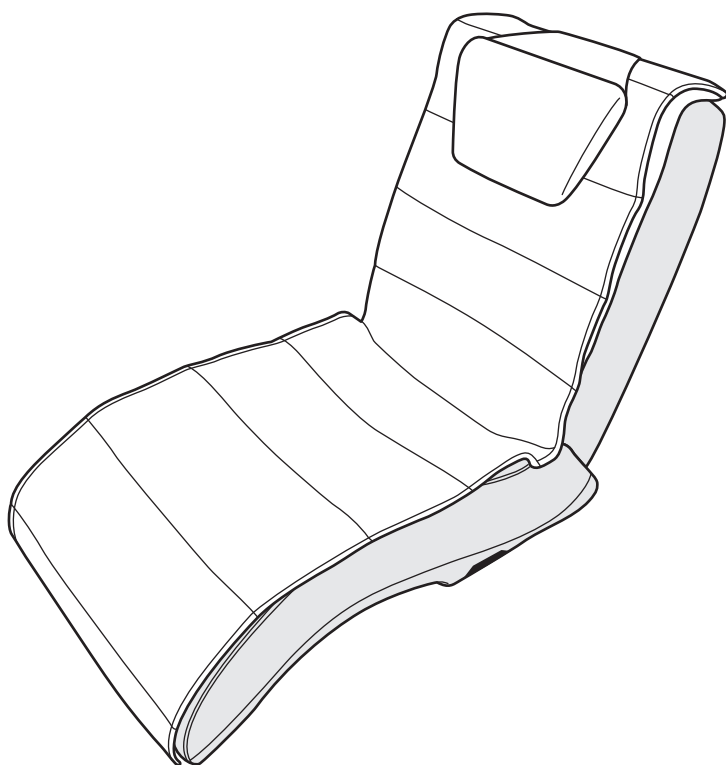


Vita

取扱説明書

添付文書


メディカルチェア ヴィータ
FMC-VT200

このたびは、メディカルチェア ヴィータをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品は、疲労の回復・改善を目的としたさまざまなマッサージがお楽しみいただけます。皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして末永くご愛用ください。

もくじ

■ 安全上のご注意	1
■ おもな特徴と使用目的または効果	4
■ 各部の名前とはたらき	5
■ ご使用前	7
■ 椅子の調節	10
■ 使い終わったら	12
■ コースの種類と特徴	13
■ メディカルコース	14
■ お好みコース	15
■ Q&A	17
■ 故障かな?と思ったら	18
■ 保管とお手入れの仕方	19
■ アフターサービスについて	20
■ 仕様	21
■ 安全のために商品の点検を	22
■ お問い合わせ窓口・保証書	裏表紙

- ◎ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◎「取扱説明書」は、いつでも見られるように大切に保管してください。
- ◎この製品は、日本国内の弊社工場にて企画・開発・設計から最終組み立て、及び品質保証まで全てをおこなっております。
- ◎この製品は、一般家庭用として設計されていますので、一般家庭以外(業務用等)でご使用の場合は、お買い上げの販売店または「製品に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。

日本国内専用

この製品は日本国外への輸出と使用を禁止しています。
PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE PRODUCT OUTSIDE OF JAPAN.

この製品に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。
よってこの製品を国外に持ち出した場合、保証及び修理対応はできませんのでご了承ください。
JAPANESE EQUIPMENT SPECIFICATION WARRANTY APPLIES ONLY IN JAPAN.
WARRANTY INCLUDING REPAIRS BY THE MANUFACTURER DOES NOT APPLY IF THE PRODUCT IS TAKEN OUT OF JAPAN.

Massage
+
Medical



安全上のご注意

ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。なお、各部の名前については5～6ページをご覧ください。

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

表示の種類

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。

図記号の種類と意味

 禁止	禁止の行為であることを示しています。
 分解禁止	分解してはいけないことを示しています。
 ぬれた手禁止	ぬれた手で扱ってはいけないことを示しています。
 禁止	風呂・シャワー室等で使用してはいけないことを示しています。
 強制	行為を強制したり指示したりするものです。
 プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
 アース 取り付け	アースを取り付けることを示しています。

ご使用場所の注意

 注意	
 禁止	●浴室やサウナ、湿気の多い場所では使用しないでください。 →感電や故障の原因になります。
 強制	●床面が水平な場所に置いて使用してください。 →不安定な場所では本体が転倒し事故の原因になります。
 アース 取り付け	●万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。 詳しくは、8ページをご覧ください。
 禁止	●アース線はガス管・水道管・電話線・避雷針には絶対に接続しないでください。

ご使用前の注意点

警告

 禁止	●次の人は使用しないでください。 ○医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓（塞栓）症、重度の動脈リゅう（瘤）、急性静脈リゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症〔皮下組織の炎症を含む〕等。○急性の頸椎ねんざ（むちうち症）の疑いのある人 ●電源は交流100V以外では使用しないでください。 →火災や感電の原因になります。 ●変圧器を用いた使用はしないでください。 →故障や感電の原因になります。 ●電源コードや電源プラグがいたんだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいとき等は使用しないでください。 →感電やショート・発火の原因になります。 ●マッサージの前には必ず施療部の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでも勝手に修理などせず、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご連絡ください。施療部の布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。 →布地が破れた状態で使用すると、ケガや感電のおそれがあります。
 強制	●次の人は、使用前に医師に相談してください。 ○心臓に障害のある人 ○糖尿病等による高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ○骨粗しょう（鬆）症の人や脊椎の骨折、急性【とう（疼）痛性】疾患の人 ○施療部位に創傷のある人 ○体温38℃以上（有熱期）の人 例：急性炎症症状【けん（倦）怠感、悪寒、血圧の変動等】の強い時期にある人。衰弱している人 ○妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ○ペースメーカ等の電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ○背骨（脊椎）に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ○かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する ○悪性の腫瘍のある人 ○安静を必要とする人 ○内臓疾患（胃炎、腸炎、肝炎）等の急性症状のある人 ○医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ○リウマチ症、痛風等により関節が変形している人 ○めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ○捻挫、肉離れ等の炎症性の人 ○腱鞘炎、またはそのおそれのある人 ●特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。 ●しばらく使用しても、効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。

注意

 禁止	●この取扱説明書の使用法以外の使い方をしないでください。また、本体と他の治療器や電気毛布等を併用しないでください。 →体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。 ●人をのせたまま移動しないでください。 →本体の転倒により、事故やケガの原因になります。 ●リクライニングを倒したままで椅子に座らないでください。 →故障の原因となります。また、本体の転倒により事故やケガの原因になります。 ●本体に付属しているもの、または指定しているもの以外は使用しないでください。
 強制	●電源プラグをコンセントに差し込む前に主電源スイッチが切れていることを確認してください。 →故障や感電の原因になります。 ●電源プラグおよびコネクタは確実に最後まで差し込んでください。 →感電やショート・発火の原因になります。 ●ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。 ●使用前にはリクライニングを完全に起こしてください。 ●安全のために、メカの位置を確認し、収納位置にない場合は、主電源スイッチを入れ、機器が正常に動作することを確認してからゆっくり座ってください。 ●しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。

ご使用時の注意点

警告

 禁止	●電源コードやリモコンのコードを本体に巻きつけたり、本体の脚で踏んだりしないでください。また、電源コードやリモコンのコードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。 →コードが破損し、火災や感電の原因になります。 ●本体やリモコンに水等をこぼさないでください。 →感電やショート・発火の原因になります。 ●お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを、本体の上や本体の周辺（背もたれの後ろや座面の下等）で遊ばせたり、本体の上のせたり、座らせたりしないでください。 →事故やケガの原因になります。 ●椅子に2人以上座ってのご使用はおやめください。特に小さなお子様（乳児等）を抱きかかえてのご使用はおやめください。 →事故やケガの原因になります。 ●布地が破れた状態では使用せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →事故やケガ・感電の原因になります。修理は『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。 ●本体を手で持ち上げた状態で急に手をはなさないでください。
 ぬれ手禁止	●ぬれた体で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。 →感電や故障の原因になります。
 強制	●マッサージコース開始前やリクライニングを倒すときや起こすとき、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろに体や物をはさまないようにしてください。 →事故やケガの原因になります。 ●や物がはさまれた場合、リクライニングボタンを押して安全な位置まで戻してください。

安全上のご注意

ご使用時の注意点

⚠ 注意	
 禁止	●素肌では使用しないでください。 ●マッサージおよび椅子としての目的以外には使用しないでください。 →事故やケガの原因になります。 ●頭部、胸部、腹部、関節部（ひじ、ひざ等）には使用しないでください。 →気分が悪くなったり、ケガの原因になります。首筋等には柔らかいタオルを当てて強い刺激を避けてご使用ください。 ●もみ玉が上下する部分、リクライニング等の可動部に手や足を入れないでください。また、髪飾り、ネックレス、腕時計、ブレスレット、指輪などのかたい物をつけて使用しないでください。 ●マッサージチェアを無人で動作させないでください。 →事故やケガの原因になります。
 強制	●緊急時や動作中に異常を感じたときは、リモコンの【急停止】ボタンを押して、動作を停止させてください。 ●使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください。 ●はじめは弱い刺激でマッサージしてください。マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し『製品に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。 →はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。 ●マッサージ中は眠らないように注意してください。 →ケガの原因になります。 ●マッサージは、1回15分以内にしてください。同一箇所已连续して5分以上使用しないでください。 →長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。1日当たりのマッサージは、通算30分程度を目安にして時間をあけてご使用ください。
 プラグを抜く	●停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止して主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。 ●落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止して、主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に点検・修理を依頼してください。 →感電や漏電・ショート等による火災のおそれがあります。

ご使用後や使用しないときの注意点

⚠ 注意	
 禁止	●使用後は必ず主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。 ●電源コードは本体以外では使用しないでください。 ●本体を使用後は、必ずリクライニングを完全に起こしてください。 ●コード類は、ねじれをほどいて保管してください。 ●使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。 ●本体に物を載せないでください。
 プラグを抜く	●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。 →感電やショートによる火災の原因になります。 ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 ●ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 →ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。

その他の注意点

⚠ 警告	
 禁止	●本体の上に立たないでください。座面以外に座等して、上から強い衝撃を与えないでください。
 分解禁止	●機器が故障した場合は、勝手に修理せず、販売店または『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に連絡してください。 ●電源コードが破損した場合、危険ですので電源コードの交換は『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に交換の依頼をしてください。 ●機器は改造しないでください。 →火災や感電、ケガの原因になります。
⚠ 注意	
 強制	●他の人に譲渡、貸与するときは、本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡しください。

お願い

- 製品及び付属品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

おもな特長と使用目的または効果

特 長

肩位置調節可能

指圧点位置調節機能

お好みの肩位置に調節し、指圧する位置を変更できるので、効果的なマッサージをおこなうことができます。

背メカ・脚メカ 2つのメカを搭載

Wエンジンシステム

上半身、下半身に専用のマッサージメカを搭載。動きを連動させることで、全身をくまなくもみほぐします。他にも血流の促進や筋肉の疲れをとるマッサージなど、効果的にマッサージをおこなうことができます。

設置箇所に悩まない

コンパクト設計・軽量設計

全身マッサージ機で搬入幅約61cm、マンション等でも設置しやすいサイズ。約26kgの重さで移動も簡単です。

ひとそれぞれの強さに合わせる

人工知能搭載

ブラシレスモーターを使用し、特殊なパルス制御をおこなうことで、それぞれの体型に合ったマッサージを実現します。

プロの施術ノウハウ

求心法・遠心法でプロの施術

松浦鍼灸大学堂院長 松浦氏監修のプロの施術を徹底的に模したマッサージ手順でもみほぐすマッサージコース。

末端から身体の中心へ向かって血の巡りをよくする「求心法」と、身体の中心から末端へ血の巡りをよくする事で全身の血液を促進させる「遠心法」を搭載しています。

優しい体感

柔らかモード搭載

柔らかモードでは脚メカのマッサージを弱くすることができるので、幅広い世代の方にお使いいただけます。

【おもな特徴と使用目的または効果】


使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用するこ

- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- 血行をよくする
- 筋肉のこりをほぐす

各部の名前とはたらき


【各部の名前とはたらき】

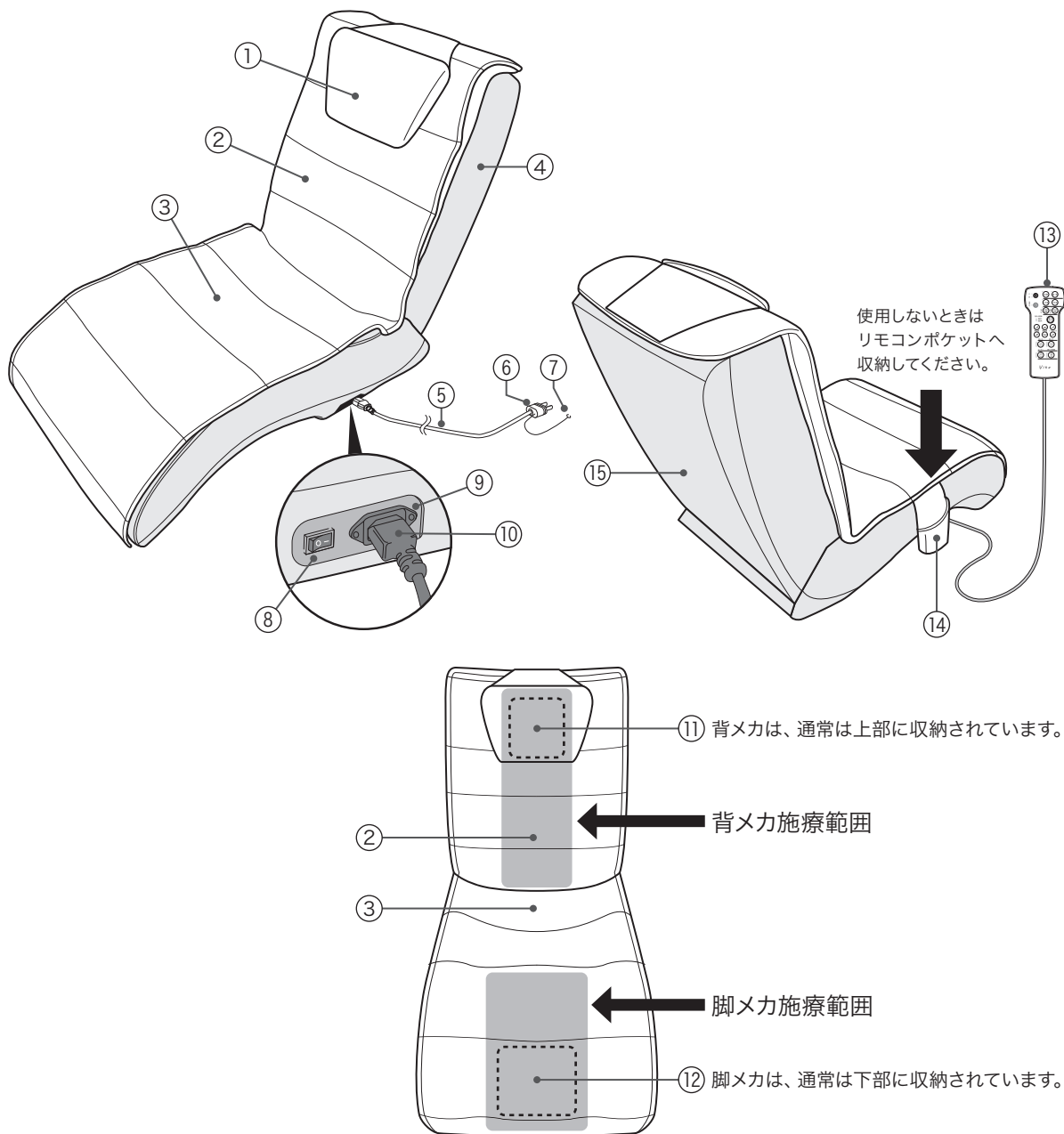

①	枕
②	背パッド
③	座面
④	背もたれ
⑤	電源コード
⑥	電源プラグ
⑦	アース線
⑧	主電源スイッチ

⑨	インレット
⑩	コネクタ
⑪	背メカ
⑫	脚メカ
⑬	リモコン
⑭	リモコンポケット
⑮	裏カバー

リモコン

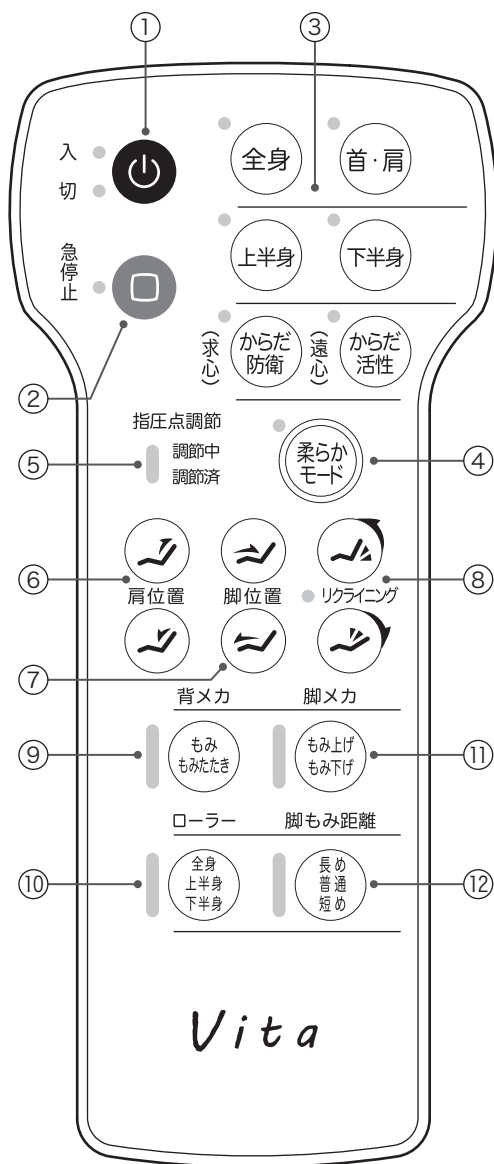

①	入/切ボタン	リモコンの電源の「入」「切」をおこないません。リモコンの電源が「入」の状態では緑色、「切」の状態ではオレンジ色に点灯します。動作中に押すと、もみ玉が収納位置まで戻ってから停止します。
②	急停止ボタン	緊急時や動作中に異常を感じたときに押してください。その場で動作が停止します。急停止中は急停止ボタンのランプが赤色に点滅します。
③	メディカルコースボタン	各ボタンでコースを選択できます。
④	柔らかモードボタン	マッサージ中に柔らかモードを選択することで、脚メカのマッサージを弱くすることが出来ます。
⑤	指圧点調節表示ランプ	肩位置ボタンで指圧位置の調節中と調節済をランプでお知らせします。
⑥	肩位置ボタン	指圧する肩位置や、コース中の背メカのもみ玉の位置調節に使用します。(首から腰にかけて)
⑦	脚位置ボタン	コース中の脚メカの位置の調節に使用します。(太ももつけ根から足首にかけて)
⑧	リクライニングボタン	リクライニング角度を調節します。リクライニングを倒すときに、リクライニングボタンのランプがオレンジ色に点滅し、ビビビビという音が鳴ります。
⑨	背メカマッサージボタン	上半身のマッサージ(もみ、もみたたき)を選択できます。
⑩	ローラーマッサージボタン	ローラーマッサージ(全身、上半身、下半身)を選択できます。
⑪	脚メカマッサージボタン	下半身のマッサージ(もみ上げ、もみ下げ)を選択できます。
⑫	脚もみ距離ボタン	脚メカの距離(長め・普通・短め)を三段階調節で選択できます。

【各部の名前とはたらき】

⚠ 警告	●リモコンに水等をこぼさないでください。 ●ぬれた手で操作しないでください。
⚠ 注意	●リモコンの上に座ったり、落したり、踏んだり、コードを強くひっぱったりしないでください。 ●先のとがったものやかたいものでボタンを押さないでください。 →破損の原因になります。

ご使用前に

- この製品は、リクライニングを全て倒した状態で梱包してお届けしています。ご使用前には、必ずリクライニングを起こしてください。
- 冷えきった室内の温度を上げて使用するとき、室温を急に上げず、徐々に上げてください。本体を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1時間ほど待ってから使用してください。
→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。

設置場所について


リクライニングを倒したときに壁や物に当たらないように、本体後ろのスペースを約50cm以上確保してください。



注意

- 浴室やサウナなど、湿気の多い場所では使用しないでください。
- 床面の水平な場所に置いて使用してください。
- ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所（40℃以上）では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。
- タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。


- 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。
- 重量物ですので、下ろすときに床面を傷つけないように注意してください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。
- 体重100kgの人が座った状態で1cmあたり約2.5kgの荷重がかかります。

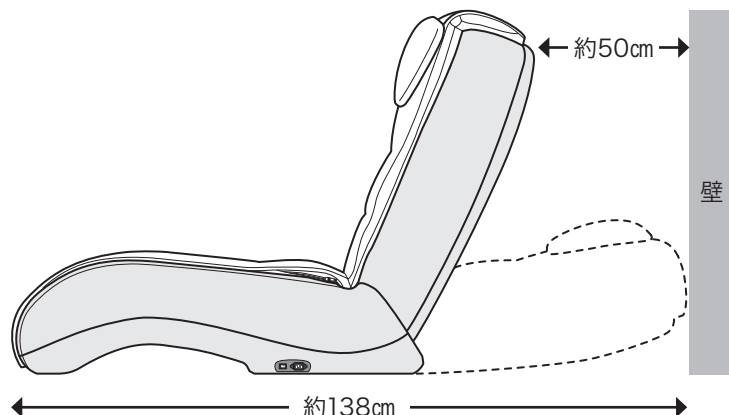

同梱物の確認

梱包箱には本体と同梱物が入っていることを確認してください。

本 体

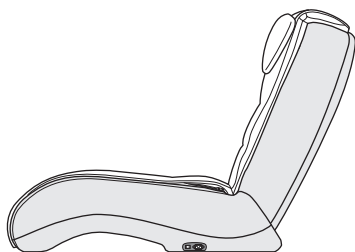

本体

同梱物



取扱説明書（本誌）




電源コード

搬入／移動の仕方

移動の際は、主電源スイッチを切り、電源プラグ及びアース線をコンセントから抜き、電源コードのコネクタもインレットから抜いてください。

1人で移動するとき

リクライニングを全て倒し、下図のように中心部を片腕で抱きかかえ、腰と片腕で支えながら移動してください。

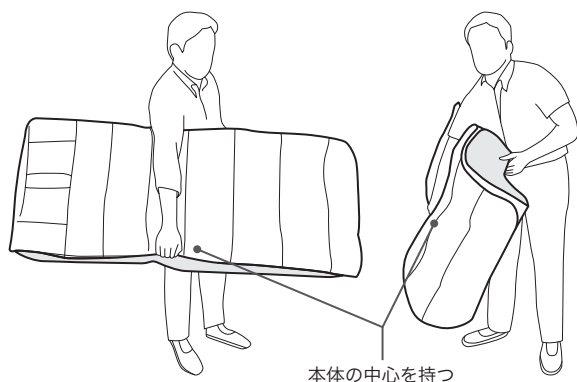

本体を落とすと床を傷つけたり、ケガをしたりするおそれがありますので、可能な限り2人での移動をおすすめします。

2人で移動するとき

リクライニングを全て倒し、本体の上部と下部を持ち、持ち上げて移動してください。



本体を落とすと床を傷つけたり、ケガをしたりするおそれがありますので、しっかり持ってください。

- 重量物ですので搬入移動時に、製品を落としたり、ケガ等しないよう、市販の運搬用手袋を装着することをおすすめします。
- 重量物ですので搬入移動時には腰等を痛めないようにご注意ください。
- リモコンがついていますので、移動時に落とさないよう注意してください。
- 通路の幅は約66cm必要です。



注意


- 人をのせたまま移動させないでください。
- 電源コード、アース線をコンセントからはずし、電源コードのコネクタもインレットから抜いて移動してください。
→ 電源コード、アース線が破損し、火災や感電の原因になります。

アースの取付け方

万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。

①コンセントにアース端子がある場合

電源プラグから出ているアース線を、コンセントのアース端子に確実に接続してください。
アースがはずれたり、端子がゆるんでないかときどき点検してください。

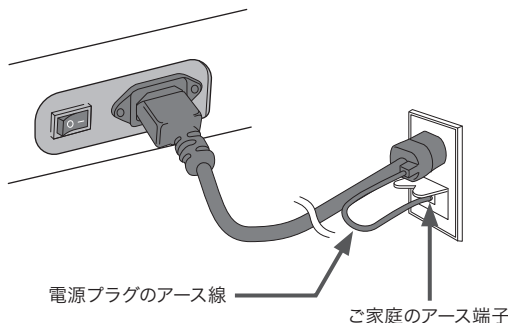

②コンセントにアース端子がない場合


お買い上げの販売店にご相談ください。

電源コードは、必ず本体に付属のものをご使用ください。とくに、電源コードのプラグ部にアース線がついていないものは万一の感電を防ぐことができませんので絶対に使用しないでください。


ご使用の前に

主電源の入れ方

- ① 電源コードのコネクタを本体左部のインレットに差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。

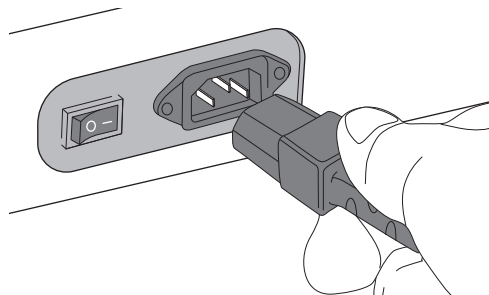

- ② 本体左部の主電源スイッチを入れます。

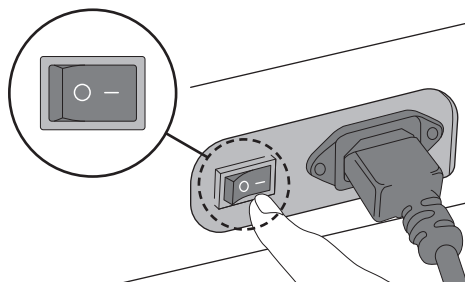

※もみ玉が途中で止まっているとき主電源スイッチを入れると、もみ玉は自動的に収納位置（背もたれ上部と座面の手前側）まで移動して停止します。

⚠ 警告

- 変圧器を用いた使用はしないでください。
→故障や感電の原因になります。
- 日本国外では使用しないでください。
→故障や感電の原因になります。

⚠ 注意

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に主電源スイッチが切れていることを確認してください。
- 電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。
- ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。

布地の確認

ご使用前には布地の破れがないか確認してください。

⚠ 注意


- ご使用前には必ず本体布地が破れていないか確認してください。またその他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご連絡ください。本体布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。

リモコンの取り回し方

リモコンケーブルは座面裏から伸びています。



リモコンポケットは、梱包時は座面部分のカバーの下に収納してありますので、取り出し、面ファスナーで右側の側面部に装着してください。

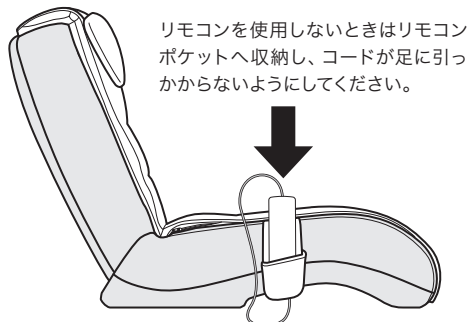

リモコンを使用しないときはリモコンポケットへ収納し、コードが足に引っかからないようにしてください。

椅子の調節

椅子の座り方

もみ玉は通常、背もたれの上部と座面の手前側にそれぞれ左右に広がっている状態になっています（収納状態）。安全のため、もみ玉の位置を確認し、上記以外の場所にもみ玉がある場合はすぐに座らず主電源スイッチを入れて、もみ玉を収納状態に戻してから、ゆっくりと椅子の中央に座ってください。




注意

- リクライニングを倒したまま椅子に座らないでください。
→座面に衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本体の転倒により、事故やケガの原因となります。
- ご使用前はリクライニングを完全に起こし、体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。

椅子への乗り降りの際の注意点

正しい座り方

座面の奥側へ深くお座りください。

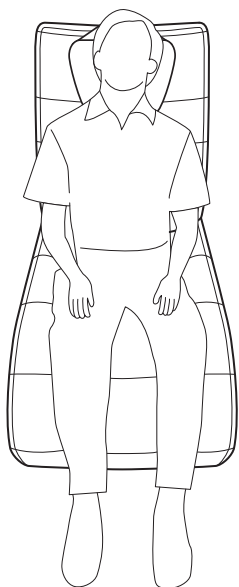


警告

- 上記以外の座り方は絶対にしないでください。
→事故やケガ、故障の原因になります。
- お子様やペットを本体の上や本体の周辺（背もたれの後ろや本体と床との間）で遊ばせたり、のせたり、座らせたりしないでください。
→事故やケガの原因になります。

正しい乗り降りの方

左右いずれかの方向から、座面の上に手を置いて身体を支えながら、ゆっくりと座面の奥側へ座ってください。降りる際も、座面の上に手を置いて身体を支えながら、ゆっくりと降りてください。

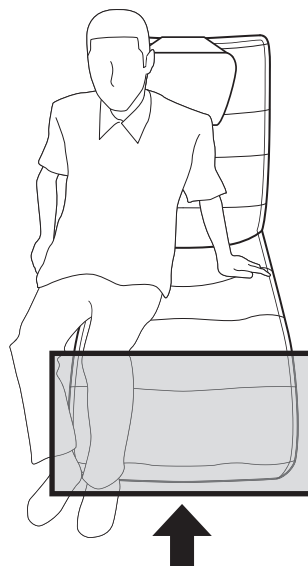

※矢印が示す場所には脚メカが入っていますので乗り降りの際十分に注意してください。
正面からの乗り降りはしないでください。




注意

- 上記以外の乗り降りは絶対にしないでください。
→事故やケガ、故障の原因になります。
- 急停止後、再度乗る際は、脚メカの位置を確認してから乗り降りしてください。

椅子の調節


危険な乗り方

例1

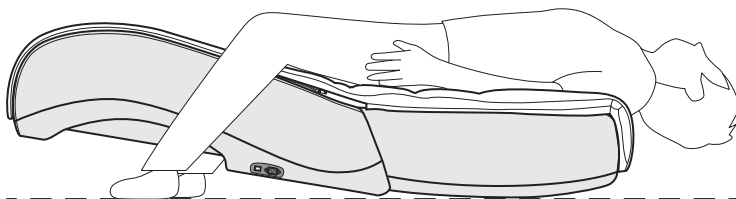

✕ 椅子の背もたれが壁や床に接触した状態での使用は、壁や床を傷つけたり、故障の原因となりますので絶対にしないでください。

例2

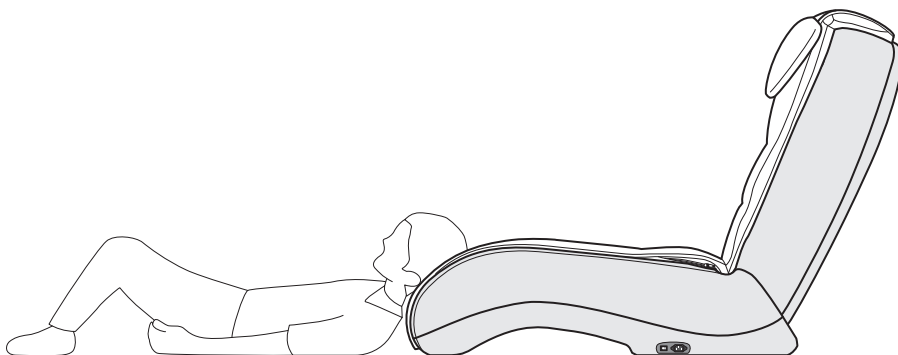

✕ 脚メカが頭に接触した状態での使用は、事故やケガ、故障の原因となりますので絶対にしないでください。

リクライニングの使い方



リクライニングを起こす場合

リクライニングボタンの上側のボタンを押すことでリクライニングを起こすことができます。

● リクライニング



リクライニングを倒す場合

リクライニングボタンの下側のボタンを押すことでリクライニングを倒すことができます。
倒れているときにはピピピピという音が鳴ります。




警告


● リクライニングを倒すときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。
また、背もたれの後ろに体や物をはさまないようにしてください。

枕の使い方と調節


枕を使う際は裏側についている面ファスナーで、位置を調節してください。

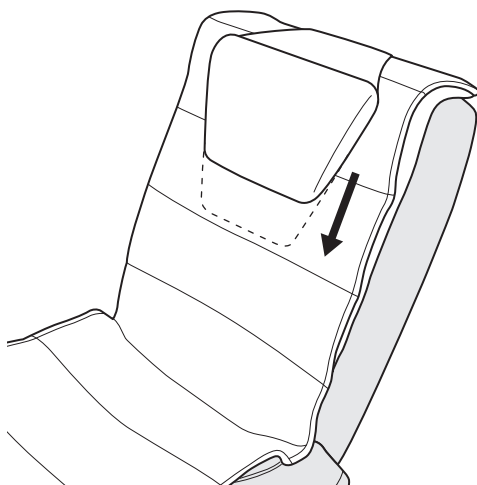

正しい枕の位置

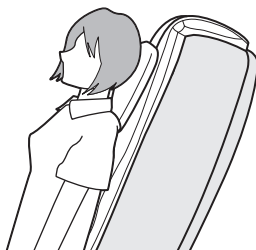

枕にしっかりと後頭部がのっていない。

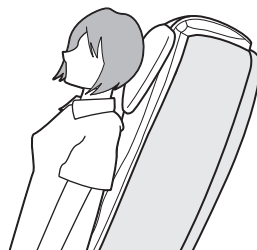

枕にしっかりと後頭部を置きます。

使い終わったら

周囲に注意しながら、リクライニングを完全に起こしてください。
もみ玉が収納位置に移動し、完全に停止したことを確認してから、
本体左側の主電源スイッチを切ってください。



注意

- コース終了後は、もみ玉が収納位置に移動します。移動中には、緊急の時を除いて、主電源のスイッチをきらないでください。
- 使用後は必ず主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
→お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。
- 使用後は、必ずリクライニングを完全に起こしてください。
- 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- コード類に引っかかって転倒しないようにしてください。
- コード類はねじれをほどこいて保管してください。

コースの種類と特長

メディカルコース

筋肉の疲労回復を目的としたコースです。
目的に合わせてお選びください。

全身コース

上下2つのメカを組み合わせた動きにより、全身をバランスよくほぐし血流を促進します。

首・肩コース

背メカは首から肩にかけて、脚メカは足首からふくらはぎを中心に、しっかりとほぐします。

上半身コース

首・肩・腰・背をしっかりと刺激することで上半身の疲れをほぐします。

下半身コース

太もも・ふくらはぎ・足首をしっかりと刺激することで下半身の疲れをほぐします。身長差により部位の体感に差があります。

からだ防衛コース (求心コース)

身体の末端から血流を心臓に送り返す求心法で、静脈の流れに沿ってマッサージを行います。

からだ活性コース (遠心コース)

心臓から血流を身体の末端に促す遠心法で、動脈の流れに沿ってマッサージを行います。

お好みコース

お好みの機能を組み合わせることができます。

背メカマッサージ

脚メカマッサージ


ローラーマッサージ

※肩位置ボタンで指圧する位置の調節ができるのは、ローラーマッサージのみです。その他は選択すると動作が開始します。

メディカルコース

- 疲労の回復、改善などを目的とした6種類のコースを用意しています。
- 各コースボタンで目的に合わせてコースを選ぶことにより、あらかじめ設定されたメニューにもとづいてマッサージをおこないます。

操作方法

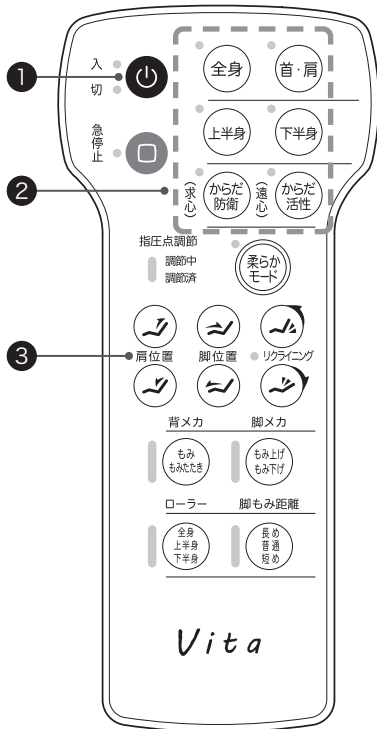


- ①「入/切」ボタンを押す。
5分間入力がなければ自動的に電源が切れて、オレンジ色のランプが点灯します。
- ②好きなコースのボタンを押します。
メディカルコースからお好みのコースをお選びください。
- ③肩位置調節ができます。
指圧点調節表示ランプの調節中ランプが点滅している間に、もみ玉を肩の位置に調節してください。
調節しなくてもよい場合はそのままにしておきます。
- ④コースが始まります。
指圧する位置の調節が完了すると、指圧点調節表示ランプの調節済ランプが点灯し、コースが始まります。
- ⑤コースが終了します。
もみ玉が収納位置まで戻ります。その後電源が切れて、オレンジ色のランプが点灯しますが、リクライニングの上下調節はご使用になれません。

肩位置の調節

肩位置ボタンで、肩位置を調節してください。

		押している間もみ玉が上に動き続けます。
		押している間もみ玉が下に動き続けます。

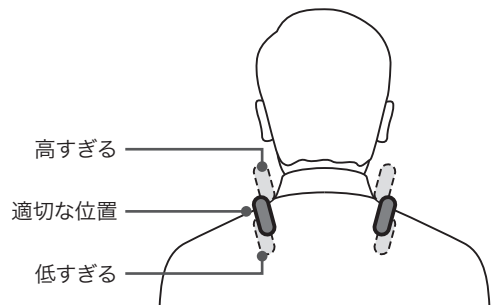

- もみ玉の位置が最上部（最下部）にあるときに、さらに上昇（下降）を選択しても動きません。
※「プププ」と警告音が鳴ります。
- 一度も基本動作やローラーを選択していない場合は肩位置ボタンを押しても動作しません。




注意

- 肩位置が高すぎる場合は後頭部にあたらないように調節してください。
→ケガのおそれがあります。
- 体調に合わせて強さを調節してください。
→強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。

お好みコース

お好みのマッサージメニューを選択できます。また、背メカと脚メカのマッサージを組み合わせることができます。

操作方法

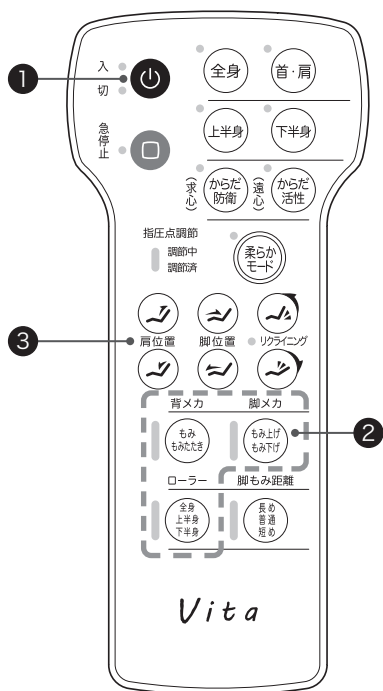

①「入/切」ボタンを押す。

5分間入力がなければ自動的に電源が切れて、オレンジ色のランプが点灯します。

②好きなマッサージのボタンを押します。

背メカ、脚メカ、ローラーの中から好みの動作を組み合わせてください。

※ただし、ローラーは他の動作と組み合わせることはできません。

③肩位置調節ができます。

ローラーをお選びの際は、指圧点調節表示ランプの調節中ランプが点滅している間に、もみ玉を肩の位置に調節してください。

調節しなくてもよい場合はそのままにしておきます。

※背メカと脚メカは選択後、すぐにマッサージを開始します。

④コースが始まります。

コース動作中でも基本動作の変更や解除ができます。

⑤コースが終了します。

もみ玉が収納位置まで戻ります。その後電源が切れて、オレンジ色のランプが点灯しますが、リクライニングの上下調節はご使用になれません。

お好みコース

①と②は組み合わせることができます。

背メカ

もみ
もみたたき

①背メカマッサージボタン

- ボタンを押して、もみ、もみたたきをお選びください。
- 肩位置ボタンで、背メカの位置をお好みの位置に合わせて下さい。
- 15分でコースは終了します。

脚メカ

もみ上げ
もみ下げ

②脚メカマッサージボタン

- ボタンを押して、もみ上げ、もみ下げをお選びください。
- 脚位置ボタンで、脚メカの位置をお好みの位置に合わせて下さい。
- 脚もみ距離ボタンで、体型やお好みに合わせてマッサージの距離を調節して下さい。
- 15分でコースは終了します。

ローラー

全身
上半身
下半身

③ローラーマッサージボタン

- ボタンを押して、全身、上半身、下半身をお選びください。
- 指圧点調節表示ランプの調節中ランプが点滅している間に、肩位置ボタンで肩の位置に調節してください。調節しなくてもよい場合はそのままにしておきます。調節済ランプが点灯すると、ローラーマッサージが始まります。
- コース中に肩位置ボタンで背メカの位置、脚位置ボタンで脚メカの位置を調節できます。
- 15分でコースは終了します。

コース変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切りかえられます。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

メディカルコース → メディカルコース

メディカルコース実行中に他のメディカルコースボタンを押すと、もみ玉が一度調節した肩位置に戻り、肩位置の再調節をおこなってからコースが開始します。

メディカルコース → お好みコース

メディカルコース実行中にお好みコースのボタンを押すと、押した時点でメディカルコースは中断し、選択した動作が開始します。肩位置調節する動作を選択した場合は、肩位置の再調節をおこなってからコースが開始します。

お好みコース → メディカルコース

お好みコース中に他のメディカルコースボタンを押すと、メディカルコースに切りかえられます。

コースの途中終了

途中で終了する場合は、動作中に[入/切]ボタンを押してください。収納動作をおこなった後で停止します。

緊急時や動作中に異常を感じたときは、[急停止]ボタンを押してください。その場で動作が停止します。安全確認後、[入/切]ボタンを押してください。収納動作をおこなった後で停止します。



注意

- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し『製品に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。
→ 強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分や、背もたれと座面のすき間や可動部に手や足を入れないでください。
また、髪飾り、ネックレス、腕時計、ブレスレット、指輪などのかたい物をつけて使用しないでください。
- マッサージの使用は1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。
→ 長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。
1日当たりのマッサージは通算して30分程度を目安にしてください。

脚メカの調節



柔らかモードボタン

- メディカルコースとお好みコース中にお好みに合わせて脚メカのマッサージを弱めることができます。

脚もみ距離



脚もみ距離調節ボタン

- メディカルコースとお好みコース中に体型やお好みに合わせて脚メカの距離を変更することができます。
- ボタンを押すと、長め→普通→短めと変わります。（マッサージ開始時は普通に設定されています。）

Q ホットカーペットの上に椅子を置いてもいいですか？

A 火災のおそれがありますのでホットカーペットの上に置くのはおやめください。

椅子は重量物ですのでホットカーペットの発熱体を痛め、そこから発火するおそれがあります。

Q マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか？

A 次のことをおこなってみてください。

- 柔らかモードを選択する。(脚メカのみ)
- 枕を使う。

以上の方法でより弱くマッサージをおこなうことができます。

Q マッサージをより強くするにはどうすればいいですか？

A 次のことをおこなってみてください。

- 深く腰かけ背もたれに体重がかかるように座る。
- 枕をはずす。

以上の方法でより強くマッサージをおこなうことができます。

Q フローリングや床暖房の上に設置しても大丈夫ですか？

A 設置しても大丈夫です。

ただし、床を傷つけることがあるかもしれませんので、カーペットなどを敷き、その上に椅子を設置することをおすすめします。(畳等も同様です)

Q 誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか？

A 感電のおそれがあります。ただちに使用を中止し、次の内容にしたがってください。

- 本体左部の主電源スイッチを切る。
- 電源プラグをコンセントから抜く。

以上のことをおこなった上、お買い上げの販売店またはお近くのサービスセンターにご相談ください。

Q 1ヶ月の電気代はいくらですか？

A 1日15分、毎日ご使用いただいた場合、1ヶ月で約15円です。

27円/kwで計算した場合。ご契約地域や条件により変動する場合がございます。

(2020年9月現在 当社調べ)

Q 体重が重くても大丈夫ですか？

A 体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。

Q 身長が150cm未満の人や180cm以上の人でも使えますか？

A お使いいただけます。

肩位置調節の際に肩位置が合わない場合がありますので、以下の方法でご使用することをおすすめします。


- 身長の低い人…リクライニングを起こす。
- 身長の高い人…リクライニングを倒す。
- 指圧する位置の調節中に肩の位置を肩位置ボタンで調節する。

Q 座面位置の高さをより高くすることはできますか？


A 専用のチェアスタンド (別売り) をご使用ください。

専用のチェアスタンドを本体の下に取り付けることで約18cm底上げすることができます。

チェアスタンド(別売り)の取り付け方

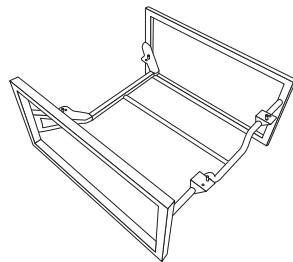

チェアスタンドのネジ穴とマッサージチェア本体の底面にある取り付け用穴をあわせ、付属の六角レンチを使用して、ネジで4箇所固定してください。取り付けの際、チェアスタンドのネジ穴とピンを間違えないように注意してください。固定後、全てのネジにゆるみがないか確認してください。確認後、リモコンをスタンドの枠をくぐらせます。このとき、リモコンケーブルが絡まないように注意してください。

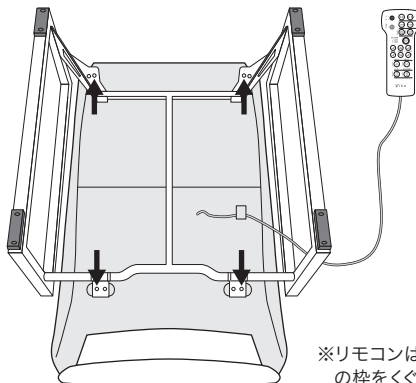

※リモコンは図のようにスタンドの枠をくぐらせてください。

故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）までご相談ください。

状態	原因と直し方	
左右のもみ玉の位置がずれている。	交互たたき機構を採用しているため、構造上発生するもので、故障ではありません。	構造上発生するもので異常ではありません。
もみ玉が上部へ移動して止まってしまった。	オートタイマー機能により、マッサージ終了時にもみ玉が体に干渉しないように上部または下部へ移動するようになっています。	
マッサージ中にもみ玉が途中で止まる。	もみ玉に必要以上の力が加わると、動きが止まることがあります。体を浮かせぎみにするか、リクライニングを軽く起こしてご使用ください。(特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。)	
マッサージ中にガタンと音がし、もみ玉に大きな振動が感じられる。	もみ玉が移動する際に、体や布地を乗り越えた位置から元の位置に戻る際の現象です。	点検後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。
リモコンの急停止ボタンとコースのボタンが点滅している。	本体左部の主電源スイッチを切り、5秒ほどしてから主電源スイッチを入れ直してください。	
リモコンのボタンを押しても正常に動作しない。または電源が入らない。	次の点検をおこなってください。 ①電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。 ②本体左部の主電源スイッチは入っていますか。 ③ボタンを2つ同時に押していませんか。	
電源コード、プラグが異常に熱い。	ただちに使用を中止してください。	
お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』までご相談ください。		

サービスマン以外の人は分解や修理はおこなわないでください。

【故障かな?と思ったら】

故障かな?と思ったら

動作時の音

構造上やむを得ず発生するもので、性能などに影響はありません。

動作中は下記のような作動音がします。

たたきを伴う動作時の音

ゴトゴト音
カタカタ音

もみ動作時のもみ玉と布のすれる音

キュッキュッ音
ギューギュー音

もみ玉の昇降、もみ動作時の音

ウィーン音
ゴロゴロ音
コトツ音

※上記の音について、性能等に影響はありません。

保管とお手入れの仕方

保管の仕方

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない場所に保管してください。
- ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本体の周辺にペットを近づけないようにしてください。



注意

- 直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。
- コード類はねじれをほどいて保管してください。

お手入れの仕方



注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

【背パッド・各カバーのお手入れ】

汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取ってください。



注意

- ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。

【リモコンのお手入れ】

リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。
絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。→故障の原因になります。

アフターサービスについて


1.保証書について

この製品の保証書は取扱説明書についております。保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。（修理の際、必要となります。）お買い上げ時の領収書またはお買い上げ証明書は本書にかならず貼り付け大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、この製品は日本国内専用ですので、日本国外でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外（業務用など）でご使用の場合は、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。


2.修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、18、19ページの「故障かな？と思ったら」をよくお読みください。
点検後、まだ異常がありましたらお買い上げの販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

- (1) お名前・ご住所・お電話番号
- (2) 販売名…この取扱説明書の21ページの仕様欄、または、リモコン裏面に貼ってある社銘板をご覧ください。
- (3) 製造番号…リモコン裏面に貼ってある社銘板をご覧ください。
- (4) お買い上げ日
- (5) 故障の状態（できるだけ詳しくお知らせください。）
- (例) リモコンのボタンが下図のように点滅している場合は、点滅しているコースの名称をお知らせください。

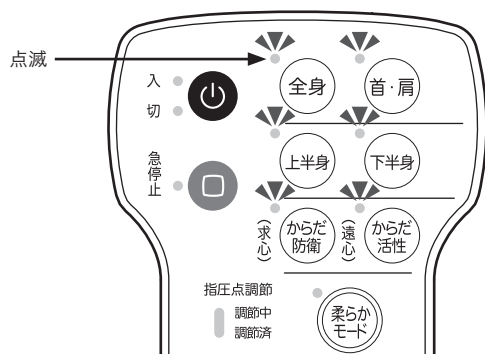

社銘板の位置

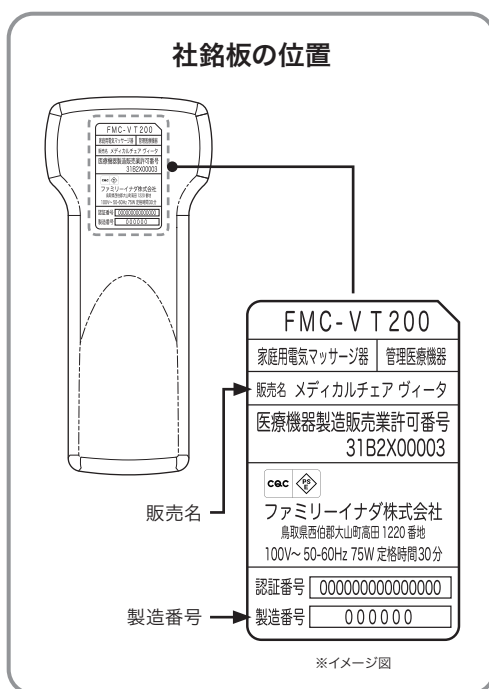

- 保証期間中は
修理の際、保証書をご提示ください。保証期間中でも有償になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間が過ぎている場合は
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有償で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
弊社はこの電気マッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。（ただし、縫製部品は除きます。）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 日本国外でご使用になられた場合、修理をお断りする場合があります。
- アフターサービスについてご不明な点は
お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』にお問い合わせください。
- 販売店にご依頼になれない場合は
『修理等に関するお問い合わせ窓口』にご連絡ください。

販売名	メディカルチェア ヴィータ
使用電源	AC100V
定格消費電力	75W
定格周波数	50-60Hz
定格時間	30分
電撃に対する保護の形式	クラス0Ⅰ機器
もみ速さ	背メカ最小約5回/分、最大約18回/分 脚メカ最小約5回/分、最大約24回/分
たたき速さ	最小約210回/分、最大約525回/分 (背メカのみ)
上下移動速さ	最小約1.4cm/秒、最大約4.0cm/秒
マッサージ範囲	背メカ約59cm 脚メカ約48cm
メディカルコース	6種類
お好みコース	3種類
オートタイマー	約15分 (メディカルコース時は異なります)
リクライニング角度	水平面に対して約115°～ 約169° 無段階 (電動リクライニング)
本体の寸法	幅約61cm×奥行約111 (138) cm×高さ約78 (35) cm 奥行・高さの () 内の数字は最大リクライニング時
重量	約26kg
外装布地	合成皮革
付属品	電源コード
包装	1梱包/1台
類別	機械器具 (77) バイブレーター
一般的名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000) 管理医療機器
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003
医療機器認証番号	302AKBZX00060000
製造販売元	ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地
製造元	ファミリーイナダ株式会社

安全のために商品の点検を

長期で使用の場合は商品の点検を

こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、動作しないときがある。
- 電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
- 自動的にタイマーが切れないときがある。
- その他の異常や故障がある。

左記のような症状があれば、故障や事故の防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店または、『修理等に関するお問い合わせ窓口』に点検をご依頼ください。

愛情点検



安全にお使いいただくために

本体布地（もみ布）は消耗品であり、耐用年数は3年です（使用条件：1日15分コースを2回、毎日使用した場合）。安全にお使いいただくために、お買い上げ後、耐用年数が過ぎる前にお買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』に定期点検をご依頼ください。

※ただし使用条件が上記と異なる場合には、耐用年数が変わります。

※お買い上げ後5年ほど経ちましたら、安全のために椅子全体の点検をおすすめします。

点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』にご相談ください。

〈キリトリ線〉

保証規定

- 保証期間内に万一発生した故障については修理料金を無償といたします。
 - 修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
 - お買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（0120-772-294）にご連絡ください。
 - ご転居の場合やご贈答品等で本保証書に記入のお買い上げ店で無償修理をお受けにできない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（0120-772-294）にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - (1) お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合
 - (2) 火災・天災・異常電圧等による故障・損傷の場合
 - (3) 機器を改造や修理された場合
 - (4) 取扱説明書に記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって発生した故障・損傷の場合
 - (5) 本保証書を提示されない場合
 - (6) 本保証書のお買い上げ店名、およびお買い上げ年月日の未記入あるいは字句を訂正された場合
 - (7) 一般家庭以外（業務用等）でご使用されていた場合
- 本保証書は日本国内において有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書の記載内容については『修理等に関するお問い合わせ窓口』（取扱説明書に記載）にご相談ください。

修理メモ

ファミリーイナダ株式会社

※This warranty is valid only in Japan

お客様相談窓口のご案内

- 製品に関するお問い合わせ窓口 ☎ 0120-129-011
- 修理等に関するお問い合わせ窓口 ☎ 0120-772-294

受付：土・日・祝を除く平日 9：00～17：00



一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員

ファミリーチャア株式会社

<https://www.family-chair.co.jp>

- 領収書またはお買い上げ証明書 貼付欄

〈キリトリ線〉

ファミリーチャア 保証書

品番	FMC-VT200		製造番号	
お客様	お名前 様			
	ご住所 -			
	電話 ()			
お買い上げ店名 住所・電話番号				
お買い上げ日			保証期間	1年間
			保証対象	本体

- 正常なご使用状態（取扱説明書に記載）で万一発生した故障については、お買い上げ日から上記の期間、裏面の保証規定により、その故障の修理料金を無償といたします。
- 本保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 製造番号は、かならずご記入ください。
- お買い上げ時の領収書またはお買い上げ証明書は、本書にかならず貼り付け、大切に保管してください。