



# i-CORON (アイコン) FIP-2224

家庭用

このたびは、i-CORONをお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。

この製品は、疲労の回復・改善を目的とした  
さまざまなマッサージがお楽しみいただけます。  
皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして  
末永くご愛用ください。



## もくじ

■ 安全上のご注意 .....	1
■ 運搬の仕方 .....	8
■ 各部の名称とはたらき .....	9
■ ご使用前に .....	11
■ リクライニングの調節・フットレストの使い方	13
■ 自動コースを使ってみよう .....	14
■ 手動コースを使ってみよう .....	16
■ BLUETOOTHスピーカー .....	18
■ 故障かな?と思ったら .....	19
■ 安全のために点検を .....	21
■ Q&A .....	22
■ お手入れと保管の仕方 .....	23
■ アフターサービスについて .....	24
■ 仕様 .....	25
■ 販売元・お問い合わせ窓口 裏表紙	

- ◎ ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◎ 「取扱説明書」は、いつでも見られるように大切に保管してください。
- ◎ この製品は、一般家庭用として設計されていますので、一般家庭以外（業務用など）で  
ご使用の場合は、お買い上げの販売店または販売元にご相談ください。

### マッサージチェアの使用目的又は効果効果

あんま、マッサージの代用。

- ・疲労の回復・血行の促進・筋肉の疲れをとる
- ・筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みをやわらげる

Massage  
+  
Medical



# 安全上のご注意

ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。  
この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。  
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。なお、各部の名称については9～10ページをご覧ください。

## 表示の種類

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害の発生が想定される場合。

## 図記号の種類と意味

	 記号は、禁止の行為であることを示しています。 (左図の場合は分解禁止)
	 記号は、行為を強制したり指示したりするものです。 (左図の場合は電源コードのプラグを抜く)

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

## ご使用場所の注意点

### **注意**

 <b>強制</b>	● 床面が水平な場所に置いて使用してください。 → 不安定な場所では本体が転倒し事故の原因になります。
---	--

### **警告**

 <b>禁止</b>	● 浴室やサウナ、湿度の高い場所では使用しないでください。 → 感電や故障の原因になります。
 <b>アース 取り付け</b>	● この製品は必ずアースを接続してください。 → 製品が故障、破損した場合の感電の危険を低減することができます。

## ご使用前の注意点

### 警告



禁止

- 次の人は使用しないでください。
  - ◎ 医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓（塞栓）症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症〔皮下組織の炎症を含む〕など。
  - ◎ 急性の頸椎ねんざ（むちうち症）の疑いのある人
- 電源は交流100V以外では使用しないでください。
  - 火災や感電の原因になります。
- 変圧器を用いて使用しないでください。
  - 故障や感電の原因になります。
- 電源コードや電源コードのプラグがいたんだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいときなどは使用しないでください。
  - 感電・ショート・発火の原因になります。



強制

- 次の人は、使用前に医師に相談してください。
  - ◎ 心臓に障害のある人
  - ◎ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
  - ◎ 骨粗しょう（鬆）症の人やせきつい（脊椎）の骨折、捻挫、肉離れなど、急性〔とう（疼）痛性〕疾患の人
  - ◎ 施療部位に創傷のある人
  - ◎ 体温38℃以上（有熱期）の人 例：急性炎症症状〔けん（倦）怠感、悪寒、血圧の変動など〕の強い時期。衰弱しているとき。
  - ◎ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
  - ◎ ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
  - ◎ 背骨（脊椎）に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人
  - ◎ かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人
  - ◎ 悪性のしゅよう（腫瘍）のある人
  - ◎ 安静を必要とする人 ◎ 内臓疾患などの急性症状のある人
  - ◎ 医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人
  - ◎ リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人
  - ◎ めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ◎ 捻挫、肉離れなどの炎症性の人
  - ◎ 腱鞘炎、またはそのおそれがある人
- マッサージの前には必ず本体の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源コードのプラグを抜き、お買い上げいただいた販売店又は販売元（裏表紙に記載）にご連絡ください。本体布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。
  - 布地が破れた状態で使用すると、事故やケガ・感電のおそれがあります。
- 特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。
- 使用しても、効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。
- お子様やペットが本体を使用して遊ばないようにしてください。

# つづき (安全上のご注意)

## ご使用前の注意点

### 注意



禁止

- この取扱説明書の使用法以外の使い方をしないでください。  
→体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。  
また、本体と他の治療器や電気毛布などを併用しないでください。
- 人をのせたまま移動しないでください。  
→本体の転倒により、事故やケガの原因になります。
- リクライニングを倒したまま座らないでください。  
→フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。  
また、本体の転倒により事故やケガの原因になります。
- 付属品以外のものを用いて本体を使用しないでください。



強制

- 電源コードのプラグをコンセントに差し込む前に電源スイッチ（主電源）が「OFF」になっていることを確認してください。  
→故障や感電の原因になります。
- 電源コードのプラグおよびコネクタは確実に最後まで差し込んでください。  
→感電やショート・発火の原因になります。
- ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。
- はじめは弱い刺激でマッサージしてください。  
→はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。  
特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- 安全のために、もみ玉の位置を確認し、収納位置にない場合は、電源スイッチ（主電源）を入れ、収納したことを確認してからゆっくり座ってください。
- フットレストの上にいる、立つ、座る等の行為はしないでください。  
→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。
- しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。

ご使用時の注意点

 警告



禁止

- 電源コードを本体に巻きつけたり、本体やフットレストで踏んだりしないでください。また、電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。  
→ コードが破損し、火災や感電の原因になります。
- 本体に水などをこぼさないでください。  
→ 感電やショート・発火の原因になります。
- ぬれた手で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。  
→ 感電や故障の原因になります。
- お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺(背もたれの後ろやフットレストの下など)で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせないでください。  
→ 事故やケガの原因になります。
- 本体に2人以上座ってのご使用はおやめください。特に小さなお子様(乳児など)を抱きかかえてのご使用はおやめください。  
→ 事故やケガの原因になります。
- 布地が破れた状態では使用せず、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください  
→ 事故やケガ・感電の原因になります。修理はお買い上げいただいた販売店又は販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。
- 髪飾り、ネックレス、腕時計、ベルト、プレスレット、指輪、付け爪などのかたい物をつけて使用しないでください。  
→ 事故やケガの原因になります。



強制

- マッサージコース開始前やリクライニングを倒すときや起こすときは、必ず周囲に人(特にお子様)やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろやフットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。  
→ 事故やケガの原因になります。
- 体や物がはさまれた場合、リクライニングボタンを押して安全な位置まで戻してください。
- 本体(特に電源コード)の隙間などに金属類(ヘアピン、針金)などを差し込まないでください。  
→ 感電やショート・発火の原因になります。
- ぬれた手で操作しないでください。
- USBポートにホコリ、ゴミが付着している状態でコネクタなどの取付けや機器に接続しないでください。
- USBケーブルのコネクタなどを逆向きや斜めに取付けしないでください。
- 充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- USBポートを指などで直接接触しないでください。
- USBポートに異常(煙・発煙・異臭・変形など)が発生した場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または『修理等に関するお問い合わせ窓口』(裏表紙に記載)までご相談ください。

# つつき (安全上のご注意)

## ご使用時の注意点

### 注意



- 素肌では使用しないでください。
- マッサージおよび椅子以外の用途に使用しないでください。  
→ 事故やケガの原因になります。
- もみ玉が上下する部分や、リクライニングなどの可動部に手を入れないでください。また、髪飾り、ネックレス、腕時計、ベルト、プレスレット、指輪、付け爪などのかたい物をつけて使用しないでください。ベルトなどのかたい物をつけて使用しないでください。  
→ ケガや故障の原因になります。
- 頭部、胸部、腹部、関節部（ひじ、ひざなど）には使用しないでください。  
→ 気分が悪くなったり、ケガの原因になります。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。  
→ 無理に入れようとすると、故障の原因になります。



- 緊急時や動作中に異常を感じたときは、[緊急停止] ボタンを押して、動作を停止させてください。
- 使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、直ちに使用を中止し医師に相談してください。
- はじめは弱い刺激でマッサージしてください。マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書に従い刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し『製品に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。  
→ はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガの恐れがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は 十分注意してマッサージしてください。強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- マッサージ中は眠らないように注意してください。  
→ ケガの原因になります。
- マッサージは、1日30分以内に行ってください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内に行ってください。  
→ 長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。
- 周囲に人(特にお子様)やペットがいないことを確認してご使用ください。  
→ 事故やケガの原因になります。
- USBポートを使用するときは、静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を取除くようにしてください。
- ホコリ、湿気の多いところでは、USBケーブルを長期間差しっぱなしにしないでください。
- USBケーブルのコネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。
- USBポートを使用中、多少発熱しますが故障ではありません。USBポートや接続対象機器が極端に熱くなったり、異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- USBポートの故障またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負いかねます。
- USBポートを使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。

## ご使用時の注意点

### ⚠ 注意

 <p>プラグを抜く</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止して電源スイッチ（主電源）を「OFF」にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。 → 停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。</li> <li>● 落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止して電源スイッチ（主電源）を「OFF」にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。</li> <li>● 動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して電源スイッチ（主電源）を「OFF」にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いて、お買い上げいただいた販売店又は販売元（裏表紙に記載）に点検・修理を依頼してください。 → 感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。</li> </ul>
---	---

## ご使用後や使用しない時の注意点

### ⚠ 注意

 <p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードは本体以外では使用しないでください。</li> <li>● 本体を使用後は、必ずリクライニングを完全に起こしてください。</li> <li>● 物を載せないでください。</li> </ul>
 <p>強制</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用後は必ず電源スイッチ（主電源）を「OFF」にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。 → お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。</li> <li>● 電源コードはねじれをほどいてから保管してください。 → 電源コードが劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。</li> </ul>
 <p>プラグを抜く</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードのプラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源コードのプラグを持って抜いてください。 → 感電やショートによる火災の原因になります。</li> <li>● お手入れの際は必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源コードのプラグの抜き差しをしないでください。</li> <li>● ご使用にならないときは、必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。 → ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。</li> </ul>

# つづき (安全上のご注意)

## その他のの注意点

 警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>● 本体の上に立たないでください。座部以外に座るなどして、上から強い衝撃を与えないでください。 → 転倒による事故やケガ、故障の原因になります。</li></ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>● 機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げいただいた販売店又は販売元（裏表紙に記載）に連絡してください。</li><li>● 電源コードが破損した場合、危険ですので電源コードの交換はお買い上げいただいた販売店又は販売元（裏表紙に記載）に依頼してください。</li><li>● 機器は改造しないでください。 → 火災や感電、ケガの原因になります。</li></ul>

 注意	
 強制	<ul style="list-style-type: none"><li>● 他の人に譲渡、貸与するときは、本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡してください。</li></ul>

## お願い

- 本体及び付属品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口で正しい廃棄方法をお問い合わせください。



# 運搬の仕方

リクライニングを倒した後、電源スイッチ（主電源）を「OFF」の状態にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いてから運んでください。

- 電源コードを本体に取りつけたまま移動しないでください。
- 重量物ですので搬入移動時に本体を落としたり、ケガ等しないよう、運搬用手袋を装着してください。
- 重量物ですので搬入移動時には腰等を痛めないようご注意ください。
- 床を傷つける恐れがありますので、マット等を敷いて移動してください。

## 2人で持ち上げて移動する場合

アームレストの下部を持ち移動する。

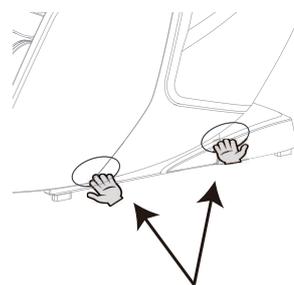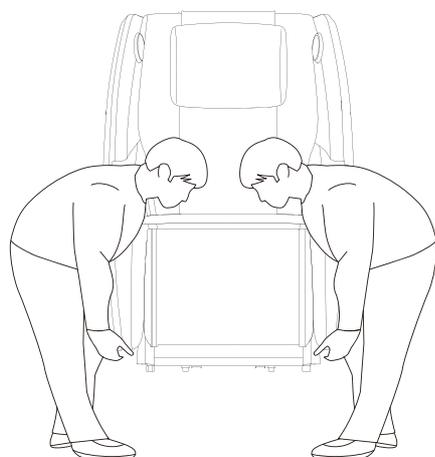


手の位置は、アームレストの下部のこちら

- 持ち上げて移動する場合は、必ず2人以上で運んでください。
- 座部やフットレストを持って運ばないでください。故障やケガの原因になります。

## キャスターで移動する場合

本体前面を持ち上げ、移動する

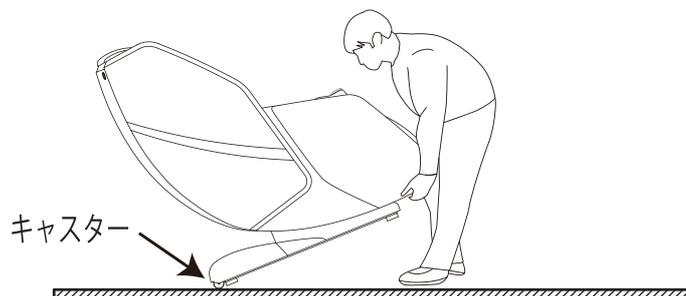

- 前面を浮かせる際は、重量があるので注意してください
- 引きずって移動しないでください。故障の原因になります。


### ⚠ 注意

- 人をのせたまま移動しないでください。
- 移動の際には足や電源コードなどはさまないように十分注意してください。
- キャスターで床を傷つけないように注意してください。


# 各部の名称とはたらき

## 本体


### 前側

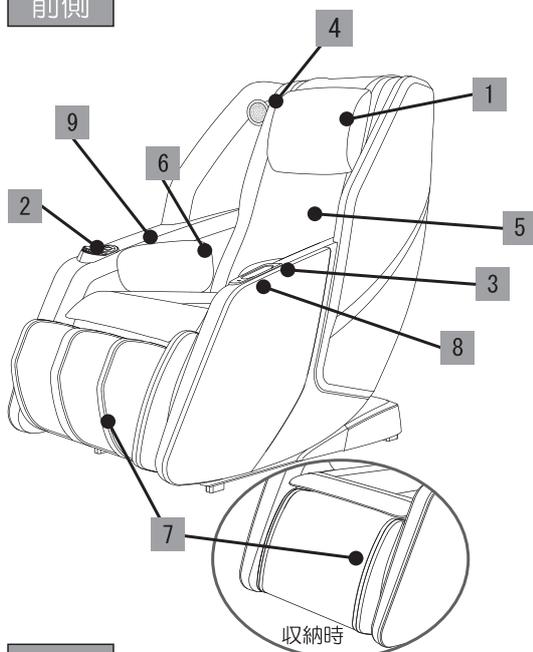

### 後側

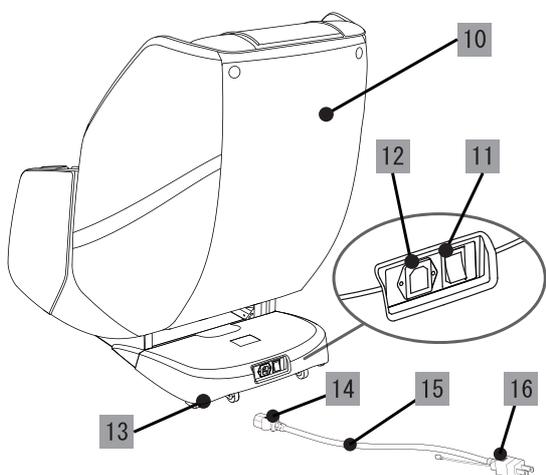

### マッサージ位置

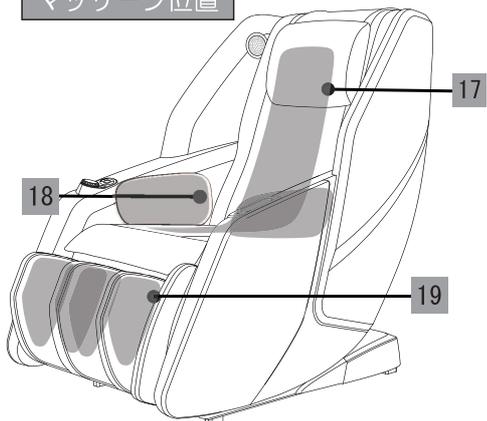

### 前側

- |   |   |
|---|---|
| 1 | 枕<br>マッサージをするときは後ろに回してください。                         |
| 2 | リモコン<br>本体の操作を行います。                                 |
| 3 | スマホポケット<br>スマートフォンを置きたい時にお使いください。                   |
| 4 | BLUETOOTHスピーカー<br>BLUETOOTH接続で音楽を聴くことができます。         |
| 5 | 背もたれ<br>この上にゆったりともたれてください。                          |
| 6 | エアセル<br>骨盤、もも横のエアーマッサージができます。                       |
| 7 | フットレスト<br>エアセルでふくらはぎのエアーマッサージができます。                 |
| 8 | USBポート (Type-C) ※端子保護キャップ付属<br>スマートフォン等の充電にお使いください。 |
| 9 | アームレスト  |


### 後側

- |    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 10 | バックカバー                             |
| 11 | 電源スイッチ (主電源)<br>ご使用後は「OFF」にしてください。 |
| 12 | インレット (電源コード差し込み口)                 |
| 13 | キャスター                              |
| 14 | 電源コネクタ                             |
| 15 | 電源コード                              |
| 16 | 電源プラグ                              |

### マッサージ位置

- |    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 17 | もみ玉のマッサージ範囲<br>首・肩～お尻までマッサージをします。  |
| 18 | 腰部のマッサージ範囲<br>骨盤、もも横のエアーマッサージをします。 |
| 19 | 脚部のマッサージ範囲<br>ふくらはぎのエアーマッサージをします。  |

## リモコン

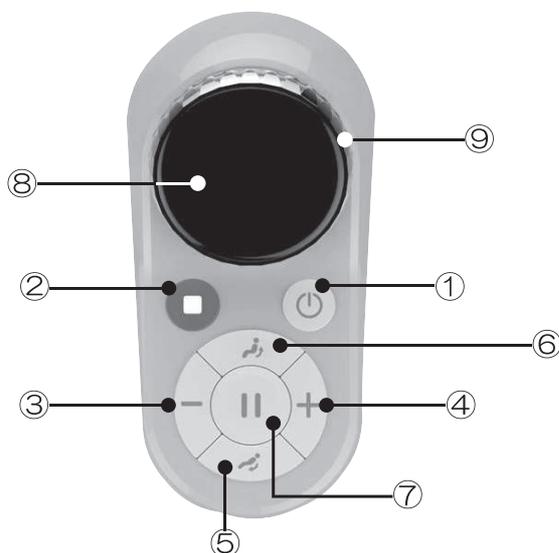

①	入/切ボタン	リモコンの電源の「ON」「OFF」を行います。動作中に押すと本体が初期位置に戻ってから停止します
②	緊急停止	緊急時や動作に異常を感じたときに押してください。その場で動作が停止します。
③	強さ・速さ調節	このボタンを押すと、腰部・フットレストのエアの強さ、 ならびにもみ玉のマッサージの速さを調整することができます。
④		
⑤	リクライニング	このボタンを押すと、リクライニングが倒れ・フットレストを上げることができます。
⑥		このボタンを押すと、リクライニングが上がり・フットレストを下げるすることができます。
⑦	一時停止	動作を一時停止したい場合に押してください。動作を停止し、初期位置に戻ります。
⑧	モニター	選択した操作設定がここに表示されます。モニターは決定ボタンとしても使用します。
⑨	ダイヤル	ダイヤルを左右に回すことにより各コースを選択できます。お好みのコースをモニターに表示させ、モニターを押すとコースが開始します。

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンに水などをこぼさないでください。</li> <li>●ぬれた手で操作しないでください。</li> </ul>
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンの上に座ったりしないでください。</li> <li>●先のとがったものやかたいものでボタンを押さないでください。 →破損の原因になります。</li> <li>●リモコンのモニターを強く押ししたり、必要以上に力を加えたりしないでください。 液晶が破損したり、ボタンを押し込み過ぎて故障するおそれがあります。</li> <li>●USBポートを長時間使用しないときは、USBケーブルを取外し、キャップを取り付けてください。</li> <li>●この製品にUSBケーブルは付属していません。 ご使用になる機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。</li> </ul>

# ご使用前に

冷えきった室内の温度を上げて使用するとき、室温を急に上げず、徐々に上げてください。本体を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1時間ほど待ってから使用してください。

→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。


## 設置場所について

リクライニングをしたときに壁や物に当たらないように、本体後ろのスペースは約30cm以上あけ、本体前は約15cm以上のスペースを確保してください。

### ⚠注意

- 浴室やサウナなど、湿度の高い場所では使用しないでください。
- 床面の水平な場所に置いて使用してください。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。
- タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。
- エアコンの風が直接当たる場所では使用しないでください。

- 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。(ホットカーペットは敷かないでください。)
- 重量物ですので、下ろすとき床面を傷つけないように注意してください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。
- 体重100kgの人が座った状態で1cmあたり約3.2kgの荷重がかかります。

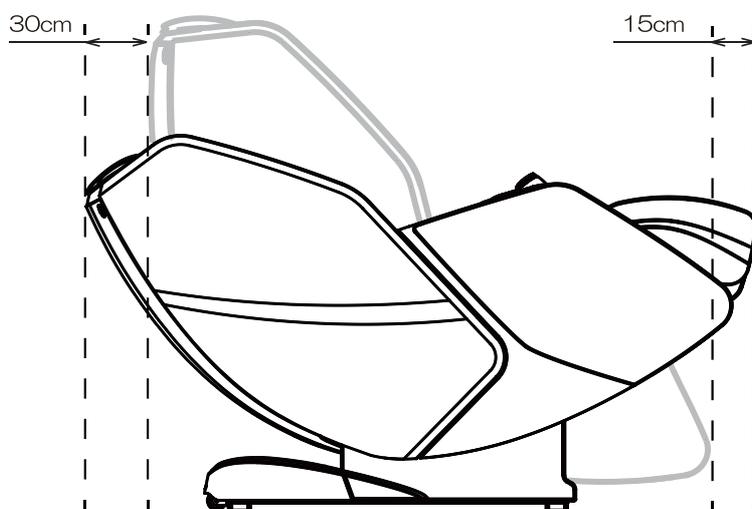

※フットレスト使用状態


## 同梱物の確認

梱包箱には本体のほか、同梱物が入っていることを確認してください。

本体	同梱物		
	取扱説明書	電源コード	端子保護キャップ

## 主電源の入れ方

- ① 電源コネクタをインレットに差し込みます。

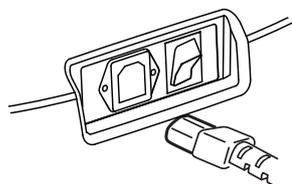


- ② 電源コードのプラグから出ているアース線を、電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。電源コンセントにアース端子がない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ③ 電源コードのプラグを正しく電源コンセントに差し込みます。



- ④ 本体後部の電源スイッチ（主電源）を「ON」にします。

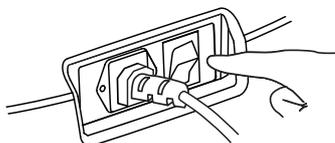

- ⑤ リモコン（モニター下部）の入／切ボタンをモニターが点灯するまで押してください。



 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 変圧器を用いて使用しないでください。故障や感電の原因になります。</li><li>● 日本国内以外では使用しないでください。故障や感電の原因になります。</li></ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源コードのプラグを電源コンセントに差し込む前に、電源スイッチ（主電源）が「OFF」になっていることを確認してください。</li><li>● 電源コードのプラグは確実に最後まで差し込んでください。ご使用の際にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。</li></ul>


# リクライニングの調節・フットレストの使い方

マッサージを行わず、リクライニングチェアとしてご利用いただけます。

- ご使用後はリモコンの電源を「切」にしてください。  
※30分間入力がない場合、自動的に電源が切れます。

## リクライニングの使い方

リモコンのモニター下にあるボタンを押すと、背もたれのリクライニングとフットレストの角度を調整できます。マッサージ中でも、角度の調整が可能です。ボタンをおよそ2秒間長押しするとリクライニングの上昇（下降）動作を最大まで動作後、自動で停止します。途中で止める時は再度ボタンを押してください。

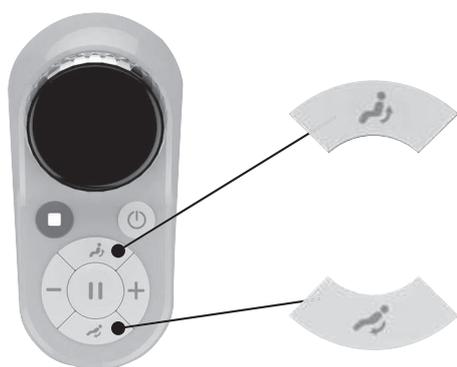

- リクライニングを起こす場合  
上側のボタンを押すことで  
背もたれが起き上がり、  
フットレストを下げることができます。


- リクライニングを倒す場合  
下側のボタンを押すことで  
背もたれが下がり、  
フットレストを上げることができます。

### 【注意】

マッサージ中にリクライニングを行う際は、マッサージの強さを確認しながら、ゆっくりとリクライニングを倒してください。  
製品の安全動作のため、リクライニングの動作が始まるまでに時間がかかる場合があります。

## フットレストの使い方

フットレストを回転させて、使用状態/収納状態の切替が可能です。  
お好みで切り替えてご使用ください。

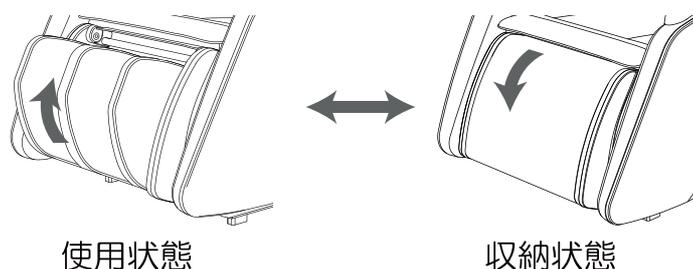

- ふくらはぎのマッサージが不要なときは、フットレストを収納した状態でもご利用いただけます。フットレストを収納していても、背中など上半身のマッサージや骨盤のエアーマッサージは通常どおり作動します。

警告	●マッサージコース開始前やリクライニングを倒すときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろやフットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。
注意	●リクライニングした状態で、無理に乗り降りしないでください。

# 自動コースを使ってみよう

リモコンのダイヤルを左右に回し、モニターに「自動コース」が表示されたら、モニターを押してください。  
疲労回復などを目的とした6種類のコースを用意しています。  
各コースボタンでお好みのコースを選ぶことにより、あらかじめ設定されたメニューにもとづいてマッサージを行います。

## コースの種類と特徴


	<b>疲労回復</b>	全身の疲労回復を目的としたコースです。 首の付け根からお尻まで全身の指圧点をほぐします。
	<b>骨盤</b>	骨盤を中心に、左右から包み込むように圧迫と解放を行い、骨盤まわりを刺激します。
	<b>首肩</b>	首の周囲や、肩周りを集中的にマッサージするコースです。首周りをスッキリさせたい方におすすめです。
	<b>腰おしり</b>	腰とお尻まわりを集中的にほぐし、こりや張りをやわらげます。長時間の座り姿勢で疲れた方におすすめです。
	<b>おはよう</b>	身体の末端から心臓へ血行を促進することで、疲労回復効果をもたらし、全身をリフレッシュします。
	<b>おやすみ</b>	心臓から身体の末端へ向けて血行を促進し、末端まで血液を巡らせ、リラックスさせます。

## 操作方法

- ①入/切ボタンをモニターが点灯するまで押します。  
※30分間入力がない場合、自動的に電源が切れます。
- ②リモコンのダイヤルを左右に回して「自動コース」を表示させ、モニターを押すと各コースの一覧が表示されます。お好みのコースをモニターに表示させた状態で、再度モニターを押すとコースが開始します。  
※コースを選択せずにしばらく操作しない場合は、「自動コース」のトップ画面に自動的に戻ります。
- ③リクライニング動作が始まり、マッサージに最適な角度になるまで動きます。  
その後、背中のもみ玉が昇降を開始し、指圧点の検索を行います。  
「肩位置調整」の表示中に、ダイヤルを回すと肩位置の調節ができます。  
【お願い】枕を後方にまわし、深く腰かけて楽な姿勢でお座りください。  
体が浮いていると正確に指圧点を検索できません。
- ④指圧点の検索が完了すると、コースが始まります。  
マッサージ動作中はエアーの強さ調節ができます。



### マッサージの強さ調節

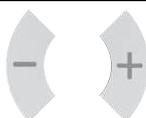

リモコンの「+」「-」を押すとエアーの強さが5段階で調節できます。ボタンを押すたびに切り替わります。  
(初期設定は2)

- ⑤コースが終了します。  
背中のもみ玉が初期位置まで戻りリクライニングが起き上がり、電源切れます。  
再度お好みの動作をおこないたい場合は①からの手順を繰り返してください。

# つづき（自動コースを使ってみよう）

## コースの変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切りかえられます。ただし、コースの途中でも、連続使用で30分経つとマッサージは終了するようになっています。

### 自動コース → 自動コース

自動コース実行中にダイヤルを回し「もどる」を選択して他のコースを選択すると、押した時点で実行中のコースは中断し、選択した自動コースが開始されます。

### 自動コース → 手動コース

自動コース実行中にダイヤルを回し「もどる」を選択して他のコースを選択すると、押した時点で実行中のコースは中断し、選択した手動コースが開始されます。※リクライニングは倒れたままです。

## 一時停止

一時停止ボタンを押すと、マッサージチェアは直ちに動作を停止し、モニターに「一時停止マーク 」が表示されます。リクライニング動作により、自動的に初期の位置まで戻ります。再度一時停止ボタンを押すと、一時停止ボタンを押す前の動作が再開されます。

## コースの途中終了

途中で終了する場合は、動作中に入/切ボタンを押してください。  
収納動作をおこなった後で停止します。  
緊急時や動作中に異常を感じたときは、緊急停止ボタンを押してください。  
その場で動作が停止します。  
安全確認後、入/切ボタンを押してください。  
収納動作を行なった後で停止します。  
ご使用前には後ろに人や障害物がないことを確認して下さい。  
また使用中に人が近づかないようご注意ください。



- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしがたい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。  
→ 強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分やリクライニング等の可動部に手や足を入れないでください。また、髪飾り、ネックレス、腕時計、ベルト、プレスレット、指輪、付け爪などのかたい物をつけて使用しないでください。  
→ 事故やケガの原因になります。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。
- マッサージの使用は1日30分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。  
→ 長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。

# 手動コースを使ってみよう

リモコンのダイヤルを左右に回し、モニターに「手動コース」が表示されたら、モニターを押してください。

動作に応じた4種類のコースを用意しています。

各コースボタンでお好みのコースを選ぶことにより、あらかじめ設定されたメニューにもとづいてマッサージを行います。

## コースの種類と特徴



もみ

しっかりとしたもみ動作で筋肉の深部までコリをほぐすコースです。

たたき

リズムカルなたたき刺激で、こわばった筋肉をほぐし、血行を促すコースです。

もみ・たたき

もみとたたきを組み合わせ、全身を効果的にほぐすコースです。

エア


エアセルのやわらかな圧迫と開放で、全身を包み込むようにリラックスさせるコースです。

## 操作方法

- ①入/切ボタンをモニターが点灯するまで押します。  
※30分間入力がない場合、自動的に電源が切れます。
- ②リモコンのダイヤルを左右に回して「手動コース」を表示させ、モニターを押すと各コースの一覧が表示されます。  
「もみ」「たたき」「もみ・たたき」コースは「全身」「上半身」「下半身」と施術部位が選択できます。  
お好みのコースをモニターに表示させた状態で、再度モニターを押すとコースが開始します。  
※コースを選択せずにしばらく操作しない場合は、「手動コース」のトップ画面に自動的に戻ります。
- ③コースが始まります。  
マッサージ動作中は強さ調節ができます。



## マッサージの強さ調節

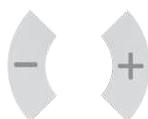

リモコンの「+」「-」を押すとエアの強さ、もみ玉のマッサージの速さ<sup>※</sup>が5段階で調節できます。ボタンを押すたびに切り替わります。(初期設定は2)  
※もみ玉のマッサージの速さは「もみ」「たたき」「もみたたき」コース使用時のみ

- ⑤コースが終了します。  
背中のもみ玉が初期位置まで戻りリクライニングが起き上がり、電源が切れます。  
再度お好みの動作をおこないたい場合は①からの手順を繰り返してください。

# つづき（手動コースを使ってみよう）

## コースの変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切りかえられます。ただし、コースの途中でも、連続使用で30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

### 手動コース → 手動コース

手動コース実行中にダイヤルを回し「もどる」を選択して他のコースを選択すると、押した時点で実行中のコースは中断し、選択した手動コースが開始されます。

### 手動コース → 自動コース

自動コース実行中にダイヤルを回し「もどる」を選択して他のコースを選択すると、押した時点で先の手動コースは中断し、肩位置の再確認を行ってから選択した自動コースが開始されます。

## 一時停止

一時停止ボタンを押すと、マッサージチェアは直ちに動作を停止し、モニターに「一時停止マーク ㊦」が表示されます。リクライニング動作により、自動的に初期の位置まで戻ります。再度一時停止ボタンを押すと、一時停止ボタンを押す前の動作が再開されます。

## コースの途中終了


途中で終了する場合は、動作中に入/切ボタンを押してください。  
収納動作をおこなった後で停止します。  
緊急時や動作中に異常を感じたときは、緊急停止ボタンを押してください。  
その場で動作が停止します。  
安全確認後、入/切ボタンを押してください。  
収納動作を行なった後で停止します。  
ご使用前には後ろに人や障害物がないことを確認して下さい。  
また使用中に人が近づかないようご注意ください。



- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。  
→ 強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分やリクライニング等の可動部に手や足を入れないでください。また、髪飾り、ネックレス、腕時計、ベルト、プレスレット、指輪、付け爪などのかたい物をつけて使用しないでください。  
→ 事故やケガの原因になります。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。
- マッサージの使用は1日30分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。  
→ 長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。

# BLUETOOTHスピーカー

BLUETOOTHスピーカーに接続して音楽を楽しむことができます。音楽再生機器の用途に合わせて接続してください。スピーカーは枕の横（サイド）に内蔵されており電池交換や充電をすることなくマッサージチェアから電源を供給します。

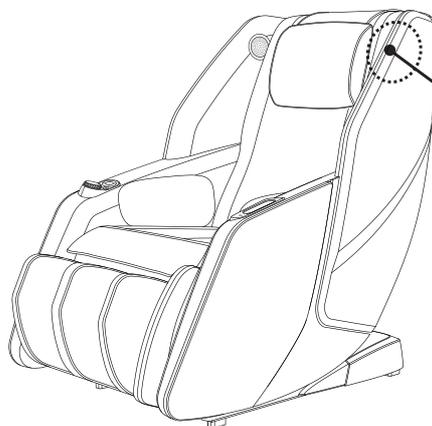

スピーカー設置位置

## 初回の接続の仕方

ペアリング操作が必要です。ペアリングが正常に完了すれば、2回目以降は自動的に接続されます。接続機器情報は1台分のみマッサージチェアに保存されます。

※複数の機器を同時に接続することはできません。

①入/切ボタンをモニターが点灯するまで押します。

30分間入力がない場合、自動的に電源が切れます。

②音楽再生機器を準備します。

音楽再生機器の電源を入れ、BLUETOOTH設定画面を表示します。

③音楽再生機器を接続します。

音楽再生機器上に「i-CORON」が表示されたら選択します。

※ご使用の機器によっては、表示内容が異なる場合があります。

その場合は、同様の内容が表示された項目を選択してください。

### 【注意】

本スピーカーでは音量調整ができませんので、過大な音量での再生を避けるため、あらかじめ音楽再生機器の音量を下げてください。

## 2回目以降の接続の仕方

ペアリング操作をすることなく、自動的に接続されます。

※複数機器を同時に接続することはできません。

別の機器を接続する場合は、上記の初回の接続の仕方の順序で接続してください。

## 接続状態のリセット

自動接続させたくない場合は、お使いの音楽再生機器の使用手順に沿って接続を解除してください。




注意

- ご使用の際は、必ず事前に音楽再生機器の説明書をご覧ください。
- 万一、音楽再生機器のメモリーなどが消失しても、当社は一切責任を負いません。
- 接続する際は、必ず音楽再生機器の音量を下げてください。
- 本体の近くに電子機器や発信機（携帯電話など）があると本体にノイズが入る場合があります。その場合は距離を取ってご使用ください。
- テレビやラジオのアンテナ付近で使用すると、テレビやラジオにノイズが入る場合があります。その場合は距離を取ってご使用ください。

# 故障かな?と思ったら

## 構造の状態

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため、ただちに使用を中止し、電源コードのプラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または販売元(裏表紙に記載)までご相談ください。

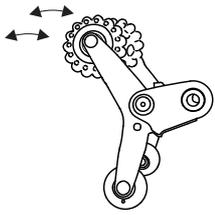状態	原因と直し方	構造上発生するもので、故障ではありません。
メカの左右のもみ玉の位置がずれている。	交互たたき機構を採用しているため、構造上発生するもので、故障ではありません。 	
もみ玉が肩部へ移動して止まってしまった。	オートタイマー機能により、マッサージ終了時にメカが体に干渉しないように肩部へ移動するようになっています。	
もみ動作をしているとき、もみ玉がスキップすることがある。	本体後部の主電源スイッチを「OFF」にし、5秒ほどしてから主電源スイッチを入れ直してください。	
マッサージ中にもみ玉が途中で止まる。	もみ玉に必要以上の力が加わると、動きが止まる場合があります。体を浮かせぎみにするか、リクライニングを軽く起こしてご使用ください。(特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。)	点検後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。
自動指圧点検索がうまくいかない。(もみ玉が肩の高さに合っていない。)	枕を後方にまわし、深く腰かけて楽な姿勢でお座りください。指圧点検索直後にダイヤルで肩位置を調節できます。	
リモコンのボタンを押しても正常に動作しない。または電源が入らない。	次の点検を行ってください。 ①電源コードのプラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。 ②本体後部の主電源スイッチは「ON」になっていますか。 ③2つ以上のボタンを同時に押しいませんか。	
電源コード、プラグが異常に熱い。	ただちに使用を中止してください。	

- サービスマン以外の方は分解や修理は行わないでください。
- お買い上げの販売店、または販売元(裏表紙に記載)までご相談ください。

## 動作音について

動作中は以下のような作動音がしますが、性能等に影響はありません。

動作時の音

動作中は下記のような作動音がします。

たたきを伴う動作時の音	ゴトゴト音
もみ動作時のもみ玉と布のすれる音	キュッキュッ音 ギュウギュウ音
もみ玉の昇降、もみ動作時の音	ウィーン音
エアーマッサージ中の音	コツコツ音・パリパリ音
エアポンプの音	ブーン音
エアの排気音	シュー音
リクライニング昇降時の音	ウィーン音

ゴトゴト音  
キュッキュッ音  
ギュウギュウ音  
ウィーン音

コツコツ音  
パリパリ音  
シュー音  
ブーン音  
ウィーン音

ゴトゴト音  
キュッキュッ音  
ギュウギュウ音  
ウィーン音

シュー音  
ブーン音  
ウィーン音

コツコツ音  
パリパリ音  
シュー音  
ブーン音  
ウィーン音

# 安全のために点検を

## 長期ご使用の場合は商品の点検を

### こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、動作しないときがある。
- 電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
- 電源コードや電源コードのプラグが異常に熱くなる。
- コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
- 自動的にタイマーが切れないときがある。
- その他の異常や故障がある。

左記のような症状があれば、故障や事故の防止のため使用を中止し、電源コードのプラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店または、販売元(裏表紙に記載)に点検をご依頼ください。



### 安全にお使いいただくために

施療部の布地は消耗品であり、耐用年数は1年です。

※使用条件：1日60分、毎日使用した場合

安全にお使いいただくために、お買い上げ後、耐用年数が過ぎる前に

お買い上げの販売店、または販売元(裏表紙に記載)での定期点検をおすすめします。

ただし使用条件が上記と異なる場合には、耐用年数が変わります。

お買い上げ後5年ほど経ちましたら、安全のために椅子全体の点検をおすすめします。

点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、

または販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。

# Q&A

**Q** ホットカーペットの上に椅子を置いてもいいですか？

**A** 火災のおそれがありますのでホットカーペットの上に置くのはおやめください。  
椅子は重量物ですのでホットカーペットの発熱体を傷め、そこから発火するおそれがあります。

**Q** フローリングや床暖房の上に設置しても大丈夫ですか？

**A** 設置しても大丈夫です。  
ただし、床をきずつけることがあるかもしれませんので、カーペットなどを敷き、その上に本体を設置することをお勧めします。(畳等も同様です)

**Q** マッサージをより強くするにはどうすればいいですか？

**A** 次のことを行なってみてください。  
●深く腰かけ背もたれに体重がかかるように座る。  
●強さ調節ボタンで強さを強くする(最大で5)。  
以上の方法でより強くマッサージを行う事ができます。

**Q** マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか？

**A** 次のことを行なってみてください。  
●背もたれを起こす  
●強さ調節ボタンで強さを弱くする(最小で1)。  
以上の方法でより弱くマッサージを行う事ができます。

**Q** 誤って水をかけてしまったらどうすればいいですか？

**A** 感電のおそれがあります。  
ただちに使用を中止し、次の内容に従ってください。  
●電源スイッチ(主電源)を「OFF」にする。  
●電源コードのプラグをコンセントから抜く。  
以上のことを行った上、お買い上げの販売店または販売元にご相談ください。

**Q** コースが終了したときにリクライニングは自動で動きますか？

**A** コース終了時は自動でリクライニング起き上がります。

**Q** 身長が150cm未満の人や180cm以上の人でも使えますか？

**A** お使いいただけます。

**Q** 体重が重くても大丈夫ですか？

**A** 体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。

**Q** 1ヶ月の電気代はいくらですか？

**A** 1日30分、毎日ご使用いただいた場合、1ヶ月で約22円です。  
(2025年12月当社調べ)

# お手入れと保管の仕方

## お手入れの仕方



注意

- お手入れの際は必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源コードのプラグの抜き差しをしないでください。

### 【縫製品のお手入れ】

汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取ってください。




注意

- ビニールや室内の壁紙等に本体を長時間接触させると、変色の原因となります。

### 【プラスチックのお手入れ】

少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

- アルコール、その他の溶剤やみがき粉などでのお手入れは傷、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

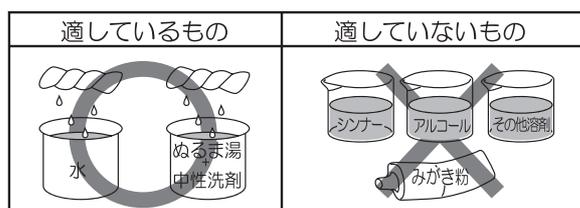

### 【USBポート・リモコンのお手入れのお手入れ】

USBポートを使用しないときには、付属のキャップを取り付けてください。リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

- 絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。  
→故障の原因となります。

## 保管の仕方

- ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。また、次にお使いになるためのためにお手入れし付属品とともに湿気の少ないところに保管してください。
- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本体の周辺にペットを近づけないようにしてください。



注意

- 直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書について


この製品の保証書について、お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店もしくは販売元からお受け取りください。保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。（修理の際、必要となります。）保証期間は、保証書内に記載されています。

ただし、この製品は日本国内専用ですので、外国でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外でご使用の場合は、保証期間中でも有料修理とさせていただきます。

## 2. 修理を依頼される時

修理を依頼される前に、19-20ページの「故障かな？と思ったら」をよくお読みください。点検後、まだ異常がありましたらお買い上げの販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

- 1) お名前・ご住所・お電話番号
- 2) 販売名・型番…電源スイッチ（主電源）の近くに貼ってある社銘板をご覧ください。
- 3) 製造番号…電源スイッチ（主電源）の近くに貼ってある社銘板をご覧ください。
- 4) お買い上げ日
- 5) 故障の状態（できるだけ詳しくお知らせください。）

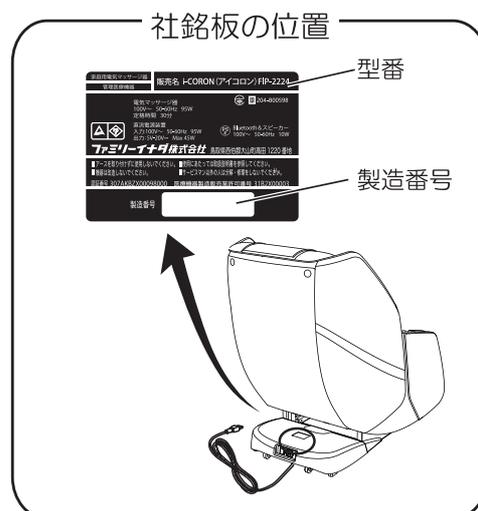

- **保証期間中は**  
修理の際、保証書をご提示ください。保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。
- **保証期間が過ぎている場合は**  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- **販売店にご依頼にできない場合は**  
「修理等に関するお問い合わせ窓口」（裏表紙に記載）にご連絡ください。
- **補修用性能部品の最低保有期間**  
弊社はこの電気マッサーの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しております。  
（ただし、縫製部品は除きます。）  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- **アフターサービスについてご不明な点は**  
お買い上げいただいた販売店又は販売元（裏表紙に記載）にお問い合わせください。
- **日本国外でご使用になられた場合、修理をお断りする場合があります。**

# 仕様

販売名	i-CORON (アイコロン) FIP-2224
使用電源	AC100V
定格消費電力	95W
定格周波数	50-60Hz
定格時間	30分
類別	機械器具 (77) バイブレーター
一般的名称等	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000) 管理医療機器
医療機器認証番号	307AKBZX00098000
USB充電定格出力	DC 5V-20V / MAX 45W
USBポート数	USB typeCポート×1ポート
もみ速さ	最小18回/分、最大28回/分
たたき速さ	最小230回/分、最大392回/分
もみ玉上下移動速さ	5.5 cm/秒
マッサージ範囲	88 cm
エア圧力	約75kPa
自動コース	6種類
手動コース	4種類
リクライニング角度	水平面に対して約 122~153° 無段階(電動リクライニング)
本体の寸法	幅約71cm×奥行約112(147)cm×高さ約101(80)cm 奥行・高さの( )内の数字は背もたれを倒した状態の寸法
質量	約59kg
外装布地	合成皮革
付属品	電源コード・端子保護キャップ
包装	1梱包/1台
製造販売元	ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地

〈キリトリ線〉

## 保証規定

- 保証期間内に万一発生した故障については修理料金を無償といたします。
  - 修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
  - お買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(0120-772-294)にご連絡ください。
  - ご転居の場合やご贈答品等で本保証書に記入のお買い上げ店で無償修理をお受けになれない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(0120-772-294)にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
  - (1) お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合
  - (2) 火災・天災・異常電圧等による故障・損傷の場合
  - (3) 機器を改造や修理された場合
  - (4) 取扱説明書に記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって発生した故障・損傷の場合
  - (5) 本保証書を提示されない場合
  - (6) 本保証書のお買い上げ店名、およびお買い上げ年月日の未記入あるいは字句を訂正された場合
  - (7) 一般家庭以外(業務用等)でご使用されていた場合
- 本保証書は日本国内において有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書の記載内容については『修理等に関するお問い合わせ窓口』(取扱説明書に記載)にご相談ください。

修理メモ

ファミリーイナダ株式会社

※This warranty is valid only in Japan

お客様相談窓口のご案内

- 製品に関するお問い合わせ窓口

 0120-129-011

- 修理等に関するお問い合わせ窓口

 0120-772-294

受付：土・日・祝を除く  
平日 9：00～17：00（12：00～13：00除く）

〈キリトリ線〉

**ファミリーチャア** 保証書

品番	FIP-2224		製造番号	
お客様	お名前 様			
	ご住所 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
	電話 ( )			
お買い上げ店名 住所・電話番号				
お買い上げ日	保証期間		1年間	
	保証対象		本体	

- 正常なご使用状態（取扱説明書に記載）で万一発生した故障については、お買い上げ日から上記の期間、裏面の保証規定により、その故障の修理料金を無償といたします。
- 本保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 製造番号は、かならずご記入ください。
- お買い上げ時の領収書またはお買い上げ証明書は、本書にかならず貼り付け、大切に保管してください。