


MEDICALCHAIR

i-FiT Pro

品番

メディカルチェア FIP-3206J

このたびは、メディカルチェアi-FiT Proをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この製品は、疲労の回復・改善を目的とした
さまざまなマッサージがお楽しみいただけます。
皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして
末永くご愛用ください。

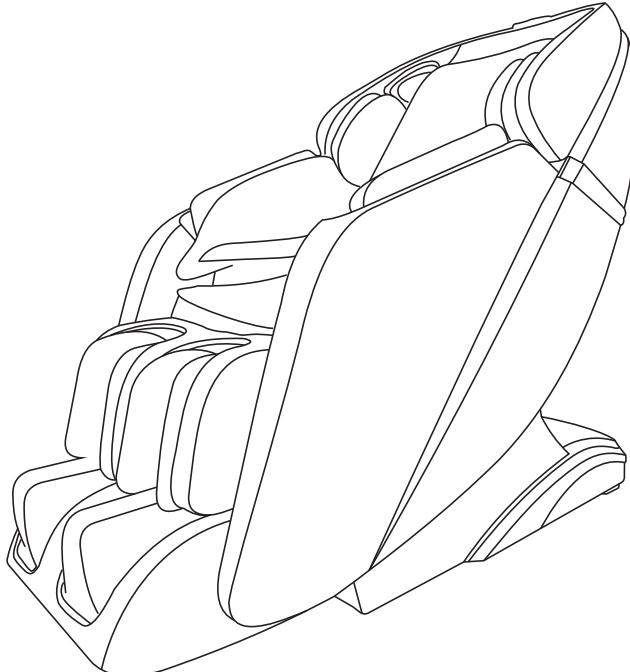

取扱説明書

添付文書

家庭用

もくじ

■ 安全上のご注意	1
■ 各部の名称とはたらき	8
■ ご使用の前に	11
■ 椅子の調節	16
■ 自動コース	17
■ 手動コース	21
■ BLUETOOTHスピーカー	23
■ 故障かな?と思ったら	24
■ 安全のために点検を	26
■ Q&A	27
■ お手入れと保管の仕方	28
■ アフターサービスについて	29
■ 仕様	30
■ 販売元・お問い合わせ窓口	裏表紙

- ◎ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◎「取扱説明書」は、いつでも見られるように大切に保管してください。
- ◎この製品は、一般家庭用として設計されていますので、一般家庭以外（業務用など）
でご使用の場合は、お買い上げの販売店または販売元にご相談ください。

マッサージチェアの使用目的又は効能効果

あんま、マッサージの代用。

- ・疲労の回復・血行の促進・筋肉の疲れをとる
- ・筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みをやわらげる

安全上のご注意

ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。なお、各部の名称については8~9ページをご覧ください。

表示の種類

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。

図記号の種類と意味

	記号は、禁止の行為であることを示しています。 (左図の場合は分解禁止)
	記号は、行為を強制したり指示したりするものです。 (左図の場合は電源コードのプラグを抜く)

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

ご使用場所の注意点

 注意	
 強制	<ul style="list-style-type: none">床面が水平な場所に置いて使用してください。 →不安定な場所では本体が転倒し事故の原因になります。

 警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none">浴室やサウナ、湿度の高い場所では使用しないでください。 →感電や故障の原因になります。
 アース取り付け	<ul style="list-style-type: none">この製品は必ずアースを接続してください。 →製品が故障、破損した場合の感電の危険を低減することができます。

ご使用前の注意点



警告



禁止

- 次の人は使用しないでください。
 - ◎医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。
 - ◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人
- 電源は交流100V以外では使用しないでください。
→火災や感電の原因になります。
- 変圧器を用いて使用しないでください。
→故障や感電の原因になります。
- 電源コードや電源コードのプラグがいたんだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいときなどは使用しないでください。
→感電・ショート・発火の原因になります。



強制

- 次の人は、使用前に医師に相談してください。
 - ◎心臓に障害のある人 ◎施療部位に創傷のある人
 - ◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - ◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
 - ◎体温38°C以上(有熱期)の人 例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期。衰弱しているとき。
 - ◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人
 - ◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
 - ◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人
 - ◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人
 - ◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人
 - ◎安静を必要とする人 ◎内臓疾患などの急性症状のある人
 - ◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人
 - ◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人
 - ◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人
 - ◎腱鞘炎、またはそのおそれがある人
 - ◎温度感覚喪失が認められる人【ヒーター搭載機種のみ】
- マッサージの前には必ず本体の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源コードのプラグを抜き、販売元(裏表紙に記載)にご連絡ください。
本体布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。
→布地が破れた状態で使用すると、事故やケガ・感電のおそれがあります。
- 特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。
- 使用しても、効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。
- お子様やペットが本機を使用して遊ばないようにしてください。
- 低温やけどの恐れがありますので、使用時間を厳守してください。

安全上のご注意

ご使用前の注意点

⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">●この取扱説明書の使用法以外の使い方をしないでください。 また、本機と他の治療器や電気毛布などを併用しないでください。 →体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。●人をのせたまま移動しないでください。 →本体の転倒により、事故やケガの原因になります。●リクライニングを倒したまま椅子に座らないでください。 →フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。 また、本体の転倒により事故やケガの原因になります。●付属品以外のものを用いて本機を使用しないでください。
 強制	<ul style="list-style-type: none">●電源コードのプラグをコンセントに差し込む前に主電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。 →故障や感電の原因になります。●電源コードのプラグおよびコネクタは確実に最後まで差し込んでください。 →感電やショート・発火の原因になります。●ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。●はじめは弱い刺激でマッサージしてください。 →はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。●安全のために、メカの位置を確認し、収納位置にない場合は、主電源スイッチを入れ、収納したことを確認してからゆっくり座ってください。●フットレストの上にのる、立つ、座る等の行為はしないでください。 →転倒による事故やケガ、故障の原因になります。●しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。

ご使用時の注意点



警告



禁止

- 電源コードを本体に巻きつけたり、本体やフットレストで踏んだりしないでください。また、電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
→コードが破損し、火災や感電の原因になります。
- 本体に水などをこぼさないでください。
→感電やショート・発火の原因になります。
- ぬれた体で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。
→感電や故障の原因になります。
- お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺(背もたれの後ろやフットレストの下など)で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせたりしないでください。
→事故やケガの原因になります。
- 椅子に2人以上座ってのご使用はおやめください。特に小さなお子様(乳児など)を抱きかかえてのご使用はおやめください。
→事故やケガの原因になります。
- 布地が破れた状態では使用せず、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
→事故やケガ・感電の原因になります。修理は販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。
- 腕時計やネックレスなど、アクセサリを身につけた状態で使用しないでください。
→事故やケガの原因になります。



強制

- マッサージコース開始前やリクライニングを倒すときや起こすとき、必ず周囲に人(特にお子様)やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろやフットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。
→事故やケガの原因になります。
- 体や物がはさみこまれた場合、リクライニングボタンを押して安全な位置まで戻してください。
- 本機(特に電源コード)の隙間などに金属類(ヘアピン、針金)などを差し込まないでください。
→感電やショート・発火の原因になります。

安全上のご注意

ご使用時の注意点

⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 素肌では使用しないでください。● マッサージおよび椅子以外の用途に使用しないでください。 →事故やケガの原因になります。● もみ玉が上下する部分や、リクライニングなどの可動部に手を入れないでください。また、ベルトなどのかたい物をつけて使用しないでください。 →ケガや故障の原因になります。● 頭部、胸部、腹部、関節部(ひじ、ひざなど)には使用しないでください。 →気分が悪くなったり、ケガの原因になります。● 無人で動作させないでください。 →事故やケガの原因になります。● フットレストは脚部以外には使用しないでください。 →ケガの原因になります。● 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。 →無理に入れようとすると、故障の原因になります。● アームレストは腕部以外には使用しないでください。 →ケガの原因になります。● 腕部のマッサージ中にアームレストから腕が抜けた場合、無理に腕を入れないでください。 →無理に入れようとすると、故障の原因になります。
 強制	<ul style="list-style-type: none">● 緊急時や動作中に異常を感じたときは、「緊急停止」ボタンを押して、動作を停止させてください。● 使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください。● マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し販売元（裏表紙に記載）にご相談ください。 →強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。● マッサージ中は眠らないように注意してください。 →ケガの原因になります。● マッサージは、1日30分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。 →長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。● 周囲に人(特にお子様)やペットがいないことを確認してご使用ください。 →事故やケガの原因になります。● 背パッドははずしてマッサージしないでください。

ご使用時の注意点

⚠ 注意

 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none">● 停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止して主電源スイッチを「OFF」にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。 →停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。● 落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止して主電源スイッチを「OFF」にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。● 動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して主電源スイッチを「OFF」にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いて、販売元（裏表紙に記載）に点検・修理を依頼してください。 →感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。
---	--

ご使用後や使用しないときの注意点

⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 電源コードは本機以外では使用しないでください。● 本機を使用後は、必ずリクリーニングを完全に起こしてください。● 物を載せないでください。
 強制	<ul style="list-style-type: none">● 使用後は必ず主電源スイッチを「OFF」にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。 →お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。● 電源コードはねじれをほどいてから保管してください。 →電源コードが劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none">● 電源コードのプラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源コードのプラグを持って抜いてください。 →感電やショートによる火災の原因になります。● お手入れの際は必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源コードのプラグの抜き差しをしないでください。● ご使用にならないときは、必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。 →ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。

安全上のご注意

その他の注意点

!**警告**



禁止

- 本体の上に立たないでください。座部以外に座るなどして、上から強い衝撃を与えないでください。
→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。



分解禁止

- 機器が故障した場合は、勝手に修理せず、販売店または販売元（裏表紙に記載）に連絡してください。
- 電源コードが破損した場合、危険ですので電源コードの交換は販売元（裏表紙に記載）に依頼してください。
- 機器は改造しないでください。
→火災や感電、ケガの原因になります。

!**注意**





強制

- 他の人に譲渡、貸与するときは、本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡しください。

お願い


- 製品及び付属品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

各部の名称とはたらき

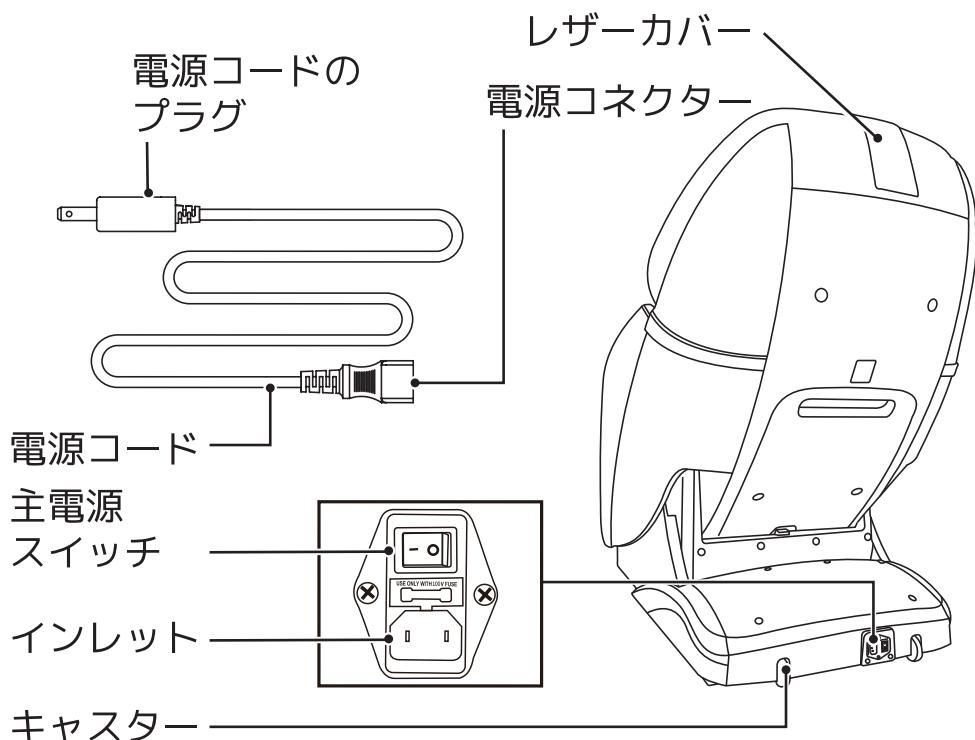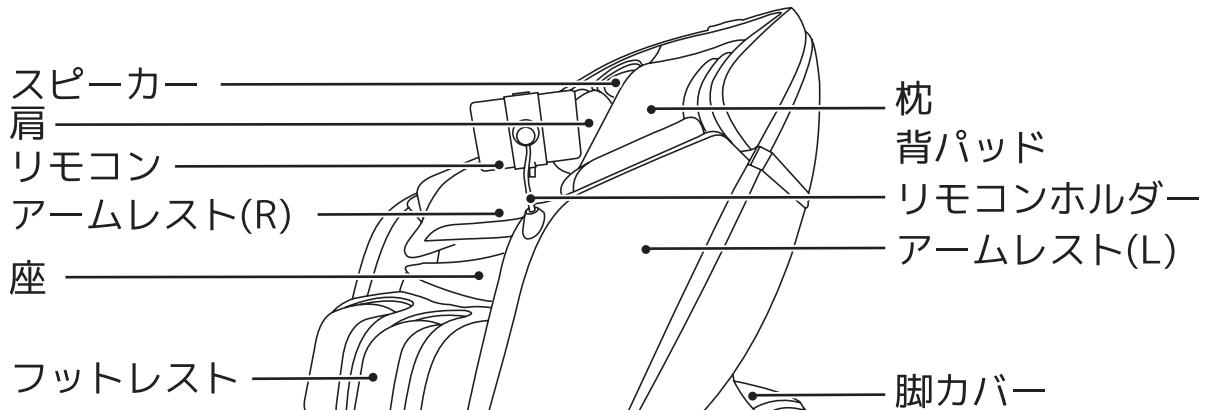

各部の名称とはたらき

リモコン

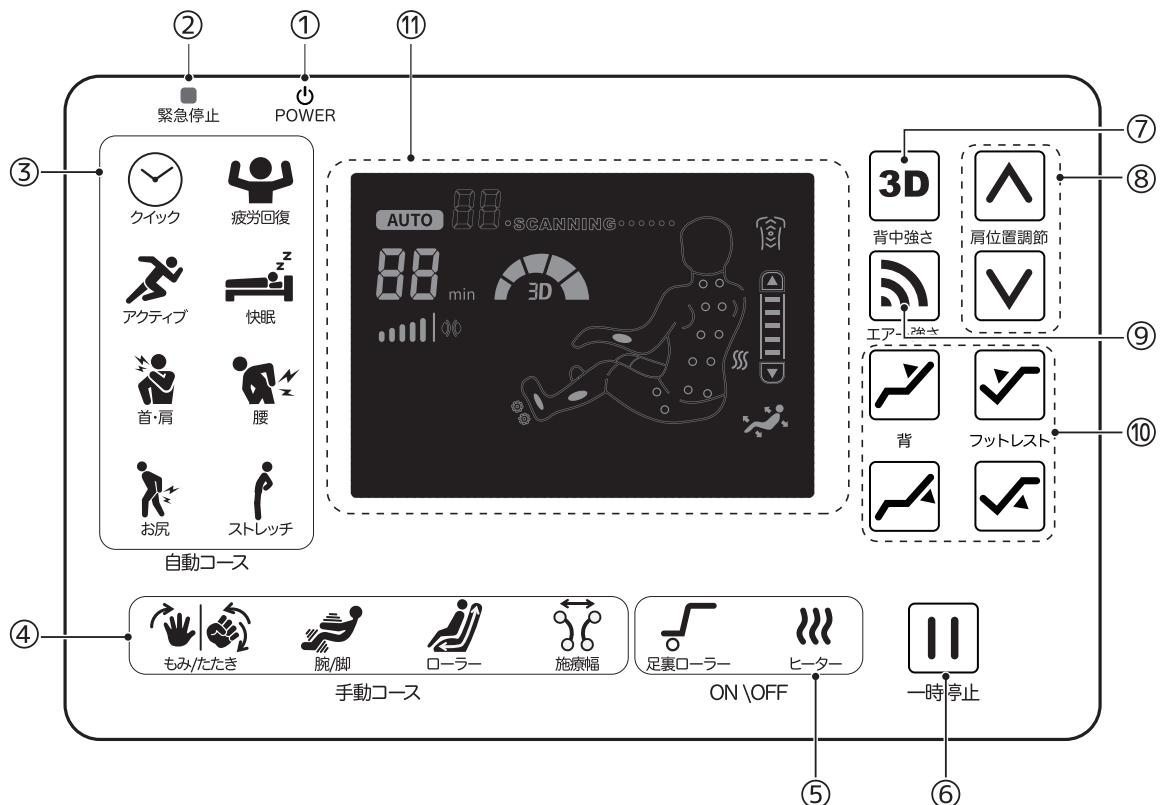

- リモコンに水などをこぼさないでください。
- ぬれた手で操作しないでください。



- リモコンの上に座ったり、落したり、踏んだり、コードを強くひっぱったりしないでください。
- 先のとがったものやかたいものでボタンを押さないでください。
→ 破損の原因になります。

①	POWER	リモコンの電源の「オン」「オフ」を行います。動作中に押すとチェアが初期位置に戻ってから停止します。
②	緊急停止	緊急時や動作に異常を感じたときに押してください。その場で動作が停止します。
③	自動コース	このボタンを押すと、各コースを選択できます。 お好みのコースボタンを選択してください。
④	手動コース	このボタンを押すと、各基本操作を選択することができます。 お好みの動作ボタンを選択してください。
⑤	ON/OFF	このボタンを押すと、足裏ローラーとヒーターのON/OFFができます。
⑥	一時停止	動作を一時停止したい場合に押してください。動作を停止し、初期位置に戻ります。
⑦	背中強さ調節	このボタンを押すと、背中の強さを調節することができます。
⑧	肩位置調節	このボタンを押すと、自動コースの肩位置検索中およびローラーを除く手動コース中に背中のもみ玉の上下位置の調節ができます。
⑨	エアー強さ調節	このボタンを押すと、アームレストおよびフットレストのエアーの強さを調節することができます。
⑩	リクライニング	このボタンを押すと、背中・脚の倒し角度を調節することができます。
⑪	ステータス	選択した操作設定及びマッサージ動作の状況がここに表示されます。

ご使用の前に

- 冷えきった室内の温度を上げて使用するときは、室温を急に上げず、徐々に上げてください。本機を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1時間ほど待ってから使用してください。
→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。


設置場所について

リクライニングをしたときに壁や物に当たらないように、本体後ろのスペースは約15cm以上開け、本体前は約40cm以上のスペースを確保してください。

⚠ 注意


- 浴室やサウナなど、湿度の高い場所では使用しないでください。
- 床面の水平な場所に置いて使用してください。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。
- タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。
- エアコンの風が直接当たる場所では使用しないでください。

- 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。(ホットカーペットは敷かないでください。)
- 重量物ですので、下ろすとき床面を傷つけないように注意してください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。
- 体重100kgの人が座った状態で1cm²あたり約3.9kgの荷重がかかります。

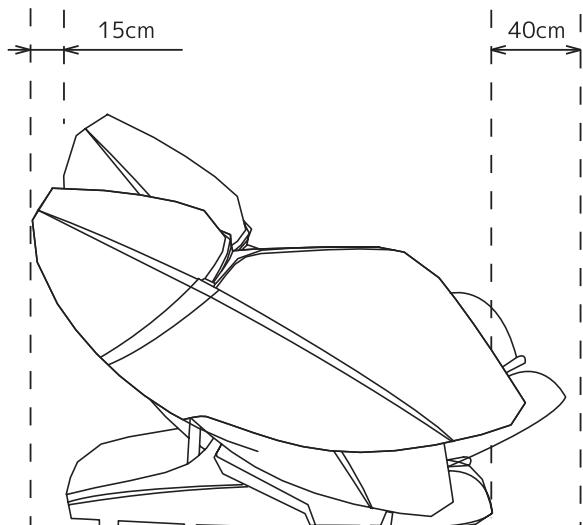

同梱物の確認

梱包箱には本体のほか、同梱物が入っていることを確認してください。

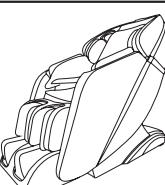本体	同梱物
	<p>取扱説明書 電源コード</p> <p>組立ネジ、工具セット (プレート:1個、 ネジA:4個、 ネジB:4個、 座金:4個、 レザーカバー:1個、 L型レンチ:1個)</p>

設置方法・組立て方法


本機はアームレストが仮固定の状態で梱包されています。初回の設置の際に、固定してご使用ください。



- 設置・組立ての際には手や物をはさまないように十分注意してください。
- 設置時に電源コードを足カバーなどで踏まないようにしてください。

- ① 本体のエアーホースをアームレスト(R)に接続します。


※エアーホースやケーブルを挟み込まないよう注意してください。
※同じ色同士を接続するよう注意してください。

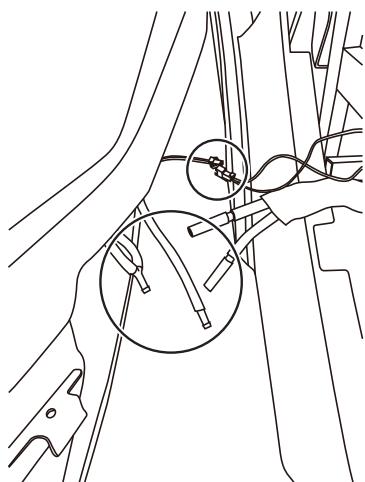


- ② アームレスト(R)を本体に引っ掛けます。

※本体後方から前側にスライドさせながら、肩側のフックから順に引っ掛けください。
※肩付近と座面付近にフックが3箇所設けられています。


※エアーホースやケーブルを挟み込まないよう注意してください。

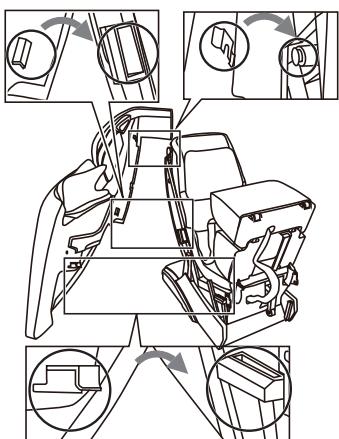


- ③ ネジAに座金を入れ、アームレスト(R)前側に固定します。

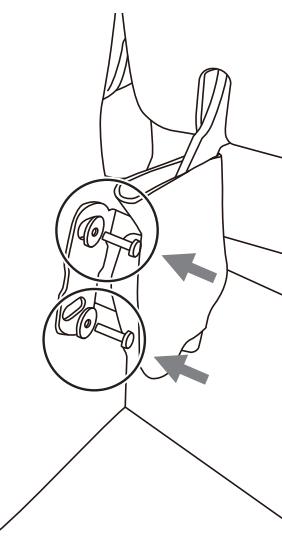


- ④ ①～③と同じ工程でアームレスト(L)を本体に取り付けます。

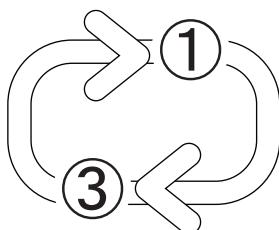

- ⑤ プレートとネジBを固定します。

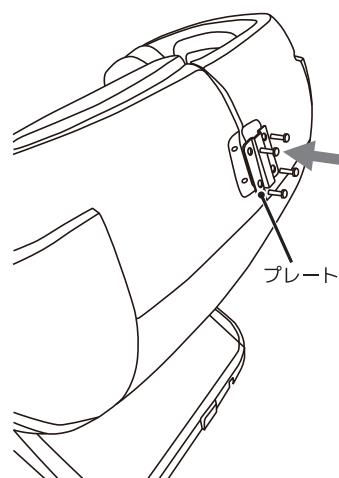


- ⑥ 固定後、レザーカバーをマジックテープで貼り付けます。

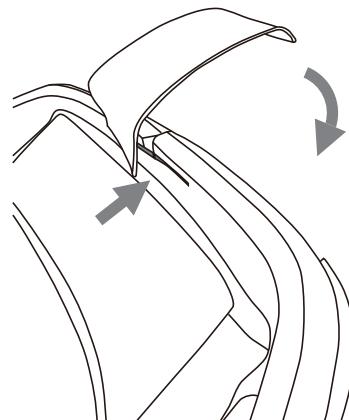


ご使用の前に

⑦ フットレストを反転させ、座と本体、フットレストとの間のファスナーを閉じます。

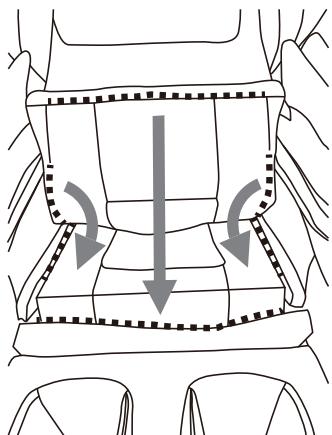

⑧ リモコンをリモコンホルダーに最後まではめ込みます。


※リモコンケーブルを挟まないよう注意してください。

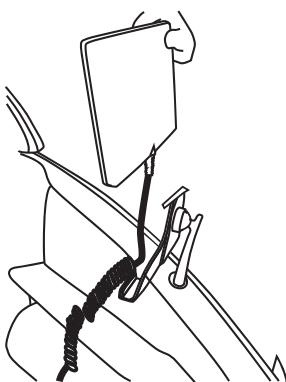

布地の確認

背パッドのファスナーの間から腕を入れ、本体の布地等に破れがないか確認してください。(右図〇部分) また、その他の部分の布地が破れていないか確認してください。

腕を入れる際は必ず主電源を「OFF」にし、ファスナーや背パッド内側の部品などだけがをしないよう十分に注意してください。

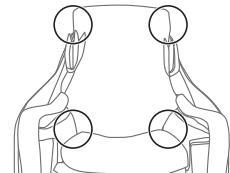


警告


- マッサージの前には必ず本体の布地が破れていないか確認してください。
な破れでもただちに使用を中止し、電源コードのプラグを抜き、
にご連絡ください。施療部の布地をはずしたり、破れた状態で使用することは大変危険
ですので、絶対にしないでください。

主電源の入れ方

①電源コネクターをインレット
に差し込みます。

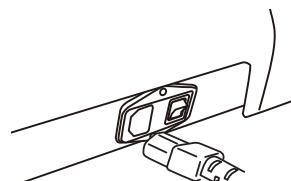


②電源コードのプラグから出ているアース線を、電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。電源コンセントにアース端子がない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

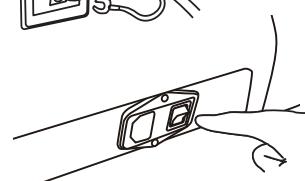

③電源コードのプラグを正しく電源コンセントに差し込みます。



④本体後部の主電源スイッチを
「ON」にします。

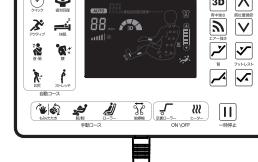

⑤リモコン上部の電源スイッチを
リモコンが点灯するまで押します。

警告

- 変圧器を用いて使用しないでください。
→故障や感電の原因になります。
- 日本国内以外では使用しないでください。
→故障や感電の原因になります。

注意


- 電源コードのプラグを電源コンセントに差し込む前に、主電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- 電源コードのプラグは確実に最後まで差し込んでください。
- ご使用の際にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。

ご使用の前に

本体に移動用キャスターがついています。主電源スイッチを「OFF」の状態にし、電源コードのプラグをコンセントから抜いてから運んでください。

リクライニングを倒し、フットレストを上げ、アームレストの下側を持って前側を浮かせ、キャスターで移動してください。

おひとりで持ち運びが難しい場合は、お二人でアームレストの下側を片側ずつ持ち上げ、前側を浮かせてキャスターで移動してください。

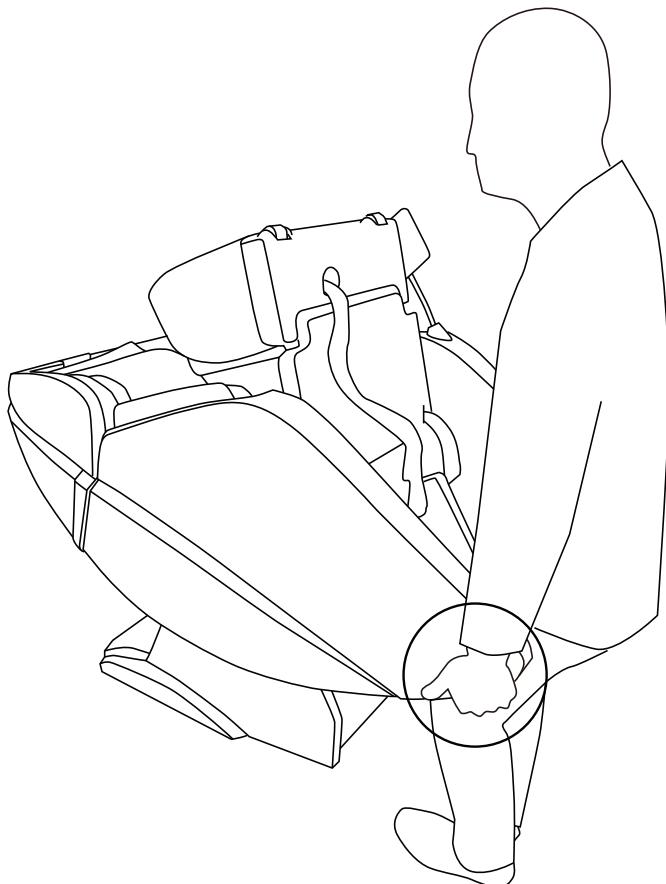

- 重量物ですので搬入移動時に、製品を落としたり、ケガ等しないよう、運搬用手袋を装着してください。
- 重量物ですので搬入移動時には腰等を痛めないようにご注意ください。
- リモコンがついていますので、移動時に落とさないよう注意してください。




- 人をのせたまま移動しないでください。
- 移動の際には足や電源コードなどをはさまないように十分注意してください。
- キャスターで床を傷つけないように注意してください。

椅子の調節

アームレストの使い方

下の図のようにアームレストと背もたれの間に肘が来るよう腕を置いてください。

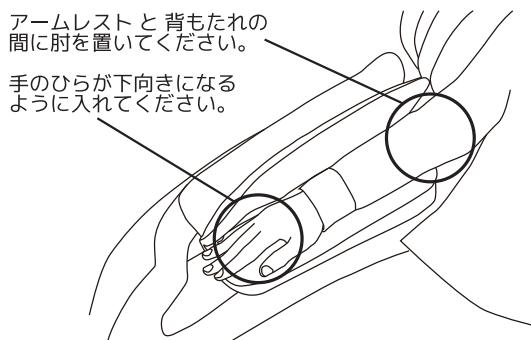

！注意

- 腕部以外には使用しないでください。
→ケガの原因になります。
- 腕部のマッサージ中にアームレストから腕が抜けた場合、無理に腕を入れないでください。
→無理に入れようとすると、故障の原因になります。
- 肘をマッサージしないでください。また、手のひらが下向きになるようにマッサージしてください。他の向きで腕を入れないでください。
→ケガの原因になります。

リクライニングの使い方


リクライニングボタンを押すことで、背もたれとフットレストの調節が出来ます。

■リクライニングを起こす場合

背の上側のボタンを押すことで背もたれを起こすことが出来ます。
このとき、フットレストも連動して下がります。

■フットレストを上げる場合

フットレストの上側のボタンを押すことでフットレストを上げることが出来ます。

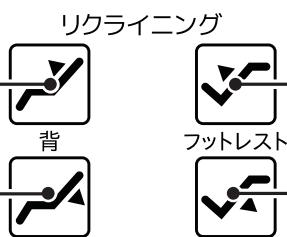

■リクライニングを倒す場合

背の下側のボタンを押すことで背もたれを倒すことが出来ます。
このとき、フットレストも連動して上がります。

■フットレストを下げる場合

フットレストの下側のボタンを押すことでフットレストを下げることが出来ます。

！警告

- マッサージコース開始前やリクライニングを倒すときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがないことを確認してください。また、背もたれの後ろやフットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。

自動コース


コースの種類と特徴

あらかじめ設定されたメニューにより、目的・用途に応じたコースが簡単に選択出来ます。

クイックコース	約8分	首から足裏まで、短時間で独自のマッサージを行う全身コースです。時間のない方におすすめです。
疲労回復コース	約15分	全身の疲労回復を目的としたコースです。首の付け根から足裏まで全身の指圧点をほぐします。
アクティブコース	約15分	身体の末端から血流を心臓に送り返す求心法で静脈の流れに沿ってマッサージします。
快眠コース	約15分	心臓から血流を身体の末端に送り返す遠心法で動脈の流れに沿ってマッサージします。
首・肩コース	約15分	首の周囲や、肩周りを集中的にマッサージするコースです。首周りをスッキリさせたい方におすすめです。
腰コース	約15分	腰の周囲を集中的にマッサージするコースです。腰回りをスッキリさせたい方におすすめです。
お尻コース	約15分	お尻の周囲を集中的にマッサージするコースです。お尻回りをスッキリさせたい方におすすめです。
ストレッチコース	約15分	前屈、背筋伸ばし動作の組み合わせでしっかりとストレッチを行い、筋肉をほぐすコースです。

自動コースでのマッサージ

- 疲労の回復、改善などを目的とした8種類のコースを用意しています。
- 各コースボタンでお好みのコースを選ぶことにより、あらかじめ設定されたメニューにもとづいてマッサージを行います。

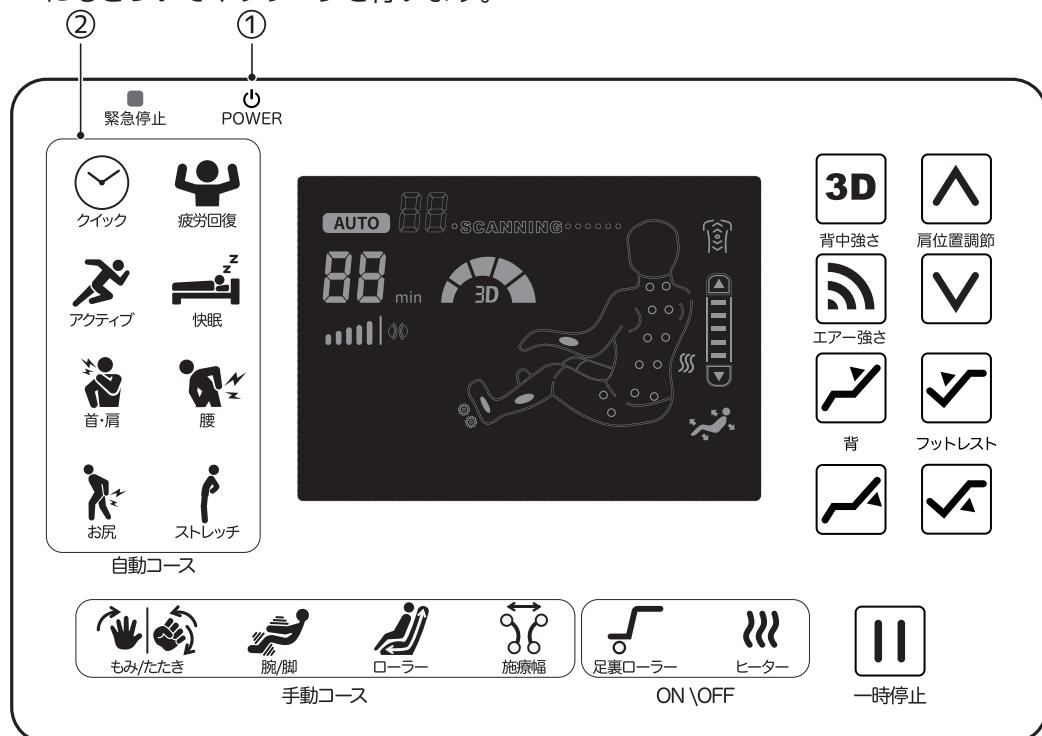

① POWERボタンを押します。

30分間入力がない場合、自動的に電源が切れます。


② お好きなコースのボタンを押します。

リクライニングがマッサージに最適な角度になるまで動きます。その後、背中のメカが昇降を開始し、指圧点の検索を行います。

【お願い】

深く椅子に腰かけ、楽な姿勢で背もたれに頭を置いてください。体が浮いていると正確に指圧点を検索できません。

自動コース

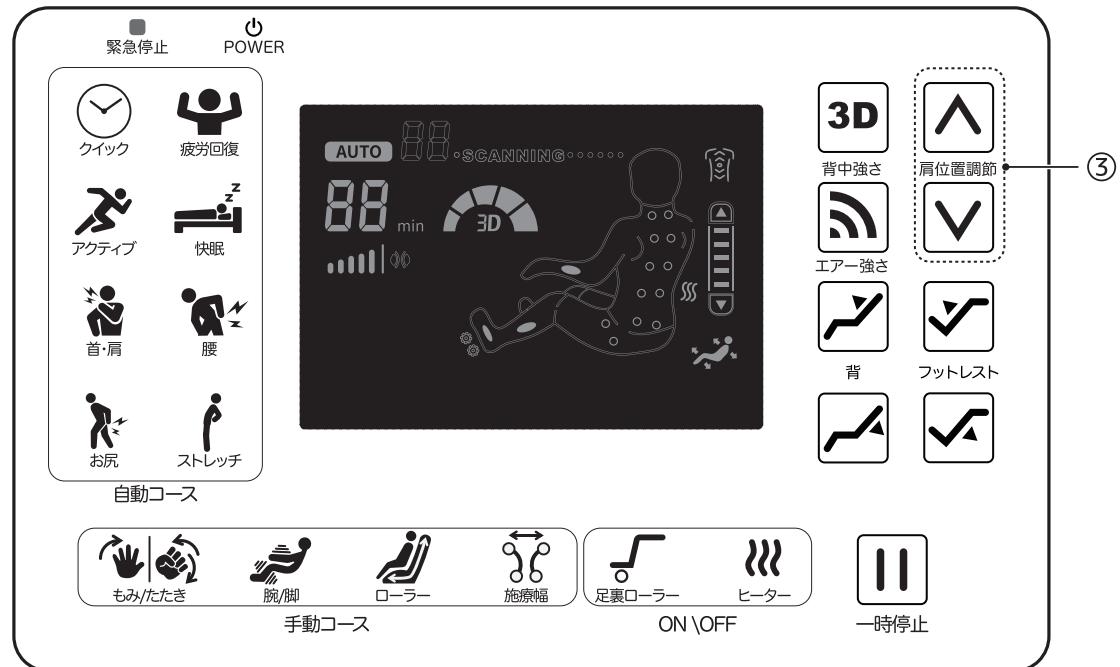


③ 肩位置の調節ができます。

指圧点検索後、ブザーの音が鳴っている間、肩の位置を調節できます。
調節しなくてもよい場合は、そのままにしておきます。

【肩位置の調節】

肩位置が合っていないときはブザーが鳴っている間に、肩位置を調節してください。

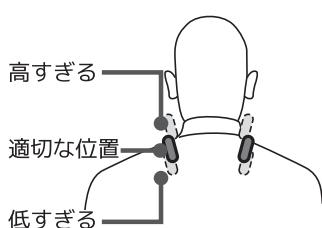

肩位置調節	↑	押している間、 もみ玉が上に動き続けます。
	↓	押している間、 もみ玉が下に動き続けます。

④ コースが始まります。

指圧点の検索が完了すると、ブザーの音がやみ、コースが始まります。
マッサージ動作中はメカの強さ調節やエアーの強さ調節ができます。

マッサージの強さ調節/足裏ローラーとヒーターのON/OFF			
3D 背中強さ	エアー強さ	足裏ローラー ON/OFF	ヒーター ON/OFF

マッサージの強さ調節と足裏ローラー及びヒーターのON/OFFをおこなうことができます。強さ調節ボタンを押すたびに切り替わります。(初期設定は中)。強さ調節ボタンを押すごとに、中→強→弱の順に切り替わります。足裏ローラーボタンとヒーターボタンを押すごとに、ON/OFFが切り替わります。(初期設定は足裏ローラーがON、ヒーターがOFF)。

⑤ コースが終了します。

もみ玉が収納位置まで戻り、自動でリモコンの電源が「OFF」になります。その後お好みの動作をおこないたい場合は再度リモコンの電源を「ON」にしてください。
● ご使用後はリモコンの電源を「OFF」にしてください。

コース変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切りかえられます。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

自動コース→自動コース

自動コース実行中に他の自動コースボタンを押すと、もみ玉が一度検出した肩位置に戻り、肩位置の再確認を行ってから開始します。肩位置再確認中は、肩の位置を調節できます。

自動コース→手動コース

自動コース実行中に手動コースボタンを押すと、押した時点で自動コースは中断し、選択した手動コースが開始されます。

一時停止

一時停止ボタンを押すと、マッサージチェアは直ちに動作を停止し、リクライニングが起き上がります。マッサージチェアが一時停止すると、リモコン画面が一時停止のアナウンス画面に変わり、任意の動作を選択することができます。再度一時停止ボタンを押すと、一時停止ボタンを押す前の動作が再開されます。

コースの途中終了

途中で終了する場合は、動作中にPOWERボタンを押してください。収納動作をおこなった後で停止します。緊急時や動作中に異常を感じたときは、緊急停止ボタンを押してください。その場で動作が停止します。

安全確認後、POWERボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。

自動コースはコース選択時にリクライニングが自動で倒れる場合があります。

また、コース中にフットレストの角度が自動で動くコースもありますので、ご使用前に後ろに人や障害物がないことを確認して下さい。また使用中に人が近づかないようご注意ください。




- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。
→強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分やリクライニング等の可動部に手や足を入れないでください。
また、髪飾り、ネックレス、腕時計、ブレスレット、指輪、付け爪などのかたい物をつけて使用しないでください。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。
- マッサージの使用は1日30分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。

手動コース

コースの種類と特徴

お好みの機能を組み合わせること出来ます。また、速さや強さ、上下調節など、マッサージ動作の調節も行えます。

各部の操作と調節方法

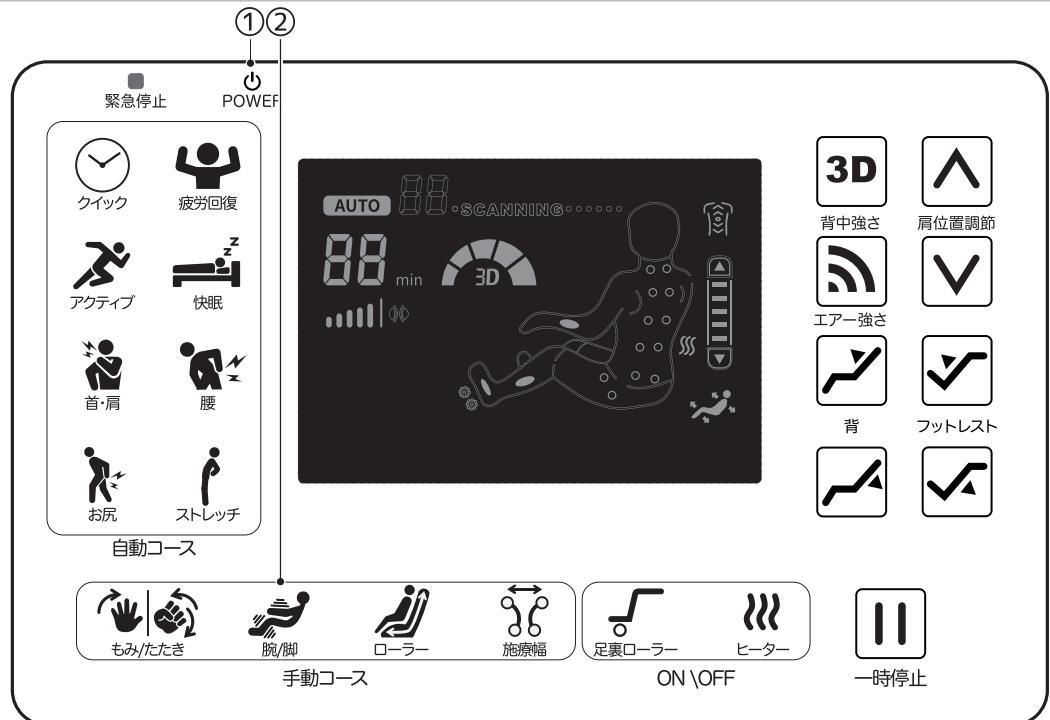

① POWERボタンを押します。

30分間入力がない場合、自動的に電源が切れます。

② お好きな動作のボタンを押します。

もみ玉たたき、ローラー、腕/脚の中からお好みの動作を組み合わせてお選びください。
※ボタンは押すごとに動作が切り替わります。

③ コースが始まります。

マッサージ動作中はメカの強さ調節やエアーの強さ調節、各動作の解除ができます。

④ コースが終了します。

もみ玉が収納位置まで戻り、自動でリモコンの電源が「OFF」になります。その後お好みの動作をおこないたい場合は再度リモコンの電源を「ON」にしてください。

● ご使用後はリモコンの電源を「OFF」にしてください。

もみ玉の位置の調節

	【ローラーを選択していないとき】 マッサージしたい位置にもみ玉の位置を調節することができます。		押している間、もみ玉が上に動き続けます。
	●もみ玉の位置が最上部(最下部)にあるときに、さらに上昇(下降)を選択すると「ピーピー」と警告音が鳴ります。		押している間、もみ玉が下に動き続けます。

幅の調節



施療幅

幅調節ができる基本動作中に、もみ玉の幅を狭→中→広の順に切りかえることができます。（コース開始時は狭に設定されています。）

マッサージの強さ調節/足裏ローラーとヒーターのON/OFF



背中強さ



エアー強さ



足裏ローラー
ON \ OFF

マッサージの強さ調節と足裏ローラー及びヒーターのON/OFFをおこなうことができます。強さ調節ボタンを押すたびに切り替わります。（初期設定は中）。強さ調節ボタンを押すごとに、中→強→弱の順に切り替わります。足裏ローラーボタンとヒーターボタンを押すごとに、ON/OFFが切り替わります。（初期設定は足裏ローラーがON、ヒーターがOFF）。

コース変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切りかえられます。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

手動コース→自動コース

手動コース中に自動コースボタンを押すと、リモコン画面右側が自動コース選択画面に変わります。自動コースを選択した時点で手動コースは中断し、自動コース動作を開始します。コースは肩位置検出を行ってから開始します。

一時停止

一時停止ボタンを押すと、マッサージチェアは直ちに動作を停止し、リクライニングが起き上がります。マッサージチェアが一時停止すると、リモコン画面が一時停止のアナウンス画面に変わり、任意の動作を選択することができます。再度一時停止ボタンを押すと、一時停止ボタンを押す前の動作が再開されます。

コースの途中終了

途中で終了する場合は、動作中にPOWERボタンを押してください。収納動作をおこなった後で停止します。緊急時や動作中に異常を感じたときは、緊急停止ボタンを押してください。その場で動作が停止します。

安全確認後、POWERボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。

自動コースはコース選択時にリクライニングが自動で倒れる場合があります。

また、コース中にフットレストの角度が自動で動くコースもありますので、ご使用前には後ろに人や障害物がないことを確認して下さい。また使用中に人が近づかないようご注意ください。




- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。
→強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分やリクライニング等の可動部に手や足を入れないでください。
また、髪飾り、ネックレス、腕時計、ブレスレット、指輪、付け爪などのかたい物をつけて使用しないでください。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。
- マッサージの使用は1日30分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。

BLUETOOTHスピーカー

BLUETOOTHスピーカーに接続して音楽を楽しむことができます。音楽再生機器の用途に合わせて接続してください。スピーカーは背パッドに内蔵されており、電池交換や充電をすることなくマッサージチェアから電源を供給します。

スピーカー設置位置

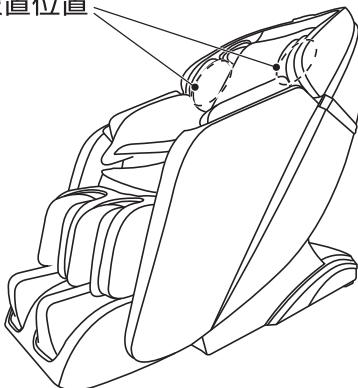

初回の接続の仕方

ペアリング操作が必要です。ペアリングが正常に完了すれば、二回目以降は自動的に接続されます。接続機器情報は1台分のみマッサージチェアに保存されます。

※複数の機器を同時に接続することはできません。

① POWERボタンを押します。

30分間入力がない場合、自動的に電源が切れます。

② 音楽再生機器を準備します。

音楽再生機器の電源を入れ、BLUETOOTH設定画面を表示します。

③ 音楽再生機器を接続します。

音楽再生機器上に“i-FiT Pro”が表示されたら選択します。

【注意】

本スピーカーでは音量調整ができませんので、過大な音量での再生を避けるため、あらかじめ音楽再生機器の音量を下げてください。

二回目以降の接続の仕方

マッサージチェアまたは音楽再生機器の主電源を入れると、自動的に接続されます。

※複数の機器を同時に接続することはできません。別の機器を接続する場合は、上記の初回の接続の仕方の順序で接続してください。

接続状態のリセット

自動接続させたくない場合は、お使いの音楽再生機器の使用手順に沿って接続を解除してください。


⚠ 注意

- ご使用の際は、必ず事前に音楽再生機器の説明書をご覧ください。
- 万一、音楽再生機器のメモリーなどが消失しても、当社は一切責任を負いません。
- 接続する際は、必ず機器の音量を下げるおいてください。
- 本機の近くに電子機器や発信機(携帯電話など)があると本機にノイズが入る場合があります。その場合は距離を取ってご使用ください。
- テレビやラジオのアンテナ付近で使用すると、テレビやラジオにノイズが入る場合があります。その場合は距離を取ってご使用ください。

故障かな？と思ったら

構造の状態

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため、ただちに使用を中止し、電源コードのプラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または販売元(裏表紙に記載)までご相談ください。

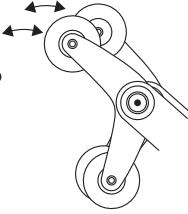状態	原因と直し方	構造上発生するもので、故障ではありません。
メカの左右のもみ玉の位置がずれている。	交互たたき機構を採用しているため、構造上発生するもので、故障ではありません。 	
もみ玉が肩部へ移動して止まってしまった。	オートタイマー機能により、マッサージ終了時にメカが体に干渉しないように肩部へ移動するようになっています。	
もみ動作をしているとき、もみ玉がスキップすることがある。	人が乗っている時にメカに荷重が大きくかかる箇所とかからない箇所の境目や、体重や体型などの個人差により引っかかることがあるためです。	
マッサージ中にもみ玉が途中で止まる。	もみ玉に必要以上の力が加わると、動きが止まることがあります。体を浮かせぎみにするか、リクライニングを軽く起こしてご使用ください。(特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。)	
起動しない基本動作がある。	本体後部の主電源スイッチを「OFF」にし、5秒ほどしてから主電源スイッチを入れ直してください。	点検後、なお異常がある場合はただちに使用
自動指圧点検索がうまくいかない。(もみ玉が肩の高さに合っていない。)	椅子に深く腰かけて枕を頭にあててください。指圧点検索直後に肩位置調節ボタンで肩位置を調節できます。	を中止してください。
リモコンのボタンを押しても正常に動作しない。または電源が入らない。	次の点検を行ってください。 ①電源コードのプラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。 ②本体後部の主電源スイッチは「ON」になっていますか。 ③2つ以上のボタンを同時に押していませんか。	
電源コード、プラグが異常に熱い。	ただちに使用を中止してください。	

●サービスマン以外の人は分解や修理は行わないでください。

●お買い上げの販売店、または販売元(裏表紙に記載)までご相談ください。

故障かな？と思ったら


動作音について

動作中は以下のような作動音がしますが、性能等に影響はありません。

動作時の音

動作中は下記のような作動音がします。

たたきを伴う動作時の音	ゴトゴト音
もみ動作時のもみ玉と布のするる音	キュッキュッ音 ギュウギュウ音
もみ玉の昇降、もみ動作時の音	ウィーン音
エアーマッサージ中の音	コツコツ音
エアーポンプの音	ブーン音
エアーの排気音	シュー音
リクライニング昇降時の音	ウィーン音

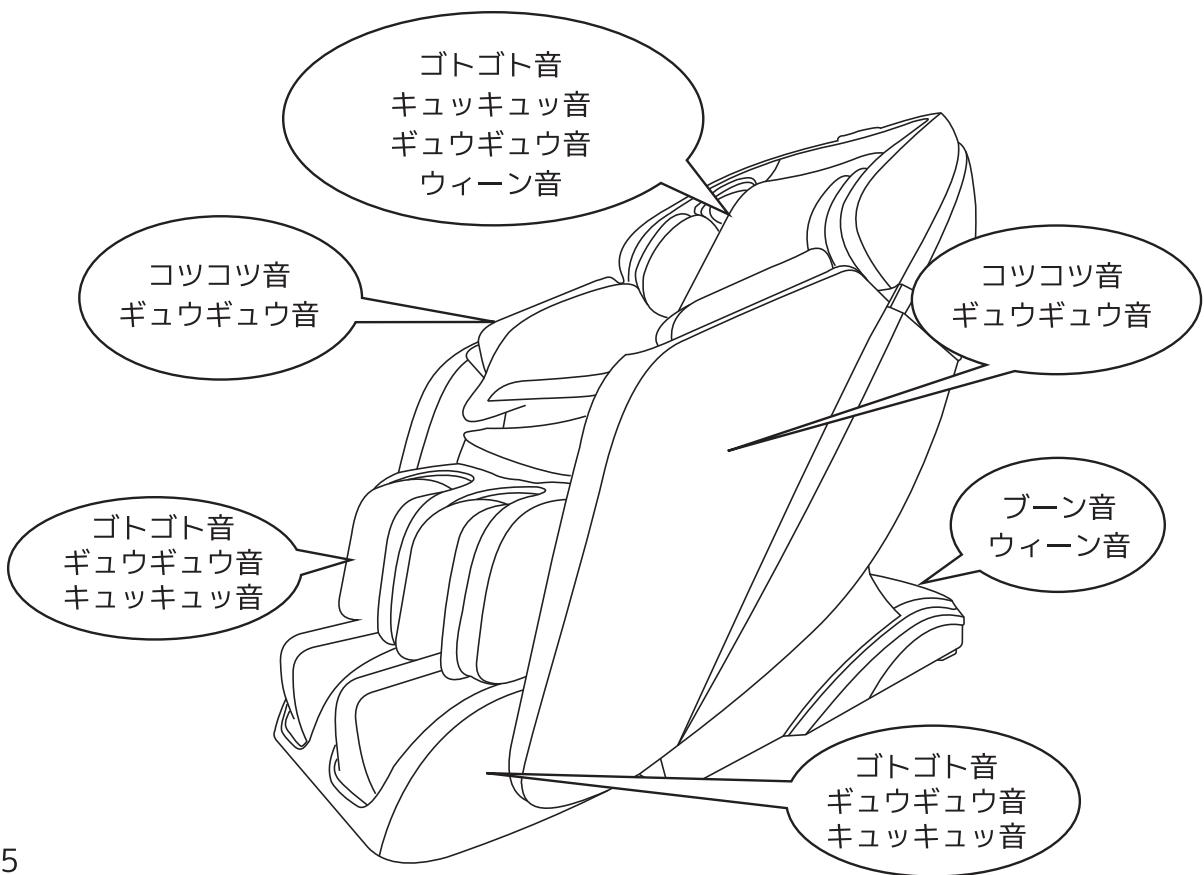

安全のために点検を

長期ご使用の場合は商品の点検を

こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、動作しないときがある。
- 電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
- 電源コードや電源コードのプラグが異常に熱くなる。
- コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
- 自動的にタイマーが切れないときがある。
- その他の異常や故障がある。

左記のような症状があれば、故障や事故の防止のため使用を中止し、電源コードのプラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店または、販売元(裏表紙に記載)に点検をご依頼ください。

愛情点検



安全にお使いいただくために

施療部の布地は消耗品であり、耐用年数は1年です。(使用条件：1日60分、毎日使用した場合)

安全にお使いいただくために、お買い上げ後、耐用年数が過ぎる前にお買い上げの販売店、または販売元(裏表紙に記載)での定期点検をおすすめします。

ただし使用条件が上記と異なる場合には、耐用年数が変わります。

お買い上げ後5年ほど経ちましたら、安全のために椅子全体の点検をおすすめします。

点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、または販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。

Q&A



ホットカーペットの上に椅子を置いてもいいですか？



火災のおそれがありますのでホットカーペットの上に置くのはおやめください。

椅子は重量物ですのでホットカーペットの発熱体を傷め、そこから発火するおそれがあります。



フローリングや床暖房の上に設置しても大丈夫ですか？



設置しても大丈夫です。

ただし、床をきずつけることがあるかもしれませんので、カーペットなどを敷き、その上に椅子を設置することをお勧めします。(畳等も同様です)



マッサージをより強くするにはどうすればいいですか？



次のことをなってみてください。

- 深く腰かけ背もたれに体重がかかるように座る。
- 強さ調節ボタンで強さを強くする(最大で強)。

以上の方でより強くマッサージを行う事ができます。



マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか？



次のことをなってみてください。

- 強さ調節ボタンで強さを弱くする(最小で弱)。

以上の方でより弱くマッサージを行う事ができます。



誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか？



感電のおそれがあります。ただちに使用を中止し、次の内容に従ってください。

- 主電源スイッチを「OFF」にする。
- 電源コードのプラグをコンセントから抜く。

以上のことを行った上、お買い上げの販売店または販売元(裏表紙に記載)にご相談ください。



コースが終了したときにリクライニングは自動で動きますか？



コース終了時は自動でリクライニング起き上がります。



身長が150cm未満の人や180cm以上の人でも使えますか？



お使いいただけます。



体重が重くても大丈夫ですか？



体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。



1ヶ月の電気代はいくらですか？



1日30分、毎日ご使用いただいた場合、1ヶ月で約136円です。(2024年8月当社調べ)

お手入れと保管の仕方

お手入れの仕方



- お手入れの際は必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源コードのプラグの抜き差しをしないでください。

【縫製品のお手入れ】

汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしほってから拭き取ってください。




- ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。

【プラスチックのお手入れ】

少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしほってから拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

- アルコール、その他の溶剤やみがき粉などでのお手入れは傷、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

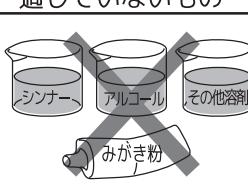適しているもの	適していないもの
	

【リモコンのお手入れ】

リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

- 絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。
→故障の原因となります。

保管の仕方

- ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。また、次にお使いになるときのためにお手入れし、付属品とともに湿気の少ないところに保管してください。
- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないようにしてください。



- 直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

アフターサービスについて


1. 保証書について

この製品の保証書について、お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店もしくは販売元からお受け取りください。保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。(修理の際、必要となります。) 保証期間は、保証書内に記載されています。ただし、この製品は日本国内専用ですので、外国でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外でご使用の場合は、保証期間中でも有料修理とさせていただきます。

2. 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、24-25ページの「故障かな？と思ったら」をよくお読みください。点検後、まだ異常がありましたらお買い上げの販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

- 1) お名前・ご住所・お電話番号
- 2) 販売名・型番…足力バーの後ろ側に貼ってある社銘板をご覧ください。
- 3) 製造番号…足力バーの後ろ側に貼ってある社銘板をご覧ください。
- 4) お買い上げ日
- 5) 故障の状態（できるだけ詳しくお知らせください。）

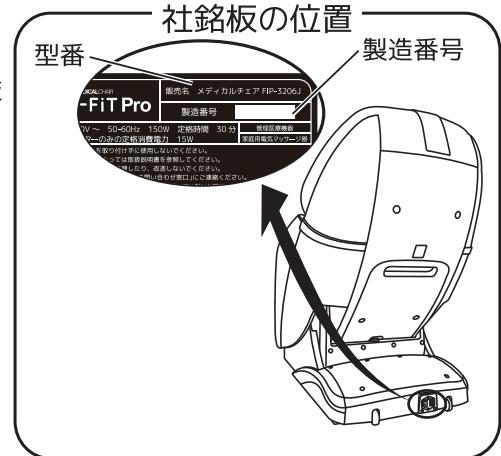

● 保証期間中は

修理の際、保証書をご提示ください。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

● 保証期間が過ぎている場合は

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

● 販売店にご依頼になれない場合は

販売元（裏表紙に記載）にご連絡ください。

● 補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの電気マッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しております。
(ただし、縫製部品は除きます。)

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店、または販売元（裏表紙に記載）にお問い合わせください。

● お買い上げいただいた国以外でご使用になられた場合、修理を承ることができません。

仕様

販売名	メディカルチェア FIP-3206J
使用電源	AC100V
定格消費電力	150W (ヒーターのみの定格消費電力22W)
定格周波数	50-60Hz
定格時間	30分
類別	機械器具(77)バイブレーター
一般的名称等	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000) 管理医療機器
医療機器認証番号	307AKBZX00030000
もみ速さ	最小22回／分、最大40回／分
たたき速さ	最小180回／分、最大450回／分
もみ玉上下移動速さ	3 cm／秒
マッサージ範囲	109 cm
エアー圧力	約28kPa
ヒーター	最大40 °C
自動コース	8種類
手動コース	5種類
リクライニング角度	水平面に対して約 126° ~約 149° 無段階(電動リクライニング)
本体の寸法	幅約75cm×奥行約138(156)cm×高さ約116(101)cm 奥行・高さの() 内の数字は背もたれを倒した状態の寸法
質量	約75kg
外装布地	合成皮革
付属品	電源コード
包装	1梱包 / 1台
製造販売元	ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地

MEMO



-----〈キリトリ線〉-----

保証規定

1. 保証期間内に万一発生した故障については修理料金を無償といたします。

- 修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
- お買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(0120-772-294)にご連絡ください。
- ご転居の場合やご贈答品等で本保証書に記入のお買い上げ店で無償修理をお受けになれない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(0120-772-294)にご相談ください。

2. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。

- (1) お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合
- (2) 火災・天災・異常電圧等による故障・損傷の場合
- (3) 機器を改造や修理された場合
- (4) 取扱説明書に記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって発生した故障・損傷の場合
- (5) 本保証書を提示されない場合
- (6) 本保証書のお買い上げ店名、およびお買い上げ年月日の未記入あるいは字句を訂正された場合
- (7) 一般家庭以外(業務用等)でご使用されていた場合

3. 本保証書は日本国内において有効です。

4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

5. 本保証書の記載内容については『修理等に関するお問い合わせ窓口』(取扱説明書に記載)にご相談ください。

修理メモ

ファミリーイナダ株式会社

※This warranty is valid only in Japan



お客様相談窓口のご案内

●製品に関するお問い合わせ窓口

0120-129-011

●修理等に関するお問い合わせ窓口

0120-772-294

受付：土・日・祝を除く平日 9:00~17:00

〈キリトリ線〉

ファミリーチェア 保証書

品番	FIP-3206J	製造番号	
お客様	お名前 様		
	ご住所 □□□-□□□□	電話	()
お買い上げ店名 住所・電話番号			
お買上げ日		保証期間	1年間
		保証対象	本体

- 正常なご使用状態(取扱説明書に記載)で万一発生した故障については、お買上げ日から上記の期間、裏面の保証規定により、その故障の修理料金を無償といたします。
- 本保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 製造番号は、かならずご記入ください。
- お買上げ時の領収書またはお買上げ証明書は、本書にかならず貼り付け、大切に保管してください。