

Design & Massage

CALACO

ファミリー キャラコ FDC-500

このたびは、ファミリー キャラコをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この製品は、疲労の回復・改善を目的としたさまざまなマッサージが楽しめます。皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして末永くご愛用ください。

目次

安全上のご注意	1
主な特長と効能・効果	4
各部の名称とはたらき	5
ご使用前に	7
カバー類の取り外し方	10
椅子の調節	11
使い終わったら・コースの種類と特長	12
おまかせコース	13
お好みコース	14
コースの変更と途中終了	15
故障かな?と思ったら	16
安全のために商品の点検を	17
Q & A	18
保管とお手入れの仕方	19
アフターサービスについて	20
仕様	21
お問い合わせ窓口・保証書	裏表紙



ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

日本国内専用 この製品は日本国外への輸出と使用を禁止しています。
 PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE PRODUCT OUTSIDE OF JAPAN.
 この製品に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 よってこの製品を国外に持ち出した場合、保証及び修理対応はできませんのでご了承ください。
 JAPANESE EQUIPMENT SPECIFICATION WARRANTY APPLIES ONLY IN JAPAN.
 WARRANTY INCLUDING REPAIRS BY THE MANUFACTURER DOES NOT APPLY IF THE PRODUCT IS TAKEN OUT OF JAPAN.

◎「取扱説明書」は、いつでも見られるように大切に保管してください。
 ◎保証書は、お買い上げの際必ずお受け取りの上、「取扱説明書」とともに大切に保管してください。
 ◎この製品は、日本国内の弊社工場にて企画／開発／設計／最終組立て／品質保証を行い、部品調達及び部品組立てを中国にある弊社工場で行っています。
 ◎この製品は、一般家庭用として設計されていますので、一般家庭以外（業務用など）でご使用の場合は、お買い上げの販売店または「製品に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。

添付文書



取扱説明書






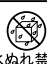




安全上のご注意

ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。なお、各部の名称については5～6ページをご覧ください。

表示の種類






 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。

図記号の種類と意味




 禁止	禁止の行為であることを示しています。
 分解禁止	分解してはいけないことを示しています。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で扱ってはいけないことを示しています。
 水ぬれ禁止	水がかかるところで使用したり、水にぬらしてはいけないことを示しています。
 禁止	風呂・シャワー室等で使用してはいけないことを示しています。
 強制	行為を強制したり指示したりするものです。
 プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
 アース取り付け	アースを取り付けることを示しています。

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。




ご使用場所の注意

 注意	
 禁止	●浴室やサウナ、湿気の多い場所では使用しないでください。 →感電や故障の原因になります。
 強制	●床面が水平な場所に置いて使用してください。 →不安定な場所では本体が転倒し事故の原因になります。
 アース取り付け	●万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。 詳しくは、9ページをご覧ください。
 禁止	●アース線はガス管・水道管・電話線・避雷針には絶対に接続しないでください。




ご使用前の注意点

 警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 次の人は使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓（塞栓）症、重度の動脈リウマチ（瘤）、急性静脈リウマチ（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症〔皮下組織の炎症を含む〕など。◎ 急性の頸椎ねんざ（むちうち症）の疑いのある人 ● 電源は交流 100V 以外では使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → 火災や感電の原因になります。 ● 変圧器を用いた使用はしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → 故障や感電の原因になります。 ● 電源コードや電源プラグがいたんだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいときなどは使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → 感電やショート・発火の原因になります。 ● マッサージの前には必ず本体布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご連絡ください。本体布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → 布地が破れた状態で使用すると、ケガや感電のおそれがあります。
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ● 次の人は、使用前に医師に相談してください。 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 心臓に障害のある人 ◎ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ◎ 骨粗しょう（鬆）症の人やせきつい（脊椎）の骨折、急性〔とう（疼）痛性〕疾患の人 ◎ 治療部位に創傷のある人 ◎ 体温 38℃ 以上（有熱期）の人 例：急性炎症症状〔けん（倦）怠感、悪寒、血圧の変動など〕の強い時期。衰弱しているとき ◎ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ◎ ベースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ◎ 背骨（脊椎）に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ◎ かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ◎ 悪性のしゅよう（腫瘍）のある人 ◎ 安静を必要とする人 ◎ 内臓疾患（胃炎、腸炎、肝炎）などの急性症状のある人 ◎ 医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ◎ リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人 ◎ めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ◎ 捻挫、肉離れなどの炎症性の人 ◎ 腱鞘炎、またはそのおそれのある人 ● 特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。 ● 使用しても、効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。

安全上の注意



 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● この取扱説明書の使用法以外の使い方をしないでください。また、本機と他の治療器や電気毛布などを併用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → 一体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。 ● 人をのせたまま移動しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → 本体の転倒により、事故やケガの原因になります。 ● フットレストを上げたまま椅子に座らないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本体の転倒により事故やケガの原因になります。 ● 付属品以外のものを用いて本機を使用しないでください。
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグをコンセントに差し込む前に POWER（主電源）スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> → 故障や感電の原因になります。 ● 電源プラグおよびコネクタは確実に最後まで差し込んでください。一感電やショート・発火の原因になります。 ● ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。 ● ご使用前には背もたれを完全に起こし体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。 <ul style="list-style-type: none"> → はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。 ● 安全のために、もみ玉の位置を確認した上で、体をねじらず背骨が左右のもみ玉の間にくるように、ゆっくりと座ってください。 ● 椅子に腰掛けたり、椅子から立ち上がるとき以外は、フットレストの上にいる、立つ、座る等の行為はしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → 転倒による事故やケガ、故障の原因になります。 ● しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。




ご使用時の注意点

 警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードやリモコンのコードを本体に巻きつけたり、本体の脚で踏んだりしないでください。また、電源コードやリモコンのコードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → コードが破損し、火災や感電の原因になります。 ● 本体やリモコンに水などをこぼさないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → 感電やショート・発火の原因になります。 ● お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを、本体の上や本体の周辺（背もたれの後ろや座・フットレストの下など）で遊ばせたり、本体の上のせたり、座らせたりしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → 事故やケガの原因になります。 ● 椅子に2人以上座ってのご使用はおやめください。特に小さなお子様（乳児など）を抱きかかえてのご使用はおやめください。 <ul style="list-style-type: none"> → 事故やケガの原因になります。 ● ぬれた体で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → 感電や故障の原因になります。 ● 布地が破れた状態では使用せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。 <ul style="list-style-type: none"> → 事故やケガ・感電の原因になります。修理は『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。 ● リクライニングするときは、本体下部の稼働部分に手や足、物をはさまないようにしてください。 <ul style="list-style-type: none"> → 手や足、物のはさまれ、事故やケガ、故障の原因となります。 ● フットレストを手で持ち上げた状態で急に手をはさまないでください。
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ● 背もたれを倒すときやフットレストを下げるときには、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろやフットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。




安全上のご注意

ご使用時の注意




 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●素肌では使用しないでください。 ●マッサージおよび椅子としての目的以外には使用しないでください。 →事故やケガの原因になります。 ●頭部、胸部、腹部、関節部（ひじ、ひざなど）には使用しないでください。また、もみ玉の間に手や足、腕などを入れないでください。 →気分が悪くなったり、ケガの原因になります。首筋などには柔らかいタオルを当てて強い刺激を避けてご使用ください。 ●もみ玉が上下する部分や、背もたれ、座、フットレストの下や可動部に手や足を入れないでください。また、髪飾り、ネックレス、腕時計、プレスレット、指輪などのかたい物をつけて使用しないでください。→ケガの原因になります。 ●フットレストは脚部以外には使用しないでください。→ケガの原因になります。 ●本機を無人で動作させないでください。 →事故やケガの原因になります。



 注意	
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ●緊急時や動作中に異常を感じたときは、リモコンの〔急停止〕ボタンを押して、動作を停止させてください。 ●使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください。 ●マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。 →強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。 ●パッドをはずしてマッサージしないでください。 →ケガの原因になります。 ●マッサージ中は眠らないように注意してください。 →ケガの原因になります。 ●マッサージは、1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。 →長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。1日当たりのマッサージは、通常30分程度を目安にして時間をあけてご使用ください。 ●脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。 →無理に入れようとすると、故障の原因になります。
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> ●停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止してPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。 ●落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止して、POWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止してPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に点検・修理を依頼してください。 →感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

ご使用後や使用しないときの注意

 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●使用後は必ずPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。 ●電源コードは本機以外では使用しないでください。 ●本機を使用後は、リクライニングは、必ず元に戻してください。 ●使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。 ●本機に物を載せないでください。
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。 →感電やショートによる火災の原因になります。 ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 ●ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 →ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。

その他の注意点

 警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●本体の上に立たないでください。座部以外に座るなどして、上から強い衝撃を与えないでください。 →転倒による事故やケガ、故障の原因になります。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●機器が故障した場合は、勝手に修理せず、販売店または『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に連絡してください。 ●電源コードが破損した場合、危険ですので電源コードの交換は『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に依頼してください。 ●機器は改造しないでください。 →火災や感電、ケガの原因になります。

 注意	
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ●他の人に譲渡、貸与するときは、本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡しください。

お願い

- 製品及び付属品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

主な特長と効能・効果

特長

デザインマッサージチェア登場

従来のマッサージチェアのイメージを一新する、温かみのある曲線のフォルムを生かしたデザインチェアです。お部屋に置きやすいコンパクト・軽量を実現し、より生活にフィットするマッサージチェアです。キャスターで移動も楽々です。

寝心地にこだわった リクライニング角度

マッサージするときの気持ちよい寝心地にまでこだわったリクライニングポジション。脚は高く上げてリラックスできる状態に、上半身は負担の少ないように身体の湾曲にフィットする形状です。(リクライニング角度 124° ~ 152°)

指圧点自動検索センサー搭載

コース開始時に、センサーにより人それぞれ異なる指圧点を見つけ出します。押すべき場所を見つけ出し、的確にマッサージを行います。

首から太もも付近まで届く、 もみ玉100cmストローク

コンパクトサイズのデザインチェアながら、当社の従来のもみ玉可動範囲よりも30cm以上拡大し、100cmのロングストロークを実現。もみほぐしたかったお尻の下の太もも付近まで届いて、コリ固まって疲れたお尻周りをしっかりマッサージすることができます。

脚スッキリ！グッと掴む脚もみ

脚部分はエアバッグでグッと圧迫し、血行を促進します。指圧パッドを入れればさらにピンポイント刺激も可能です。

骨盤・お尻をほぐす —エアともみの合わせ技—

左右片側12cmふくらむ腰エアセルが骨盤全体をホールドマッサージ。しかも、お尻の下まで届く100cmのもみ玉ロングストロークでもみほぐす合わせ技。骨盤全体がほぐされる新感覚のもみ心地が気持ちいいです。

くつろぎポジションボタン搭載

ソファとして使うときに最適な角度にワンボタンで設定します。テレビを見たり読書をするときにおすすめです。

使いやすい、シンプルリモコン

ワンボタンで操作可能なおまかせコースをはじめ、文字も大きく、どなたでも簡単に操作することができます。アームレストのサイドに左右取りつけ可能なポケットへ収納することができます。

使用目的・効能または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。



- 疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- 血行をよくする ●筋肉のコリをほぐす

※本機のリモコン等に「指圧」の文言を使用しておりますが、本機の効能または効果に指圧の代用は含まれておりません。

各部の名称とはたらき

本体

各部の名称とはたらき

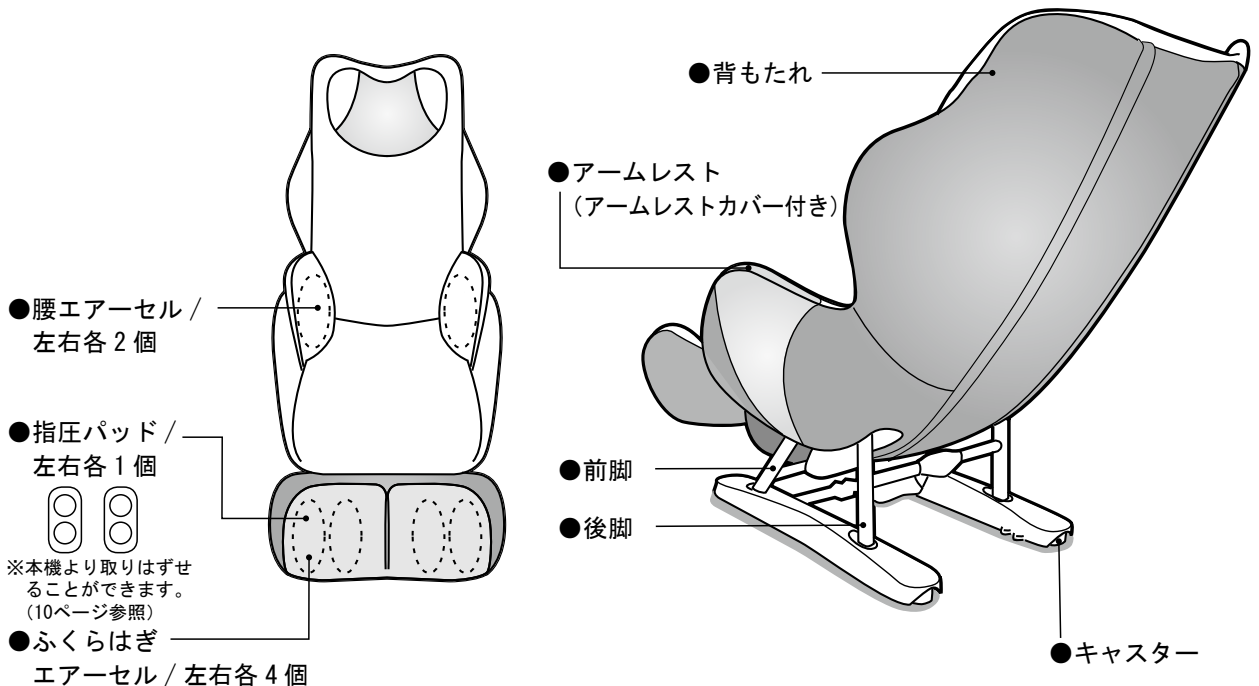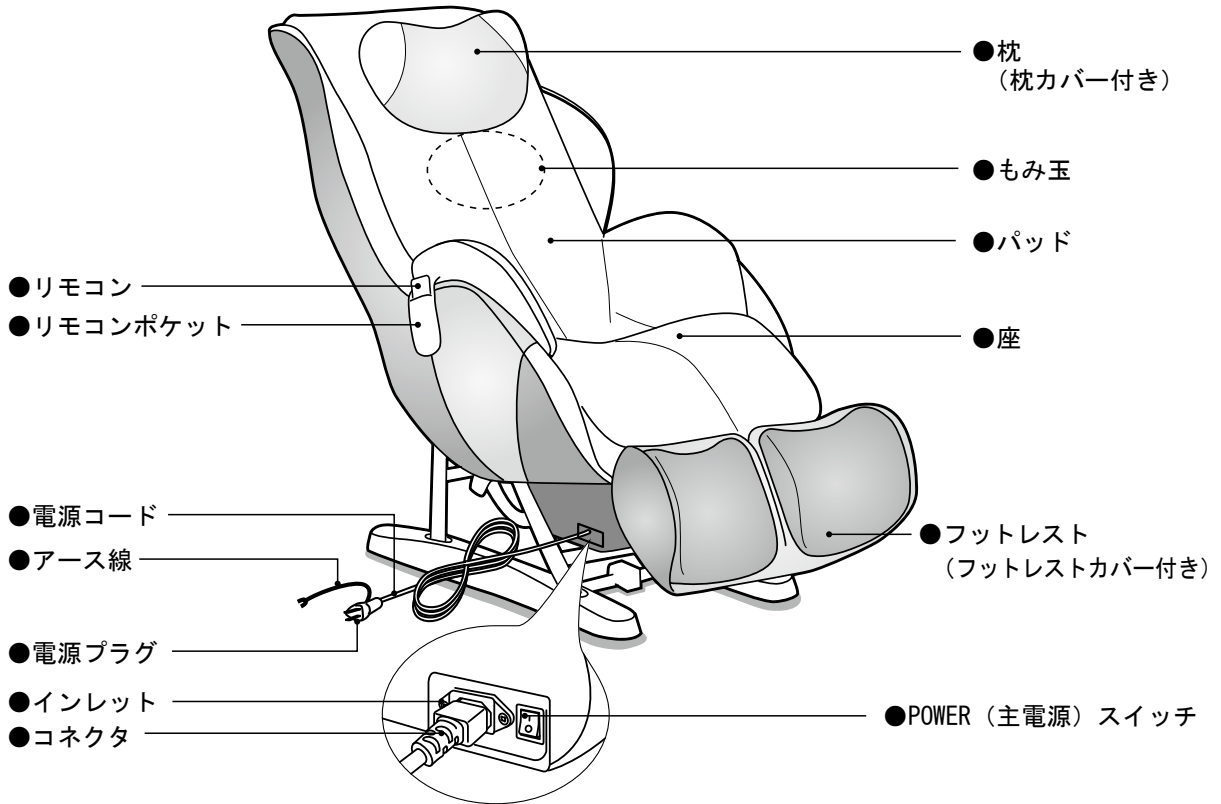

リモコン

入/切ボタン


リモコンの電源の「入」「切」を行います。
動作中に押すともみ玉が収納位置まで戻ってから停止します。
リモコンの電源が「入」の状態では緑色、「切」の状態ではオレンジ色に点灯します。

指圧点検索表示ランプ

指圧点の検索と検索完了をランプでお知らせします。

もみ位置調節ボタン

指圧点検索時の肩位置の調節や、お好みコース中のもみ玉の位置の調節に使用します。

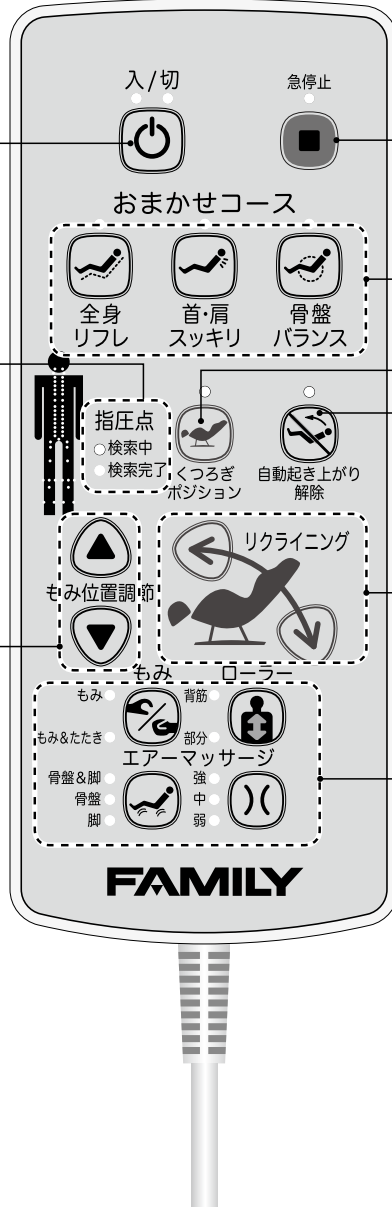

急停止ボタン

緊急時や動作中に異常を感じたときに押してください。その場で動作が停止します。急停止中はランプが点滅します。

おまかせコースボタン

各ボタンでコースを選択できます。

くつろぎポジションボタン

リクライニング角度をくつろぎポジションにします。

自動起き上がり解除ボタン

自動起き上がり解除のON/OFFの切り替えができます。

リクライニングボタン

リクライニング角度を調節します。

お好みコースボタン

もみ、もみ&たたき、ローラー、エアーマッサージの基本となる動作を選択できます。

各部の名称とはたらき



警告

- リモコンに水などをこぼさないでください。
- ぬれた手で操作しないでください。



注意

- リモコンの上に座ったり、リモコンを落としたり、踏んだり、リモコンのコードを強く引っ張ったりしないでください。
- 先のとがったものやかたいものでボタンを押さないでください。→破損の原因になります。

ご使用前に

- この製品は、背もたれが倒された状態で梱包してお届けしています。ご使用前には、必ず背もたれを起こしてください。
- 冷えきった室内の温度を上げて使用するときは、室温を急に上げず、徐々に上げてください。本機を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1時間ほど待ってから使用してください。
→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。

設置場所について


- リクライニングをしたときに背もたれ側は後方に約10cm動きます。後方へのスペースは更に3cm以上確保してください。
- リクライニングした時にフットレスト側は前方に約7cm動きます。

⚠注意

- 浴室やサウナなど、湿気の多い場所では使用しないでください。
- 床面の水平な場所に置いて使用してください。
- ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所(40℃以上)では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。
- タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。

- 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。(ホットカーペットは敷かないでください。)
- 重量物ですので、下ろすとき床面を傷つけないように注意してください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。
- 体重100kgの人が座った状態で1cmあたり約2.4kgの荷重がかかります。


ご使用前に

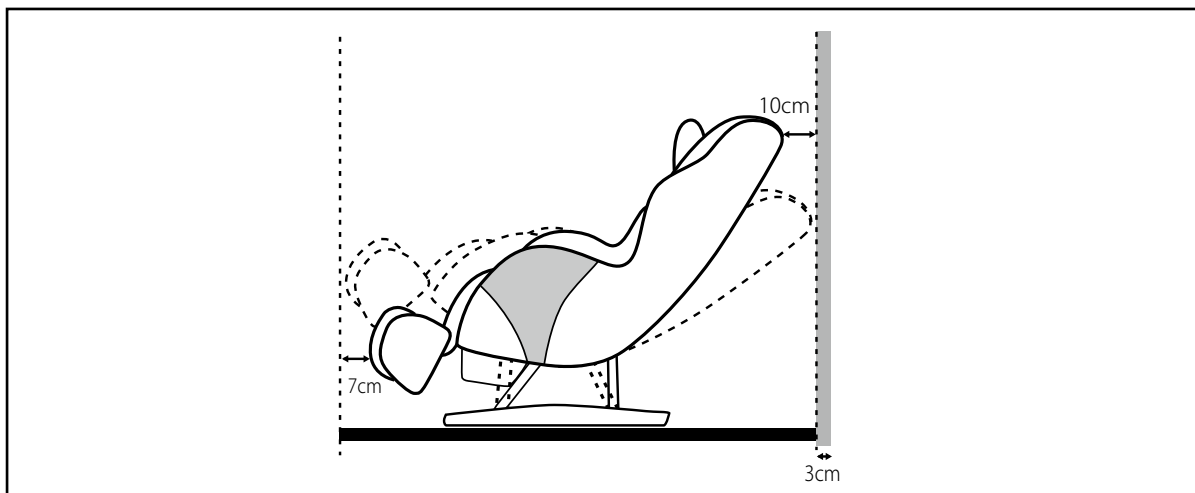

同梱物の確認

梱包箱には本体と同梱物が入っていることを確認してください。


本体

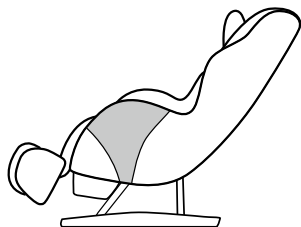

同梱物



取扱説明書(本誌)

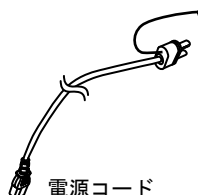

電源コード




リモコンポケット


※お届けのときには、電源コードは本体に付属しています。

搬入 / 移動の仕方

移動の際はPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグ及びアース線をコンセントから抜き、電源コードのコネクタをインレットから抜いてください。

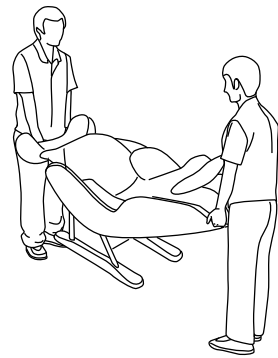キャスターで移動する場合	持ち上げて運ぶ場合
リクライニングを起こし、背もたれ上部を持って前側を浮かせ、キャスターで移動してください。	リクライニングを倒し、背もたれ上部とフットレストの前を持って持ち上げて移動してください。
	


- 重量物ですので搬入移動時には腰など痛めないようにご注意ください。
- リモコンがついていますので、移動時に落とさないよう注意してください。

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 人をのせたまま移動させないでください。 ● 移動の際は、POWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグ及びアース線をコンセントから抜き、電源コードのコネクタもインレットから抜いてください。 →電源コード、アース線が破損し、火災や感電の原因になります。
---	---


布地の確認


ご使用前には次の手順に従って布地の破れがないか確認してください。

①パッド上部のファスナーを開けてください。

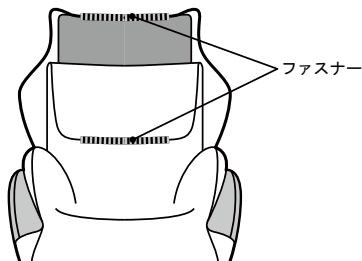

②パッドの横（片側）のファスナーを開け、本体布地に破れがないか手をあてて確認します。

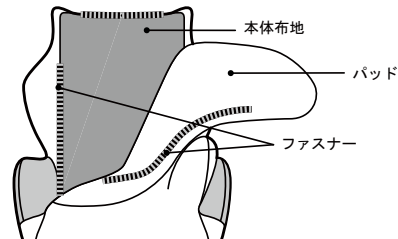


 注意	<ul style="list-style-type: none"> ● ご使用前には必ず図のようにして本体布地全体が破れていないか確認してください。またその他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご連絡ください。本体布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。
---	---


リモコンポケットの取付け方

付属のリモコンポケットについているマジックテープをはがし、下図のようにアームレスト（右）もしくはアームレスト（左）に取付けてご使用ください。

①本体右側の腰エアースルをめくります。

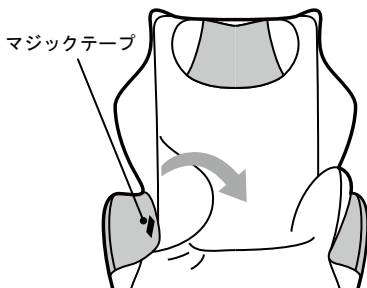


②リモコンポケットをマジックテープで貼り付け、外側にたらしめます。

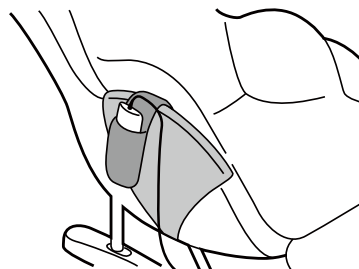


ご使用前に



電源コードの取り付け方

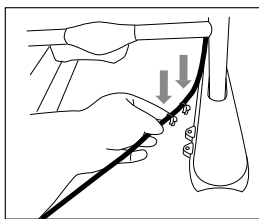

①電源コードについている、電源コード固定具を本体右後部の脚ベースにある挿入部に差し込みます。

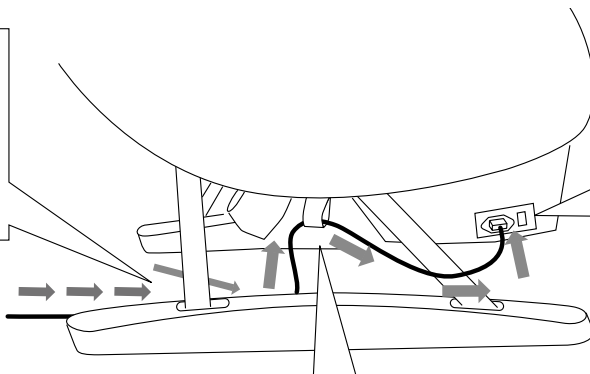

②電源コードのコネクタを本体中央部にある、帯状のベルトに通します。この時に、電源コードが絡まらないように気をつけてください。

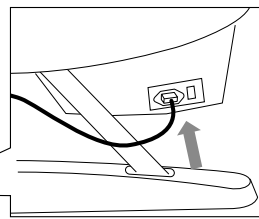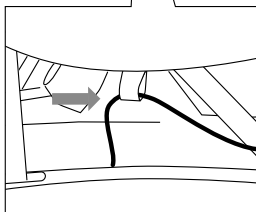

③電源コードのコネクタを本体右前部のインレットに差し込みます。

ご使用前に

アースの取付け方


万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。

①電源コンセントにアース端子がある場合
電源プラグから出ているアース線を、電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでないかときどき点検してください。

②電源コンセントにアース端子がない場合
お買い上げの販売店にご相談ください。


電源コードは、必ず本機器に付属のものをご使用ください。とくに、電源コードのプラグ部にアース線がついていないものは万一の感電を防ぐことができませんので絶対に使用しないでください。

イラスト

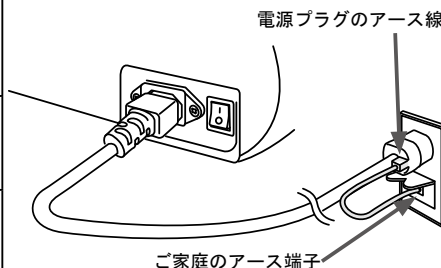


主電源の入れ方

①電源コードのコネクタを本体右前部のインレットに差し込みプラグをコンセントに差し込みます。

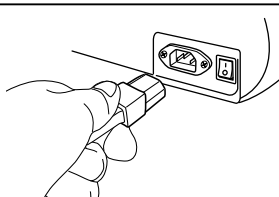

②本体右前部の POWER (主電源) スイッチを「ON」にします。

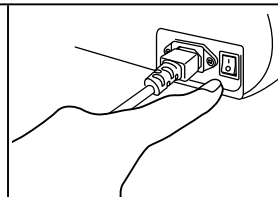


※もみ玉が途中で止まっているとき POWER (主電源) スイッチを「ON」にすると、もみ玉は自動的に収納位置 (背もたれ上部) まで移動して停止します。

警告	<ul style="list-style-type: none"> ●変圧器を用いた使用はしないでください。 →故障や感電の原因になります。 ●日本国外では使用しないでください。 →故障や感電の原因になります。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをコンセントに差し込む前に POWER (主電源) スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。 ●電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。 ●ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。

カバー類の取り外し方



枕カバー

- ① 枕を本体から取りはずす。
- ② 枕の帯状の部分をカバー中央開口部から抜く。枕をカバーの側面開口部から出す。

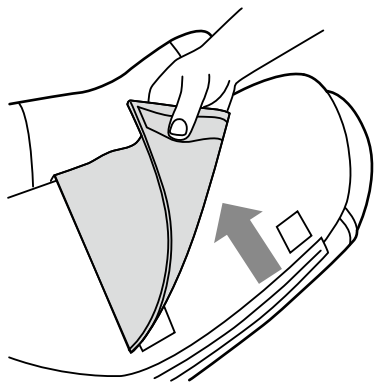


アームレストカバー

- ① 前脚のマジックテープを取りはずす。
- ② 本体の腰エアセルをめくり、アームレストカバーのマジックテープを取りはずす。

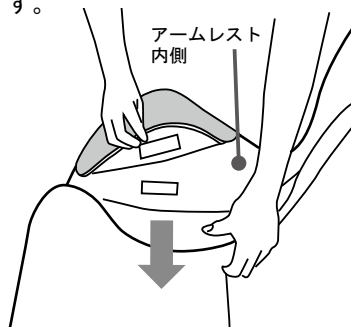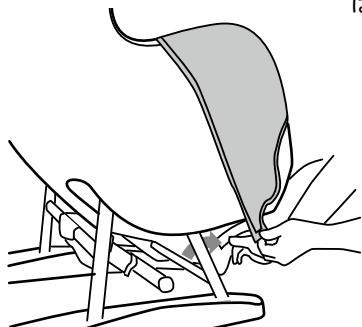


アームレストカバーの左右の見分け方

左アームレストカバーは、下方マジックテープが右側にあります。
右アームレストカバーは、下方マジックテープが左側にあります。

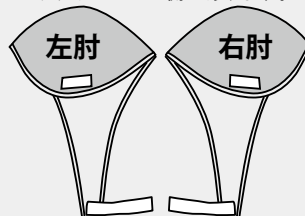

フットレストカバー

ふくらはぎエアセルを引き抜きながら取りはずす。

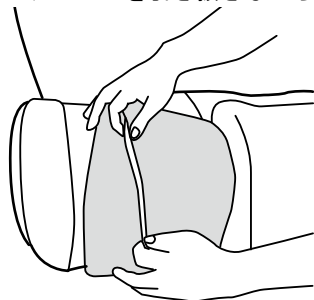

※フットレストカバーを取りはずすと、フットレストについている指圧パッドを取りはずせません。マッサージを弱くしたい場合は、フットレストのポケットから抜いてください。

カバー類の取り外しかた

椅子の調節

椅子の座り方



もみ玉は通常、背もたれの上部に左右に広がって引っ込んだ状態になっています（収納状態）。安全のため、もみ玉の位置を確認し、上記以外の場所にもみ玉がある場合はすぐに座らず POWER（主電源）スイッチを入れて、もみ玉を収納状態に戻してから、ゆっくりと椅子の中央に座ってください。

⚠️注意

- フットレストを上げたまま椅子に座らないでください。→フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本体の転倒により、事故やケガの原因になります。
- ご使用前は背もたれを完全に起こし、体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。

枕の調節

枕は位置を調節して使用することでマッサージ中に頭を楽に、自然な位置にすることができます。

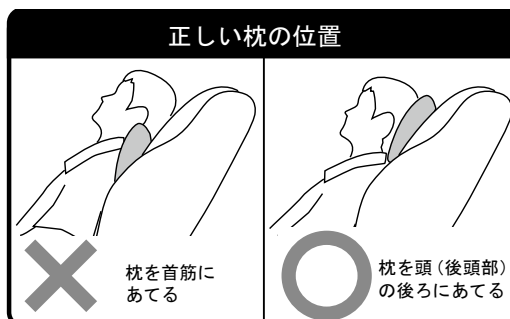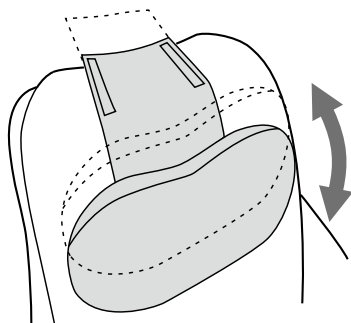

- 枕は枕を上下するだけで位置の調節ができます。あらかじめ枕を頭の高さに合わせてからマッサージを行ってください。
- 枕は正しい位置でご使用ください。位置によっては、指圧点自動検索がうまくいかない場合があります。

リクライニングの使い方

上下の調節

■背もたれを起こす場合

リクライニングボタンの上側のボタンを押すことで背もたれを起こすことができます。


■背もたれを倒す場合

リクライニングボタンの下側のボタンを押すことで背もたれを倒すことができます。



リクライニングの可動範囲

リクライニングは背もたれとフットレストが連動して上下動作します。

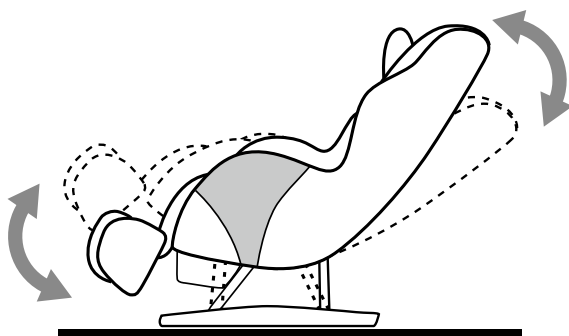

長押し機能

リクライニングが動いている途中で軽い揺れを感じる場合があります。

これは、リクライニングが動いている最中に重心移動し、発生するもので、問題ありません。

ボタンをおよそ2秒間長押しするとリクライニングの起こす（倒す）の動作を自動※でおこないます。途中で止める時は再度ボタンを押してください。

※背もたれ、フットレストは最大まで動作後、停止します。

■本体右前部の POWER（主電源）スイッチが「ON」になっていればリクライニングの上下調節がご使用になれます。

⚠️警告

- 背もたれを倒すときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろに体や物をはさまないようにしてください。

使い終わったら

周囲に注意しながら、リクライニングを完全に起こしましょう。
本体右前部の POWER（主電源）スイッチを「OFF」にしましょう。
待機電力がかからず節電（エコ）にもなります。



注意

- 使用後は必ず POWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
→お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。
- 使用後は、必ず背もたれを完全に起こし、フットレストを完全に下ろしてください。
- 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- コード類に引っかかって転倒しないようにしてください。

コースの種類と特長

おまかせコース

あらかじめ設定されたメニューにより、目的・用途に応じたコースが簡単に選べます。

全身リフレコース

全身くまなくマッサージします。疲労回復におすすめです。

首・肩スッキリコース

首から肩甲骨周りまでの僧帽筋全体をくまなく集中マッサージします。
デスクワークなどでの首肩の疲れにおすすめです。

骨盤バランスコース

骨盤まわりを横からエアースルで押しながら、下からもみ玉で立体的にほぐします。普段動かすことが少ない骨盤部分を心地よく動かします。

お好みコース

お好みの機能を組み合わせることができます。また、強さ（エアーマッサージのみ）、上下運動など、マッサージ動作の調節も行えます。

もみ

もみ&たたき

背筋ローラー

部分ローラー

エアーマッサージ



注意

- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。
→強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れしないでください。
また、髪飾り、ネックレス、腕時計、プレスレット、指輪などのかたい物をつけて使用しないでください。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れしないでください。
- マッサージの使用は1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。
1日当たりのマッサージは通算して30分程度を目安にしてください。

おまかせコース

操作方法

1 「入/切」ボタンを押します。
5分間入力がなければ、自動的に電源が切れます。

2 お好きなコースのボタンを押します。
リクライニングが最大まで倒れます。その後、指圧点検索中のランプが点灯し、指圧点の検索を行います。
指圧点
● 検索中
● 検索完了

【お願い】
深く椅子に腰かけ、楽な姿勢で枕に頭を置いてください。体が浮いていると正確に指圧点を検索できません。

3 肩位置調節ができます。
指圧点検索後、検索中ランプが点滅している間、肩の位置を調節することができます。調節しなくてもよい場合はそのままにしておきます。
● 肩位置調節について
肩位置が合っていないときは、検索中ランプが点滅している間に肩の位置を調節してください。

▲	押している間もみ玉が上に動き続けます。
▼	押している間もみ玉が下に動き続けます。

高い
適度な高さ
低い

4 コースが始まります。
指圧点の検索が完了すると、検索完了のランプが点灯し、コースが始まります。コース動作中はエアの強さの調節または解除ができます。コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切り替えられます。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。
指圧点
○ 検索中
● 検索完了

エアーマッサージ
【設定と解除】
ボタンを押すごとに骨盤&脚 → 骨盤 → 脚 → 切の順に切り替えることができます。

【強さの調節】
ボタンを押すごとに中 → 強 → 弱の順に切り替えることができます。(コース開始時は中に設定されています。)

5 コースが終了します。
もみ玉が収納位置（背もたれ上部）まで戻ります。その後リモコンの電源は切れますが、リクライニングの上下調節はご使用になれます。

おまかせコース

自動起き上がり解除について

コース終了時に自動で起き上がる機能の ON/OFF ができます。

※各コースの開始時は「ON」に設定されています。

※動作中 (ON) はランプが消灯し、解除中 (OFF) はランプがオレンジ色に点灯します。




おまかせコースの注意点

おまかせコースはコース選択時にリクライニングが自動で倒れます。ご使用時には後ろ側に人や障害物がないことを確認し、使用中に人が近づかないよう注意してください。

お好みコース

お好みコースの動作説明

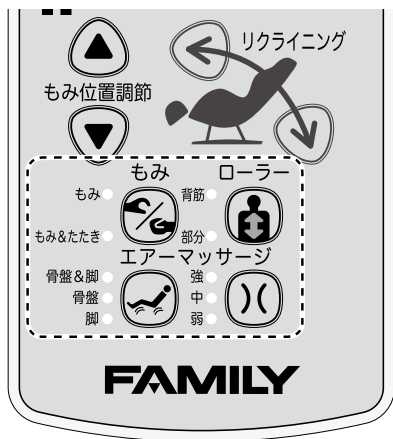

①～③のマッサージメニューを組み合わせることができます。

① もみ、もみ&たたき

ボタン	内容
	もみ、もみ&たたきを行います。 ボタンを押すごとにもみ⇒もみ&たたき⇒切と切り替えることができます。 選択した動作のランプが点灯します。

② ローラー

ボタン	内容
	上下運動のみで背筋のばし、部分背筋のばしを行います。(指圧点を検索します) ボタンを一度押すごとに背筋ローラー⇒部分ローラー⇒切と切り替えることができます。 選択した動作のランプが点灯します。

③ エアーマッサージ

ボタン	内容
	エアーマッサージを行います。 ボタンを押すごとに骨盤&脚⇒骨盤⇒脚⇒切と切り替えることができます。 選択した動作のランプが点灯します。
	エアーマッサージの強さの調節を行います。 ボタンを押すごとに中⇒強⇒弱と切り替えることができます。 選択した動作のランプが点灯します。

もみ玉の位置の調節



もみ、もみ&たたきを選択している時
マッサージしたい位置にもみ玉の位置を調節できます。

▲	押している間、もみ玉が上に動き続けます。
▼	押している間、もみ玉が下に動き続けます。

背筋ローラーを選択している時

上昇と下降が切り替わります。

▲	下降中に押すと上昇に切り替わります。
▼	上昇中に押すと下降に切り替わります。

部分ローラーを選択している時

部分ローラー範囲の中心位置が調節できます。

ボタンをはなした位置を中心に動作します。

▲	押している間、もみ玉が上に動き続けます。
▼	押している間、もみ玉が下に動き続けます。

●もみ玉の位置が最上部(最下部)にあるときに、さらに上昇(下降)を選択すると「ブブブ」と警告音が鳴ります。

注意! 一度も、もみやローラーを選択していない場合、もみ位置調節ボタンを押しても動作しません。

お好みコース

操作方法

- ① 「入/切」ボタンを押します。
5分間入力がなければ、自動的に電源が切れます。
- ② お好きなマッサージのボタンを押します。
もみ、ローラー、エアーマッサージをお選びください。
- ③ 肩位置調節ができます。
(ローラー選択時)
指圧点検索後、検索完了ランプが点滅している間、肩の位置を調節することができます。調節しなくてもよい場合はそのまましておきます。
- ④ コースが始まります。
ローラー選択時には指圧点の検索が完了すると、検索完了のランプが点灯し、コースが始まります。コース動作中でも、動作の変更やエアの強さの調節ができます。
- ⑤ コースが終了します。
もみ玉が収納位置（背もたれ上部）まで戻ります。
その後リモコンの電源は切れますが、リクライニングの上下調節はご利用になれます。

お好みコースの指圧点検索について
もみやエアーマッサージを選択したあと、ローラーを選択すると、動作を一時中断し、指圧点検索を行います。
(一度でも指圧点を検索している場合、検索は行いません)

お好みコース

コースの変更と途中終了

コースの変更と途中終了

コース変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切り替えられます。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

コースの途中終了

途中で終了する場合は、動作中に「入/切」ボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。

緊急時や動作中に異常を感じたときは、「急停止」ボタンを押してください。その場で動作が停止します。安全確認後「入/切」ボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。

故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）までご相談ください。

状態	原因と直し方	
もみ玉が上部へ移動して止まってしまった。	オートタイマー機能により、マッサージ終了時にもみ玉が体に干渉しないように上部へ移動するようになっています。	構造上発生するもので、故障ではありません。
マッサージ中にもみ玉が途中で止まる。	もみ玉に必要以上の力が加わると、動きが止まることがあります。体を浮かせぎみにするか、リクライニングを軽く起こしてご使用ください。（特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。）	
リモコンの急停止ボタンとコースのボタンが点滅している。	本体右前部のPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、5秒ほどしてから電源スイッチを入れ直してください。	点検後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。
指圧点自動検索がうまくいかない。 (もみ玉が肩の高さに合っていない。)	椅子に深く腰かけて頭を枕にあててください。指圧点検索直後に肩位置調節ボタンで肩位置を調節できます。	
リモコンのボタンを押しても正常に動作しない。または電源が入らない。	次の点検を行ってください。 ①電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。 ②本体右前部のPOWER（主電源）スイッチは「ON」になっていますか。 ③ボタンを2つ同時に押しませんか。	
電源コード、プラグが異常に熱い。	ただちに使用を中止してください。	

サービスマン以外は分解や修理は行なわないでください。

お買い上げの販売店、または『修理に関するお問い合わせ窓口』までご相談ください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら

動作時の音

構造上やむを得ず発生するもので、性能などに影響はありません。

動作中は下記のような作動音がします。

たたきを伴う動作時の音	ゴトゴト音
もみ動作のもみ玉と布のすれる音	キュッキュウ音 ギュウギュウ音
もみ玉の昇降、もみ動作時の音	ウィーン音
リクライニング昇降時の音	ウィーン音

もみ玉昇降時に、もみ玉が前後に動作する事があります。構造上やむを得ず発生するもので、性能などに影響はありません。

故障かな？と思ったら

安全のために商品の点検を

長期ご使用の場合は商品の点検を

こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、動作しないときがある。
- 電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
- 自動的にタイマーが切れないときがある。
- その他の異常や故障がある。

左記のような症状があれば、故障や事故の防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店または、『修理等に関するお問い合わせ窓口』に点検をご依頼ください。

愛情点検



安全にお使いいただくために

本体布地は消耗品であり、耐用年数は3年です。(使用条件：1日15分コースを2回、毎日使用した場合)。安全にお使いいただくために、お買い上げ後、耐用年数が過ぎる前にお買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』での定期点検をおすすめします。ただし使用条件が上記と異なる場合には、耐用年数が変わります。お買い上げ後5年ほど経ちましたら、安全のために椅子全体の点検をおすすめします。点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』にご相談ください。

安全のために商品の点検を

Q&A

Q ホットカーペットの上に椅子を置いてもいいですか？

A 火災のおそれがありますのでホットカーペットの上に置くのはおやめください。

椅子は重量物ですのでホットカーペットの発熱体を傷め、そこから発火するおそれがあります。

Q フローリングや床暖房の上に設置しても大丈夫ですか？

A 設置しても大丈夫です。

ただし、床をきずつけることがあるかもしれませんので、カーペットなどを敷き、その上に椅子を設置することをお勧めします。(畳等も同様です)

Q マッサージをより強くするにはどうすればいいですか？

A 次のことを行なってみてください。

- 深く腰かけ背もたれに体重がかかるように座る。
 - 背もたれを倒す。
- 以上の方法でより強くマッサージを行う事ができます。

Q マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか？

A 次のことを行なってみてください。

- 背もたれを起こす。
- 以上の方法でより弱くマッサージを行う事ができます。

Q 体重が重くても大丈夫ですか？

A 体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。

体重100kg以上の方がご使用になる場合は、少し体を浮かせぎみにしてご使用ください。

Q コースが終了したときに起き上がるリクライニングを止めることができますか？

A はい。できます。

「自動起き上がり解除ボタン」を押すことでコース終了時の自動起き上がり動作を行わないようにすることができます。

Q 身長が150cm未満の人や180cm以上の人でも使えますか？

A お使いいただけます。

指圧点検索の際に肩位置が合わない場合がありますので、以下の方法でご使用することをおすすめします。

- 身長の高い人…リクライニングを起こす。
- 身長の高い人…リクライニングを倒す。
- 指圧点検索後に肩の位置を調節する。

Q 誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか？

A 感電のおそれがあります。ただちに使用を中止し、次の内容に従ってください。

- 本体右前部のPOWER(主電源)スイッチを切ってください。
- 電源プラグをコンセントから抜く。

以上のことを行った上、お買い上げの販売店またはお近くの『修正等に関するお問い合わせ窓口』にご相談ください。

Q 1ヶ月の電気代はいくらですか？

A 1日15分、毎日ご使用いただいた場合、1ヶ月で約16円です。

(2012年6月現在 当社調べ)

保管とお手入れの仕方

保管の仕方

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない場所に保管してください。
- ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないようにしてください。



注意

●直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

お手入れの仕方



注意

●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

【本体布地部分のお手入れ】

■ふだんのお手入れ

ほこりや軽い汚れは、やわらかい乾いた布でふいてください。

■汚れがついたとき


- ①水または中性洗剤をぬるま湯でうすめたものに、柔らかい布をひたし、よくしぼってください。
- ②布地部分をたたくようにふいてください。
- ③水を含ませた布をよくしぼってから、洗剤液をふきとってください。
- ④柔らかい乾いた布でふきとり、自然乾燥させてください。

【カバー類のお手入れ】

■手洗いする場合

- ・布地にマジックテープが接触した場合、毛羽立ちが発生する恐れがあります。お洗濯の際は、マジックテープ同士を貼り合わせ、ネット等に入れてください。
- ・移染しやすいので他のものと分けて洗ってください。
- ① 30℃以下の水に浸し、やさしく押し洗いしてください。
- ・もみ洗いは絶対におやめください。
- ・漂白成分が入っている洗剤使うと、色落ちしますので絶対におやめください。
- ②十分にすすぎ、軽く押し程度に水を切ってください。
- ③軽くしわをのばしてください。

洗濯するときの注意

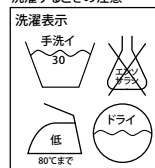

注意

●他のものに移染しやすいので洗濯後、直ちに干してください。

洗濯後、折りじわが気になるときは、アイロンがけをしてください。

(アイロン使用上の注意)

80℃を限界とした温度で行ってください。

■ドライクリーニングをする場合

クリーニング店にて、ドライクリーニングを依頼するときは、布地の傷みを防ぐため、下記のように依頼してください。

- ・ネットを必ず使用してください。
- ・ソフト洗いをを行い、タンブラー乾燥はしないでください。



注意

●ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。

【リモコンのお手入れ】

リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

●絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。→故障の原因になります。

【その他のプラスチックのお手入れ】

少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

●アルコール、その他の溶剤やみがき粉などのお手入れは、傷、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

アフターサービスについて


1. 保証書について

この製品の保証書は取扱説明書についております。保証書はお買い上げの販売店にて「販売店・購入日」などの所定事項を記入してお渡ししていますので、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。（修理の際、必要となります。）保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、この製品は日本国内専用ですので、日本国外でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外（業務用など）でご使用の場合は、保証期間中でも有料修理とさせていただきます。

2. 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、16～17ページの「故障かな？と思ったら」をよくお読みください。点検後、まだ異常がありましたらお買い上げの販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

- 1) お名前・ご住所・お電話番号
 - 2) 販売名・型番…この取扱説明書の21ページの仕様欄、または、パッド上部のファスナーをはずしたところにある社銘板をご覧ください。
 - 3) 製造番号…パッド上部のファスナーをはずしたところにある社銘板をご覧ください。
 - 4) お買い上げ日
 - 5) 故障の状態（できるだけ詳しくお知らせください。）
- 例）リモコンのボタンが右図のように点滅している場合は、点滅しているコースの名称をお知らせください。

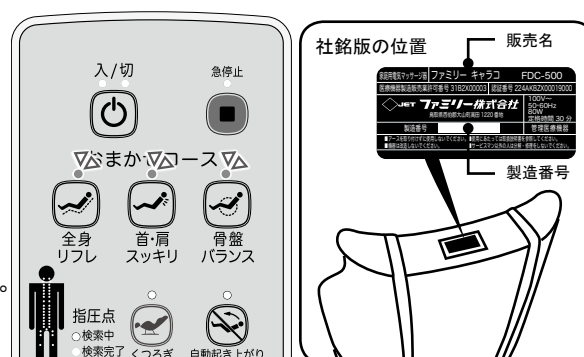

- 保証期間中は
修理の際、保証書をご提示ください。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間が過ぎている場合は
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
弊社はこの電気マッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。（ただし、縫製部品は除きます。）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 日本国外でご使用になられた場合、修理をお断りする場合があります。
- アフターサービスについてご不明な点は
お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にお問い合わせください。
- 販売店にご依頼がなれない場合は『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご連絡ください。

仕様

販売名	ファミリー キャラコ FDC-500		
使用電源	AC100V	定格周波数	50-60Hz
定格消費電力	80W		
定格時間	30分		
電撃に対する保護の形式	クラス0 I 機器		
性能	もみ速さ	最小約5回/分 最大約20回/分	
	たたき速さ	最小約80回/分 最大約300回/分	
	上下移動速さ	約48秒で1往復(約3.2~4.0cm/秒)	
	マッサージ範囲	約100cm(部分ローラーのとき約15cmの範囲で自動反復)	
	エア圧力	約31kPa	
コース	おまかせコース3種類 お好みコース7種類(一部指圧点自動検索機能付き)		
オートタイマー	約15~30分(自動コース時は異なります)		
リクライニング角度	水平面に対して約124°~約152°無段階(電動リクライニング)		
本体の寸法	幅約69cm×奥行き約135(156)cm×高さ約103(72)cm 奥行き・高さの()内の数字は最大リクライニング及びフットレスト水平時		
重量	約48kg		
外装布地	本体布地(ポリプロピレン)カバー(ポリエステル)		
付属品	電源コード、リモコンポケット		
包装	1梱包/1台		
類別	機械器具(77)バイブレーター		
一般名称	家庭用電気マッサージ器(JMDNコード34662000)管理医療機器		
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003		
医療機器認証番号	224AKBZX00019000		
製造販売元	ファミリー株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地		
製造元	ファミリー株式会社		

----- (キリトリ線) -----

保証規定

- 保証期間内に万一発生した故障については修理料金を無償といたします。
 - ・修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
 - ・お買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には『修理等に関するお問い合わせ窓口』(0120-772-294)にご連絡ください。
 - ・ご転居の場合やご贈答品等で本保証書に記入のお買い上げ店で無償修理をお受けになれない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(0120-772-294)にご相談ください。
 - ・この商品は、出張修理させていただきますので、修理に際し、本書をご提示ください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - (1)お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合
 - (2)火災・天災・異常電圧などによる故障・損傷の場合
 - (3)機器を改造や修理された場合
 - (4)取扱説明書に記載の使用方法、および注意に反するお取扱いによって発生した故障・損傷の場合
 - (5)本保証書を提示されない場合
 - (6)本保証書のお買い上げ店名、およびお買い上げ年月日の未記入あるいは字句を訂正された場合
 - (7)一般家庭以外(業務用など)でご使用されていた場合
- 本保証書は日本国内において有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書を参照ください。
- 本保証書の記載内容については『修正等に関するお問い合わせ窓口』(取扱説明書に記載)にご相談ください。

修理メモ

※This warranty is valid only in Japan

〒532-0004
大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号
ファミリー株式会社
電話 06-4807-9111 (代)

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員
健康空間を創造する



ファミリー株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3(ソラー新大阪21 14階)

<http://www.family-chair.co.jp>

製品に関するお問い合わせ窓口

0120-129-011

修理等に関するお問い合わせ窓口

0120-772-294

土・日・祝を除く平日 9:00 ~ 17:00

2012年 7月 15日 (第2版) 778200101

----- <キリトリ線> -----

ファミリー マッサージ器保証書

品番	FDC-500	製造番号	
	お名前		
お客様	様		
	ご住所 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		電話 ()
お買い上げ店名 住所・電話番号			
お買い上げ日	保証期間	1年間	
	保証対象	本機	

- 正常なご使用状態(取扱説明書に記載)で万一発生した故障については、お買い上げ日から上記の期間、裏面の保証規定により、その故障の修理料金を無償といたします。
- 本保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 製造番号は、取扱説明書をご参考にいただき、かならずご記入ください。
- お買い上げ時の領収書またはお買い上げ証明書は、本書にかならず貼り付け、大切に保管してください。