

# LUPINUS

ルピナス

## 家庭用医療機器 ルピナス

FMC – LPN10000

このたびは、家庭用医療機器 ルピナスをご利用いただき、まことにありがとうございます。  
 この製品は、家庭用医療機器として開発したメディカルチェアです。疲労の回復・改善を目的としたさまざまなマッサージをお楽しみいただき、皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして末永くご愛用ください。



もくじ

■ 安全上のご注意	1
■ おもな特長	4
■ 各部の名前とはたらき	5
■ ご使用の前に	7
■ 椅子の調節	7
■ コースの種類と特長	10
■ 本体リモコン・タブレットの使い方	11
■ コース選択の方法	13
■ 健康チェックモードの使い方・各種設定の方法	18
■ Q&A	26
■ 故障かな?と思ったら	28
■ 保管とお手入れの仕方	29
■ アフターサービスについて	30
■ 仕様	31
■ お問い合わせ窓口	33

添付文書

取扱説明書

ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

日本国内専用  
 この製品は日本国外への輸出と使用を禁止しています。  
 PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE PRODUCT OUTSIDE OF JAPAN.  
 この製品に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
 よってこの製品を国外に持ち出した場合、保証及び修理対応はできませんのでご了承ください。  
 JAPANESE EQUIPMENT SPECIFICATION WARRANTY APPLIES ONLY IN JAPAN.  
 WARRANTY INCLUDING REPAIRS BY THE MANUFACTURER DOES NOT APPLY IF THE PRODUCT IS TAKEN OUT OF JAPAN.

◎「取扱説明書」は、いつでも見られるように大切に保管してください。  
 ◎この製品は、日本国内の弊社工場にて企画・開発・設計から最終組み立て、及び品質保証まで全てをおこなっております。  
 ◎この製品は、一般家庭用として設計されています。一般家庭以外（業務用等）でご使用の場合は、お買い上げの販売店または「修理等に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。

Massage  
 +  
 Medical



# 安全上のご注意



ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。








なお、各部の名前については5ページをご覧ください。

**お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。**






## 表示の種類

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。






## 図記号の種類と意味

 禁止	禁止の行為であることを示しています。
 分解禁止	分解してはいけないことを示しています。
 ぬれた手禁止	ぬれた手で扱ってはいけないことを示しています。
 禁止	風呂・シャワー室等で使用してはいけないことを示しています。
 強制	行為を強制したり指示したりするものです。
 プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
 アース取り付け	アースを取り付けることを示しています。





## ご使用場所の注意

 <b>注意</b>	
 禁止	●浴室やサウナ、湿気の多い場所では使用しないでください。 →感電や故障の原因になります。
 強制	●床面が水平な場所に置いて使用してください。 →不安定な場所では本体が転倒し事故の原因になります。
 アース取り付け	●万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。 詳しくは、別冊の設置説明書をご覧ください。
 禁止	●アース線はガス管・水道管・電話線・避雷針には絶対に接続しないでください。




ご使用前の注意点

 <b>警告</b>	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 次の人は使用しないでください。 ○ 医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓（塞栓）症、重度の動脈リゅう（瘤）、急性静脈リゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症〔皮下組織の炎症を含む〕等。○ 急性の頸椎ねんざ（むちうち症）の疑いのある人</li> <li>● 電源は交流 100V 以外では使用しないでください。 → 火災や感電の原因になります。</li> <li>● 変圧器を用いた使用はしないでください。 → 故障や感電の原因になります。</li> <li>● 電源コードや電源プラグが傷んだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいとき等は使用しないでください。 → 感電やショート・発火の原因になります。</li> <li>● マッサージの前には必ず施療部の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（P.33 に記載）にご連絡ください。施療部の布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。 → 布地が破れた状態で使用すると、ケガや感電のおそれがあります。</li> </ul>
 強制	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 次の人は、使用前に医師に相談してください。 ○ 心臓に障害のある人 ○ 糖尿病等による高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ○ 骨粗しょう（鬆）症の人やせきつい（脊椎）の骨折、急性〔とう（疼）痛性〕疾患の人 ○ 施療部位に創傷のある人 ○ 体温 38℃ 以上（有熱期）の人 例：急性炎症症状〔けん（倦）怠感、悪寒、血圧の変動等〕の強い時期。衰弱しているとき ○ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ○ ペースメーカー等の電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ○ 背骨（脊椎）に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ○ かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ○ 悪性のしゅよう（腫瘍）のある人 ○ 安静を必要とする人 ○ 内臓疾患（胃炎、腸炎、肝炎）等の急性症状のある人 ○ 温度感覚喪失が認められる人 ○ 医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ○ リウマチ症、痛風等により関節が変形している人 ○ めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ○ 捻挫、肉離れ等の炎症性の人 ○ 腱鞘炎、またはそのおそれのある人</li> <li>● 特定の病気をお持ちでない場合でも、80 歳前後になると骨粗鬆症の有病率が非常に高くなります。使用前に医師に相談してください。 → マッサージの際は、別売の緩衝パッドを使用してください。</li> <li>● 使用しても、効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。</li> </ul>
 <b>注意</b>	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● この取扱説明書の使用法以外の使い方をしないでください。また、本機と他の治療器や電気毛布等を併用しないでください。 → 体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。</li> <li>● 人をのせたまま移動しないでください。 → 本体の転倒により、事故やケガの原因になります。</li> <li>● フットレストを上げたまま椅子に座らないでください。 → フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本体の転倒により事故やケガの原因になります。</li> <li>● 付属品以外のものを用いて本機を使用しないでください。</li> </ul>
 強制	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグをコンセントに差し込む前に主電源スイッチが切れていることを確認してください。 → 故障や感電の原因になります。</li> <li>● 電源プラグおよびコネクタは確実に最後まで差し込んでください。 → 感電やショート・発火の原因になります。</li> <li>● ご使用前には別冊の設置説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。</li> <li>● ご使用前には背もたれを完全に起こし体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。 → はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。</li> <li>● 安全のために、メカの位置を確認し、収納位置にない場合は、主電源スイッチを入れ、機器が正常に動作することを確認してからゆっくり座ってください。</li> <li>● 椅子に腰掛けるときに、フットレストの上ののる、立つ、座る等の行為はしないでください。 → 転倒による事故やケガ、故障の原因になります。</li> <li>● しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。</li> </ul>



ご使用時の注意点

 <b>警告</b>	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードを本体に巻きつけたり、本体の脚で踏んだりしないでください。また、電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。 → コードが破損し、火災や感電の原因になります。</li> <li>● 本体やリモコンに水等をこぼさないでください。 → 感電やショート・発火の原因になります。</li> <li>● お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを、本体の上や本体の周辺（背もたれの後ろや座フットレストの下部）で遊ばせたり、本体の上のせたり、座らせたりしないでください。ただし、集中力アップコースに限り中学生以上のお子様を使用することができます。その場合、必ず保護者が付き添ってください。 → 事故やケガの原因になります。</li> <li>● 椅子に 2 人以上座ってのご使用はおやめください。特に小さなお子様（乳児等）を抱きかかえてのご使用はおやめください。 → 事故やケガの原因になります。</li> <li>● 布地が破れた状態では使用せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。 → 事故やケガ・感電の原因になります。修理は『修理等に関するお問い合わせ窓口』（P.33 に記載）にご相談ください。</li> <li>● フットレストを手で持ち上げた状態で急にはなさないでください。</li> </ul>
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ぬれた体で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。 → 感電や故障の原因になります。</li> </ul>
 強制	<ul style="list-style-type: none"> <li>● マッサージコース開始前やリクライニングを倒すときや起こすとき、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろやフットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。 → 事故やケガの原因になります。</li> <li>● 体や物がはさまりこまれた場合、リクライニングボタンを押して安全な位置まで戻してください。</li> </ul>



## ご使用時の注意点

<b>⚠注意</b>	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●素肌では使用しないでください。</li> <li>●マッサージおよび椅子としての目的以外には使用しないでください。 →事故やケガの原因になります。</li> <li>●頭部、胸部、腹部、関節部（ひじ、ひざ等）には使用しないでください。 →気分が悪くなったり、ケガの原因になります。首筋等に柔らかいタオルを当てて強い刺激を避けてご使用ください。</li> <li>●もみ玉が上下する部分、リクライニング等の可動部に手や足を入れしないでください。また、髪飾り、ピアス、イヤリング、ネックレス、腕時計、ブレスレット、指輪などのかたい物をつけて使用しないでください。 →ケガの原因になります。</li> <li>●アームレストは腕以外には使用しないでください。 →ケガの原因になります。</li> <li>●フットレストは脚部以外には使用しないでください。 →ケガの原因になります。</li> <li>●マッサージチェアを無人で動作させないでください。 →事故やケガの原因になります。</li> </ul>
 強制	<ul style="list-style-type: none"> <li>●緊急時や動作中に異常を感じたときは、リモコンの[急停止] ボタンを押して、動作を停止させてください。</li> <li>●使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください。</li> <li>●マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し『製品に関するお問い合わせ窓口』(P.33 に記載) にご相談ください。 →強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。</li> <li>●マッサージ中は眠らないように注意してください。 →ケガの原因になります。</li> <li>●マッサージは、1日1回にしてください。同一箇所へ連続してのご使用は5分以内にしてください。 →長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。1日当たりのマッサージは、1回程度を目安にご使用ください。</li> <li>●腕部のマッサージ中にアームレストから腕が抜けた場合、無理に腕を入れしないでください。 →無理に入れようとすると、故障の原因になります。</li> <li>●脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れしないでください。 →無理に入れようとすると、故障の原因になります。</li> </ul>
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> <li>●停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止して主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。</li> <li>●落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止して、主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。</li> <li>●動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(P.33 に記載) に点検・修理を依頼してください。 →感電や漏電・ショート等による火災のおそれがあります。</li> </ul>

## ご使用後や使用しないときの注意点

<b>⚠注意</b>	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用後は必ず主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。</li> <li>●電源コードは本機以外では使用しないでください。</li> <li>●本機を使用後は、必ず背もたれを完全に起こし、フットレストを完全に下ろしてください。</li> <li>●使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。</li> <li>●本機に物を載せないでください。</li> </ul>
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。 →感電やショートによる火災の原因になります。</li> <li>●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。</li> <li>●ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 →ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。</li> </ul>

## その他の注意点

警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体の上に立たないでください。座部以外に座る等して、上から強い衝撃を与えないでください。 →転倒による事故やケガ、故障の原因になります。</li> <li>●電源コードが破損した場合、危険ですので使用を中止してください。『修理等に関するお問い合わせ窓口』(P.33 に記載) に電源コードの交換の依頼をしてください。</li> </ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●機器が故障した場合は、勝手に修理せず、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(P.33 に記載) に連絡してください。</li> <li>●機器は改造しないでください。 →火災や感電、ケガの原因になります。</li> </ul>

## お願い

- 製品及び付属品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

# おもな特長

## 特長

新開発!

### 10.1 インチのタブレット型リモコン

マッサージのコース選択から健康管理まで、タブレット型リモコン1つで行えます。

マッサージ手技の説明や機能の調節を表示するほか、家族一人ひとりの健康状態をデータ管理し、数値に応じたアドバイスをを行います。

※付属品のタブレットの機能です。

業界初! INADA medical A.I.

### 8軸 AIメカ

家族一人ひとりの体型、筋肉の形や大きさ、その時のコりに合わせて、人工知能メカが最適な強さ・最適な時間にもみ動作を調整します。

業界初! INADA medical A.I.

### 指圧点自動検索システム

マッサージ前に、その人の体型に応じて指圧点を自動に検索します。体型や目的に合わせて効果的なマッサージを行います。

生活習慣としてマッサージをしましょう!

### リラクゼーションコース

マッサージを楽しむことを目的としたコースです。画像と音楽に加え、ナレーションも流れ、気持ちもリフレッシュできます。

プロ監修のもみ技を実現!

### プロフェッショナルコース

左右のもみバランスを自動で制御できる8軸AIメカ、新開発の「レッグ・マルチエアユニット」、「前腕・マルチエアユニット」によって、プロの施術を再現しています。

業界初! INADA medical NAVI

### 健康データの管理

日々の血圧、体重、脈拍をタブレットで管理し、数値に大きな変化があった場合は、文字と光と音でお知らせします。

業界初! INADA medical NAVI

### 月1回の家族の健康チェック

約50項目の質問への回答と血圧、体重、脈拍のデータを組み合わせて、健康チェックをタブレットで実施。家族それぞれの結果に応じた生活習慣のアドバイスをを行います。

ビックデータ活用による健康サポート INADA medical NAVI

### 内臓脂肪量測定(メタボスコア)

ヘルスグリッド社がビックデータから開発した「メタボスコア」で、身長や腕の太さから内臓脂肪の状態がわかります。

最新のマッサージプログラムへのアップデート INADA medical NAVI

### 通信ネットワークによるバージョンアップ

プロのマッサージ師とともに研究し続けるファミリーナダの最新プログラムを定期的にバージョンアップ。常に新しいマッサージプログラムを受けることができます。

健康情報の受信 INADA medical NAVI

### 健康情報をユーザーに通知

ファミリーナダから配信される、予防医学の観点から日々の健康管理に役立つ最新の医療情報を、タブレットで確認できます。

## 使用目的または効果


あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。こと。

- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- 血行をよくする
- 筋肉のこりをほぐす

※タブレット表示、付属品の名称等に「指圧」の文言を使用しておりますが、使用目的または効果に指圧の代用は含まれておりません。

# 各部の名前とはたらき

## 本 体

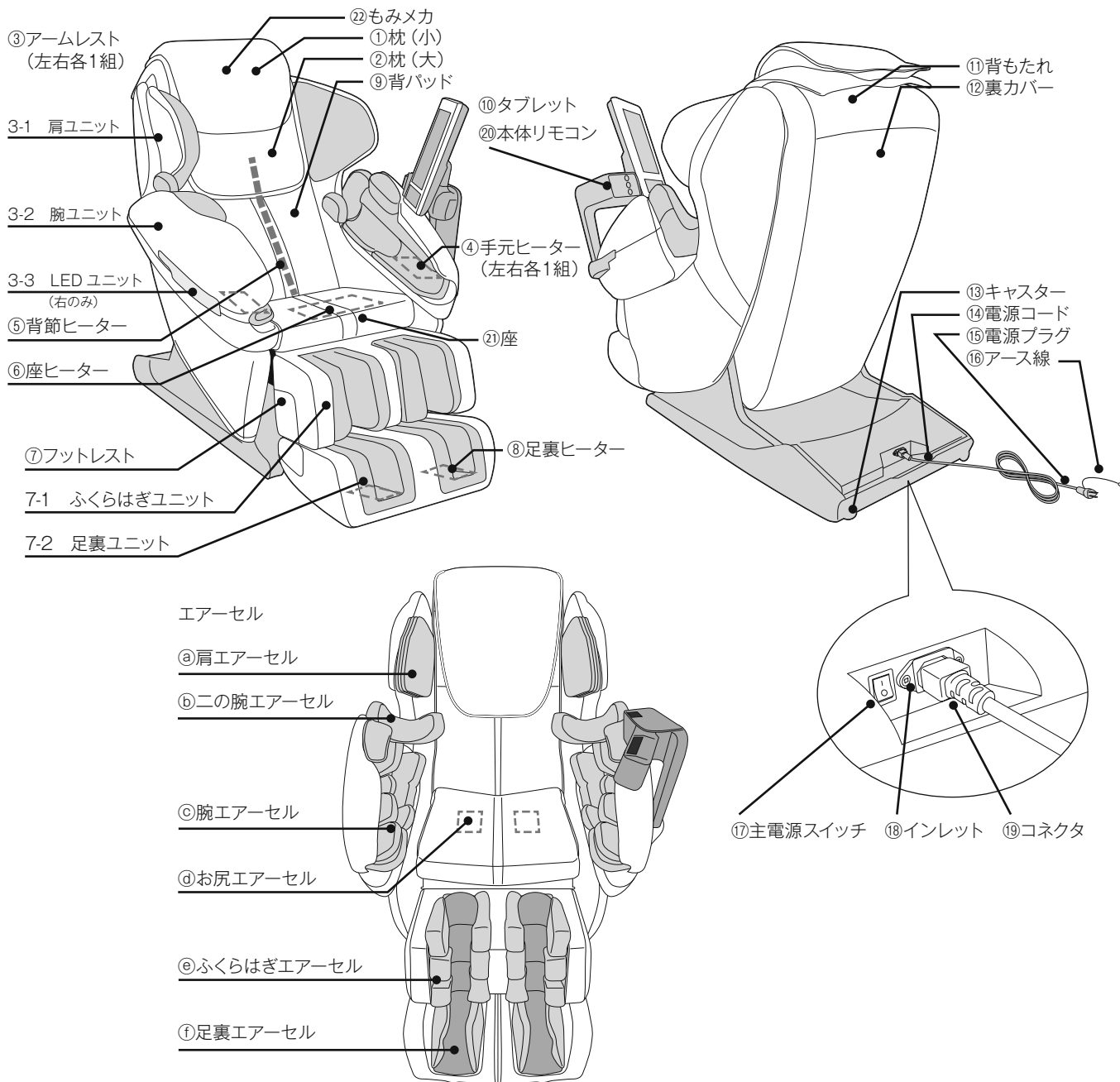


【各部の名前とはたらき】

①	枕(小)
②	枕(大)
③	アームレスト
	3-1 肩ユニット
	3-2 腕ユニット
	3-3 LEDユニット
④	手元ヒーター
⑤	背節ヒーター
⑥	座ヒーター
⑦	フットレスト
	7-1 ふくらはぎユニット
	7-2 足裏ユニット

⑧	足裏ヒーター
⑨	背パッド
⑩	タブレット
⑪	背もたれ
⑫	裏カバー
⑬	キャスター
⑭	電源コード
⑮	電源プラグ
⑯	アース線
⑰	主電源スイッチ
⑱	インレット
⑲	コネクタ

⑳	本体リモコン
㉑	座
㉒	もみメカ(通常は、背もたれ上部に収納)
エアースセル	
㉓	肩エアースセル
㉔	二の腕エアースセル
㉕	腕エアースセル
㉖	お尻エアースセル
㉗	ふくらはぎエアースセル
㉘	足裏エアースセル

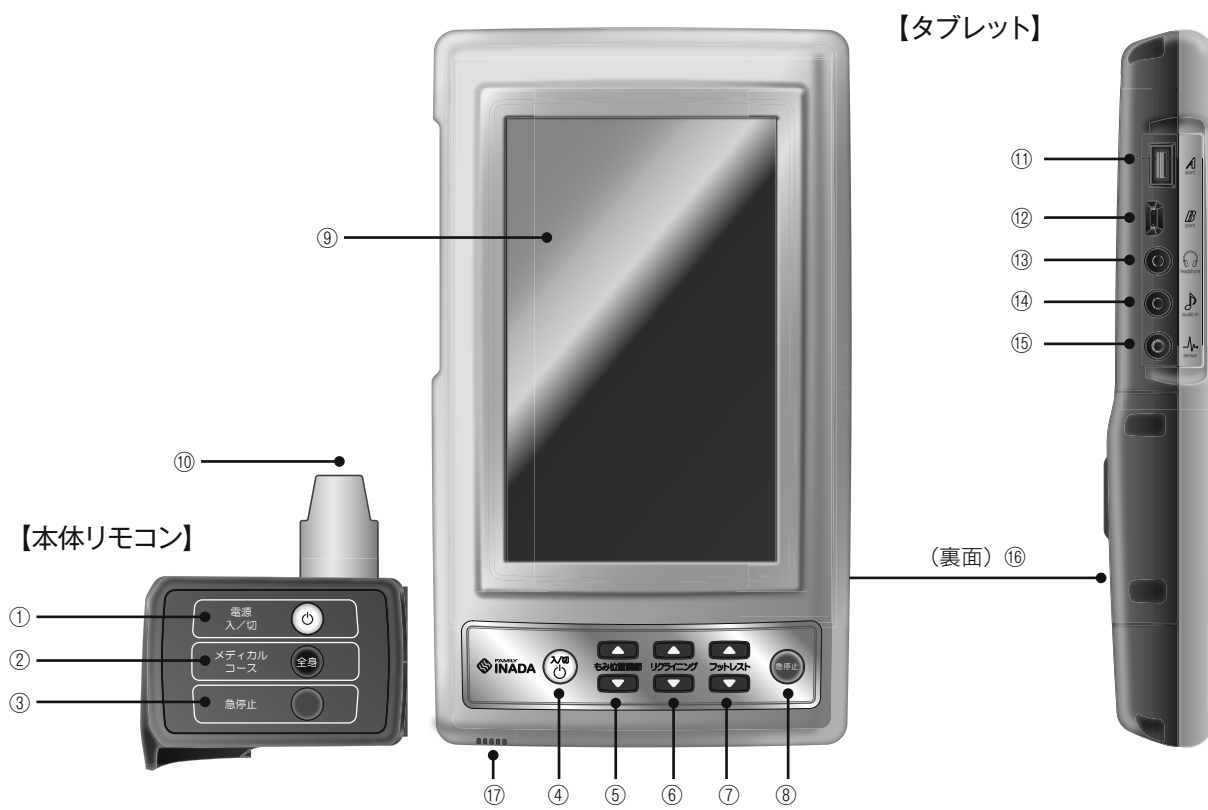

【各部の名前とはたらき】

本体リモコン		
①	入/切ボタン	本体リモコンの電源「入/切」を行います。リモコンの電源が「入」の状態では緑色、「切」の状態ではオレンジ色に点灯します。動作中に押すと、もみ玉が収納位置まで戻ってから停止します。
②	メディカルコースボタン	疲労回復を目的とし、全身のマッサージを行います。
③	急停止ボタン	緊急時や動作中に異常を感じたときに押してください。その場で動作が停止します。急停止中のときは「入/切」ボタンが赤色に点滅します。
タブレット/付属品		
④	入/切ボタン	本体リモコンの電源「入/切」を行います。リモコンの電源が「入」の状態では緑色、「切」の状態ではオレンジ色に点灯します。動作中に押すと、もみ玉が収納位置まで戻ってから停止します。
⑤	もみ位置調整ボタン	指圧点検索時の肩位置を調節します。
⑥	リクライニングボタン	リクライニング角度を調節します。
⑦	フットレストボタン	フットレスト角度を調節します。
⑧	急停止ボタン	緊急時や動作中に異常を感じたときに押してください。その場で動作が停止します。急停止中のときは「入/切」ボタンが赤色に点滅します。
⑨	タッチパネル	画面にタッチして、操作を行います。
⑩	脈拍センサー	「ストレス解消コース」選択時のマッサージ前後、「脈拍測定」選択時に使用します。
⑪	A port 端子	Bluetooth 通信専用です。Bluetooth 通信専用の USB が挿入されています。この USB は、通常挿入したままにしてください。
⑫	B port 端子	バージョンアップ時に使用します。
⑬	ヘッドフォン端子	イヤホン挿して使用できます。(CTIA 規格)
⑭	オーディオ入力端子	ミュージックシンクロコースの外部音源入力の際に使用します。
⑮	脈拍センサー端子	付属している脈拍センサーのプラグを挿入して使用してください。
⑯	電池ケース蓋	タブレットの電池ケースのフタです。
⑰	スピーカー	ここから、音声や音楽が流れます。

<b>⚠ 警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体リモコン・タブレットに水等をこぼさないでください。</li> <li>●ぬれた手で操作しないでください。</li> </ul>
<b>⚠ 注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体リモコン・タブレットの上に座ったり、強い衝撃をあたえないでください。</li> <li>●先のとがったものやかたいもので、タッチパネルやボタンを押さないでください。</li> <li>●タブレットの角度調節は、可動範囲以上に動かさないでください。</li> <li>●ヘッドフォン端子にイヤホン以外のものを差し込まないでください。</li> <li>●各端子に指定のケーブル以外を差し込まないでください。 →破損の原因になります。</li> <li>●脈拍センサー端子に指定の脈拍センサー以外を差し込まないでください。 →故障、破損の原因になります。</li> </ul>

## ご使用前に

- 冷えきった室内の温度を上げて使用するとき、室温を急に上げず、徐々にあげてください。  
→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。
- 体重 100kgまでの方のご使用を推奨しております。  
→体重 100kgの方が座った状態で、1cmあたり約 2.2kgの荷重がかかります。
- ご使用前には、布地の破れがないか確認してください。

### ⚠注意

- ご使用前には必ず本体布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（P.33 に記載）にご連絡ください。本体布地をはずしたり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。

## 椅子の調節

### 椅子の座り方


もみ玉は通常、背もたれの上部に左右に広がって引っ込んだ状態になっています（収納状態）。安全のため、もみ玉の位置を確認し、上記以外の場所にもみ玉がある場合はすぐに座らず主電源スイッチを入れて、もみ玉を収納状態に戻してから、ゆっくりと椅子の中央に座ってください。

### ⚠注意

- フットレストを上げたまま椅子に座らないでください。  
→フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本体の転倒により、事故やケガの原因になります。
- ご使用前は背もたれを完全に起こし、体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。

### 椅子への乗り降りの際の注意点

一度座面前の中央部へ腰をかけ、ゆっくりと奥へ座り直してください。  
座面の上に手を置いて支えながら、乗り降りをおこなってください。

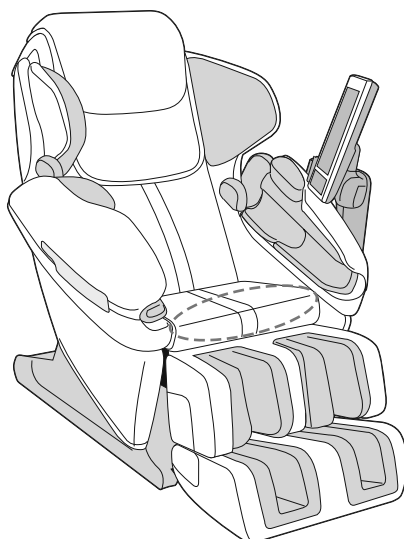

### ⚠注意

- リモコンスタンドの上に座らないようにご注意ください。
- メカが動いている時の乗り降りは大変危険です。絶対におやめください。  
→ケガや故障の原因になります。

### ⚠警告

- リモコンスタンドやアームレストに強い衝撃をかけたり、寄りかかったりしないでください。  
→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。  
→ケガや故障の原因になります。




それぞれの部位を正しい位置に合わせてご使用ください。

### 枕の使い方と調整

枕（小）は、マジックテープで止めてあります。

枕を上下して位置を調整してください。

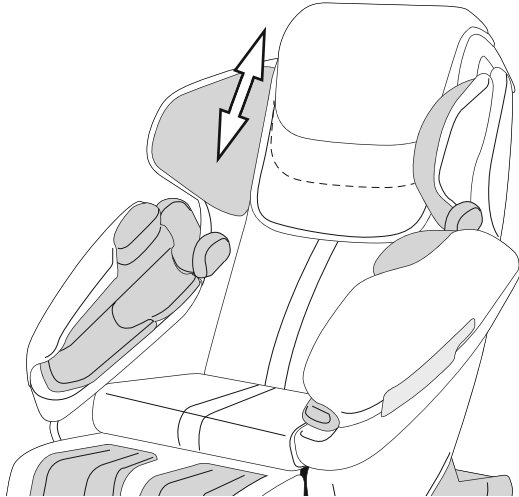

### 正しい枕の位置



枕のへこみ部分と後頭部があっていない。



枕のへこみ部分に後頭部を置きます。


- 枕は正しい位置でご使用ください。位置によっては、自動指圧点検索がうまくいかない場合があります。

### 正しい腕の位置

下の図のようにアームレストと背もたれの間で肘がくるように腕を置いてください。

アームレスト / 背もたれの間で肘を置いてください。

手のひらが下向きになるように入れてください。

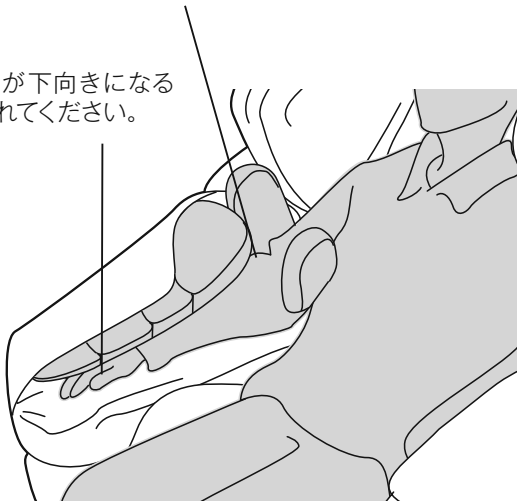

### ⚠️ 注意


- アームレストは、腕部以外には使用しないでください。  
→ケガの原因になります。
- 腕部のマッサージ中にアームレストから腕が抜けた場合、無理に腕を入れしないでください。  
→無理に入れようとすると、故障の原因になります。
- 肘をマッサージしないでください。また、手のひらが下向きになるようにマッサージしてください。  
他の向きで腕を入れしないでください。  
→ケガの原因になります。

# 椅子の調節

## 正しい脚の位置



右の図のようにフットレストのエアセルが足の甲の上にくるように入れてください。

かかとを一番奥まで入れ、足裏が底面につくようにしてください。

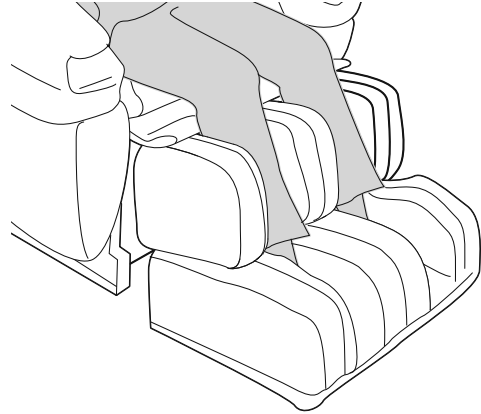

## フットレストの伸縮

椅子に座り、フットレストを一定の高さまで上げるとバネで伸縮します。

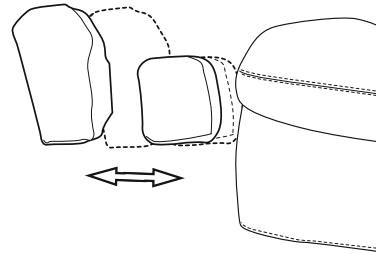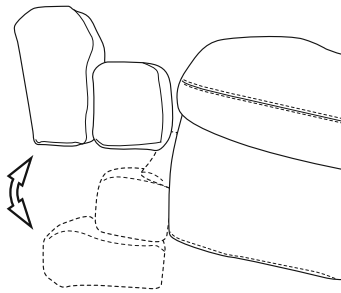

※およそ 27cmの長さで伸縮します。

### 警告


- リモコンスタンドの上に座らないようにご注意ください。
- メカが動いている時の乗り降りは大変危険です。絶対におやめください。  
→ケガや故障の原因になります。

### 注意

- フットレストは、脚部以外には使用しないでください。  
→ケガの原因になります。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。  
→無理に入れようとする、故障の原因になります。
- 膝をマッサージしないでください。他の向きで脚を入れないでください。  
→ケガの原因になります。

## 指圧パッドポケット

マッサージをより強くしたいときに、付属の指圧パッドを取り付けて使用することができます。下の図の場所に指圧パッド用ポケットがあります。

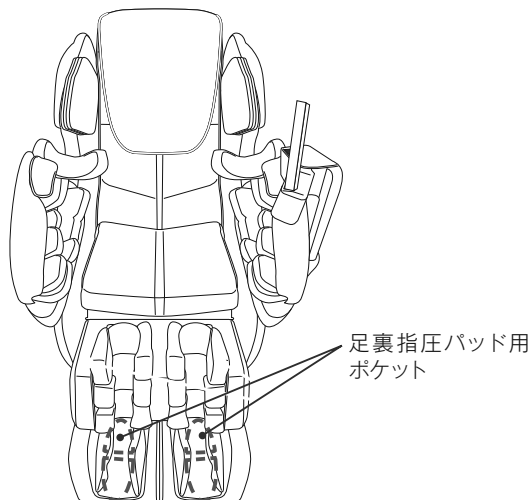

※ケガ等の原因となりますので、正規品以外のものを指定外の場所に取り付けて使用しないでください。

# コースの種類と特長

## メインコース

筋肉の疲労回復を目的とした個別コースです。目的に合わせてお選びください。

### リラクゼーションコース

毎日マッサージを楽しんでいただくことを目的として、好きな風景と音楽、ナレーターを選択できます。心地よい画像と音楽、ナレーションでリラックスしてマッサージを楽しんでください。

### プロフェッショナルコース

鍼灸師の先生などの施療を再現したマッサージコースです。定期的にコースは更新され、飽きることなくマッサージを受けていただくことができます。初回は、神の手を持つといわれている（鍼灸師）松浦英世氏のマッサージを再現した健康姿勢と血行改善コースです。

### ミュージックシンクロコース

音楽とマッサージが連動するコースです。音楽の低音に合わせて「たたき」動作を行います。音楽によってたたきタイミングが異なるため、マッサージ動作は無限に近い種類になります。内蔵の音楽とお好きな音楽で楽しんでいただける外部音源入力も可能です。

### ストレス解消コース

副交感機能を分析して、ストレスの状態を測定します。マッサージに呼吸法を取り入れて副交感機能を活性化させストレスを和らげます。マッサージ前後でストレス指数の比較ができます。

### 集中カアップコース

鳥取大学との共同研究から開発した、若年層を対象とした集中力をアップさせるコースです。

### ストレッチ姿勢調節

早稲田大学教授 金岡恒治氏監修のコースです。現代人に多い不良姿勢の修正を目的としたコースです。不良姿勢を修正することで、心身ともに健康になります。

### 体重チャレンジ

その人にあった適切なBMIになるようにアドバイスをを行います。アドバイスに基づき生活していただくことで、適切な健康BMIになることができます。また、リラックスのためにマッサージも行います。

### クイックコース

時間が無い方や忙しい方に7分間のクイックコースです。7分間で交感機能を刺激し、やる気や元気を出すコースです。

## メディカルコース

筋肉の疲労回復を目的とした標準コースです。7種類のコースからお選びください。

### 全身疲労回復

頭の付け根から足裏まで、全身をマッサージしていきます。毎日の疲れをリセットする日々の健康管理にオススメのコースです。

### 求心

古代ヨーロッパで生まれた「マッサージ」の考えを取り入れた技法で、体の末端から心臓へ向けて血流を促します。戻りにくい末端の血液を心臓に送り返し、疲労回復を促し、新陳代謝を高めて体をリフレッシュさせます。

### 遠心

古代中国で生まれた「あんま」の考えを取り入れたマッサージの技法で、心臓から体の末端へ向けて血流を促します。全身の血行を促進し、末端まで血液を巡らせ、リラックスさせます。

### 肩こり緩和

ヒーターのあたためとストレッチで肩こりの原因といわれる肩甲挙筋をほぐす、早稲田大学教授 金岡恒治氏監修のコースです。

### 活力アップ

短時間のコースで、たたき動作を中心に行います。全身を刺激することで身体をリフレッシュさせ、次の行動へ向かいやすいからだづくりを目的にしたコースです。

### 姿勢伸ばし

リクライニングを起こし、フットレストをあげることにより長座の状態にします。肩を押さえて背中全体をアーチ状にし、腹部の筋肉を伸ばすことで、しなやかな身体をめざします。

### 左右ひねり

腕を押さえた状態で、お尻エアーを左右それぞれ動かすことにより、腰回りを左右にひねっていきます。こり固まった骨盤を刺激し、身体の中心である腰を整えることで、全身のバランスを調整します。

## 部位別に楽しむコース

お好みの機能を組み合わせることができます。

〈首・肩〉 〈背・腰〉 〈腕・手〉 〈脚〉

※指圧点検索があるのは、〈首・肩〉〈背・腰〉のみです。その他は、選択すると動作が開始されます。

# 本体リモコンの使い方

## メディカルコース〈全身〉のみを使用したい方



- ① マッサージチェア本体うしろの主電源を入れてください。
- ② 最上部の《入/切》ボタンを押してください。
- ③ 中段のメディカルコース《全身》ボタンを押すと、自動で始動します。

# タブレットの使い方

## ログイン方法

## 起動画面

- ① マッサージチェア本体うしろの主電源を入れてください。  
タブレット起動画面が表示されます。



- ② タブレット画面に「電源ボタンを押してください」という表示が出たら「入/切ボタン」を押してください。



## 初回個人設定

### 起動画面

#### ① 新規登録

《新規登録》ボタンを押してください。

#### ② 使用者名入力

《使用者名》を入力してください。  
《次に進む》又は《登録せずに開始する》  
ボタンを押してください。

#### ③ 生まれ年を入力

《生まれ年》を入力してください。  
《次に進む》又は《登録せずに開始する》  
ボタンを押してください。

#### ④ 性別入力

《性別》を選択後、自動で次に進みます。

#### ⑤ 身長入力

《身長》を入力してください。  
《次に進む》又は《登録せずに開始する》  
ボタンを押してください。

#### ⑥ 体重入力

《体重》を入力してください。  
《次に進む》又は《登録せずに開始する》  
ボタンを押してください。

#### ⑦ 入力内容を確認・登録

入力した項目を確認の上、《登録》ボタンを  
押してください。

#### ⑧ ルピナス紹介動画を表示

動画をご確認の上、下の《次へ》ボタンを  
押してください。

#### ⑨ ご利用上の注意事項

《ご利用上の注意事項》をご確認ください。




①



②



③

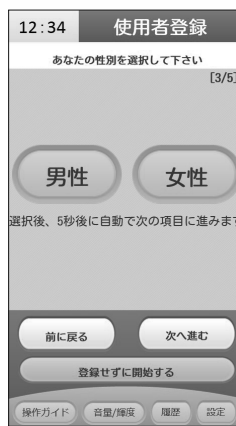


④



⑤




⑥

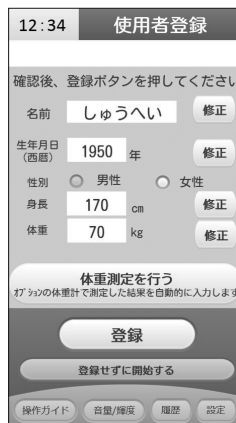

⑦



⑧

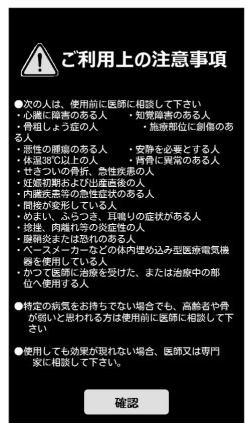

⑨



# コース選択の方法

初回個人設定後、2 回目以降


## 起動画面

### ① 登録一覧より使用者名を選択


登録した《使用者名》を選択し、ボタンを押してください。

### ② ご利用上の注意事項

《ご利用上の注意事項》をご確認ください。

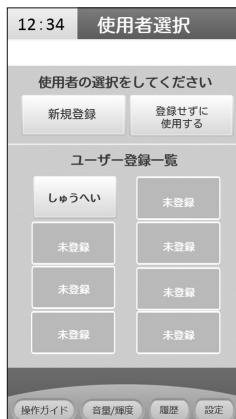

①

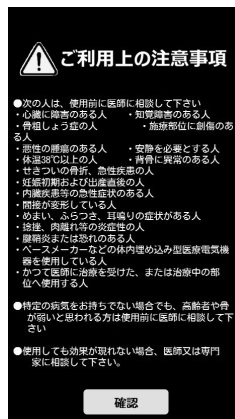

②

自動でコース選択メニューへ移動します。

- ユーザーを変更する場合、「入／切ボタン」で電源を切り、再度「入／切ボタン」で起動させてください。

## メインメニュー



← 使用者の名前を表示

メインコース	8 種類
メディカルコース	7 種類
部位別モード	
測定モード	脈拍、体重(体組成)、血圧測定
当社調査結果	検証(エビデンス)結果の表示

### 今のあなたの健康チェック

メタボスコア	内臓脂肪量推定
気になる健康チェック	症状による健康チェック、ストレスチェック、認知症チェック&脳トレーニング、健康辞典
操作ガイド	操作方法、メンテナンス方法等の表示
音量／輝度設定	アナウンス音量等の設定 画面の明るさの設定
履歴	使用履歴、脈拍履歴、血圧履歴、体重履歴、体脂肪率履歴、履歴
設定	Wi-Fi 設定、Bluetooth 設定、個人情報設定等
月に1回の健康チェック	

## リラクゼーションコース




9種類の中からお好みの画像を選択します。

(定期的にバージョンアップされます)



画像にあった音楽を4種類から選択します。

(画像によって音楽は変わります)

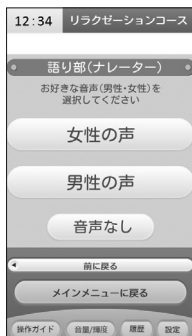

ナレーターを男性・女性から選択します。  
選択後、コースが開始されます。  
画像・音楽・ナレーションでリラックスしてマッサージを楽しんでください。

マッサージは軽いローラー中心のコースです。

## プロフェッショナルコース



定期的にコースは更新され、飽きること無く本格的なマッサージを受けていただくことができます。

初回は、神の手を持つといわれている〈鍼灸師〉松浦英世氏のマッサージを再現した姿勢調整と血行改善コースです。

## ミュージックシンクロコース




内部音源、もしくは外部音源を選択します。



内部音源の選択時、3種類の音楽を用意しています。

お好きな音楽を選択すると音楽にあわせたマッサージを開始します。

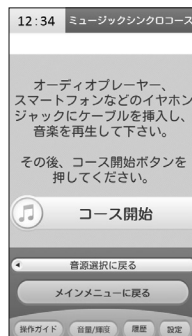

外部音源の選択時、スマートフォンやオーディオプレーヤーのイヤホンジャックに接続し、再生してください。

音楽に連動(低音)して、シンクロマッサージを行います。

音楽によって、全く異なるマッサージを行います。

# コース選択の方法

## ストレス解消コース




まずコース開始前に脈拍の測定を行います。


脈拍センサーを人差し指に取り付け、測定開始ボタンを押してください。



測定姿勢までリクライニングを倒します。

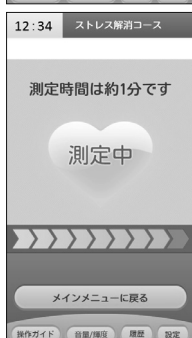

測定時間は、約1分間です。

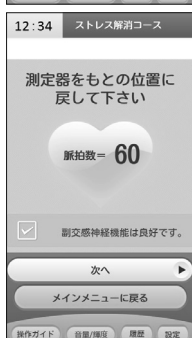

測定が完了したら、脈拍センサーを取り外してください。測定結果に応じて副交感機能の状態が表示されます。

マッサージを開始できる状態になると点灯します。

※脈拍数が高い時は、再測定を促すことがあります。



コース終了後に脈拍の測定を行います。

脈拍センサーを人差し指に取り付け、測定開始ボタンを押してください。



測定姿勢までリクライニングを倒します。



測定時間は、約1分間です。



マッサージ前後のあなたの状態と現在のストレス指数を表示します。

なお、ストレス指数は、ファミリーナダ独自の指数で、健康管理の目安にしてください。



呼吸法を取り入れたマッサージを行い、副交感機能をアップさせます。



# 体重チャレンジ




はじめに体重の手動入力か Bluetooth 対応体重計で測定するか選択してください。





手で入力する画面です。体重以外は分かる範囲での入力をしてください。




ルピナスが、あなたに最適なプランを自動的に計算、判断して提案します。(BMI を基準に計算します) A プランもしくは B プラン好きなプランを選択してください。

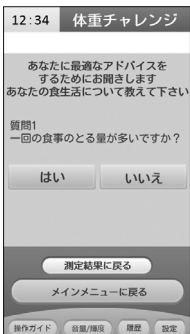

体重管理のための最適なアドバイスを行うために、食生活と運動習慣について各 3 ~ 5 問程度質問を行いますので、「はい」か「いいえ」で回答してください。

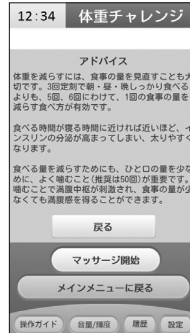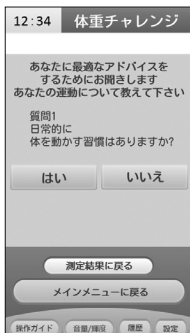

あなたの選択したプランと質問の回答によりあなたに最適なアドバイスをを行います。このアドバイスに従って、生活や運動を行っていたら、目標に近づくことができます。その後、リラックスのためにマッサージを行います。

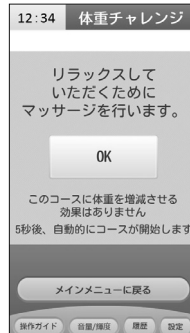

マッサージを開始します。

## ストレッチコース

## クイックコース

以上のコースにつきましては、タブレットの操作ガイドをご参照下さい。

# コース選択の方法

## 部位別に楽しむ気持ちよいコース



マッサージしたい好きな部位を選択してください。



それぞれの部位でもみ技を選択できます。  
本格的な東洋医学の技も選択できます。



好きなもみ技と好きな部位を選んで、お好きなマッサージを受けることができます。

## メディカルコース



メディカルコースは7種類あり、定期的にバージョンアップします。  
全身のマッサージを行うことで、血行を促進し新陳代謝を高め、疲労回復・リフレッシュを行うコースです。

# 健康チェックモードの使い方

## 月に1回(毎月)の健康チェック




月に1回の健康チェックを選択してください。




次に、血圧の手動入力を行うか通信機能 (Bluetooth) 対応血圧計で測定するか選択してください。すでに測定していたり、履歴がある場合は、最新の数値が反映されます。




先ほどと同様に、体重の手動入力を行うか通信機能 (Bluetooth) 対応体重計で測定するか選択してください。すでに測定していたり、履歴がある場合は、最新の数値が反映されます。

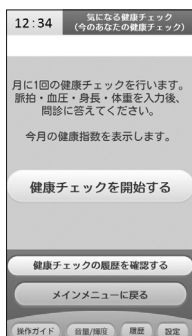

健康チェックを開始します。

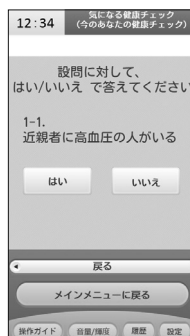


複数の問診がはじまります。正確な状態を把握するために、60 問程度の問診を行います。

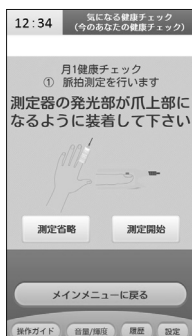

まず始めに脈拍の測定を行います。

脈拍センサーを人差し指に取り付け、測定開始ボタンを押してください。

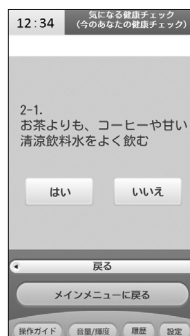

問診は、食生活や仕事の状態、ストレス等について行います。過去1ヶ月の自分の生活を思い出して、回答してください。




脈拍測定が終わると、脈拍数がタブレットの画面に反映されます。測定省略を選択した場合は、脈拍数を手動で入力してください。







問診が終了後、あなたの健康指数を表示します。脈拍、血圧、BMI、問診による健康レベルの表示を行いますので、レベルが低い項目については、特に注意して生活してください。

# 健康チェックモードの使い方

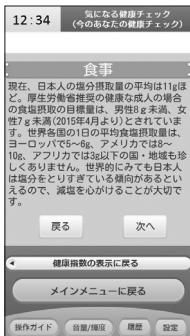

食事、運動習慣、ストレス、飲酒・喫煙、睡眠について、総合的なアドバイスをを行います。特に改善が必要だと判断される項目についてのアドバイスが表示されますので、よく読んで生活習慣の改善を行ってください。

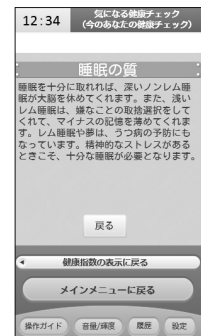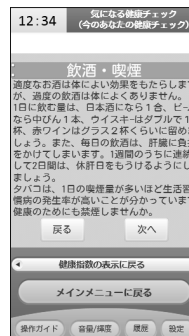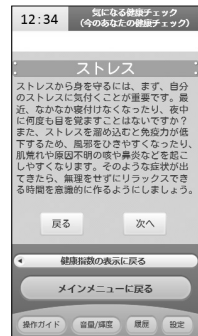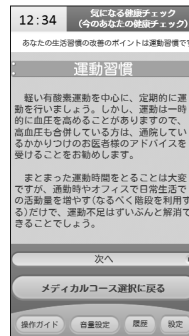

## 気になる健康チェック

【健康チェックモードの使い方】



- 症状による健康チェック** 気になる症状があるときに、その症状を選択し、複数の問診により、東洋医学に基づいた症状の原因とアドバイスを表示します。
- ストレスチェック** 職業などの要因を抜いた29項目の問診によりストレス状態を表示します。(出典元：厚生労働省 職業性ストレスチェック)
- 認知症チェック** 認知症チェックのための問題と脳トレーニングができます。
- 健康辞典** 症状別の原因・改善方法等約200問の健康辞典です。

## 測定モード



血圧、体重、脈拍を管理するために、測定（入力）モードが搭載されています。

測定（入力）結果は、各履歴に反映されます。

また、測定を忘れないために、アラーム設定機能も搭載されています。

タブレットのサイドについているLEDと音声、画面表示でお知らせします。


## 血圧測定（入力モード）



はじめに血圧の手動入力か通信機能（Bluetooth）対応血圧計で測定するか選択してください。

通信機能付きの血圧計はA & D社やタニタ社の製品と連動予定です。

手動で入力する画面です。

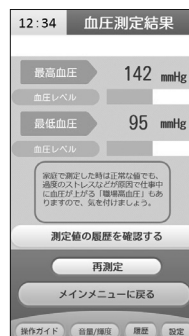

測定（入力）値に応じて血圧レベルの表示を行います。参考にして、セルフケアを行いましょう。

# 健康チェックモードの使い方


## 体重測定 (入力モード)



はじめに体重の手動入力か通信機能 (Bluetooth) 対応体重計で測定するか選択してください。

通信機能付きの体重計は A & D 社やタニタ社の製品と連動予定です。

手動で入力する画面です。

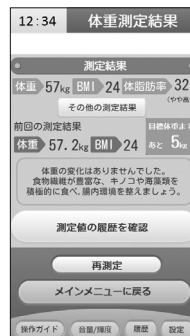

測定 (入力) を反映させた履歴を表示します。また、体重チャレンジを行っている場合は、目標体重までの数値が表示されます。

## 脈拍測定 (入力モード)



まずコース開始前に脈拍の測定を行います。脈拍センサーを人差し指に取り付け、測定開始ボタンを押してください。

臥位の状態 (フルリクライニング) で脈拍を測定します。



1分間測定を行います。

測定が完了したら、脈拍センサーを取り外してください。測定結果に応じて副交感機能の状態が表示されます。

## 履歴モード



それぞれの履歴を確認することができます。

### 使用履歴

どのコースをいつ使用したのか履歴を表示します。

### 脈拍履歴

脈拍値の履歴グラフを週、月、年で表示します。

### 血圧履歴

血圧値の履歴グラフを週、月、年で表示します。

### 体重履歴




体重値の履歴グラフを週、月、年で表示します。

### 体脂肪率履歴

体脂肪率値の履歴グラフを週、月、年で表示します。

### メタボスコア履歴

メタボスコア (内臓脂肪推定量) の履歴グラフを表示します。

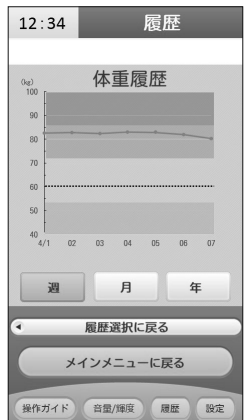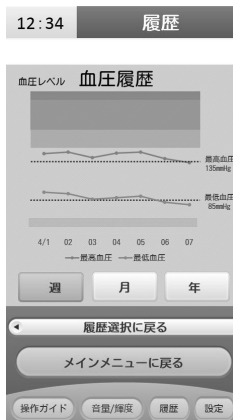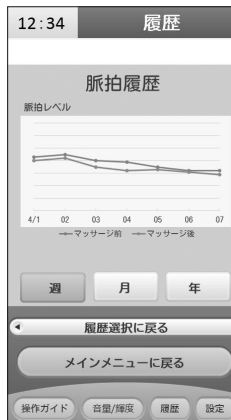


各履歴表示サンプルです。



## メタボスコア



タブレットでメタボスコアができます。  
メタボスコアは、身体サイズから腹部の内臓脂肪と皮下脂肪の面積を推定し、メタボリックシンドロームのリスクを評価したものです。早稲田大学とヘルスグリッド株式会社の共同研究で得た成果を活用しています。

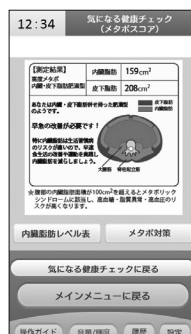

メタボスコアの利用に必要な情報を入力してください。入力情報には、ユーザー情報を利用することができます。

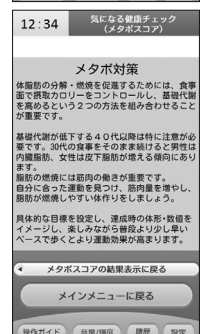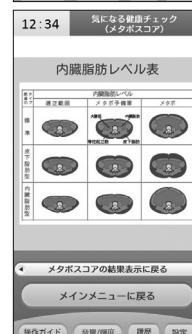

# 健康チェックモードの使い方

## 操作ガイド



### 設置方法 動作確認方法

本製品の設置場所や設置方法、設置・移動後の動作確認方法を動画で表示します。

### 移動方法

本製品の移動方法と搬入・移動ができずにアームレストを取り外す場合を動画とイラストで表示します。

### 使用上の 注意

本製品の使用前、使用中、使用後の注意事項をイラストで表示します。

### 使用方法

マッサージチェアの使用法、スピーカーヘッドレストの使用法、タブレットの操作法を動画やイラストで表示します。

### ルピナス の特長

家族みなさんで利用していただくために、ルピナスの特長について動画で説明します。また、コースの説明、指圧点・筋肉についても紹介します。

### メンテナ ンス方法

マッサージチェアとタブレットのお手入れ方法を動画で表示します。

### Wi-Fi 設 定

Wi-Fi 設定を動画で表示します。


※その他詳しくは操作ガイドをご覧ください。

【健康チェックモードの使い方】

【各種設定の方法】

## 各種設定の方法

### 音量／輝度

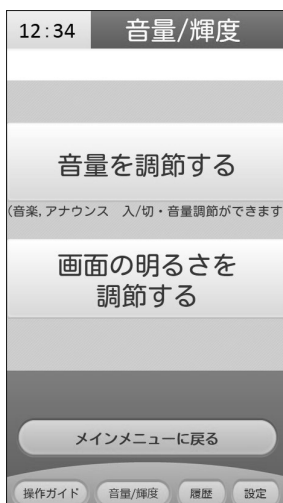

タブレットの「音量」「明るさ」の調整が行えます。



# 設定



Wi-Fi、Bluetooth の設定、  
タブレット画面左上の時計  
の設定を変更できます。

個人設定の内容が変更でき  
ます。

マッサージ中は変更できま  
せんので、マッサージ前後に  
行ってください。

変更後は必ず「OK」ボタン  
を押してください。



**Q** フローリングや床暖房の上に設置しても大丈夫ですか？

**A** 設置しても大丈夫です。

ただし、床を傷つけることがあるかもしれませんので、カーペットを敷き、その上にマッサージチェアを設置することをおすすめします。(畳等も同様です)

また、ホットカーペットは発熱体を痛め、そこから発火するおそれがありますので使用しないでください。

**Q** 誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか？

**A** 感電のおそれがあります。ただちに使用を中止し、次の内容に従ってください。

- 本体真後ろの主電源スイッチを切ってください。
- 電源プラグをコンセントから抜く。  
以上のことを行った上、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(P.33に記載)へご相談ください。

**Q** マッサージをより強くするにはどうすればいいですか？

**A** 次のことを行ってみてください。

- 強弱調節ボタンで調節する。
- 深く腰かけ背もたれに体重がかかるように座る。
- 背パッド上に緩衝パッド(別売)を置く。
- 枕(大)、枕(小)をはずす。  
以上の方法でより強くマッサージを行うことができます。

**Q** マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか？

**A** 次のことを行ってみてください。

- 強弱調節ボタンで調節する。
- 背もたれを起こす。
- 背パッド上に緩衝パッドを置く。
- 枕(大)、枕(小)をつける。  
以上の方法でより弱くマッサージを行うことができます。

**Q** 体重が重くても大丈夫ですか？

**A** 体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。

**Q** 身長が150cm未満の人や180cm以上の人でも使えますか？

**A** お使いいただけます。

指圧点検索の際に肩位置が合わない場合がありますので、以下の方法でご使用することをおすすめします。

- 身長の低い人…リクライニングを起こす。
- 身長の高い人…リクライニングを倒す。
- 指圧点検索後に肩の位置を調節する。

**Q** イヤホンは別のものを使用できますか？

**A** 使用できます。


差し込み口がφ3.5mm (CTIA規格)のものを使用してください。

その他の差し込み口のものを使用しないでください。故障の原因となります。



# 故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(P.33 に記載) までご相談ください。

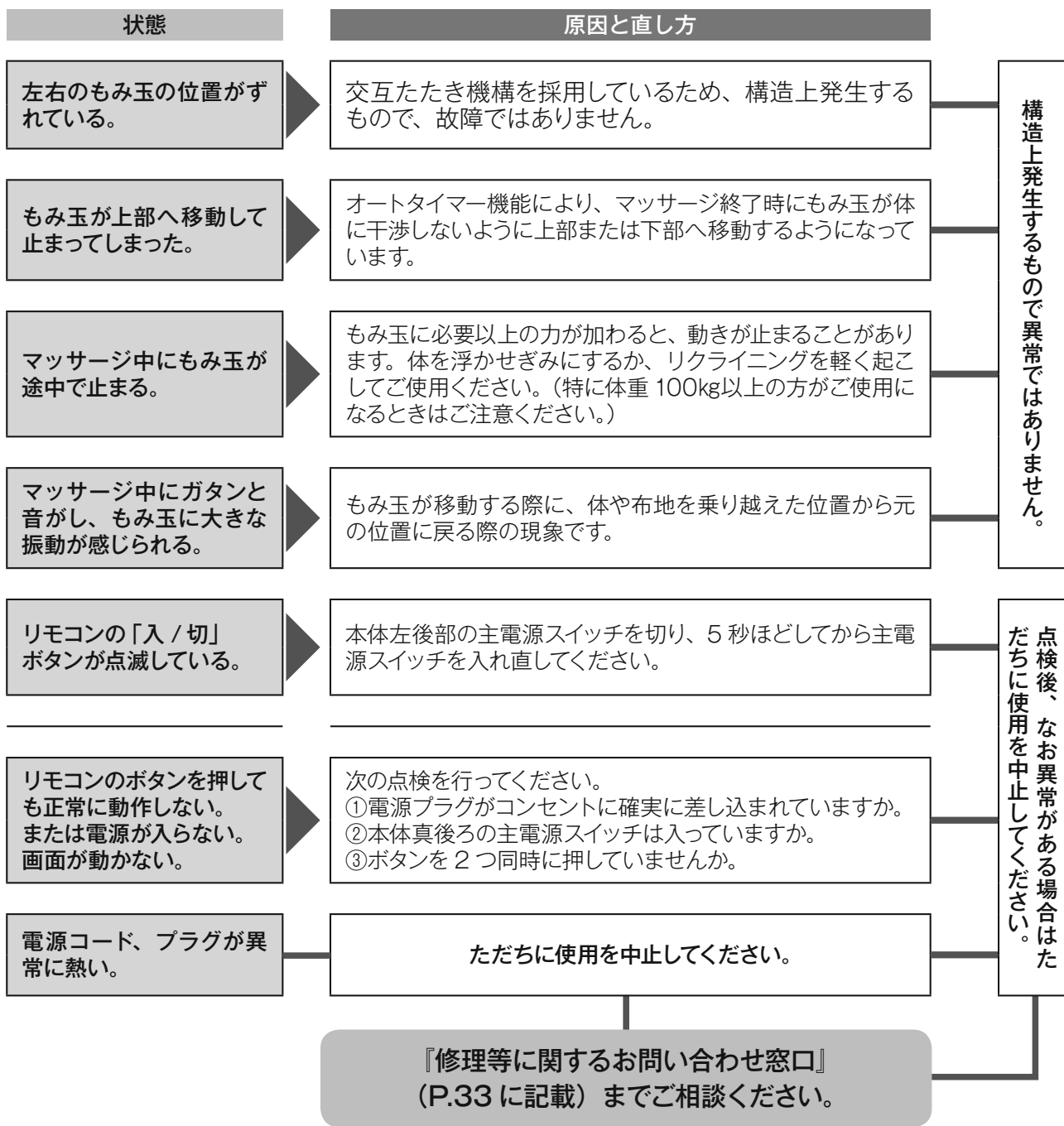

サービスマン以外の方は分解や修理は行わないでください。

「故障かな?と思ったら」

## 動作時の音

構造上やむを得ず発生するもので、性能などに影響はありません。

動作中は下記のような作動音がします。

たたきを伴う動作時の音	ゴトゴト音・カタカタ音
もみ動作時のもみ玉と布のすれる音	キュッキュツ音・ギウギウ音
もみ玉の昇降、もみ動作時の音	ウィーン音・ゴロゴロ音・コトツ音
エアーマッサージ中の音	コツコツ音
エアープンプの音	ブーン音
エアアの排気音	シュー音
リクライニング昇降時の音	ウィーン音

※上記の音について、性能等に影響はありません。

# 保管とお手入れの仕方

## 保管の仕方

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない場所に保管してください。
- ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないようにしてください。



注意

●直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

## お手入れの仕方



注意

●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

## 【背パッド・各カバーのお手入れ】

汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取ってください。



注意

●ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。

## 【リモコンのお手入れ】


リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

●絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。→故障の原因になります。

## 【その他のプラスチックのお手入れ】

少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

●アルコール、その他の溶剤やみがき粉などのお手入れは傷、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

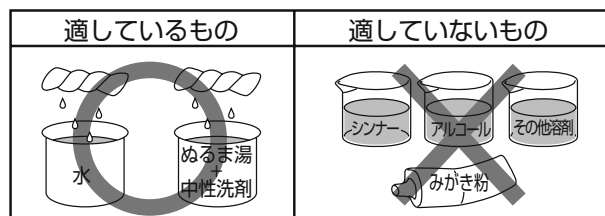

# アフターサービスについて

## 1. 保証書について

この製品の保証書は、「保守メンテナンス保証書」を別途発行致します。いつでも見られるように大切に保管してください。「保守メンテナンス保証書」には、「保証期間、製造番号、設置場所、保証規定」などが記載されております。よくお読みください。ただし、この製品は日本国内専用ですので、日本国外でご使用になられた場合は保証期間中でも保証は無効となります。

## 2. 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、28 ページの「故障かな?と思ったら」をよくお読みください。確認後、まだ異常がありましたら『修理等に関するお問い合わせ窓口』(P.33 に記載) へご連絡ください。ご連絡の際は、「保守メンテナンス保証書」をお手元にご用意のうえ、ご連絡ください。なお、有償保守サービスとなることがありますので、内容をよくお読みください。

### ● 保証期間中は

修理の際、保守メンテナンス保証書をご提示ください。修理内容によっては、有償になることがありますので、内容をよくお読みください。

### ● 日本国外でご使用になられた場合、修理をお断りする場合があります。

### ● アフターサービスについてご不明な点は『修理等に関するお問い合わせ窓口』(P.33 に記載) にお問い合わせください。

### ● 本体布地(もみ布)等の消耗品については安全にお使いいただくために、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(P.33 に記載) へお問い合わせください。

### ■ オープンソースソフトウェアについて

本製品は GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL)、その他の著作権ライセンス、ライセンス通知が適用されるソフトウェアを含んでいます。これらの具体的な条件については、操作ガイドの中でご覧いただけます。

上記のライセンスのもと、配布を要求しているソースコードについては、書面による要求があった場合に、配布のための必要な費用(メディア・取り扱い費用等)を負担していただけることを条件に、CD-ROM にて配布致します。

### 商標説明

・Android、Android ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

# 仕 様

販 売 名	ファミリーメディカルチェア ルピナス FMC - LPN10000		
使 用 電 源	AC100V		
定 格 消 費 電 力	230W (ヒーター使用時) ヒーターのみの定格消費電力 60W		
定 格 周 波 数	50-60Hz		
定 格 時 間	30 分		
電撃に対する保護の形式	クラス 0 I機器		
上 半 身	背 上 メ 力	も み 速 さ	最小約 5 回 / 分、最大約 20 回 / 分
		た た き 速 さ	最小約 220 回 / 分、最大約 450 回 / 分
自 動 コ ー ス	15 種類		
部 位 別 コ ー ス	12 種類 (一部自動指圧点検索機能付き)		
エ ア ー 圧 力	約 30kPa		
オ ー ト タ イ マ ー	約 15 分 (自動コース時は異なります)		
フットレスト調節範囲	約 27cm		
リ ク ラ イ ニ ン グ 角 度	水平面に対して約 115° ~ 約 162° 無段階 (電動リクライニング)		
本 体 の 寸 法	幅約 91cm×奥行約 140 (192) cm×高さ約 110 (76) cm 奥行・高さの ( ) 内の数字は最大リクライニングおよびフットレスト水平時		
重 量	約 100kg		
外 装 布 地	合成皮革		
付 属 品	電源コード・イヤホン・T 型レンチ・脈拍センサー・タブレット・指圧パッド		
包 装	1 梱包 / 1 台		
類 別	機械器具 (77) バイブレーター		
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器 (JMDN コード 34662000) 管理医療機器		
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003		
医 療 機 器 認 証 番 号	228AKBZX0005300		
製 造 販 売 元	ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田 1220 番地		
製 造 元	ファミリーイナダ株式会社		





※「商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがあります。(タブレット画面のデザインを含む)」

製品に関するお問い合わせ窓口

**0120-129-011**

修理等に関するお問い合わせ窓口

**0120-772-294**

土・日・祝を除く平日 9:00 ~ 17:00

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員

 **ファミリーチャア株式会社**

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3(ソーラ新大阪2114階)

<https://www.family-chair.co.jp>