




HOGU-C

ファミリー ホグシー FMC-RC10

このたびは、ファミリーホグシーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品は、疲労の回復・改善を目的としたさまざまなマッサージがお楽しみいただけます。皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして未永くご愛用ください。

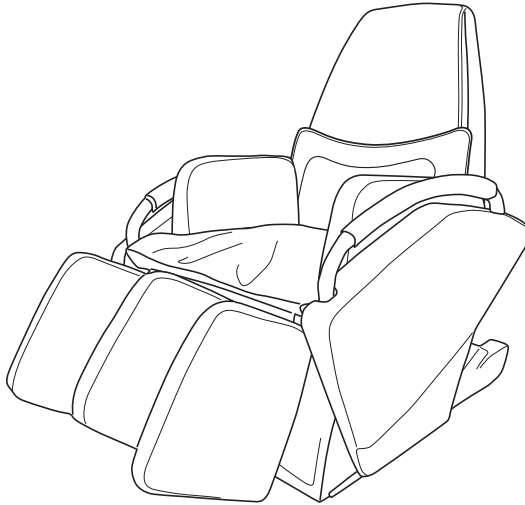

もくじ

安全上のご注意	1
主な特長と効能・効果	6
各部の名前とはたらき	7
ご使用前に	9
椅子の調節	11
使い終わったら	14
操作方法	15
故障かな?と思ったら	17
安全のために商品の点検を	18
Q&A	19
保管とお手入れの仕方	20
アフターサービスについて	21
仕様	22
サービスセンター	裏表紙

ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

添付文書

取扱説明書

保証書別途添付

日本国内専用

この製品は日本国外への輸出と使用を禁止しています。
PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.

この製品に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。
よってこの製品を国外に持ち出した場合、保証及び修理対応はできませんのでご了承ください。
JAPANESE EQUIPMENT SPECIFICATION WARRANTY APPLIES ONLY IN JAPAN.
WARRANTY INCLUDING REPAIRS BY THE MANUFACTURER DOES NOT APPLY IF THE CHAIR IS TAKEN OUT OF JAPAN.



Message
+
Medical

- ◎「取扱説明書」は、いつでも見られるように大切に保管してください。
- ◎保証書は、お買い上げの際必ずお受け取りの上、「取扱説明書」とともに大切に保管してください。
- ◎この製品は、日本国内の弊社工場にて企画/開発/設計/最終組立て/品質保証を行い、部品調達及び部品組立てを中国にある弊社工場で行っています。
- ◎この製品は、一般家庭用として設計されています。一般家庭以外（業務用など）でご使用の場合は、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご相談ください。





安全上のご注意

ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。なお、各部の名前については7～8ページをご覧ください。

表示の種類






 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。

図記号の種類と意味

	 記号は、禁止の行為であることを示しています。（左図の場合は分解禁止）
	 記号は、行為を強制したり指示したりするものです。（左図の場合は電源プラグを抜く）





お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

ご使用場所の注意点

 注意	
 禁止	● 浴室やサウナ、湿気の多い場所では使用しないでください。 →感電や故障の原因になります。
 強制	● 床面が水平な場所に置いて使用してください。 →不安定な場所では本体が転倒し事故の原因になります。
 アース 取り付け	● 万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。 詳しくは、10ページをご覧ください。
 禁止	● アース線はガス管・水道管・電話線・避雷針には絶対に接続しないでください。



ご使用前の注意点

 警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 次の人は使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。◎ 急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ● 次の人は、使用前に医師に相談してください。 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 心臓に障害のある人 ◎ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ◎ 骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ◎ 治療部位に創傷のある人 ◎ 体温 38℃以上(有熱期)の人 <ul style="list-style-type: none"> 例：急性炎症症状[けん(巻)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期。衰弱しているとき。 ◎ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ◎ ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ◎ 背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ◎ かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ◎ 悪性のしゅよう(腫瘍)のある人 ◎ 安静を必要とする人 ◎ 内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人 ◎ 医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ◎ リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人 ◎ めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ◎ 捻挫、肉離れなどの炎症性の人 ◎ 腱鞘炎、またはそのおそれのある人 ● 特定の病気をもちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。 ● 使用しても、効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源は交流 100V 以外では使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → 火災や感電の原因になります。 ● 変圧器を用いた使用はしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → 故障や感電の原因になります。 ● 電源コードや電源プラグがいたんだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいときなどは使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → 感電やショート・発火の原因になります。 ● マッサージの前には必ず布地の部分が破れていないか確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、サービスセンター(裏表紙に記載)にご連絡ください。布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> → 布地が破れた状態で使用すると、ケガや感電のおそれがあります。

【安全上の注意】



安全上のご注意

ご使用前の注意点

⚠ 注意



禁止

- この取扱説明書の使用法以外の使い方をしないでください。また、本機と他の治療器や電気毛布などを併用しないでください。
→体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。
- 椅子に腰掛けたり、椅子から立ち上がる時以外は、フットレストの上にいる、立つ、座る等の行為はしないでください。
→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。
- 人をのせたまま移動しないでください。
→本体の転倒により、事故やケガの原因になります。
- 付属品以外のものを用いて本機を使用しないでください。



強制

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に POWER (主電源)スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
→故障や感電の原因になります。
- 電源プラグおよびコネクターは確実に最後まで差し込んでください。
→感電やショート・発火の原因になります。
- ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。
- 体調に応じて、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。
→はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。
- しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。

ご使用時の注意点

⚠ 警告







禁止

- 電源コードやリモコンのコードを本体に巻きつけたり、本体の脚で踏んだりしないでください。また、電源コードやリモコンのコードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
→コードが破損し、火災や感電の原因になります。
- 本体やリモコンに水などをこぼさないでください。
→感電やショート・発火の原因になります。
- お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを、本体の周辺で遊ばせたり、本体の上へのせたり、座らせたりしないでください。
→事故やケガの原因になります。
- 椅子に2人以上座ってのご使用はおやめください。特に小さなお子様(乳児など)を抱きかかえてのご使用はおやめください。→事故やケガの原因になります。
- めれた体で座ったり、めれた手で操作したりしないでください。
→感電や故障の原因になります。
- 布地が破れた状態では使用しないでください。
→事故やケガ・感電の原因になります。電源プラグをコンセントから抜いてサービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。
- フットレストと本体の間に手や足、物をはさまないようにしてください。
→手や足、物がはさまれ、事故やケガ、故障の原因となります。
- フットレストを手で持ち上げた状態で急に手をはなさないでください。



ご使用時の注意点

 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 素肌では使用しないでください。 ● マッサージおよび椅子としての目的以外には使用しないでください。 →事故やケガの原因になります。 ● 頭部、胸部、腹部、関節部(ひじ、ひざなど)には使用しないでください。 →気分が悪くなったり、ケガの原因になります。 ● 可動部に手や足を入れないでください。 →ケガの原因になります。 ● フットレストは脚部以外には使用しないでください。 →ケガの原因になります。 ● マッサージチェアを無人で動作させないでください。 →事故やケガの原因になります。
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ● 緊急時や動作中に異常を感じたときは、リモコンの[急停止]ボタンを押して、動作を停止させてください。 ● 使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください。 ● マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書(19 ページ)にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止しサービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。 →強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。 ● マッサージ中は眠らないように注意してください。 →ケガの原因になります。 ● マッサージは、1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。 →長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。1日当たりのマッサージは、通算30分程度を目安にして時間をあけてご使用ください。 ● 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。 →無理に入れようとすると、故障の原因になります。
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止して POWER (主電源)スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。 ● 落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止して、POWER (主電源)スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ● 動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して POWER (主電源)スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、サービスセンター(裏表紙に記載)に点検・修理を依頼してください。 →感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。



【安全上の注意】



安全上のご注意



ご使用後や使用しない時の注意点

⚠ 注意



 強制	<ul style="list-style-type: none">● 使用後は必ず POWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 → お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。● 本機を使用後は、必ずフットレストを完全に下ろしてください。● 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none">● 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。 → 感電やショートによる火災の原因になります。● お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。● ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 → ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。

その他の注意点

⚠ 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 本体の上に立たないでください。座部以外に座るなどして、上から強い衝撃を与えないでください。 → 転倒による事故やケガ、故障の原因になります。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none">● 機器が故障した場合は、勝手に修理せず、販売店またはサービスセンター（裏表紙に記載）に連絡してください。● 電源コードが破損した場合、危険ですのでコードの交換はサービスセンター（裏表紙に記載）に依頼してください。● 機器は改造しないでください。 → 火災や感電、ケガの原因になります。

⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 本機の上に物を載せないでください。● 付属の電源コードは専用品です。本機以外では使用しないでください。
 強制	<ul style="list-style-type: none">● 他の人に譲渡、貸与するときは、本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡しください。

お願い

- 製品及び付属品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

主な特長と効能・効果

特長

■脚ほぐし機構搭載

脚のエアーマッサージに加え、ふくらはぎの施療部が前後に動き脚をほぐす「脚ほぐし機能」を搭載。脚の筋肉を程よくほぐします。

■座ほぐし機構搭載

おしりや太もものエアーマッサージに加え、太ももの施療部が前後に動き、おしりや太もものをほぐす「座ほぐし機能」を搭載。おしりや太ももの筋肉を程よくほぐします。

使用目的・効能または効果


あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩和
- 血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす

「主な特長と効能・効果」


同梱物の確認

梱包箱には本体と同梱物が入っていることを確認してください。

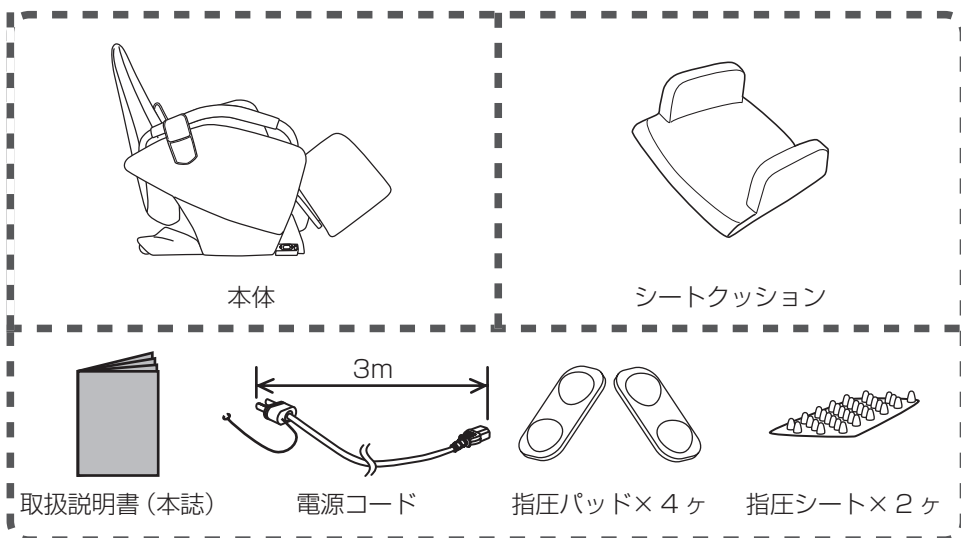

各部の名前とはたらき

本体

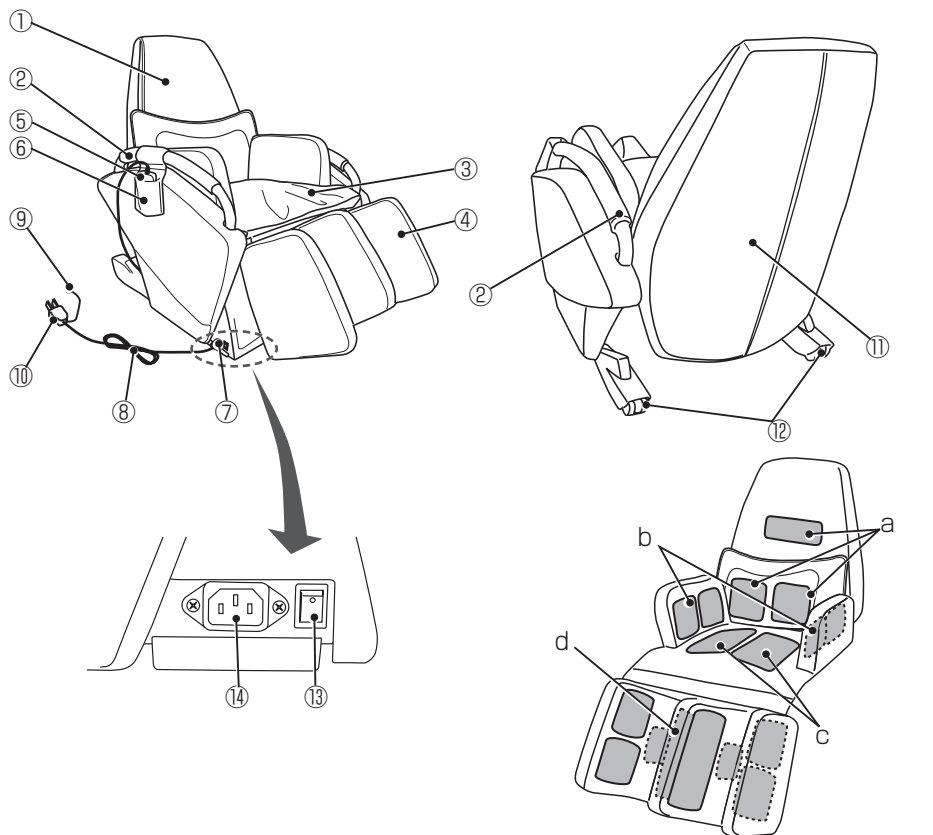


【本体の取り付け】

1	背パッド
2	アームレスト
3	座ほぐしユニット
4	フットレスト
5	リモコン
6	リモコンポケット
7	コネクター
8	電源コード
9	アース線

10	電源プラグ
11	背もたれ
12	キャスター
13	POWER (主電源) スイッチ
14	インレット
a	腰用エアースセル /3 個
b	太もも用エアースセル /4 個
c	座用エアースセル /2 個
d	フット用エアースセル /8 個

リモコン

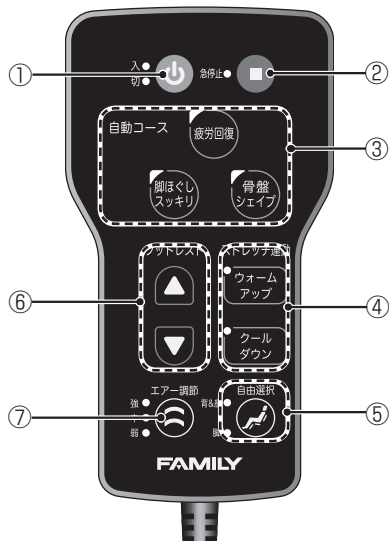

1	ボタン	リモコン電源の「入」「切」を行います。
2	急停止ボタン	緊急時や動作中に異常を感じた時に押してください。その場で動作が停止します。
3	自動コースボタン	各ボタンでコースを選択できます。
4	ストレッチ運動コースボタン	各ボタンでコースを選択できます。
5	自由選択コースボタン	背&座または脚のマッサージを選択できます。
6	フットレストボタン	フットレスト角度を調節します。
7	エア―調節ボタン	エア―の強さ調節ができます。



警告

- リモコンに水などをこぼさないでください。
- ぬれた手で操作しないでください。



注意

- リモコンの上に座ったり、リモコンを落としたり、踏んだり、リモコンのコードを強く引っばったりしないでください。
- 先のとがったものやかたいものでボタンを押さないでください。
→破損の原因になります。

ご使用の前に


冷えきった室内の温度を上げて使用するとき、室温を急に上げず、徐々に上げてください。本機を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1 時間ほど待ってから使用してください。

→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。

設置場所について

背もたれが倒れた時やフットレストを持ち上げた時に壁や物に当たらないように、本体前、本体後ろのスペースを約 50cm 以上確保してください。

【ご使用の前に】

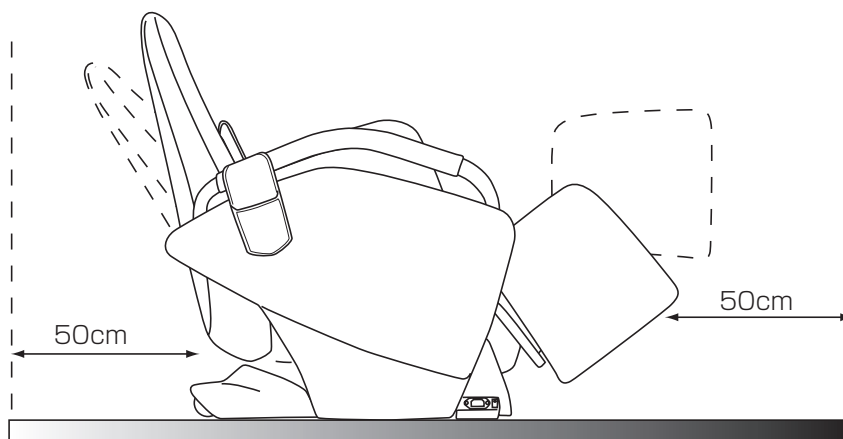

注意

- 浴室やサウナなど、湿気が多い場所では使用しないでください。
- 床面の水平な場所に置いて使用してください。
- ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所(40℃以上)では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。
- タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。

- 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。(ホットカーペットは敷かないでください。)
- 重量物ですので、下ろすとき床面を傷つけないように注意してください。
- テレビやラジオなどの AV 機器から 1m 以上離してください。雑音が入ることがあります。
- 体重 100kg の人が座った状態で 1cm²あたり約 2.6 kg の荷重がかかります。



移動のしかた

POWER (主電源) スイッチを「OFF」の状態にし、電源プラグおよびアース線をコンセントから抜いてから運んでください。


キャスターで移動するとき

フットレストの前を持って前側を浮かせ、キャスターで移動してください。



持ち上げて運ぶとき

アームレストのパイプ部分とフットレストの前を持って持ち上げて移動してください。

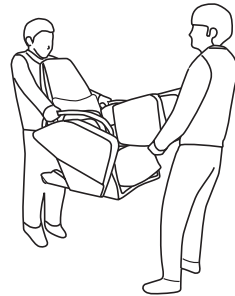

■ 重量物ですので搬入、移動時には腰など痛めないようご注意ください。

■ リモコンがついていますので、移動時に落とさないよう注意してください。




- 人をのせたまま移動させないでください。
- 電源コード、アース線をコンセントからはずして移動させてください。
→電源コード、アース線が破損し、火災や感電の原因になります。

アースの取付け方

万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。

- ①電源コンセントにアース端子がある場合
電源プラグから出ているアース線を、電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでないかときどき点検してください。
- ②電源コンセントにアース端子がない場合
お買い上げの販売店にご相談ください。

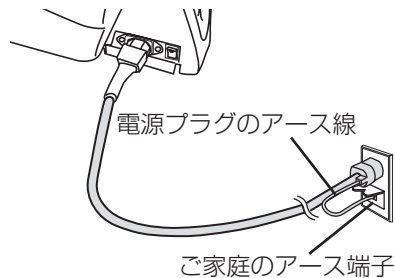



電源コードは、必ず本機器に付属のものをご使用ください。とくに、電源コードのプラグ部にアース線がついていないものは万一の感電を防ぐことができませんので絶対に使用しないでください。

ご使用前に

主電源の入れ方

- ① 電源コードのコネクターを本体右前部のインレットに差し込みプラグをコンセントに差し込みます。
- ② 本体右前部の POWER（主電源）スイッチを「ON」にします。




 警告	<ul style="list-style-type: none">● 変圧器を用いた使用はしないでください。 →故障や感電の原因になります。● 日本国外では使用しないでください。 →故障や感電の原因になります。
 注意	<ul style="list-style-type: none">● 電源プラグをコンセントに差し込む前に POWER（主電源）スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。● 電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。● ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。

椅子の調節

椅子の座り方


安全のため、ゆっくりと椅子の中央に座ってください。

 注意	<ul style="list-style-type: none">● フットレストを上げたまま椅子に座らないでください。 →フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本体の転倒により、事故やケガの原因になります。● 体調に応じて、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

椅子の調節

指圧パッドの使い方

本機は指圧パッド及び指圧シートが付属しています。背もたれや座ほぐしユニット、フットレストにある専用のポケットに入れてお使いください。

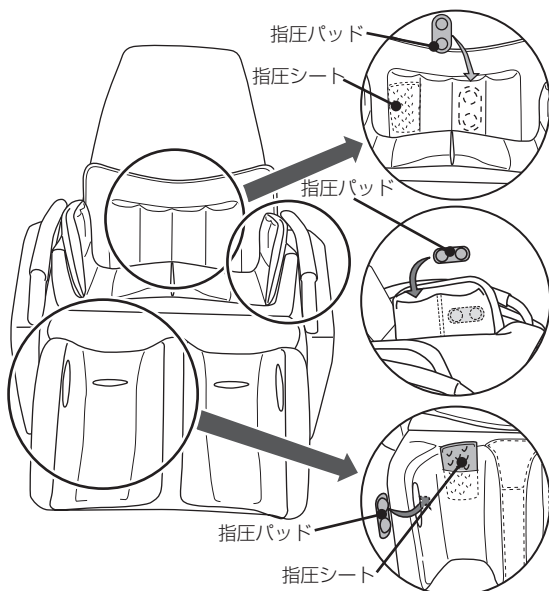

背もたれ

背もたれには指圧パッド、指圧シートを入れるポケットがついています。お好みに応じて取付けてください。

座ほぐしユニット

座ほぐしユニットには、指圧パッドを入れるポケットがついています。お好みに応じて取付けてください。

フットレスト

フットレストには指圧パッド、指圧シートを入れるポケットがついています。お好みに応じて取付けてください。


■刺激が強い場合は指圧パッド、指圧シートは外してご使用ください。

リモコンの位置変更

本製品は、お好みによりリモコンを左右どちらでも使えるようになっています。お届け時はリモコンは右側に付いています。

左側にする場合

リモコンケーブルをワイヤーサドルから外すと、リモコンを左側で使用することができます。

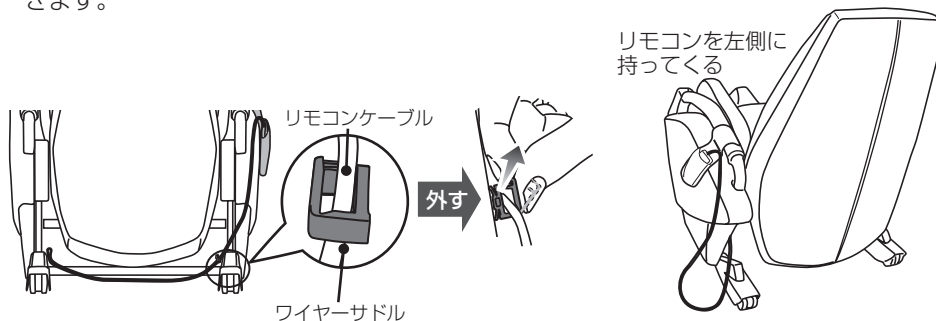

注意

● コード類に引っかかって転倒しないようにしてください。

※13ページ「リモコンポケットの取付け方・使い方」を参照し、リモコンポケットを左側に取付けてください。


椅子の調節

リモコンポケットの取付け方・使い方

お届け時は本機の右側にリモコンポケットが取付けてあります。リモコンを左側で使いたい時はリモコンポケットを取外し、左側に取付けてご使用ください。


取付け方

- ①アームレストのパイプ部分にリモコンポケットを巻き付け、マジックテープで留めます。
- ②使いやすい位置に調節してください。

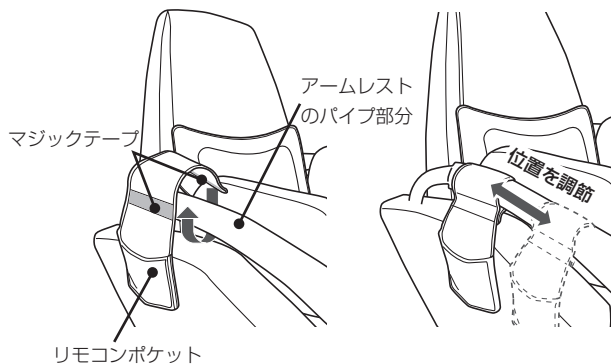

使い方

リモコンを図のようにポケットに入れて使います。

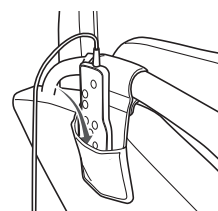


※リモコンポケットを左側に取付けた場合は 12 ページ「リモコンの位置変更」を参照し、リモコンを左側で使用できるようにしてください。

シートクッションの取付け方

本機はシートクッションが付属しています。座り心地や強弱の調節に応じて座ほぐしユニットに取付けてご使用ください。

- ①シートクッションを座ほぐしユニットにかぶせてください。
- ②下図の位置のファスナーを閉めてください。

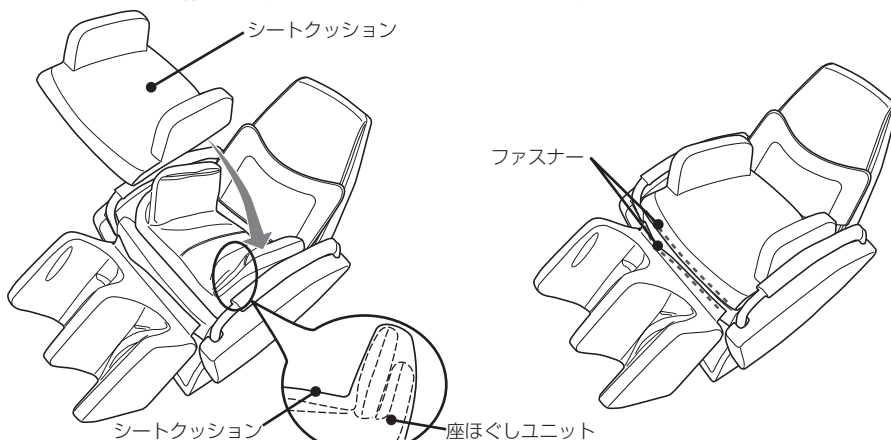

シートクッションを
図のようにかぶせる



フットレストの使い方

上下の調節

フットレストを上げる場合

フットレストボタンの上側のボタンを押してください。


フットレストを下げる場合

フットレストボタンの下側のボタンを押してください。

フットレスト



もたれると倒れる
スプリング式

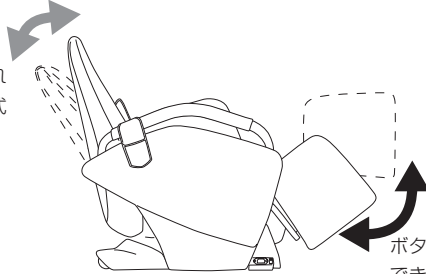

ボタンで上下調節
できます。


長押し機能

ボタンをおよそ2秒間長押しするとフットレストの昇降（下降）動作を一定時間自動で行います。

途中で止める場合は再度ボタンを押してください。

フットレストの伸縮

図のように手で押し引きすることでフットレストを伸縮させることができます。

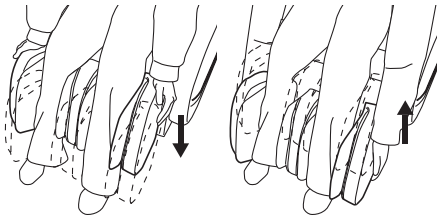

足裏のマッサージ

図のようにフットレストに脚を乗せることで足裏のマッサージを行うことができます。



警告

- フットレストを下げるときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、フットレストの下に体や物を挟まないようにしてください。
- フットレストを手で持ち上げた状態で急に手をはなさないでください。



注意

- 脚部以外には使用しないでください。

使い終わったら

本体右前部の POWER（主電源）スイッチを「OFF」にしましょう！
コンセントから電源プラグを抜きましょう！待機電力がかからず節電（エコ）にもなります。



注意

- 使用後は必ず POWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
- 電源プラグをコンセントから抜く時は、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- コード類に引っかかって転倒しないようにしてください。



操作方法

コースの種類と特長

自動コース

あらかじめ設定されたメニューにより、目的、用途に応じたコースが簡単に選べます。



疲労回復

元気が出ない、疲れやすいという方におすすめするマッサージコースです。



脚ほぐしスッキリ

脚の疲れを取りたい方におすすめするマッサージコースです。



骨盤シェイプ

骨盤やおしりを刺激するコースです。

ストレッチ運動コース

身体全体を反らす動作を行うストレッチ運動コースを選べます。



ウォームアップ

運動前の筋肉を柔らかくほぐすことを目的としています。朝の体を目覚めさせる目的でも使用できます。



クールダウン

運動後の筋肉をバランスよく伸ばすことを目的としています。翌日に疲れを残さないためにおすすめします。

自由選択コース

背&座または脚のマッサージを選べます。

背&座



背&座

背中や座のマッサージを行います。


脚



脚

脚のマッサージを行います。

操作方法

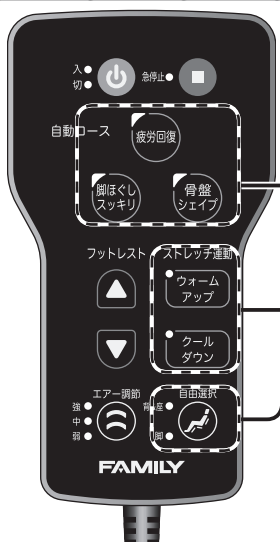

① 電源ボタンを押して電源を入れます。

「入」のランプが点灯します。
5分間入力がなければ自動的に電源が切れ、「切」のランプが点灯（待機状態）します。

② お好きなコースのボタンを押します。

③ コースが始まります。

強さの調節をすることができます。
エアー調節ボタンを押してエアー強さを調節してください。

④ 約15分後、コースが終了します。

コース終了後「切」のランプが点灯します。



コース変更
するには・・・

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切り換えられます。

コースの途中で
終了するには・・・

⏻ボタンを押すと動作が終了します。

コースの途中でも電源を入れてから 30 分経つとマッサージが終了し「切」のランプが点灯（待機状態）します。

緊急時や異常を感じたときは・・・

急停止ボタンを押してください。その場で動作が停止します。

安全を確認後、⏻ボタンを押してください。


⚠️ 注意

- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書(19 ページ)にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止しサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。
→強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- 背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れないでください。また、髪飾り、ネックレスなどのかたい物をつけて使用しないでください。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。
- スポンのポケットに物を入れた状態で使用しないでください。
→ケガのおそれがあります。
- マッサージの使用は 1 回 15 分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は 5 分以内にしてください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。
1 日当たりのマッサージは通算して 30 分程度を目安にしてください。

「操作方法」

故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお近くのサービスセンター（裏表紙記載）までご相談ください。

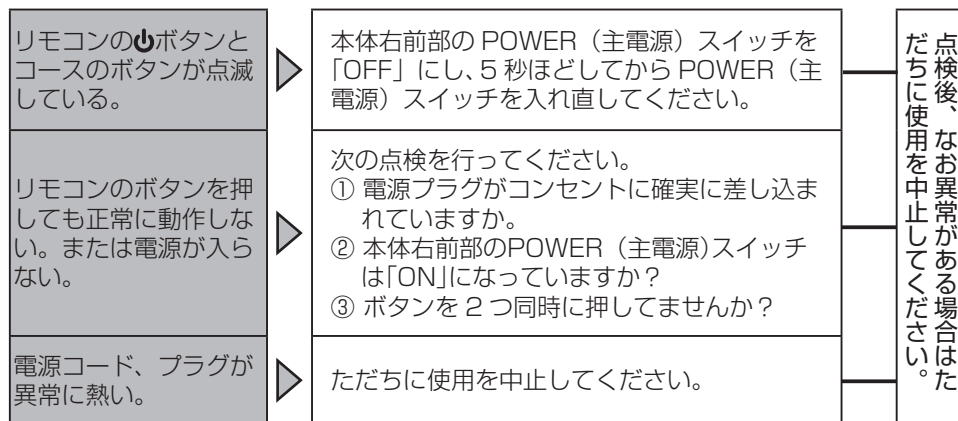

【故障かな？と思ったら】

サービスマン以外の人は分解や修理は行わないでください。

お買い上げの販売店、またはお近くのサービスセンターまでご相談ください。

動作時の音

構造上やむを得ず発生するもので、性能などに影響はありません。

動作中は下記のような作動音があります。

ほぐし時の音	ウィーン音	エアーポンプの音	ブーン音
エアーマッサージ中の音	コツコツ音	エアー排気音	シュー音

安全のために商品の点検を

長期で使用の場合は商品の点検を

こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、動作しないときがある。
- 電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
- 自動的にタイマーが切れないときがある。
- その他の異常や故障がある。

上記のような症状があれば、故障や事故の防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店または、サービスセンターに点検をご依頼ください。




本体布地は消耗品であり、耐用年数は3年です。(使用条件：1日15分コースを2回、毎日使用した場合)。

安全にお使いいただくために、お買い上げ後、耐用年数が過ぎる前にお買い上げの販売店、またはサービスセンターでの定期点検をおすすめします。

※ただし使用条件が上記と異なる場合には、耐用年数が変わります。

※お買い上げ後5年ほど経ちましたら、安全のために椅子全体の点検をおすすめします。点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、またはサービスセンターにご相談ください。

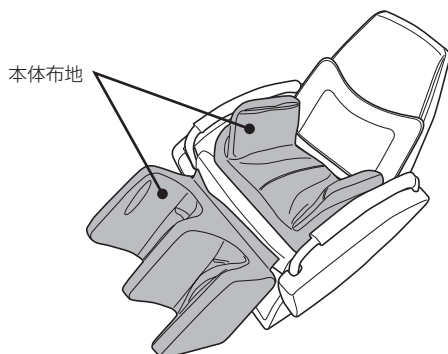

【安全のために商品の点検を】

Q&A

Q ホットカーペットの上に椅子を置いてもいいですか？

A 火災のおそれがありますのでホットカーペットの上に置くのはおやめください。

椅子は重量物ですのでホットカーペットの発熱体を痛め、そこから発火するおそれがあります。

Q フローリングや床暖房の上に設置しても大丈夫ですか？

A 設置しても大丈夫です。

ただし、床をきずつけることがあるかもしれませんので、カーペットなどを敷き、その上に椅子を設置することをお勧めします。(畳等も同様です)

Q マッサージをより強くするにはどうすればいいですか？

A 次のことを行ってください。

- 深く腰かけ、背もたれに体重がかかるようにする。
- エア強さを『強』にする。
- 指圧パッドや指圧シートを入れる。
- シートクッションを取外す。

Q マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか？

A 次のことを行ってください。

- エア強さを『弱』にする。
- 指圧パッドや指圧シートを抜く。
- シートクッションを取付ける。

Q 1ヶ月の電気代はいくらですか？

A 1日15分、毎日ご使用いただいた場合、1ヶ月で約15円です。

(2010年8月 当社調べ)

保管とお手入れの仕方

保管の仕方

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない場所に保管してください。
- ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないようにしてください。



注意

- 直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

お手入れ仕方



注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

【背パッド・各カバーのお手入れ】

汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取ってください。



注意

- ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。

【リモコンのお手入れ】



リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

- 絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。→故障の原因になります。

【その他のプラスチックのお手入れ】

少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

- アルコール、その他の溶剤やみがき粉などでのお手入れは、傷、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

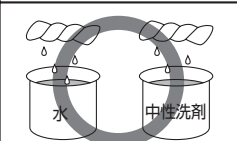適しているもの	適していないもの
	

アフターサービスについて

1. 保証書について

この製品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店にて「販売店・購入日」などの所定事項を記入してお渡ししていますので、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。（修理の際、必要となります。）保証期間は、お買い上げ日より1年です。ただし、この製品は日本国内専用ですので、日本国外でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外（業務用など）でご使用の場合は、保証期間中でも有料修理とさせていただきます。

2. 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、17ページの「故障かな?と思ったら」をよくお読みください。点検後、まだ異常がありましたらお買い上げの販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

- 1) お名前・ご住所・お電話番号
- 2) 販売名…この取扱説明書の仕様欄、または、本体右前部に貼ってある社銘板をご覧ください。（下図 社銘板の位置参照）
- 3) 製造番号…本体右前部に貼ってある社銘板をご覧ください。
- 4) お買い上げ日
- 5) 故障の状態（できるだけ詳しくお知らせください。）
例) リモコンのランプが下図のように点滅している場合は、点滅していることをお知らせください。

リモコンボタンの点滅



社銘板の位置



- **保証期間中は**
修理の際、保証書をご提示ください。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- **保証期間が過ぎている場合は**
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- **補修用性能部品の最低保有期間**
弊社はこのエアマッサー器の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。（ただし、縫製部品は除きます。）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- **日本国外でご使用になられた場合、修理をお断りする場合があります。**
- **アフターサービスについてご不明な点は**
お買い上げの販売店、またはフリーコール（裏表紙に記載）にお問い合わせください。
- **販売店にご依頼になれない場合は**
フリーコール（裏表紙に記載）にご連絡ください。

仕様

販売名	ファミリー ホグシー FMC-RC10	
使用電源	AC100V	
定格消費電力	90W	
定格周波数	50-60Hz	
定格時間	30分	
電撃に対する保護の形式	クラス0 I 機器	
ほぐし回数	座ほぐしユニット	8~22 ± 2 回 / 分
	フットレスト	12~33 ± 2 回 / 分
エア圧力	約 37kPa	
オートタイマー	約 15分	
本体の寸法	幅約 68cm × 奥行約 104cm × 高さ約 82cm	
重量	約 55kg	
外装布地	合成皮革	
付属品	電源コード、指圧パッド× 4 個、指圧シート× 2 個 シートクッション、リモコンポケット	
包装	1 梱包 / 1 台	
類別	機械器具 (77) パイプレーター	
一般的名称	家庭用エアマッサージ器 (JMDN コード 34663000) 管理医療機器	
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003	
医療機器認証番号	222AKBZX00069000	
製造販売元	ファミリー株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田 1220 番地	
製造元	ファミリー株式会社	

【仕様】

ファミリー株式会社

サービスセンター 受付時間 土・日・祝を除く平日 9:00～17:00

製品に関する問い合わせフリーコール 0120-129-011

修理等に関する問い合わせフリーコール 0120-772-294

札幌営業所	〒060-0006	札幌市中央区北六条西十八丁目1-17	TEL.(011)640-6655 (代)
仙台営業所	〒984-0047	仙台市若林区木ノ下三丁目1-2	TEL.(022)291-3484 (代)
東京支店	〒167-0033	東京都杉並区清水一丁目8-4	TEL.(03)3392-7100 (代)
名古屋営業所	〒460-0011	名古屋市中区大須一丁目35-18	TEL.(052)223-1641 (代)
大阪支店	〒532-0004	大阪市淀川区西宮原二丁目1-3	TEL.(06)4807-9191 (代)
広島営業所	〒733-0033	広島市西区観音本町一丁目21-5	TEL.(082)231-0227 (代)
福岡営業所	〒810-0071	福岡市中央区那ノ津二丁目6-4	TEL.(092)711-1567 (代)

2010年 9月 1日 (第2版) 777703701
2010年 8月 1日 (第1版)