


通路幅が63cm以下の場合には通常搬入できません。お買い上げの販売店にご相談ください。


※あて布などの養生部材は別途用意してください。

梱包箱のサイズ

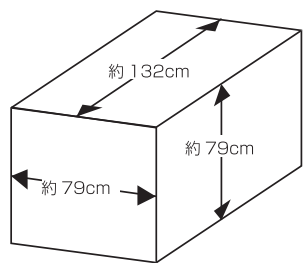


搬入可能な通路幅
養生後 約 80cm 以上

背もたれを倒した状態

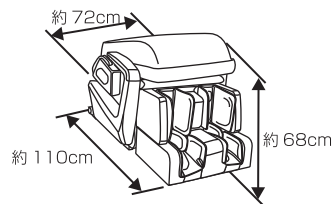


搬入可能な通路幅
養生後 約 77cm 以上

背もたれを起こした状態

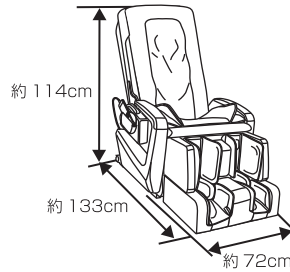

搬入可能な通路幅
養生後 約 77cm 以上

リクライニング時寸法

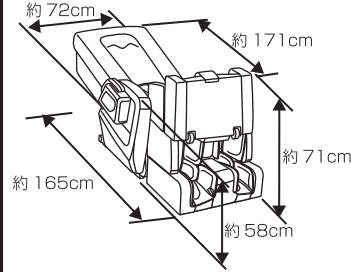


搬入可能な通路幅
養生後 約 63cm 以上

近くにコンセントがある場合


運搬方法について

通路幅が広いとき

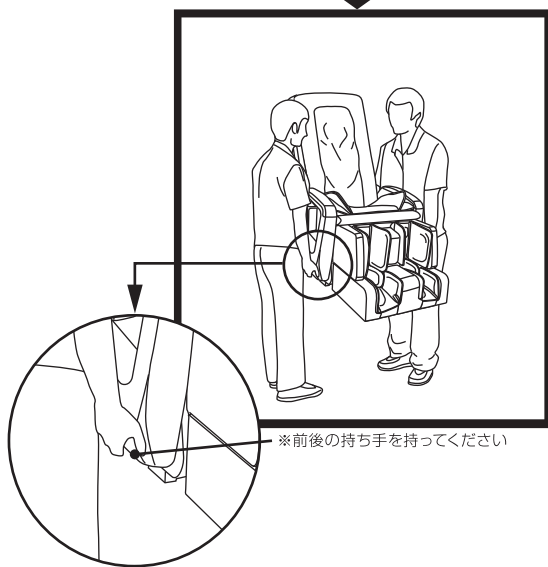

※前後の持ち手を持ってください


背もたれを倒す

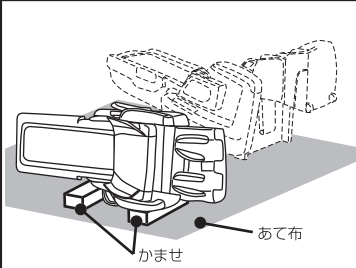

手もみユニットを直接地面に当てず、あて布を敷いてダンボールなどでかませをつくり、浮かせてください。


通路幅 77cm 以下の
場合

※反対側はキャスターや持ち手部分を持ってください。

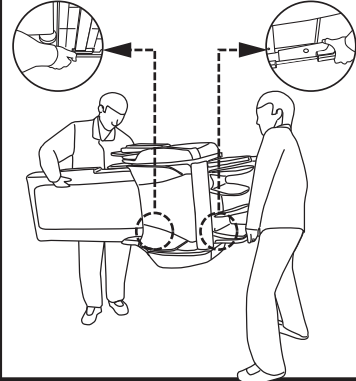


背もたれを倒す

- ①付属品ケース(本体同梱)から電源コードを取り出します。
- ②本体右後部のインレット(差込口)にコネクタを差し込んでください。
- ③コンセントに電源プラグを差し込んでください。
- ④POWER(主電源)スイッチを「ON」にしてください。
- ⑤リモコンのリクライニングボタンで背もたれを倒してください。

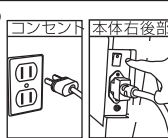

※背フォーム上部の持ち手を持ちます。

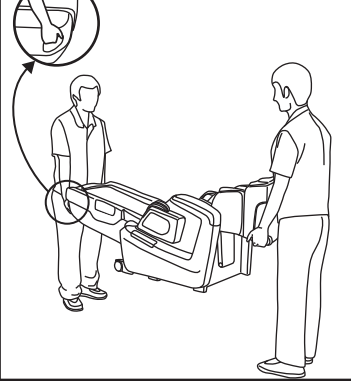

注意事項

- 間口・通路のサイズを確認のうえ、上記の運搬方法を参考に搬入してください。
- 重量物ですのでゆっくり慎重に運搬してください。
- リモコンがついていますので、運搬時に落とさないように注意してください。
- 搬入先の床や壁、商品などを傷つけないように注意してください。
- ポケットのペンなどで商品を傷つけないように注意してください。
- 上記の運搬方法は一般的な通路を想定しています。上記の運搬方法での搬入が困難な場合、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

※製品によりイラストが若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。


設置場所について

リクライニングをしたときに壁や物に当たらないように、本体後のスペースは約 40 cm 以上、本体前のスペースは約 30 cm 以上確保してください。また、左右のスペースは約 20 cm 以上確保してください。


注意

- 浴室やサウナなど、湿気が多い場所では使用しないでください。
- 床面の水平な場所に置いて使用してください。
- ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所(40℃以上)では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。
- 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。(ホットカーペットは敷かないでください)
- 重量物ですので、下ろすとき床面を傷つけないように注意してください。
- テレビやラジオなどの AV 機器から 1m 以上離してください。雑音が入ることがあります。
- 体重 100 kg の人が座った状態で 1 cm² あたり約 2.3 kg の荷重がかかります。

左右のスペース


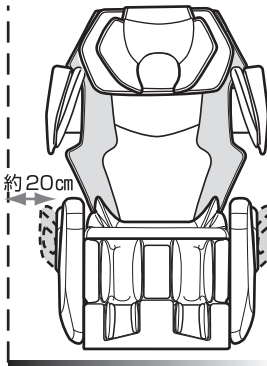


前後のスペース

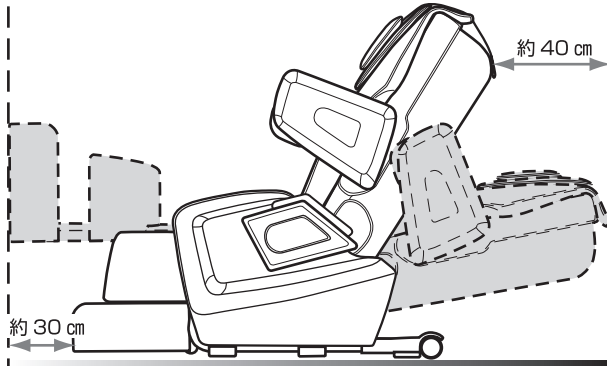

肩引ユニットの取付け方

肩引ユニットから出ている軸の部分、背もたれ横の穴に差し込み、奥まで押し込んでください。この時、吸気部が上になるように取付けてください。また、肩引ユニットには左右があります。

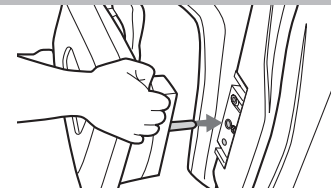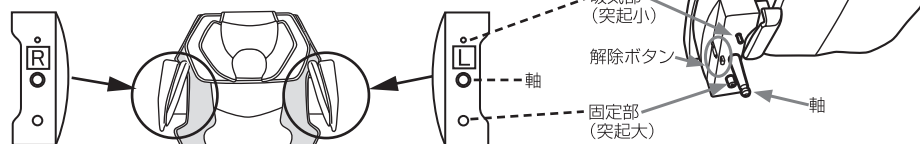


● 取付けた後に、必ず引っ張って抜けないことを確認してください。

肩引ユニットの取り外し方

肩引ユニットを外す場合は以下の手順で行ってください。

- ① 肩引ユニットを本体側にまっすぐ押さえる。
- ② ①をしたまま解除ボタンを押す。
- ③ 解除ボタンを押したまま引き抜いてください。

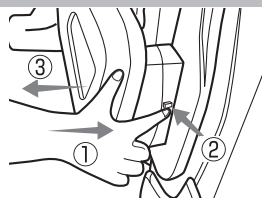

設置方法について