

MEDICALCHAIR ROBOSTIC

ファミリー メディカルチェア ロボスティック

FMC-6000


このたびは、FAMILY MEDICAL CHAIR ROBOSTICをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この製品は、疲労の回復・改善を目的としたさまざまなマッサージがお楽しみいただけます。

皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして末永くご愛用ください。

もくじ

■ 安全上のご注意	1
■ おもな特長と効能・効果	4
■ 各部の名前とはたらき	5
■ ご使用の前に	9
■ 椅子の調節	12
■ 使い終わったら	16
■ マッサージの種類と特長	17
■ 自由選択コースのマッサージ	19
■ メディカルコースのマッサージ	25
■ 故障かな?と思ったら	27
■ Q&A	30
■ 保管とお手入れの仕方	31
■ アフターサービスについて	32
■ 安全のために商品の点検を	33
■ 仕様	34

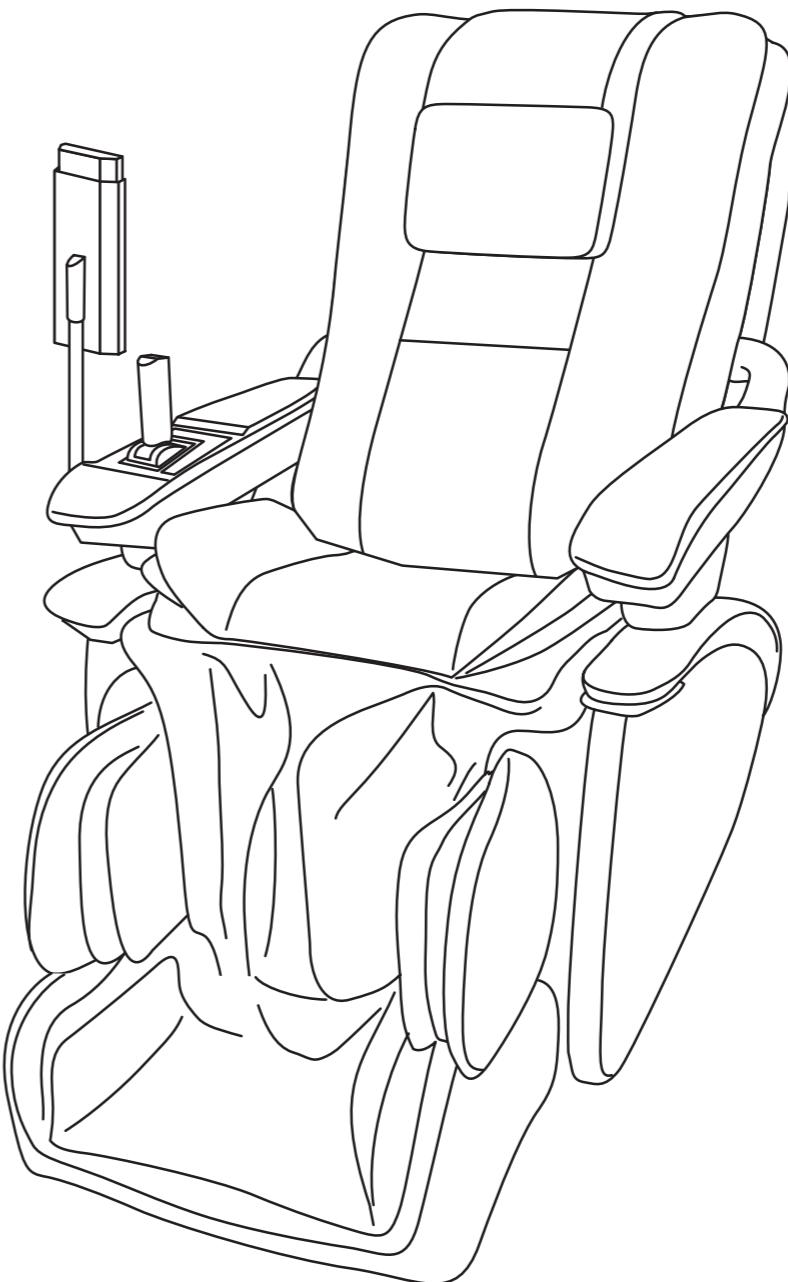

ファミリー株式会社 サービスセンター

受付時間 土・日・祝を除く平日 9:00~17:00

全国共通フリーダイヤル

0120-772-294

札幌営業所	〒004-0051 札幌市厚別区厚別中央一条3丁目1-27(プラザ館中央1-3 1階) TEL.(011)896-6555(代)
仙台営業所	〒984-0047 仙台市若林区木ノ下3丁目1-2 TEL.(022)291-3484(代)
東京支店	〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目16-14(武蔵館ビル4階) TEL.(03)3392-7100(代)
名古屋営業所	〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目35-18(一光大須ビル1階) TEL.(052)223-1641(代)
大阪支店	〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3(ソーラ新大阪21 14階) TEL.(06)4807-9191(代)
広島営業所	〒733-0033 広島市西区観音本町1丁目21-5 TEL.(082)231-0227(代)
福岡営業所	〒810-0071 福岡市中央区那ノ津2丁目6-4(九産ビル3階) TEL.(092)711-1567(代)

安全上のご注意

ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。なお、各部の名前については5~8ページをご覧ください。

表示の種類と意味

	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。

図記号の種類と意味

	記号は、禁止の行為であることを示しています。(左図の場合は分解禁止)
	記号は、行為を強制したり指示したりするものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

ご使用場所の注意点

	●浴室やサウナ、湿気の多い場所では使用しないでください。 →感電や故障の原因になります。
	●床面が水平な場所に置いて使用してください。 →不安定な場所では本体が転倒し事故の原因になります。
	●万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。 詳しくは、9ページをご覧ください。
	●アース線はガス管・水道管・電話線・避雷針には絶対に接続しないでください。

ご使用前の注意点

	●次の人には使用しないでください。 ◎医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。 ◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人
	●次の人には、使用前に医師に相談してください。 ◎心臓に障害のある人 ◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ◎施療部位に創傷のある人 ◎体温38°C以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期。衰弱しているとき。 ◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ◎ベースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人 ◎安静を必要とする人 ◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人 ◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人 ◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人
	●電源は交流100V以外では使用しないでください。 →火災や感電の原因になります。 ●変圧器を用いた使用はしないでください。 →故障や感電の原因になります。 ●電源コードや電源プラグがいたんだ状態、またはコンセントの差しこみがゆるいときなどは使用しないでください。 →感電・ショート・発火の原因になります。 ●マッサージの前には必ず背パッドを上げて本体の布地が破れていないか確認してください。 また、他の部分に布地の破れないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、サービスセンター(裏表紙に記載)にご連絡ください。 →布地が破れた状態で使用すると、ケガや感電のおそれがあります。

ご使用前の注意点

△ 注意

	●電源プラグをコンセントに差し込む前にPOWER(主電源)スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。 →故障や感電の原因になります。
	●電源プラグおよびコネクターは確実に最後まで差し込んでください。 →感電やショート・発火の原因になります。
	●ご使用前にはこの取扱説明書にしたがって全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。
	●ご使用前には背もたれを完全に起し体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。 →はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。
	●安全のために、もみ玉の位置を確認した上で、体をねじらず背骨が左右のもみ玉の間にくるように、ゆっくりと座ってください。
	●椅子に腰掛けたり、椅子から立ち上がるとき以外は、フットレストの上にのる、立つ、座る等の行為はしないでください。 →転倒による事故やケガ、故障の原因になります。
	●しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
	●この取扱説明書の使用法以外の使い方をしないでください。また、本機と他の治療器や電気毛布などを併用しないでください。 →体に悪い影響を与えることがあります。
	●人をのせたまま移動しないでください。 →本体の転倒により、事故やケガの原因になります。

ご使用時の注意点

△ 警告

	●電源コードやリモコンのコードを本体に巻きつけたり、本体の脚で踏んだりしないでください。また、電源コードやリモコンのコードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。 →コードが破損し、火災や感電の原因になります。
	●本体やリモコン、サプリメント、ジョイスティックに水などをこぼさないでください。 →感電やショート・発火の原因になります。
	●お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺(背もたれの後ろや座・フットレストの下など)で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせたりしないでください。 →事故やケガの原因になります。
	●布地が破れた状態では使用せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →事故やケガ、感電の原因になります。修理はサービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。
	●フットレストの各ユニット間やフットレストと本体の間、アームレストと本体の間に指や物をはさまないようにしてください。 また、フットレストを手で持ち上げた状態で急に手をはなさないようにしてください。
	●フットレストを上げたままでの乗り降りはしないでください。
	●ぬれた体で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。 →感電や故障の原因になります。
	●背もたれを倒すときやフットレストを下げるときは、必ず周囲に人(特にお子様)やペットがいないことを確認してください。 また、背もたれを倒すときは、背もたれの後ろに体や物をおかないようにしてください。
	●フットストライド機能動作時、フットレストのユニット間に手や足、物などをはさまないようにしてください。 →事故やケガの原因になります。

△ 注意

	●素肌では使用しないでください。
	●マッサージおよび椅子としての目的以外には使用しないでください。 →事故やケガの原因になります。
	●頭部、胸部、腹部、関節部(ひじ、ひざなど)には使用しないでください。また、もみ玉の間に手や足、腕などを入れないでください。 →気分が悪くなったり、ケガの原因になります。首筋などには柔らかいタオルを当てて強い刺激を避けてご使用ください。
	●もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れないようにしてください。 →ケガの原因になります。
	●フットレストは脚部以外には使用しないでください。 →ケガの原因になります。
	●マッサージチェアを無人で動作させないでください。 →事故やケガの原因になります。

安全上のご注意

ご使用時の注意点

△ 注意

	<ul style="list-style-type: none">●緊急時や動作中に異常を感じたときは、リモコンの【急停止】ボタンを押して、動作を停止させてください。●使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください。●マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。 それでも強いと感じる時は、使用を中止してサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。 →強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。●背パッドをはずしてマッサージしないでください。 →ケガの原因になります。●マッサージ中は眠らないように注意してください。 →ケガの原因になります。●マッサージは、1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。 →長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。1日当たりのマッサージは、通算30分程度を目安にして時間をあけてご使用ください。●脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。 →無理に入れようとすると、故障の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">●停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止してPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。●落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止してPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。●動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止してPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、サービスセンター（裏表紙に記載）に点検・修理を依頼してください。 →感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

ご使用後や使用しないときの注意点

△ 注意

	<ul style="list-style-type: none">●使用後は必ずPOWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →お子様やペットのいたずら等による事故やケガのおそれがあります。●本機を使用後は、必ず背もたれを完全に起こし、フットレストを完全に下ろしてください。●使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。●座、背もたれ、アームレスト、フットレスト、サブリモコン、ジョイスティックに物を載せないでください。
	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。 →感電やショートによる火災の原因になります。●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。●ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 →ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。

その他の注意点

△ 警告

	<ul style="list-style-type: none">●本体の上に立たないでください。座部以外に座るなどして、上から強い衝撃を与えないでください。 →転倒による事故やケガ、故障の原因になります。●フットレストを上げたまでの乗り降りはしないでください。●制御ボックスの上にのったり、物を置いたりしないでください。
	<ul style="list-style-type: none">●改造はしないでください。また、サービスマン以外の人は分解・修理をしないでください。 →火災や感電、ケガの原因になります。修理はサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。

△ 注意

	<ul style="list-style-type: none">●他の人に譲渡、貸与するときは、本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡しください。
---	--

おもな特長と効能・効果

特 長

もみ玉、エアー、パイプを組み合わせた ハイブリッドマッサージ機能

あらゆる技術を投入したマッサージ機能により、心地よいリラックスを実現しました。

背部、座部及びふくらはぎ部はバリエーション豊富なマッサージ技術と独自のプログラムで人の手に近い感覚のマッサージを行います。足裏ユニットはリクライニングをしたときもぴたっと足裏についてくるので、どの角度でも心地よいマッサージを行うことができます。

細かな調節が自在にできる ジョイスティック機能

ジョイスティックによる簡単操作で、動作の選択やマッサージの強さ調節、位置の調節ができます。

光センサーによる 自動指圧点検索機能

マッサージ前に、その人の体型に応じて指圧点を自動的に検索。体型や目的に合わせて効果的なマッサージが行なえるようになっています。

わかりやすいガイドメッセージ 表示部付きリモコン

リモコンにはくっきりと見やすい電光掲示機能の表示部を採用。マッサージ動作への誘導を行い、実行中の動作内容の説明などをわかりやすく確認できるようになっています。

効能・効果

あんま・マッサージの代用として、以下の効能・効果があります。

- 疲労回復
- 血行をよくする

- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす

心地よい姿勢を簡単調節できる 電動リクライニング機能

背もたれの角度を床面に対して約120°～約170°の範囲内で、フットレストユニットの角度を約90°の範囲内で、それぞれお好みの角度で調節できます。

バイブレーター機能

座、フットレスト（足裏ユニット）、および背にバイブルーター機能を内蔵。心地よい振動で疲れをほぐします。

技法にこだわった 多彩なコース機能

10種類のメディカルコース（自動コース）とお好みで組み合わせができる自由選択コースをご用意。目的に合わせた最適なマッサージが選べます。

リモコンスタンドも標準装備





リモコンの収納に便利なリモコンスタンドを標準装備しています。

足裏の位置に応じて長さを自動調節 フットスライド機能

背もたれと連動でフットレストが動作します。リクライニング動作後、自動でフットレストの長さを調節。体型に応じたふくらはぎ、足裏のマッサージを行うことができます。


各部の名前とはたらき

本体

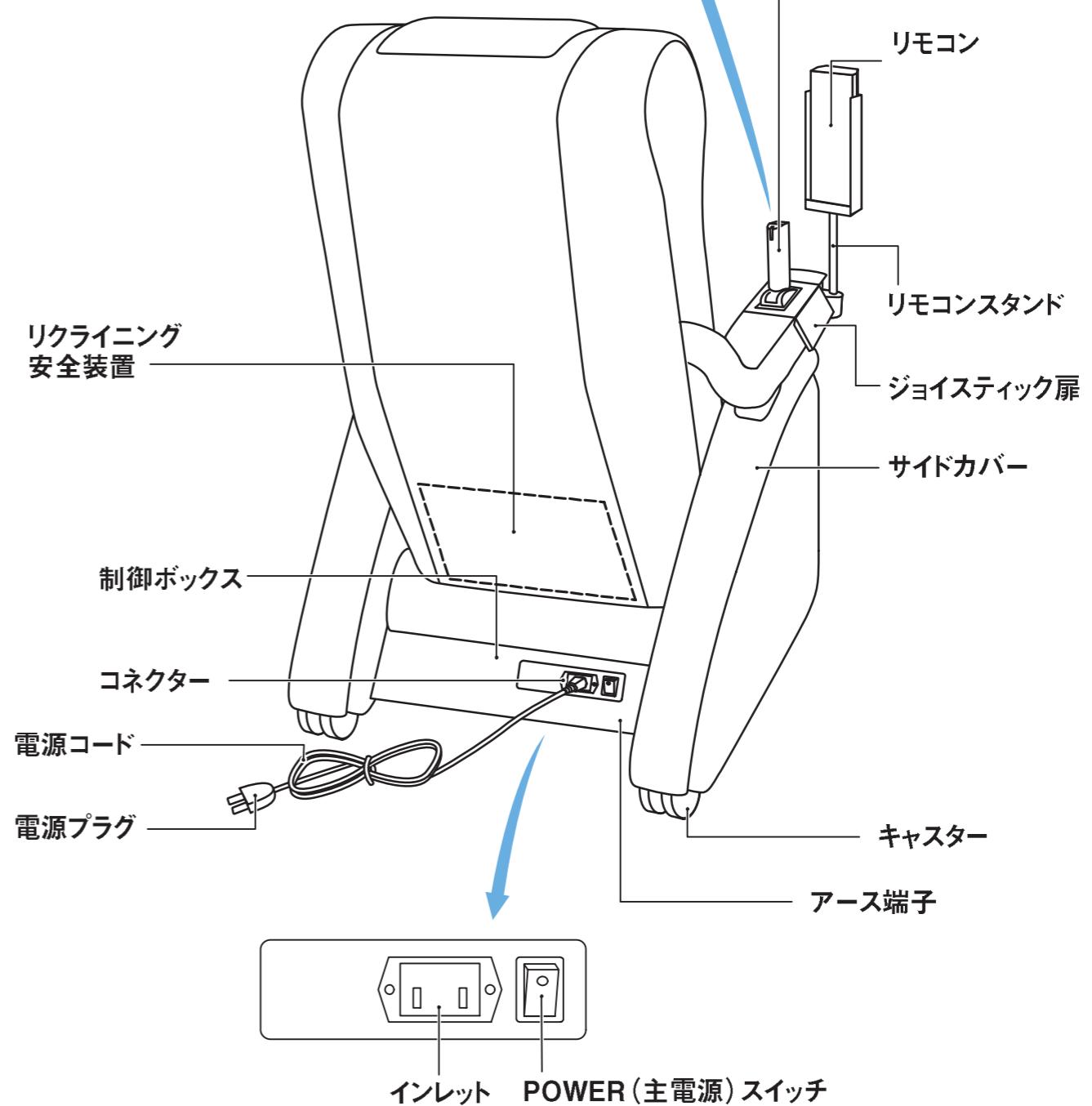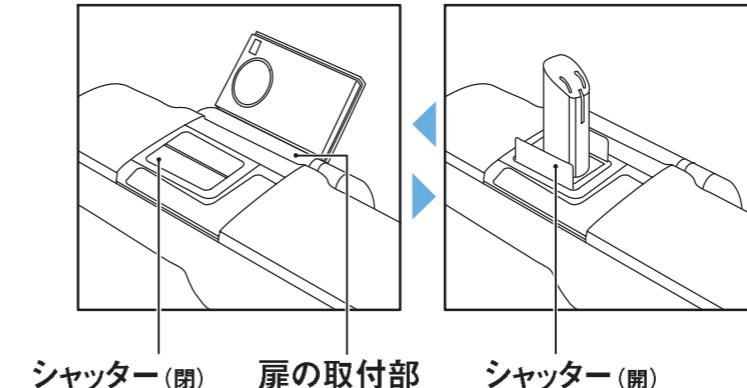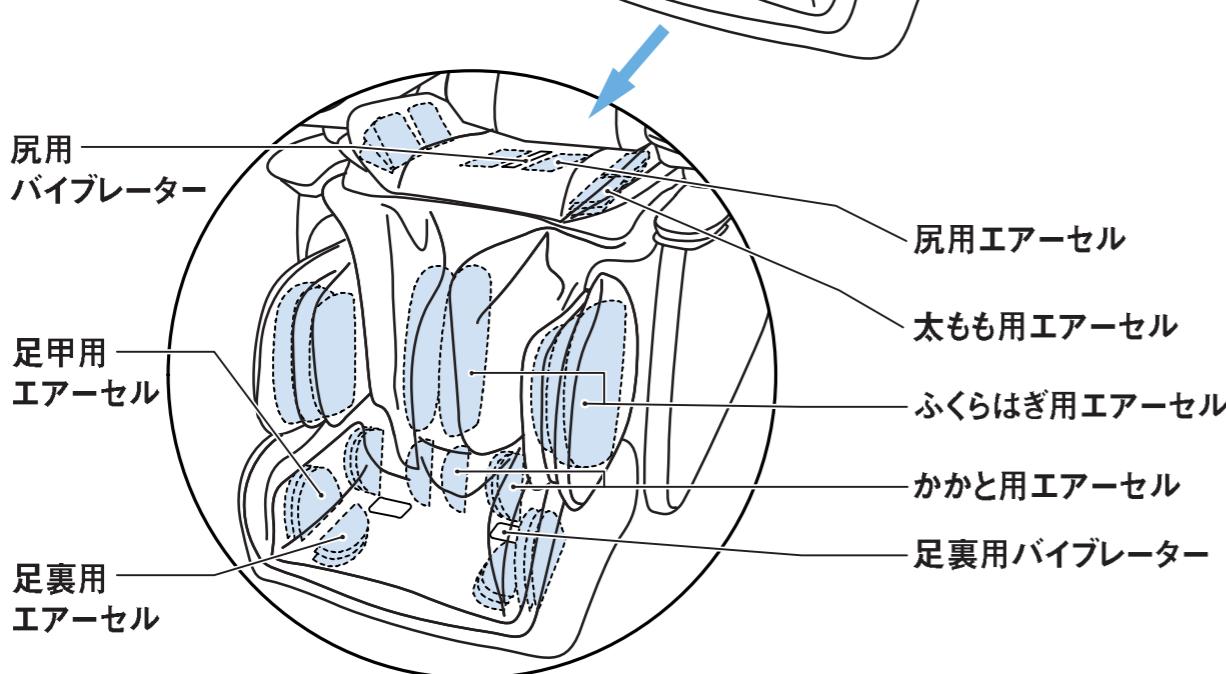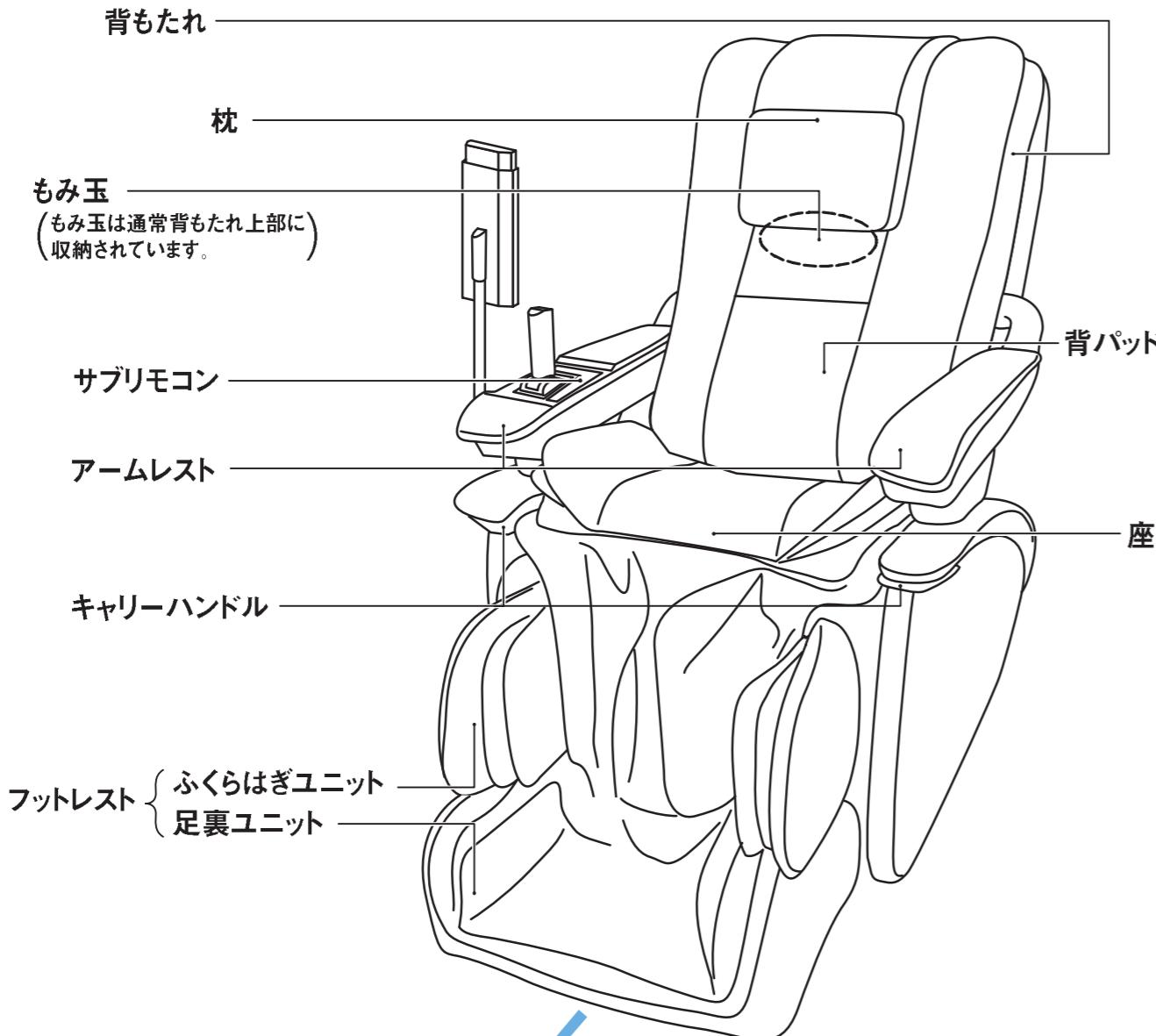

各部の名前とはたらき

リモコン

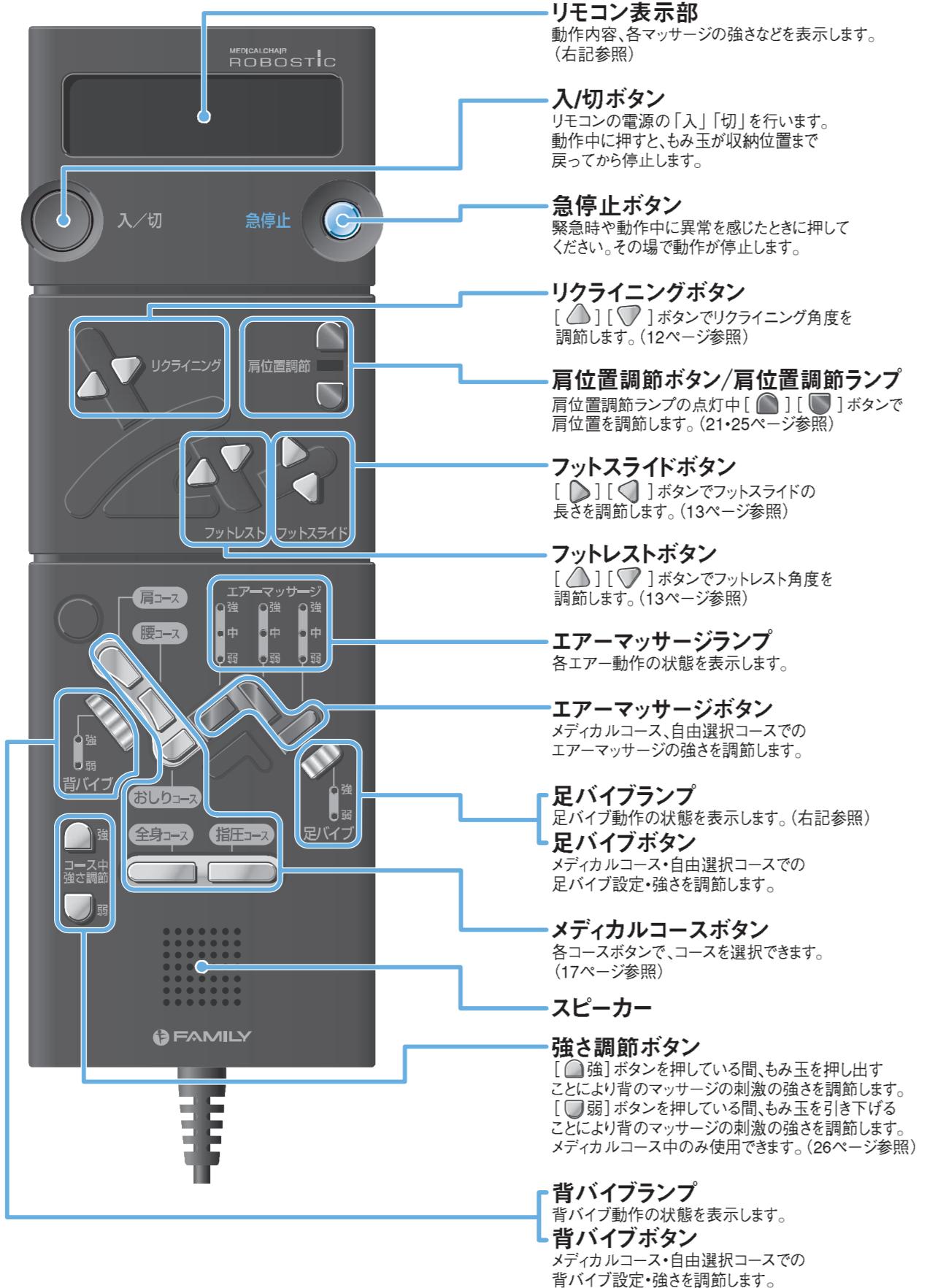

リモコン表示部／ランプについて

リモコン表示部

動作内容、各マッサージの強さなどを文字で表示します。文字は表示部の右から左に向かって流れます。

例) 自動指圧点検索動作時に流れる文字 「指圧点検索中!」



エアーマッサージランプ

座・ふくらはぎ・足裏のエアーマッサージの停止または強さを表示します。

停止	弱	中	強
●強	●中	●弱	●強
●弱	●中	●弱	●弱
●強	●中	●弱	●弱
●弱	●中	●弱	●弱

バイブルランプ

背・足バイブの停止または強さを表示します。


停止	弱	強
●強	●弱	●強
●弱	●弱	●弱

肩位置調節ランプ

肩位置調節ボタンが使用可能なとき点灯します。



サブリモコン・ジョイスティック(自由選択コース機能)／アームレスト右側

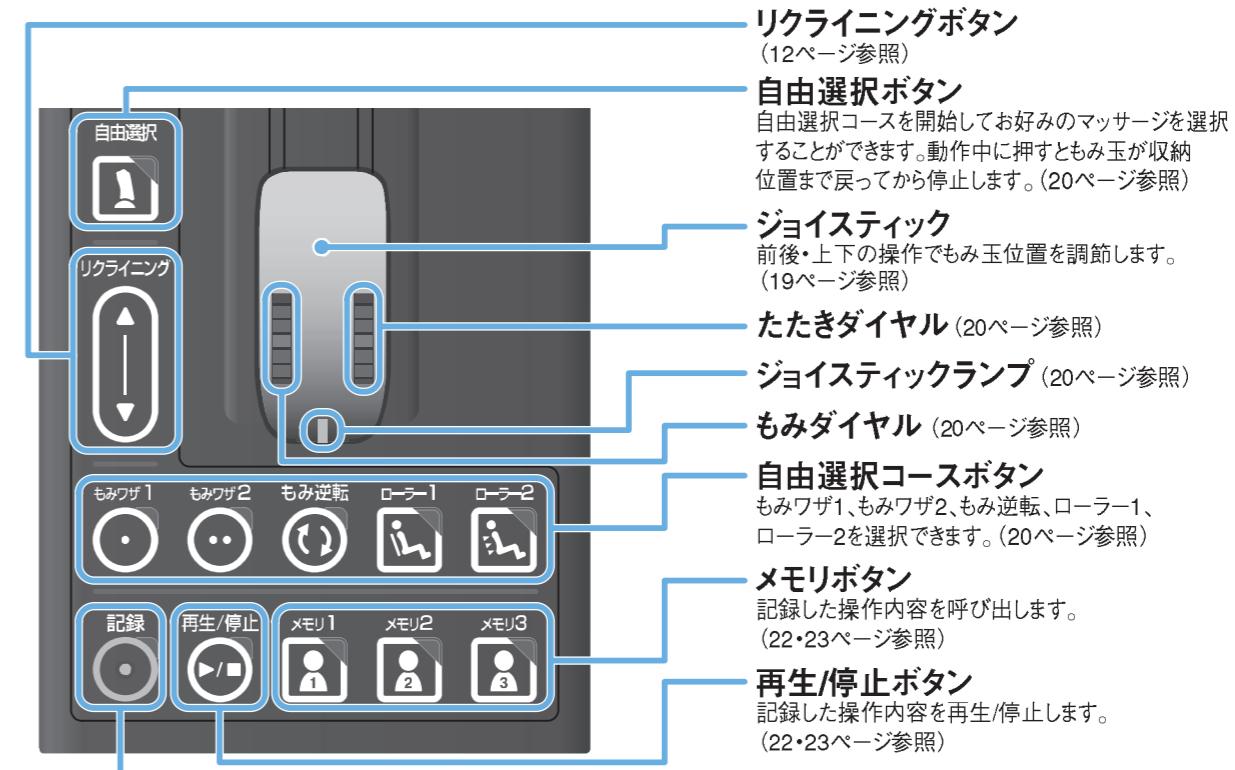

- リモコン、サブリモコン、ジョイスティックに水などをこぼさないでください。
- ぬれた手で操作しないでください。
- リモコン、サブリモコン、ジョイスティックの上に座ったり、リモコンを落したり、踏んだり、リモコンのコードを強く引っ張ったりしないでください。
→破損の原因になります。

ご使用の前に

●この製品は、背もたれが倒され、フットレストが外された状態で梱包してお届けしています。
ご使用前には、必ず背もたれを起こし、「フットレストの取り付け方」を参照して取り付けてください。
→フットレストを取り付けずに電源を入れた際「主電源を入れなおすしてください。…」とリモコンに表示されますが、故障ではありません。


●冷えきった室内の温度を上げて使用するときは、室温を急に上げず、徐々に上げてください。本機を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1時間ほど待ってから使用してください。
→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。

設置場所について

リクライニングをしたときに壁や物に当たらないように、本体後ろのスペースは50cm以上、本体前のスペースは40cm以上確保してください。

△ 注意


- 浴室やサウナなど、湿気の多い場所では使用しないでください。
 - 床面が水平な場所に置いて使用してください。
 - ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所(40°C以上)では使用しないでください。
 - 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。
-
- 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。(ホットカーペットは敷かないでください。)
 - 重量物ですので、下ろすとき床面を傷つけないように注意してください。
 - テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音があります。
 - 体重100kgの人がのった状態で1cm²あたり約4.3kgの加重が床面にかかります。

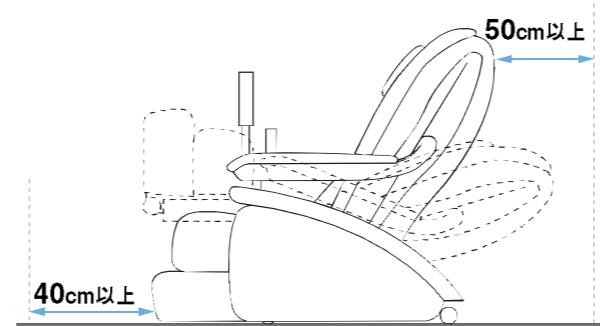

アースの取り付け方


万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。

- ①電源コンセントにアース端子がある場合
本体後部のフレームにあるアース端子のネジに付属のアース線を接続し、他端部の先端の皮をむき、電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでいないか、ときどき点検してください。
- ②電源コンセントにアース端子がない場合
お買い上げの販売店にご相談ください。

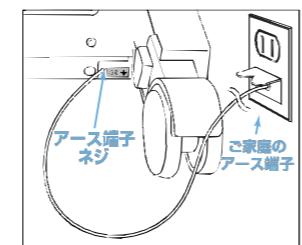


主電源の入れ方

- ①電源コードのコネクターを本体後部のインレットに差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。

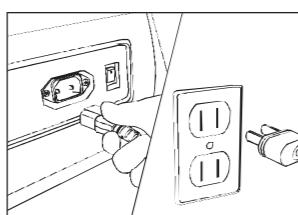

- ②本体後部のPOWER(主電源)スイッチを「ON」にします。
このとき、リモコン表示部に文字が表示されます。

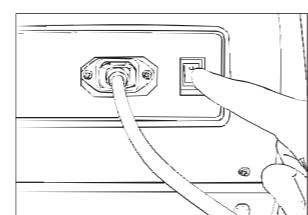

※もみ玉が途中で止まっているときPOWER(主電源)スイッチを「ON」にすると、もみ玉は自動的に収納位置(背もたれ上部)まで移動して停止します。

△ 警告

- 変圧器を用いた使用はしないでください。
→故障や感電の原因になります。


△ 注意

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、POWER(主電源)スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- 電源プラグおよびコネクターは確実に最後まで差し込んでください。
- ご使用の際にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。

リモコンスタンドの取り付け方

リモコンスタンド取付部を本体右アームレスト外側のケーブルカバーにかぶせるようにしてあて、付属のネジで取り付けます。
ネジは2ヵ所ともしっかりと取り付けてください。


リモコンスタンドにリモコンを取り付けるときは、リモコンのケーブルをリモコンスタンドのケーブルガイドにはさむようにしてください。

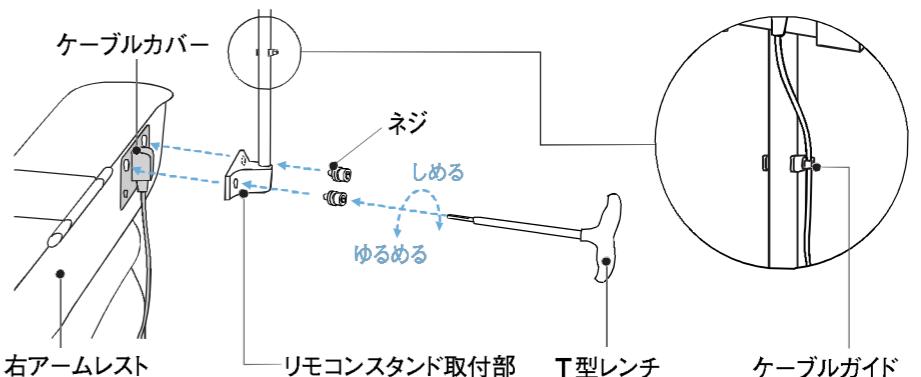

フットレストの取り付け方

※フットレストの取り付けを行うときはPOWER(主電源)スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体とフットレストの取付方法

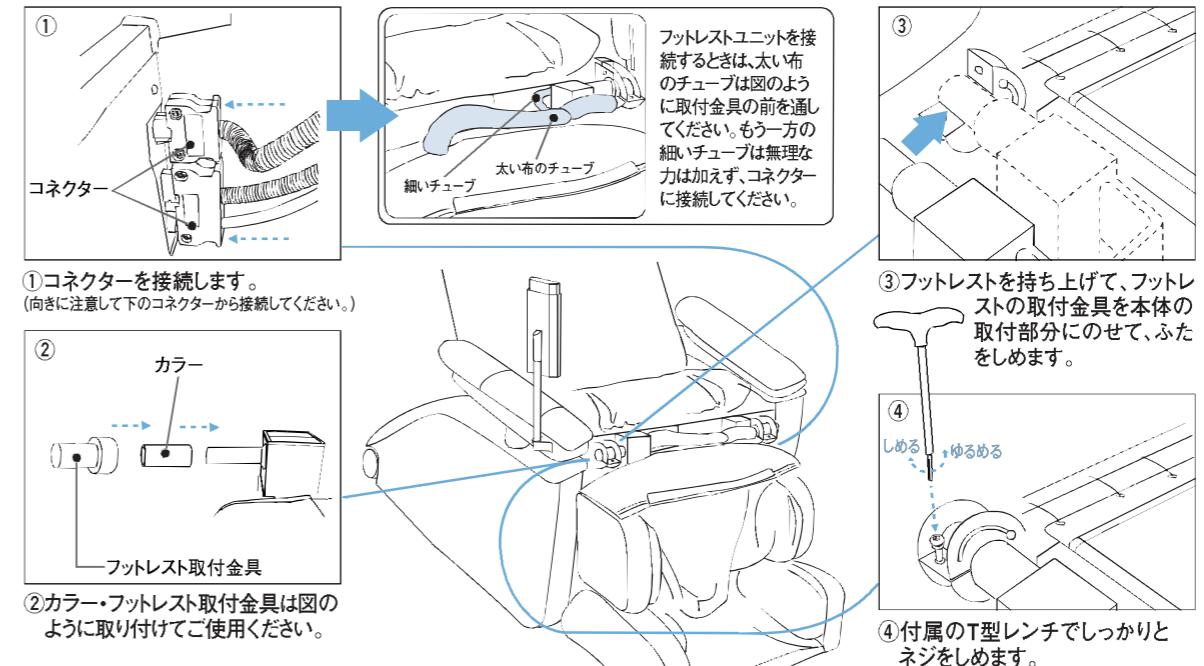

縫製品(カバー)の取付方法



●フットレストの取り付けを行う前にPOWER(主電源)スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。

●フットレストの取り付けを行うときは本体とフットレストとの間に手や指をはさまないように注意してください。

●コネクターは確実に最後まで差し込んでください。また、取付用ネジもしっかりとしめてください。(故障の原因になります。)

●リモコンのコードを本体とフットレストの間にはさみ込まないように注意してください。

●ふくらはぎ用エアーセルが縫製品(カバー)の中央ポケット状の部分にきちんと入っていることを確認してください。


ご使用の前に

布地の確認

図のように、背もたれ上部のファスナーをはずして背パッドをおろし、本体の布地が破れていないか確認してください。

△警告


- ご使用前には必ず背パッドをおろし、本体の布地が破れていないか確認してください。また、他の部分に布地の破れないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、サービスセンター（裏表紙に記載）にご連絡ください。

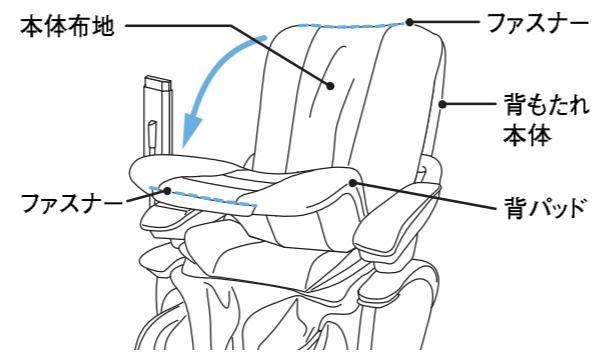

移動の仕方


本体に移動用キャスターがついています。背もたれを起こし、POWER(主電源)スイッチを「OFF」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いて図①のキャリーハンドルを図②・図③のように2人で持ち、前側を浮かせてキャスターで移動してください。

図① キャリーハンドル

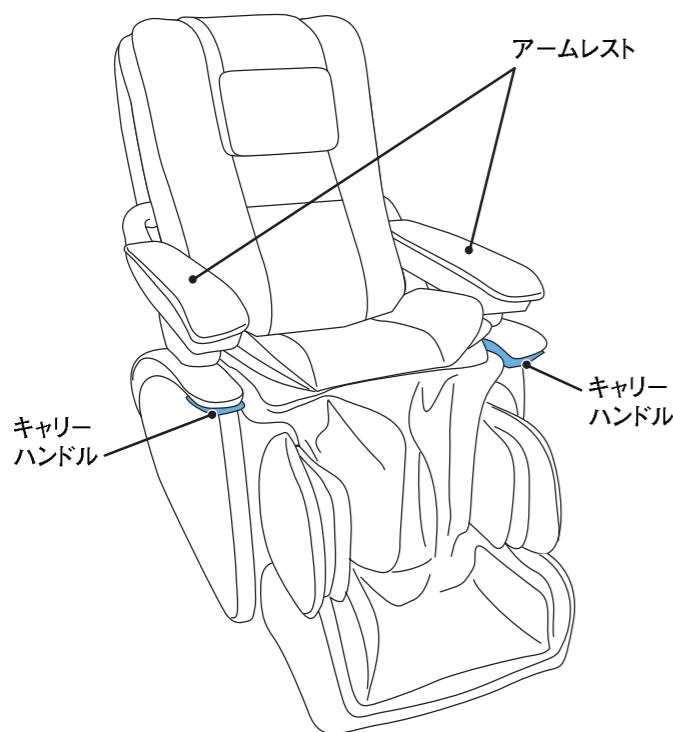

△注意



- アームレストではなく、必ずキャリーハンドルを持ってください。
- 人をのせたまま移動させないでください。
- 足などをはさまないようにしてください。

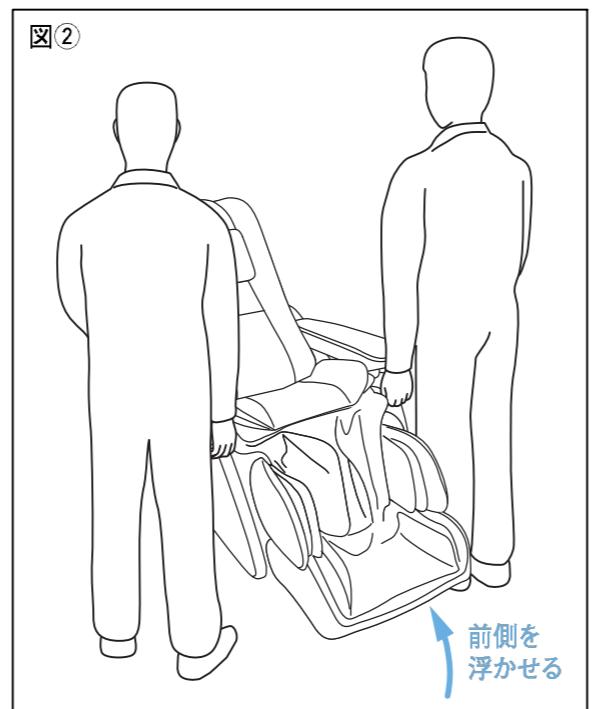

椅子の調節

椅子への座り方

フットレストユニットが完全に下りていることを確認してください。もみ玉は通常、背もたれの上部に左右に広がって引っ込んだ状態になっています（収納状態）。安全のため、もみ玉の位置を確認し、上記以外の場所にももみ玉がある場合は、すぐに座らず、POWER(主電源)スイッチを入れてももみ玉を収納状態に戻してください。確認ができましたら、下の図の注意に従い、ゆっくりと椅子の中央に座ってください。

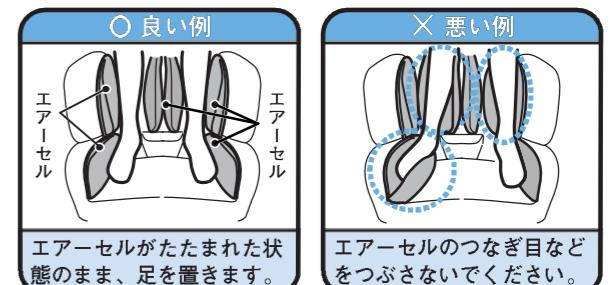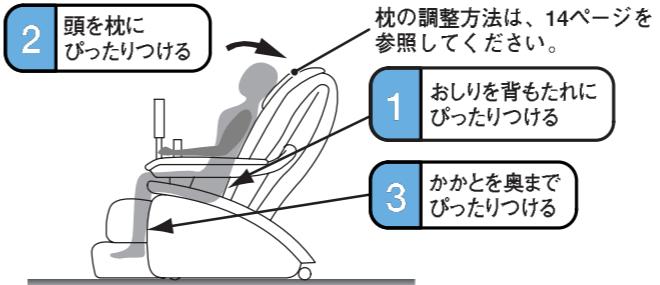


△注意

- ご使用前は背もたれを完全に起こし、体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。
- フットレストを上げたまま、椅子に座らないでください。フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。

リクライニングの使い方

■背もたれを起こす場合

リモコンのリクライニング[▲]ボタン、またはサブリモコンの上向きのリクライニングボタンを押し続けてください。お好みの角度で、ボタンから指をはなしてください。

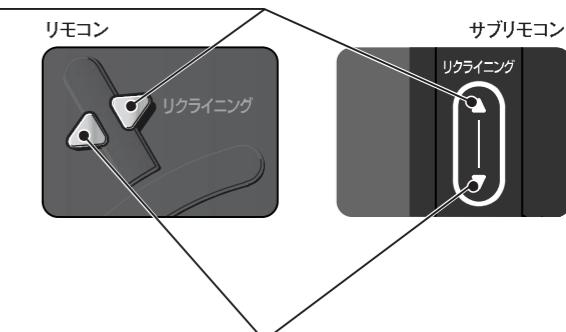

■背もたれを倒す場合

リモコンのリクライニング[▼]ボタン、またはサブリモコンの下向きのリクライニングボタンを押し続けてください。お好みの角度で、ボタンから指をはなしてください。



- サブリモコンのリクライニングボタンはジョイスティック扉が開いているときに使用できます。
- フットレストは、背もたれと連動して動作します。リクライニングを止めると同時にフットレストも停止し、フットスライド自動調節機能が動作し、脚の長さに合わせてフットスライドが伸縮します。
- リクライニングボタンから指をはなすと、フットスライド自動調節機能が動作します。
- フットスライド自動調節後、フットスライドの長さの微調節を行うときは、フットスライドボタンを押して調節してください。
- 本体後部のPOWER(主電源)スイッチが「ON」になっていれば、リクライニングの角度調節がご使用になります。



△警告

- 背もたれを倒すときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろに体や物をはさまないようにしてください。
- 背もたれを倒すときは、アームレストと本体の間に、体や物をはさまないようにしてください。
- すきま（※1）の安全装置が働いている場合はリモコンおよびサブリモコンのリクライニング（起こす、倒す）ボタンを操作しても動作しません。
- すきま（※2）の安全装置が働いている場合はリモコンおよびサブリモコンのリクライニング（倒す）ボタンを操作しても動作しません。

椅子の調節

フットレストの使い方

■フットレストを上げる場合
リモコンのフットレスト [↑] ボタンを押し続けてください。
好みの角度でボタンをはなすと固定されます。

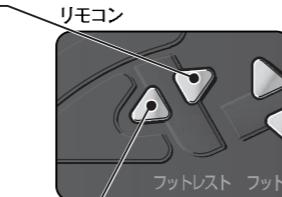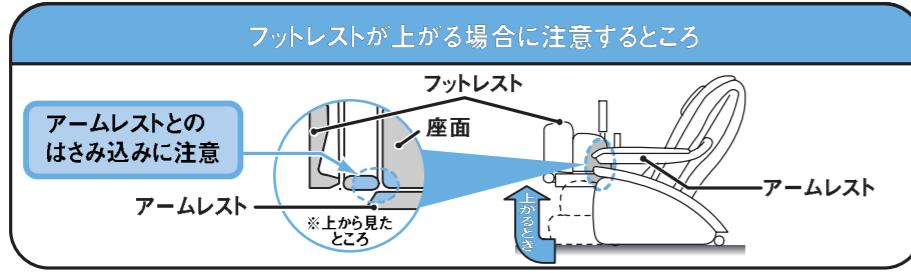

■フットレストを下げる場合
リモコンのフットレスト [↓] ボタンを押し続けてください。
好みの角度でボタンをはなすと固定されます。

- フットレストを止めるとフットスライド自動調節機能が動作し、脚の長さに合わせてフットスライドが伸縮します。
- フットスライド自動調節後、フットスライドの長さの微調節を行うときは、フットスライドボタンを押して調節してください。
- 本体後部のPOWER(主電源)スイッチが「ON」になっていれば、フットレストの上下調節がご使用になれます。


※かかとが足裏ユニットにつかないような場合は、リクライニングまたはフットレストを動かしながら、フットレストが脚に合う角度まで調節してください。

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ●フットレストを下げるときは、必ず周囲に人(特にお子様)やペットがないことを確認してください。 また、フットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。 ●フットレストを手で持ち上げた状態で急に手をはなさないでください。 ●フットレスト上げるときは、アームレストとの間に、手や足、物などをはさまないようにしてください。
-------------	--


⚠ 注意	●脚部以外には使用しないでください。
-------------	--------------------

フットスライド自動調節機能

フットスライド機能
フットスライド調節機能は、足裏ユニットのかかと部にあるセンサーが反応することで伸縮します。
センサーがきちんと反応するために、かかとをぴったりと足裏ユニットの奥につけてお座りください。
※かかとが足裏ユニットにつかないような場合は、リクライニングまたはフットレストを動かしながら、フットレストが脚に合う角度まで調節してください。

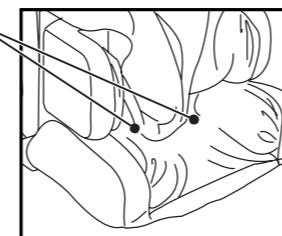

■フットスライドを縮める場合
フットスライド自動調節後、リモコンのフットスライド [▶] ボタンを押してください。

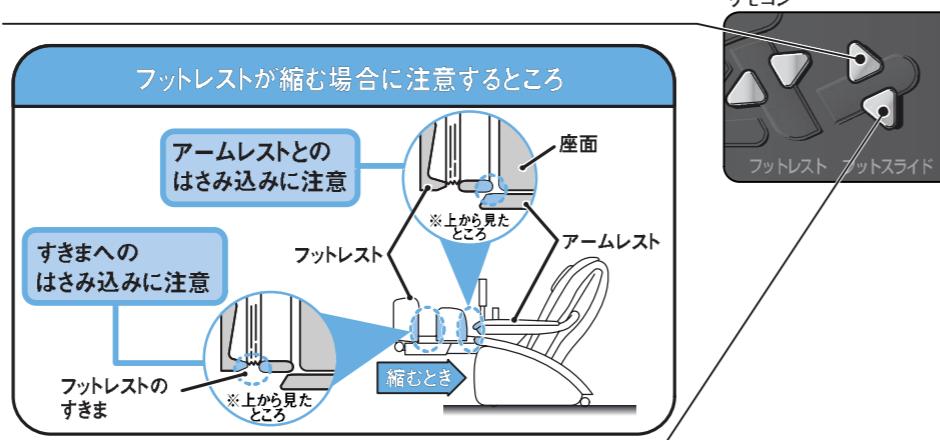


■フットスライドを伸ばす場合
フットスライド自動調節後、リモコンのフットスライド [◀] ボタンを押してください。

⚠ 警告	●フットスライド機能動作時、フットレストやアームレストとの間に手や足、物などをはさまないようにしてください。
-------------	--


枕

本機には大小2つの枕がついています。
この2つの枕によってマッサージ中に頭を楽に、自然な位置にすることができます。
●枕(小)は裏側についているマジックテープで位置の調節ができます。あらかじめ、頭の高さに合わせておいてからマッサージを行なってください。

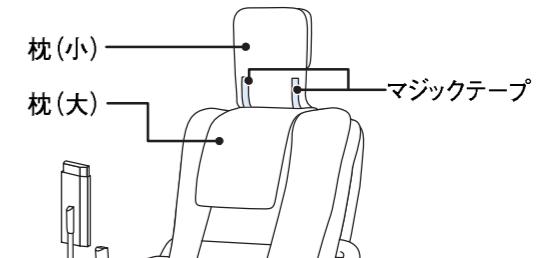

緩衝パッドの使い方

背パッドの裏には緩衝パッド(薄)が入っています。
マッサージが弱いと感じられる場合は緩衝パッドを抜き取ってマッサージを行なってください。
強いと感じられる場合は同梱の緩衝パッド(厚)に入れ替えてマッサージを行なってください。
緩衝パッドの入れ替えは背もたれ上部のファスナーをはずして背パッドをおろして行なってください。

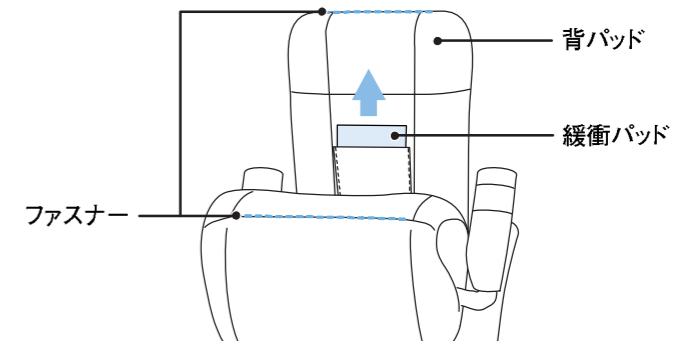

足裏指圧マット

本機には足裏指圧マットがついています。
好みにあわせ、足裏ユニットの上にのせてお使いください。




⚠ 注意	●刺激が強いと感じたときは足裏指圧マットをはずしてください。
-------------	--------------------------------

椅子の調節

ジョイスティックの取り出しと収納

ジョイスティックは未使用時に収納できます。


■取り出し方法

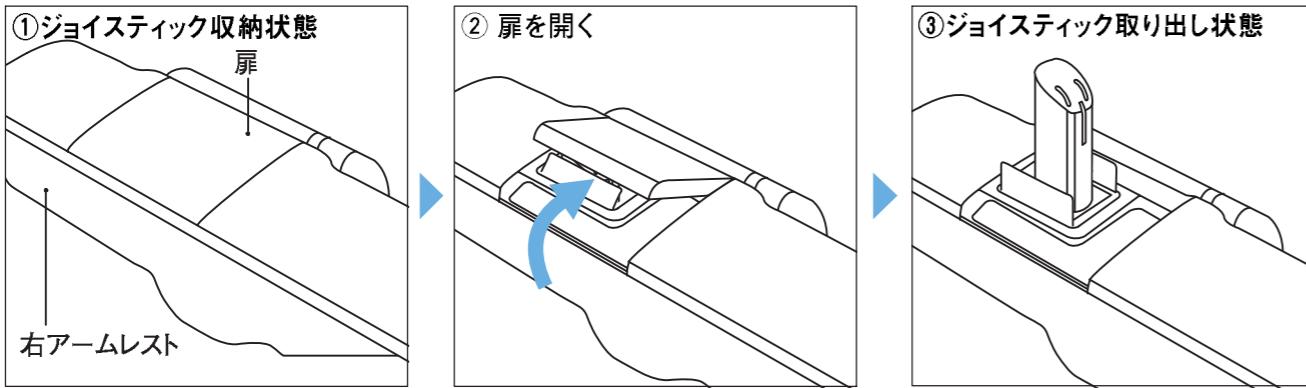

ジョイスティックを取り出す場合は、扉を約1cm程度浮かせる(②)ことにより自動的にジョイスティックが浮き上がります。なお、このとき扉が連動して開きます。(動作時間約2秒)

※リモコンの電源が入っていないときは動作しません。リモコンの[入/切]ボタンを押してから操作してください。

■収納方法

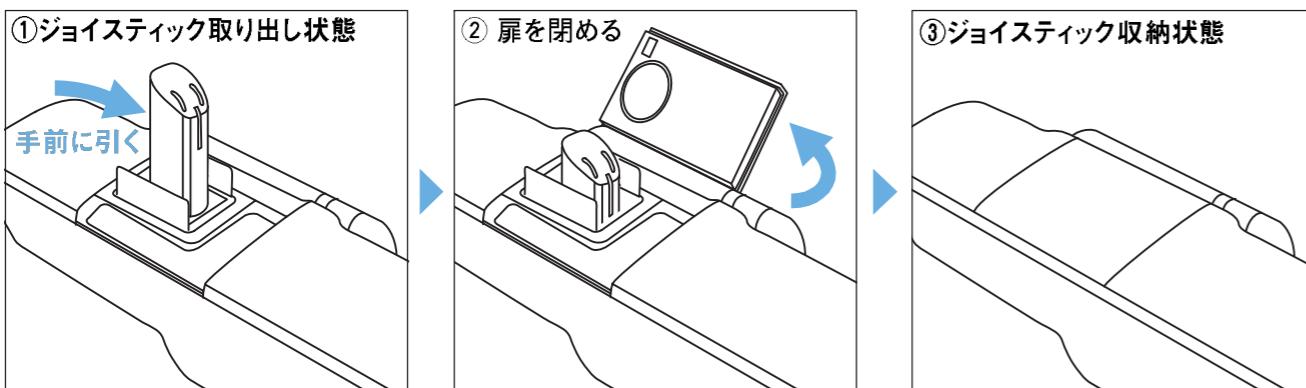


ジョイスティックを収納する場合は、ジョイスティックを手前に引いた後に、扉を閉めてください。

ジョイスティックを無理に押し込んだりしないでください。

※リモコンの電源が入っていない場合でも収納できます。

■ジョイスティック安全装置の動作

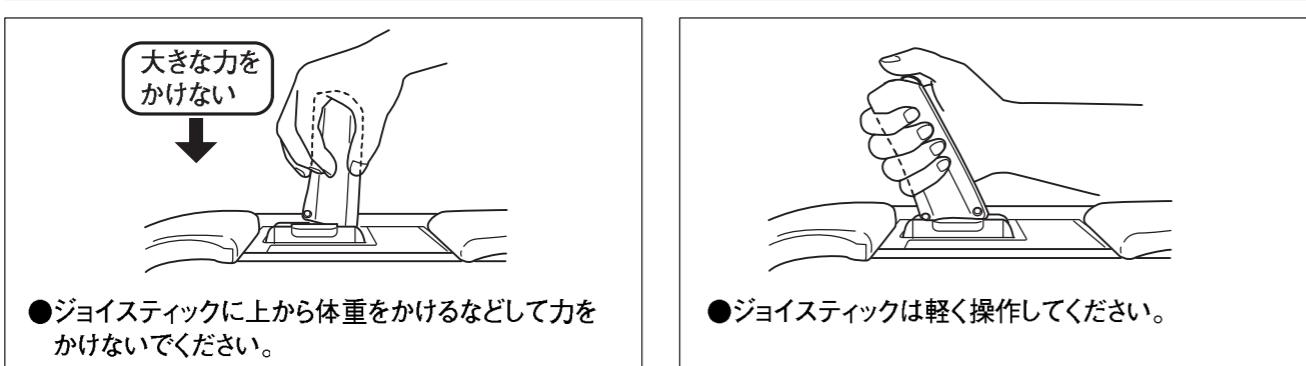

※ジョイスティックは大きな力(5kg以上)を上から受けたり、倒すときに力を入れ過ぎると下に落ちます。これは安全装置が働き、ジョイスティックを支えるロックがはずれるためです。故障ではありません。

- △ 注意
- ジョイスティック扉の上にものを置かないでください。
また、ジョイスティックを無理に引っ張ったり、横に曲げたりしないでください。
→ケガや故障の原因になります。
 - ジョイスティックを取り出すとき、または収納するときは、指などをはさまないようにしてください。
 - 収納時にジョイスティックの位置によっては扉が閉まらない場合があります。収納方法を確認してください。

使い終わったら


立ち上がるときは…

- ジョイスティックやリモコンスタンドを持ったまま、立ち上がらないでください。

※フットレストは、必ず図のように下ろしてください。

ケガや故障の原因となるおそれがあります。

リクライニングの操作方法は、12ページを参照してください。

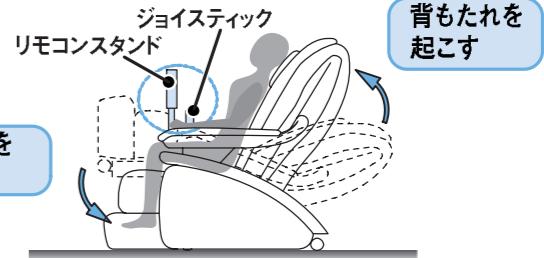



△ 注意

- 使用後はジョイスティックを収納してください。
→ケガや故障の原因となるおそれがあります。
- 使用後は必ずPOWER(主電源)スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
→お子様やペットのいたずら等による事故やケガのおそれがあります。
- 使用後は、必ず背もたれを完全に起こし、フットレストを完全に下ろしてください。
- 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

マッサージの種類と特長

【マッサージの種類と特長】

【マッサージの種類と特長】

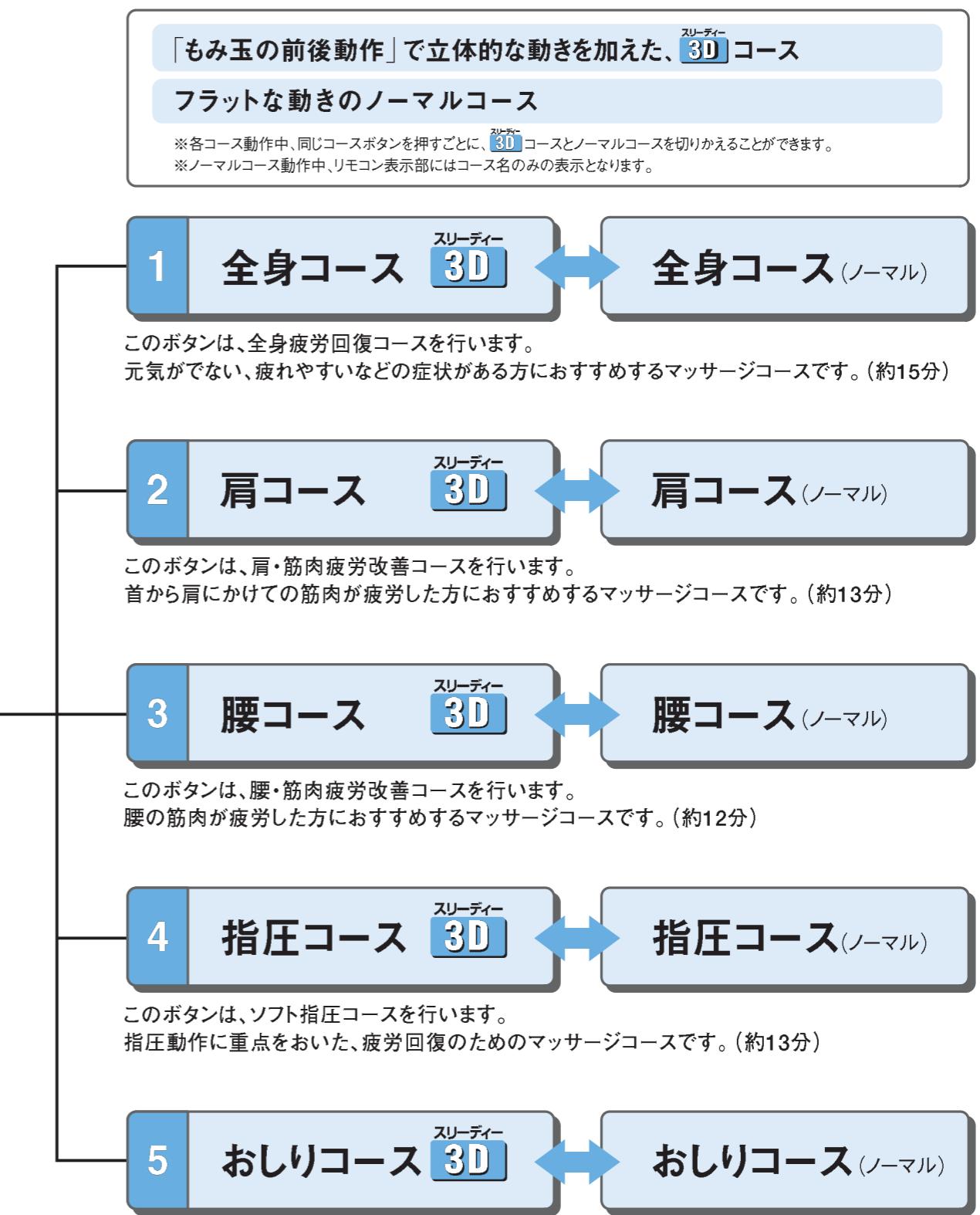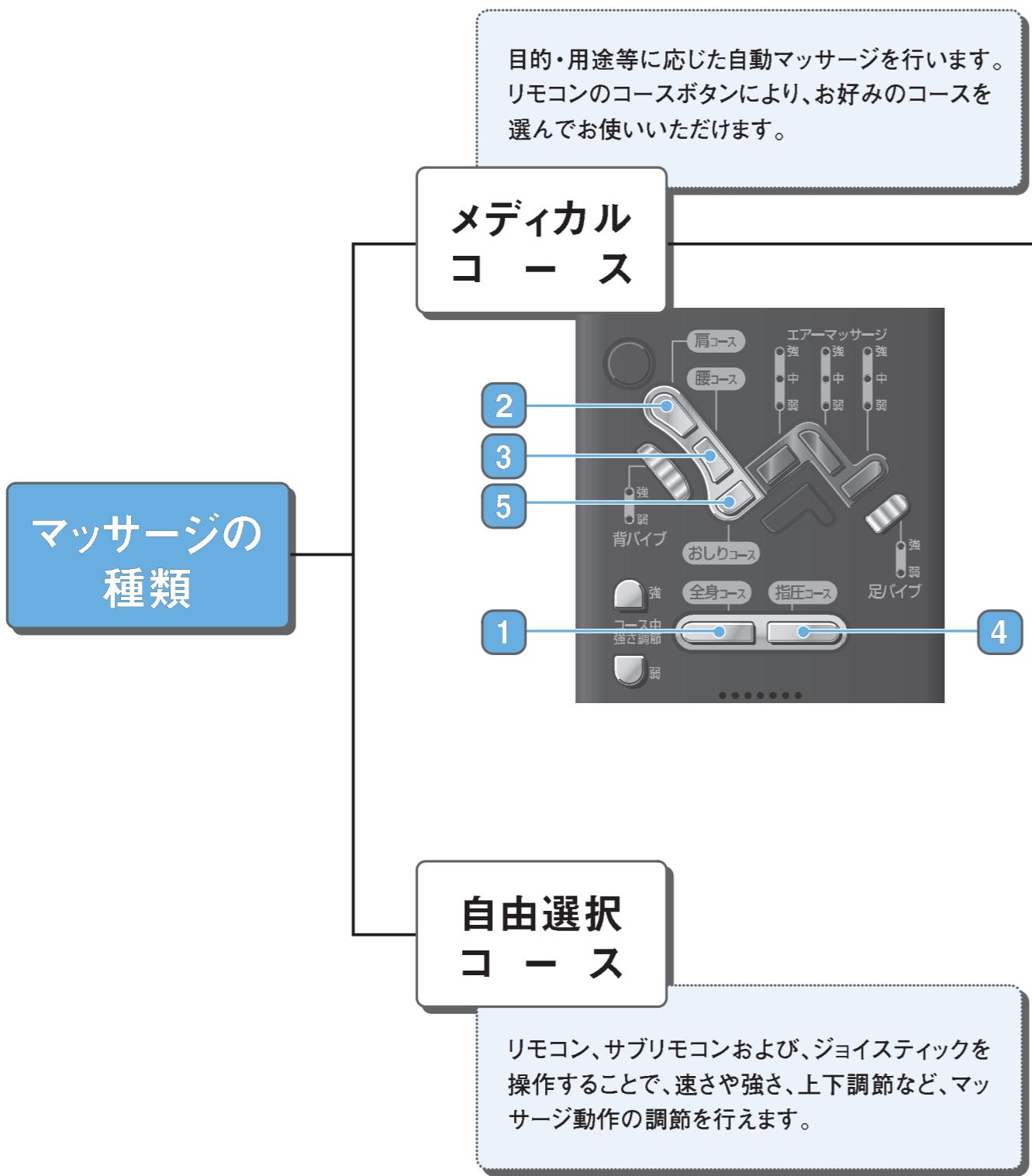

●各コースの時間は身長や体格、リクライニング角度などによって異なります。


自由選択コースのマッサージ

リモコン、ジョイスティックおよびサブリモコンでお好みのマッサージ動作を選択し、組み合わせることができます。

※自由選択コースに対応する動作のランプは、緑色で点灯します。
なお、ジョイスティックランプのみ青色で点灯・点滅します。

リモコン

リモコンでは、エアーマッサージ(座・ふくらはぎ・足裏)、バイブルーター(背・足)を選択できます。

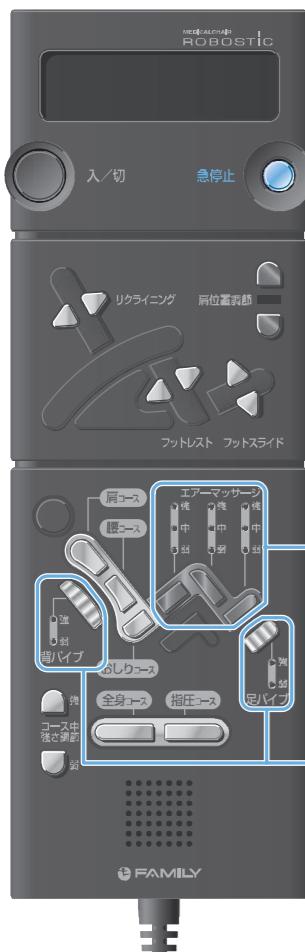

■エアーマッサージの強さ調節


エアーマッサージの強さは、はじめは[中]に設定されています。
右図 ①座 ②ふくらはぎ ③足裏の各[エアーマッサージ]ボタンを押すごとに

▶中→強→停止→弱

と切りかえることができます。

エアーマッサージランプの見方

停止	弱	中	強
●強	●強	●中	●強
●中	●中	●中	●中
●弱	●弱	●弱	●弱

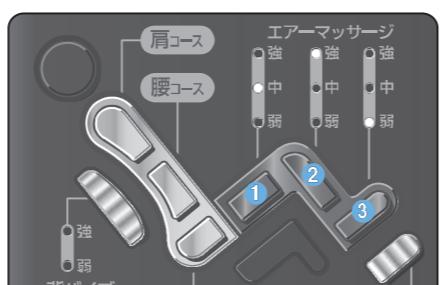

(上のイラストは座[中]・ふくらはぎ[強]・足裏[弱])

■バイブルーターの強さ調節

バイブルーターの強さは、はじめは[弱]に設定されています。
右図 ①背バイブルーター ②足バイブルーターの各[バイブルーター]ボタンを押すごとに

▶弱→強→停止

と切りかえることができます。

強さ調整 ランプ の見方	停止	弱	強
●強	●強	●弱	●強
●弱	●弱	●弱	●弱



(上のイラストは背[強]・足[弱])

ジョイスティック&サブリモコン

ジョイスティックを操作することで、もみ、たたきの速さ、マッサージの強さ、もみ玉の上下位置などを調節することができます。サブリモコンでは、もみ逆転、もみワザ(1・2)、ローラー(1・2)およびメモリ機能を選択することができます。

■マッサージの強さ、もみ玉の上下位置の調節

操作	動作内容
↑ ジョイスティックを上に引く	もみ玉が上に移動します。
↓ ジョイスティックを下に押す	もみ玉が下に移動します。
← ジョイスティックを前に押す	もみ玉が前に移動し マッサージの刺激が強くなります。
→ ジョイスティックを後に引く	もみ玉が後ろに移動し マッサージの刺激が弱くなります。



■自由選択ボタン


自由選択ボタンを押すとボタン右上のランプが点灯し、ジョイスティックおよびサブリモコンによる自由選択コース操作が可能になります。
もう一度押すとランプが消え、もみ玉が収納位置まで戻ってから停止します。



(右のイラストは自由選択コース動作中)

■ジョイスティックランプ

肩位置調節が可能なとき、およびジョイスティックを手前に引く必要のあるときに点滅します。ランプの点滅が点灯に変わると操作できる状態になります。

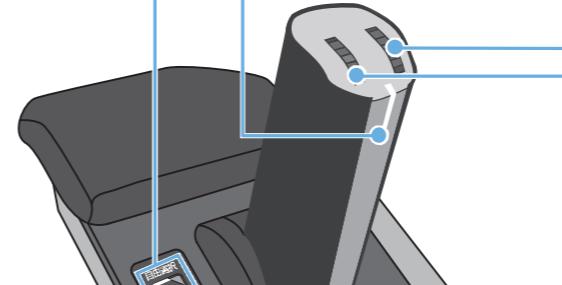

■たたきダイヤル

たたき動作の開始・終了・速度調節を行います。

操作	動作内容
速 へ回す	たたき動作を開始・加速します。
遅 へ回す	たたき動作を減速します。 さらに回すと たたき動作を停止します。

■もみダイヤル

もみ動作の開始・終了・速度調節を行います。

操作	動作内容
速 へ回す	もみ動作を開始・加速します。
遅 へ回す	もみ動作を減速します。 さらに回すと もみ動作を停止します。

■もみワザ

動作	内容
もみワザ1	もみの速度を変化させながら 手もみ感覚の複合的な動作を行います。
もみワザ2	もみと指圧を組み合わせた 複合的な動作を行います。




(左のイラストは
もみワザ1動作中)

もみワザボタンを押すとボタン右上のランプが点灯し、もみワザ動作が始まります。もみワザはもみダイヤルの操作で速度を調整できます。もう一度押すとランプが消え、もみワザ動作が終了します。

■ローラー

上下運動で部分背筋のばしを行います。

※ジョイスティックを上下に操作した場合、
上昇・下降の方向が入れ替わります。

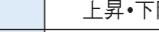

動作	内容
ローラー1	上下運動で部分背筋のばしを行います。 ※ジョイスティックを上下に操作した場合、 上昇・下降の方向が入れ替わります。
ローラー2	上下運動で部分背筋のばしを行います。 ※ジョイスティックを上下に操作した場合、 ローラー動作範囲の中心が調節できます。 また、上昇・下降の方向も入れ替わります。




ローラーボタンを押すとボタン右上のランプが点灯し、ローラー動作が始まります。
もう一度押すとランプが消え、ローラー動作が終了します。

△ 注意

- ジョイスティックおよびサブリモコンで操作するときは、自由選択ボタンを押してから操作してください。
- ジョイスティックは左右には動きません。無理に力を加えないでください。
→故障の原因になります。

自由選択コースのマッサージ

自由選択コースの操作方法

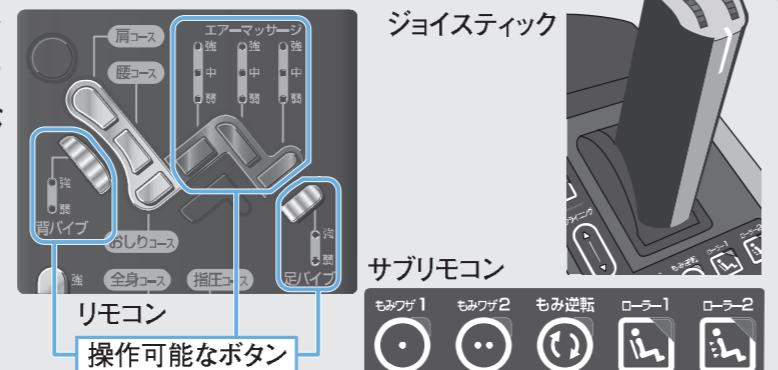- 1 [入/切] ボタン(リモコン)を押します。 5分間入力がなければ、自動的に電源が切れます。
- 2 [自由選択] ボタン(サブリモコン)を押します。 自動指圧点検索動作が始まります。
※5分間入力がなければ、自由選択コースを終了します。
- 3 肩位置調節ランプ(リモコン)が点灯している間、肩位置が調節できます。
- 4 ジョイスティックランプが点滅している場合は、点灯するまでジョイスティックを手前に引いてください。
- 5 リモコンとジョイスティックおよびサブリモコンを操作するとお好きなマッサージを行うことができます。また、メモリ機能の記録(22ページ参照)、再生(23ページ参照)も行なうことができます。

- 6 15分経過すると動作が終了します。 もみ玉が収納位置(背もたれ上部)まで戻ります。
- 7 動作が停止します。

コース変更 自由選択コース→メディカルコース

自由選択コース実行中に、メディカルコースのボタンを押すと、もみ玉が1度、収納状態に戻り、自動指圧点検索動作から開始し、メディカルコースを行ないます。

コースの途中終了 途中で終了する場合は、動作中に[入/切]ボタンまたは[自由選択]ボタンを押せば、収納動作を行なった後で停止します。緊急時や動作中に異常を感じたときは、[急停止]ボタンを押せば、その場で動作が停止します。安全確認後、[入/切]ボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。

△注意

- マッサージの刺激が強いと感じたときは、19・20ページの操作にしたがい刺激を弱くしてください。
それでも強いと感じるときは、使用を中止しサービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。
→刺激の強いままで使用を続けるとケガのおそれがあります。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。

メモリ機能

●自由選択コースのもみ、もみ逆転、もみワザ1、もみワザ2、たたきの動作ともみ玉の位置、また、ローラー1、ローラー2の動作を記録することができます。各5分間、3人分の記録が可能です。

記録の仕方

- 1 [メモリ] ボタンを押します。 選択したメモリランプが点灯します。
(右のイラストはメモリ1を選択)
- 2 [記録] ボタンを押します。 マッサージ動作の記録を開始します。なお、データがすでに記録されていて上書きする場合は、もう一度[記録]ボタンを押してください。記録中は右のイラストのようにランプが点灯します。
- 3 ジョイスティックおよびサブリモコンで記録したいマッサージ操作を行なってください。それらの動作を記録します。

- 4 5分経過、または、[再生/停止] ボタンを押すと記録動作が終了します。


△ 注意

- 記録開始後、メモリ機能で記録できる動作が90秒以上停止すると記録動作を終了します。
- 記録中に自由選択コースが終了すると、記録動作も終了します。
- メモリへの記録動作が終了しても、マッサージ動作は続きます。
- 記録時は、③にあるマッサージ操作と、リモコンにある[リクライニング]、[フットレスト]、[フットスライド]、[エアー]、[バイブ]ボタンおよびサブリモコンにある[リクライニング]以外のボタン入力があると、1度目の操作は無視しますが、2度目が押されると記録を停止します。ただし、[入/切]、[急停止]、[再生/停止]、[自由選択]ボタンの場合は1度目の操作で停止します。このとき、リモコンの「肩位置調節」および「コース中強さ調節」ボタンを操作しても無視されます。

自由選択コースのマッサージ

記録の呼び出し方(再生)

- 1 [メモリ] ボタンを押します。
(右のイラストはメモリ1を選択)

- 2 [再生/停止] ボタンを押します。
記録されたマッサージ動作の再生を開始します。なお、データがなかった場合は、記録動作(22ページ参照)を行なってください。再生中は右のイラストのようにランプが点灯します。

- 3 再生は、記録されたマッサージ動作を繰り返し行います。
自由選択コース開始より15分経過、または、
[再生/停止] ボタンを押すと再生動作が終了します。

- 4 動作が停止します。

[自由選択コースのマッサージ]



- 再生時は、リモコンにある[リクライニング]、[フットレスト]、[フットスライド]、[エアー]、[バイブ]ボタンおよびサブリモコンにある[リクライニング]以外のボタン入力およびジョイステイックによる操作があると、1度目の操作では「そのボタンは無効です。」と表示しますが、2度目が押されると再生を停止します。ただし、[入/切]、[急停止]、[再生/停止]、[自由選択]ボタンの場合は1度目の操作で停止します。このとき、リモコンの「肩位置調節」および「コース中強さ調節」ボタンを操作しても無視されます。
- 再生の時間は身長や体格、リクライニング角度などによって異なります。

動作メニューの組み合わせ方と調節可能項目一覧

①～⑤のマッサージメニューの中からそれぞれお好みのマッサージ動作を選択し、組み合わせることができます。
●実行中の動作調節が可能なものについては動作調節の欄に○印をつけています。

① もみ <small>(4種類の動作の中から1つ選択)</small>	動作	リモコン	サブリモコン	ジョイステイック	内 容	速さ調節	上下調節	強さ調節
	もみ(正転)			○	もみを行います。	○(7段階)	○	○
もみ(逆転)			○		もみの正転・逆転の切替を行います。	○(7段階)	○	○
もみワザ 1			○		手もみ感覚の複合的なもみを行います。	○(3段階)	○	○
もみワザ 2			○		指圧と組み合わせたもみを行います。	○(3段階)	○	○

② たたき <small>(2種類の動作の中から1つ選択)</small>	動作	リモコン	サブリモコン	ジョイステイック	内 容	速さ調節	上下調節	強さ調節
	たたき			○	たたきを行います。	○(7段階)	○	○

③ ローラー <small>(2種類の動作の中から1つ選択)</small>	動作	リモコン	サブリモコン	ジョイステイック	内 容	速さ調節	上下調節	強さ調節
	ローラー1			○	背筋のばしを行います。	—	○	○
ローラー2				○	部分背筋のばしを行います。	—	○	○


④ バイブ <small>同時動作可能</small>	動作	リモコン	サブリモコン	ジョイステイック	内 容	速さ調節	上下調節	強さ調節
	背バイブ			○	背のバイプレーションマッサージを行います。	—	○	○
足裏バイブ				○	足裏のバイプレーションマッサージを行います。	—	—	○

⑤ エアーマッサージ <small>同時動作可能</small>	動作	リモコン	サブリモコン	ジョイステイック	内 容	速さ調節	上下調節	強さ調節
	座			○	座のエアーマッサージを行います。	—	—	○
ふくらはぎ				○	ふくらはぎのエアーマッサージを行います。	—	—	○
足裏				○	足裏のエアーマッサージを行います。	—	—	○


※上の表のマークについて
ジョイステイックで調節可能な項目に、
右のマークをつけています。



ダイヤルで
調節可能

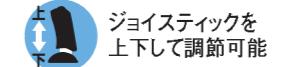

ジョイステイックを
上下して調節可能

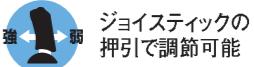

ジョイステイックの
押引で調節可能


[自由選択コースのマッサージ]

メディカルコースのマッサージ

メディカルコースでのマッサージ

- 疲労の回復、改善などを目的とした10種類のコースを用意しています。
- 各コースボタンでお好みのコースを選ぶことにより、自動マッサージを行います。
- ※ メディカルコースに対応する動作のランプは、オレンジ色で点灯します。

メディカルコースの操作方法

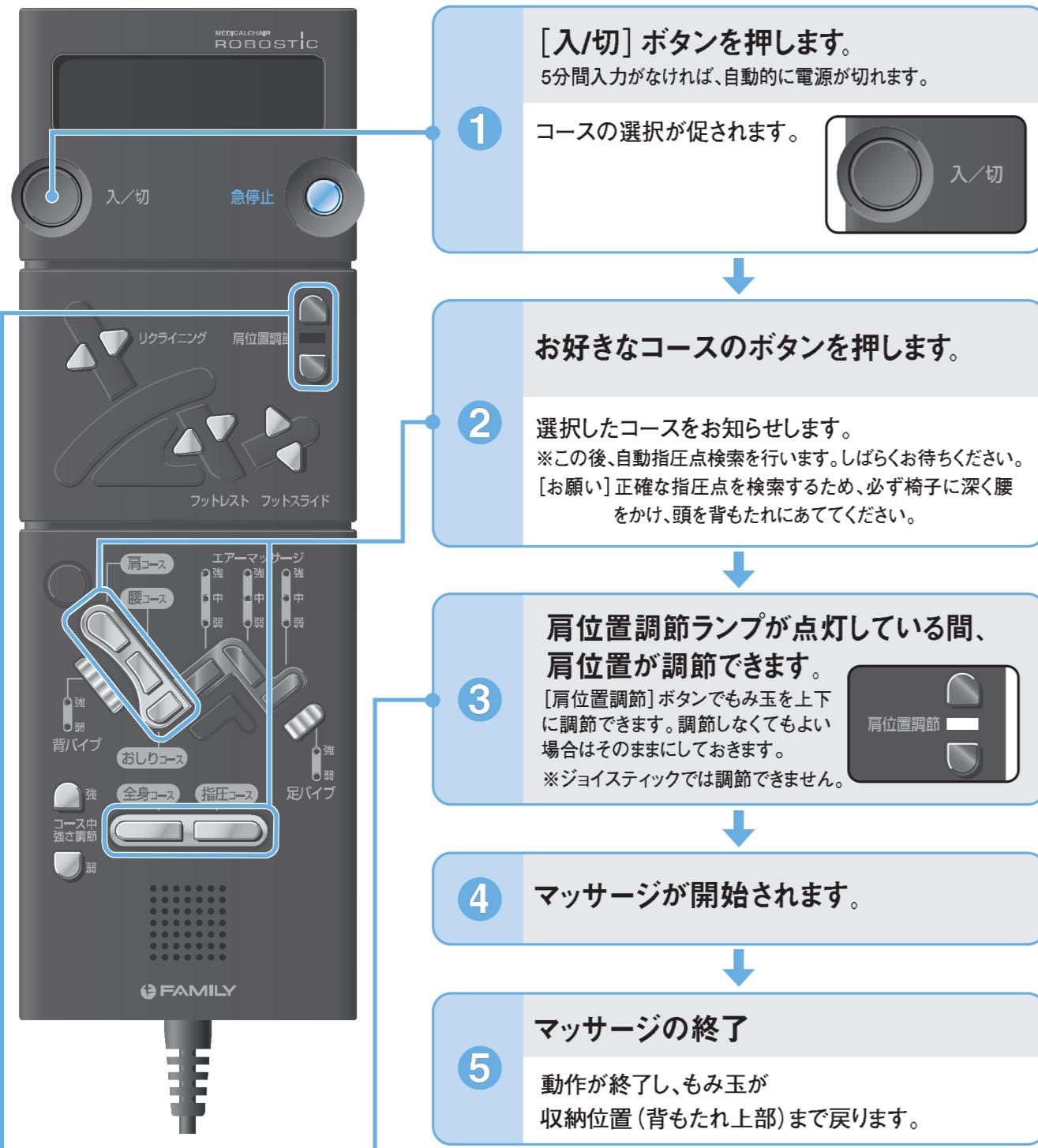

△ 注意

- マッサージの使用は1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。
- 1日当たりのマッサージは通算して30分程度を目安にしてください。

メディカルコースでのマッサージ動作の調節

背中のマッサージの強さ調節

メディカルコース動作中に

- ① [強] ボタンを押すと背中のマッサージを強くします。
- ② [弱] ボタンを押すと背中のマッサージを弱くします。




- ※① [強] ボタンを押している間もみ玉が前に、
- ② [弱] ボタンを押している間もみ玉が後ろに移動することで強さを調節しています。

エアーマッサージの強さ調節

エアーマッサージの強さは、はじめは [中] に設定されています。

右図 ① 座 ② ふくらはぎ ③ 足裏の各 [エアーマッサージ] ボタンを押すごとに

→ 中 → 強 → 停止 → 弱

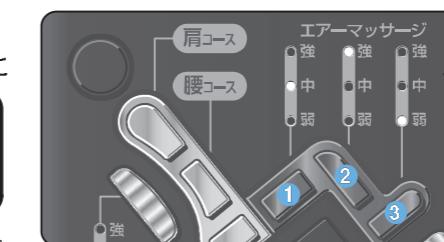

[エアーマッサージランプの見方]			
停止	弱	中	強
● 強	● 強	● 強	● 強
● 中	● 中	● 中	● 中
● 弱	● 弱	● 弱	● 弱

と切りかえることができます。

パイプ設定

パイプの強さは、はじめは [弱] に設定されています。

右図 ① 背パイプ ② 足パイプの各 [パイプ] ボタンを押すごとに

→ 弱 → 強 → 停止



[強さ調整ランプの見方]		
停止	弱	強
● 強	● 強	● 強
● 中	● 中	● 中
● 弱	● 弱	● 弱

と切りかえることができます。

コース変更

メディカルコース→メディカルコース

メディカルコース実行中に他のメディカルコースボタンを押すと、もみ玉が1度収納状態に戻り、再度自動指圧点検索動作から開始します。

メディカルコース→自由選択コース

メディカルコース実行中に自由選択ボタンを押すと、下に示すどちらか一方の動作で自由選択コースに変更されます。

- 自動指圧点検索動作を行っているときは、もみ玉が1度収納された後に自由選択コースに変更されます。
- 自動指圧点検索動作が完了しているときは、そのまま自由選択コースに変更されます。

コースの途中終了

途中で終了する場合は、動作中に [入/切] ボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。緊急時や動作中に異常を感じたときは、[急停止] ボタンを押してください。その場で動作が停止します。

安全確認後、[入/切] ボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。

△ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ● マッサージの刺激が強いと感じたときは、このページのメディカルコースでのマッサージ動作の調節にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止しサービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。 →刺激の強いまで使用を続けるとケガのおそれがあります。 ● もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れないようにしてください。 髪飾りなどのかたい物をつけて本機を使用しないでください。 ● 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。
-------------	--

故障かな?と思ったら

サービスマン以外の人は、分解や修理をしないでください。

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは、事故防止のためただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお近くのサービスセンター（裏表紙に記載）までご相談ください。

状態

動作時の音

- たたき動作と、もみ&たたき動作時の音（ゴトゴト音）
- エアーポンプの音（ブーン音）
- もみ動作時のもみ玉と布のする音（キュッキュッ、ギュウギュウ音）
- バイブレーターの音（ブーンブーン音）
- リクライニング時の音（ウィーン音）
- エアーマッサージ中の音（コツコツ音）

原因と
直し方

構造上やむを得ず発生するもので、性能等に影響はありません。

状態

リモコンのボタンを押しても正常に動作しない。

原因と
直し方

次の点検を行なってください。

- ① 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれているか確認してください。
- ② コネクターが本体後部のインレットに確実に差し込まれているか確認してください。
- ③ 本体後部のPOWER(主電源)スイッチは「ON」になっているか確認してください。

状態

表示部に「主電源を入れ直してください」という表示が出た。

原因と
直し方

本体後部のPOWER(主電源)スイッチを「OFF」にし、
5秒ほどしてからPOWER(主電源)スイッチを再度入れ直してください。

- ① 正常に戻ればそのままお使いください。
- ② フットレストのコネクターがきちんと接続されているかどうか確認してください。
- ③ 再度、同じメッセージが表示される場合は、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、
お買い上げの販売店またはお近くのサービスセンターに連絡してください。

状態

自動指圧点検索がうまくいかない。（もみ玉が肩の高さに合っていない。）

原因と
直し方

椅子に深く腰をかけて頭を背もたれにあててください。また、指圧点検索直後に肩位置調節ボタンで肩位置を調節できます。

状態

フットスライド調節機能がうまく動作しない。（フットレストが足裏に合っていない。）

原因と
直し方

かかと部分にあるセンサーが反応するよう、かかとを足裏ユニットにつけてお座りください。
かかとがつかないような場合は、フットスライドボタンで調節することができます。

詳しくは13ページを参照してください。

状態

マッサージ動作が途中で止まる。

原因と
直し方

本体後部のPOWER(主電源)スイッチを「OFF」にし、
5秒ほどしてからPOWER(主電源)スイッチを入れ直してください。

- ① 正常に戻ればそのままお使いください。
- ② 正常に戻らない場合は事故防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、
サービスセンターに連絡してください。

状態

マッサージ中に、もみ玉が途中で止まる。

原因と
直し方

速度を遅くして、もみ玉に必要以上の力が加わると、動きが止まることがあります。
故障ではありません。体を浮かせぎみにしてください。

状態

もみ玉が上部へ移動して止まってしまった。

原因と
直し方


オートタイマー機能によりマッサージ終了時に、もみ玉が体に干渉しないように上部へ移動する構造になっています。
続けてマッサージを行う場合は、もう一度リモコンの【入/切】ボタンを押してください。

状態

左右のもみ玉の位置がずれている。

原因と
直し方

交互たたき機構を採用しているため、
構造上やむを得ず発生するもので故障ではありません。

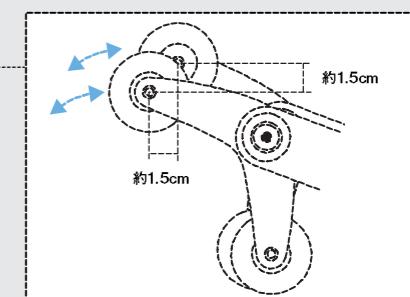

状態

脚部のマッサージ中、フットレストを昇降させたり、フットスライドを動作させると マッサージが止まってしまう。

原因と
直し方

安全のため、フットレスト昇降時やフットスライド動作時にはエアーが停止するようになっています。

状態

リクライニングができない。

原因と
直し方

背もたれと制御ボックスまたはアームレストとサイドカバーの間に何か物がはさまっていないか
確認してください。リクライニング安全装置が作動している可能性があります。

【故障かな?と思ったら】

故障かな?と思ったら

Q&A

状態

記録動作中に記録動作が止まる。

原因と
直し方

オートタイマー機能により記録開始後、90秒以上操作しないか、または、5分経過すると記録動作が自動で停止するようになっています。

状態

ジョイステイックの扉が閉まらない。

原因と
直し方


ジョイステイックの扉が周りのものに引っかかっていないか、およびジョイステイックが手前いっぱいまで引かれているかを確認してください。

状態

ジョイステイックの扉がはずれた。

原因と
直し方

ジョイステイックの扉は安全のためはずれるようになっています。図のように本体右アームレストのジョイステイック扉の取付部の回転軸の凸部がスリットに入るように取り付けてください。
※扉がはずれた状態で使用しないでください。

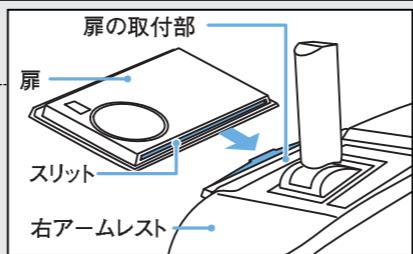

【故障かな?と思ったら】

Q

マッサージをより強くするにはどうすればいいですか?

A

メディカルコースの場合は、リモコンの[強さ調節]ボタンで、自由選択コースの場合はジョイステイックで、マッサージの刺激を調節してください。また、それでも弱いときは背もたれを倒し、深く腰を掛け、背もたれに体重がかかるようにしてください。背パッドの裏の緩衝パッドを抜き取ってマッサージをしても刺激を強くすることができます。

Q

マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか?

A

メディカルコースの場合は、リモコンの[強さ調節]ボタンで、自由選択コースの場合はジョイステイックで、マッサージの刺激を調節してください。また、それでも強いときは背パッドの裏の緩衝パッドを同梱の緩衝パッド(厚)に入れ替えてください。背もたれを起こして使用してもマッサージの刺激を弱くすることができます。

Q

誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか?

A

ただちに本体後部のPOWER(主電源)スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店またはお近くのサービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。

Q

体重が重くてもだいじょうぶですか?

A

体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。体重100kg以上の方がご使用になる場合は、少し体を浮かせぎみにしてご使用ください。

Q

電気代はいくらぐらいかかりますか?

A

1日15分、毎日ご使用いただいた場合、1ヵ月で約32円です。(2005年12月現在、当社調べ)

【Q&A】

保管とお手入れの仕方

保管の仕方

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない場所に保管してください。
- ご使用にならないときは、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないようにしてください。

△注意

- 直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

お手入れの仕方

△注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

【背パッド・枕・各カバーのお手入れ】

汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしほってから拭き取ってください。

△注意

- ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。
- アイロン掛けはしないでください。

【リモコン・サブリモコン・ジョイステイック・制御ボックスのお手入れ】

リモコン・サブリモコン・ジョイステイック・制御ボックスについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

- 絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。→故障の原因になります。

【その他のプラスチックのお手入れ】


少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしほってから拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

- アルコール、その他の溶剤やみがき粉などでのお手入れは傷、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

枕・背パッドの取りはずし方

枕・背パッドを取りはずすときは
以下の方法で行ってください。
※取り付けは取りはずしの逆の手順で行います。

- ① 枕と背もたれ用カバーを固定しているマジックテープをはがして、枕を取りはずします。
- ② 座と背もたれ用カバーをつなぐファスナーをはずします。
- ③ 背パッドと背もたれ本体をつなぐファスナーをはずし、背パッドを取りはずします。

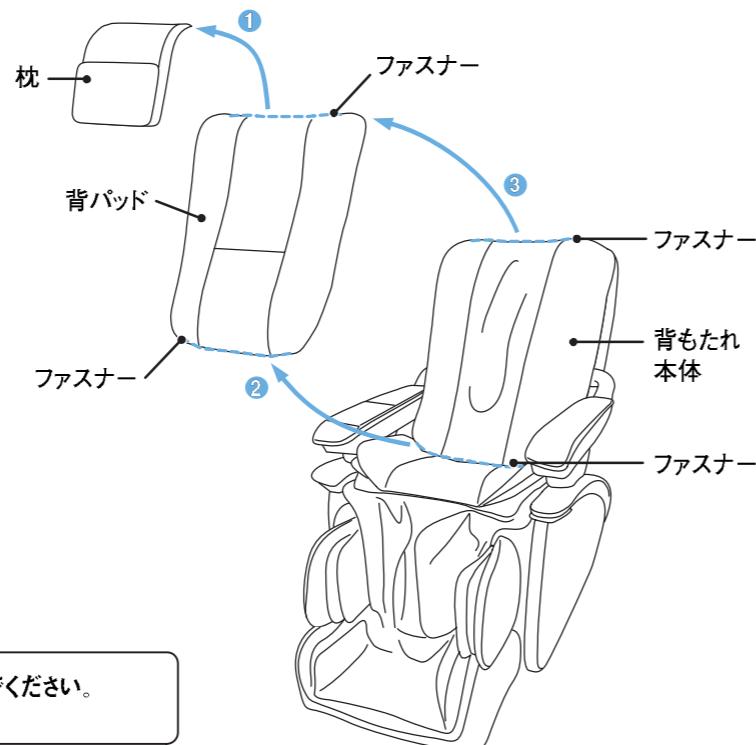

△注意

- 背パッドをはずしてマッサージをしないでください。
→ケガの原因になります。

アフターサービスについて

1.保証書について

この製品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店にて「販売店・購入日」などの所定事項を記入してお渡ししていますので、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。(修理の際、必要となります。) 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、この製品は日本国内専用ですので、海外でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外(業務用など)でご使用の場合は、保証期間中でも有料修理とさせていただきます。

2.修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、27~29ページの「故障かな?と思ったら」をよくお読みください。

点検後、まだ異常がありましたらお買い上げの販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

- 1) お名前・ご住所・お電話番号
- 2) 販売名…この取扱説明書の34ページをご覧ください。
- 3) 製造番号…本体後部の制御ボックスに貼ってある社銘板をご覧ください。
- 4) お買い上げ日
- 5) 故障の状態(できるだけ詳しくお知らせください。)

●保証期間中は

修理の際、保証書をご提示ください。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

●保証期間が過ぎている場合は

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

●販売店にご依頼になれない場合は

サービスセンター(裏表紙に記載)にご連絡ください。

●補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの電気マッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。(ただし、縫製部品は除きます。)
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店、またはサービスセンター(裏表紙に記載)にお問い合わせください。

安全のために商品の点検を

長期ご使用の場合は商品の点検を

こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、動作しないときがある。
- 電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
- 自動的にタイマーが切れないときがある。
- その他の異常や故障がある。



上記のような症状があれば、故障や事故の防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

安全にお使いいただくために

本体布地（もみ布）は消耗品であり、耐用年数は3年です（使用条件：1日15分コースを2回、毎日使用した場合）。
安全にお使いいただくために、お買い上げ後、耐用年数が過ぎる前にお買い上げの販売店、またはサービスセンターでの定期点検をおすすめします。

※ただし使用条件が上記と異なる場合には、耐用年数が変わります。

※お買い上げ後5年ほど経ちましたら、安全のために椅子全体の点検をおすすめします。

点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、またはサービスセンターにご相談ください。



仕様

販売名	FMC-6000
使用電源	AC100V
定格消費電力	170W
定格周波数	50-60Hz
定格時間	30分
もみ速さ	7段階 最小約10回／分、最大約40回／分
たたき速さ	7段階 最小約188回／分、最大約480回／分
もみ玉の幅	無段階（最小約6cm、最大約18cm）
上下移動速さ	約20秒で1往復
マッサージ範囲	約64cm（部分ローラーのとき約15cmの範囲で自動反復）
自動コース	メディカルコース：10種類（5種類×2パターン）（自動指圧点検機能付き）
自由選択コース	6種類（自動指圧点検機能付き）
バイブレーター機能	背・足：2種類 強弱2段階切り替え式（座はおしりコース中のみ動作）
エアーマッサージ	エアー圧力 約32kPa
オートタイマー	約15分（メディカルコース時は異なります）
フットレスト調節範囲	約29cm（フットスライド自動調節機能付き）
リクライニング角度	水平面に対して約120°～約170°無段階（電動リクライニング）
本体の寸法	幅約77cm×奥行約140(205)cm×高さ約120(90)cm ()内の数字は最大リクライニングおよびフットレスト水平時
重量	約113kg（本体：約88kg、フットレスト：約25kg）
外装布地	合成皮革（抗菌・防汚加工）
付属品	リモコンスタンド・電源コード・アース線・T型レンチ・足裏指圧マット・緩衝パッド（厚）
類別	機械器具(77)バイブルーター(JMDNコード34662000)
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
医療機器製造業許可番号	31BZ0017
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003
製造販売元	ファミリー株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地
製造元	ファミリー株式会社