

FAMILY

# FAMILY MEDICAL CHAIR i.Neo

ファミリーメディカルチェア i.Neo(アイネオ)


FMC-810

このたびは、ファミリーメディカルチェアi.Neoをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

※保証書は、お買い上げの際必ずお受け取りの上、「取扱説明書」とともに大切に保管してください。

## もくじ

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ●安全上のご注意                   | 1  |
| ●各部の名前とはたらき                | 5  |
| ●おもな特長と効能・効果               | 7  |
| ●ご使用の前に                    | 8  |
| ●椅子の調節                     | 11 |
| ●使い終わったら                   | 12 |
| ●マッサージの種類と特長               | 13 |
| ●自動コースのマッサージ               | 14 |
| ●自由選択コースのマッサージ             | 17 |
| ●保管とお手入れの仕方                | 21 |
| ●故障かな?と思ったら                | 22 |
| ●Q&A                       | 24 |
| ●アフターサービスについて・安全のために商品の点検を | 25 |
| ●仕様                        | 26 |

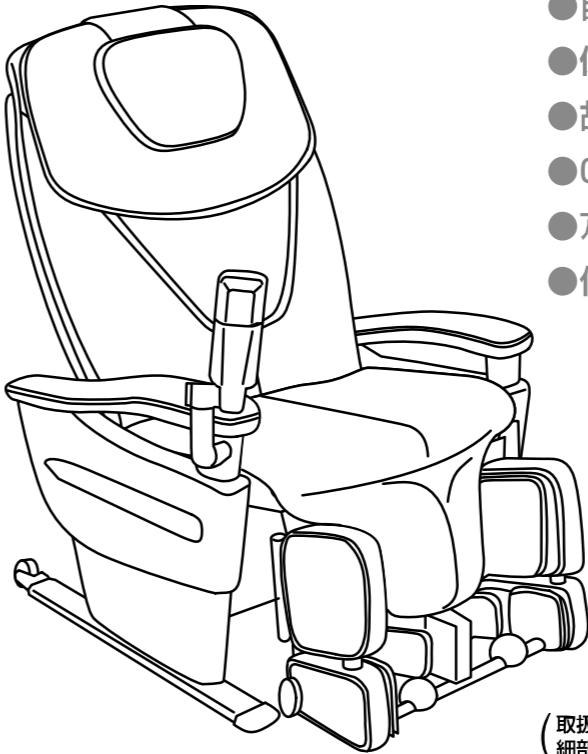

(取扱説明書のイラストと本体は  
細部が異なる場合があります。)

ファミリー株式会社 サービスセンター

受付時間 土・日・祝を除く平日 9:00~17:00

全国共通フリーダイヤル

0120-772-294

札幌営業所 〒004-0051 札幌市厚別区厚別中央一条3丁目1-27(プラザ館中央1-3 1階) TEL.(011)896-6555(代)  
仙台営業所 〒984-0047 仙台市若林区木ノ下3丁目1-2 TEL.(022)291-3484(代)  
東京支店 〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目16-14(武蔵館ビル4階)  
名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目35-18(一光大須ビル1階)  
大阪支店 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3(ソーラ新大阪21 14階)  
広島営業所 〒733-0033 広島市西区観音本町1丁目21-5  
福岡営業所 〒810-0071 福岡市中央区那ノ津2丁目6-4(九産ビル3階)

2006年7月1日(第3版) 771886803  
2005年9月1日

取扱説明書  
保証書別途添付

日本国内専用 (この製品に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。よってこの製品を)

JAPANESE EQUIPMENT SPECIFICATION WARRANTY APPLIES ONLY IN JAPAN.  
WARRANTY INCLUDING REPAIRS BY THE MANUFACTURER DOES NOT APPLY IF THE CHAIR IS TAKEN OUT OF JAPAN.

ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

「取扱説明書」は、いつも見られるように大切に保管してください。

保証書は、お買い上げの際必ずお受け取りの上、「取扱説明書」とともに大切に保管してください。

この製品は一般家庭用として設計されていますので、一般家庭用以外(業務用など)でご使用の場合は、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご相談ください。

Massage  
+  
Medical

# 安全上のご注意

ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。なお、各部の名前については5~6ページをご覧ください。

## 表示の種類と意味

|  |  |
|--|--|
|  | 誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。        |
|  | 誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。 |

## 図記号の種類と意味

|  |  |
|--|--|
|  | 記号は、禁止の行為であることを示しています。(左図の場合は分解禁止)       |
|  | 記号は、行為を強制したり指示したりするものです。(左図の場合は電源プラグを抜く) |

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

## ご使用場所の注意点

|  |  |
|--|--|
|  | ●浴室やサウナ、湿気の多い場所では使用しないでください。<br>→感電や故障の原因になります。      |
|  | ●床面の水平な場所に置いて使用してください。<br>→不安定な場所では本体が転倒し事故の原因になります。 |
|  | ●万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。<br>詳しくは、9ページをご覧ください。    |
|  | ●アース線はガス管・水道管・電話線・避雷針には絶対に接続しないでください。                |

## ご使用前の注意点

| 警告 |  |
|----|--|
|    | ●次の人は使用しないでください。<br>◎医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。<br>◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人   |
|    | ●次の人は、使用前に医師に相談してください。<br>◎心臓に障害のある人 ◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人<br>◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう](疼)痛性]疾患の人 ◎施療部位に創傷のある人<br>◎体温38°C以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期。衰弱しているとき。<br>◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人は ◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人<br>◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人<br>◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人 ◎安静を必要とする人<br>◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人 ◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人<br>◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人  |
|    | ●電源は交流100V以外では使用しないでください。<br>→火災や感電の原因になります。<br>●変圧器を用いた使用はしないでください。<br>→故障や感電の原因になります。<br>●電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。<br>→感電・ショート・発火の原因になります。<br>●ご使用前には必ず背パッドを上げて本体の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないかどうか確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、サービスセンター(裏表紙に記載)にご連絡ください。<br>→布地の破れた状態で使用すると、ケガや感電のおそれがあります。   |
| 注意 |  |
|    | ●電源プラグをコンセントに差し込む前に電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。<br>→故障や感電の原因になります。<br>●電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。<br>→感電やショート・発火の原因になります。<br>●ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。<br>●ご使用前には背もたれを完全に起こし体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。<br>→はじめからマッサージを強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。<br>●安全のために、もみ玉の位置を確認した上で、体をねじらず背骨が左右のもみ玉の間にくるように、ゆっくりと座ってください。<br>●椅子に腰掛けたり、椅子から立ち上がるとき以外は、フットレストの上にのる、立つ、座る等の行為はしないでください。<br>→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。<br>●しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 |
|    | ●この取扱説明書の使用法以外の使い方をしないでください。また、本機と他の治療器や電気毛布などを併用しないでください。<br>→体に悪い影響を与えることによるケガの原因になります。<br>●人をのせたまま移動しないでください。<br>→本体の転倒により、事故やケガの原因になります。   |

# 安全上のご注意

## ご使用時の注意点

### △警告

|   |   |
|---|---|
|  禁止  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源コードやリモコンのコードを本体に巻きつけたり、本体の脚で踏んだりしないでください。また、電源コードやリモコンのコードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。<br/>→コードが破損し、火災や感電の原因になります。</li><li>● 本体やリモコンに水などをこぼさないでください。<br/>→感電やショート・発火の原因になります。</li><li>● お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを、本体の上や本体の周辺（背もたれの後ろや座・フットレストの下など）で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせたりしないでください。<br/>→事故やケガの原因になります。</li><li>● 布地が破れた状態では使用せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。<br/>→事故やケガ・感電の原因になります。修理はサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。</li><li>● フットレストのすき間やフットレストと本体の間に、指や物をはさまないようにしてください。また、フットレストを手で持ち上げた状態で急に手を離さないでください。</li></ul> |
|  強制 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 背もたれを倒すときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがないことを確認してください。また、背もたれを倒すときは、背もたれの後ろに体や物をはさまないようにしてください。</li><li>●ぬれた体で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。<br/>→感電や故障の原因になります。</li></ul>   |

### △注意

|  |  |
|--|--|
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 素肌では使用しないでください。</li><li>● マッサージおよび椅子としての目的以外には使用しないでください。<br/>→事故やケガの原因になります。</li><li>● 頭部、胸部、腹部、関節部（ひじ、ひざなど）には使用しないでください。また、もみ玉の間に手や足、腕などを入れないでください。<br/>→気分が悪くなったり、ケガの原因になります。首筋などには柔らかいタオルを当てて強い刺激を避けてご使用ください。</li><li>● もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れないでください。また、頭部に髪飾りなどのかたいものをつけて使用しないでください。<br/>→ケガの原因になります。</li><li>● フットレストは脚部以外には使用しないでください。<br/>→ケガの原因になります。</li><li>● マッサージチェアを無人で動作させないでください。<br/>→事故やケガの原因になります。</li></ul>          |
|  強制 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 緊急時や動作中に異常を感じたときは、リモコンの【緊急停止】ボタンを押して、動作を停止させてください。</li><li>● 使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止して医師に相談してください。</li><li>● 背パッドをはずしてマッサージしないでください。<br/>→ケガの原因になります。</li><li>● マッサージ中は眠らないように注意してください。<br/>→ケガの原因になります。</li><li>● マッサージの使用は1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。<br/>→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。1日当たりのマッサージは、通算30分程度を目安にしてください。</li><li>● 脚部のエアーマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。<br/>→無理に入れようとすると、故障の原因になります。</li></ul> |

## △注意



- 停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止して電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
→停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。
- 落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止して電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、サービスセンター（裏表紙に記載）に点検・修理を依頼してください。  
→感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

## ご使用後や使用しないときの注意点

### △注意



- 使用後は必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
→お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。
- 使用後は必ず背もたれを完全に起こしてください。
- 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
- 座、背もたれ、フットレストなどにものを載せないでください。



- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。  
→感電やショートによる火災の原因になります。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
→ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。

## その他の注意点

### △警告



- 本体の上に立たないでください。座部以外に座るなどして、上から強い衝撃を与えないでください。  
→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。



- 改造はしないでください。また、サービスマン以外の人は分解・修理をしないでください。  
→火災や感電、ケガの原因になります。修理はサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。


### △注意



- 他の人に譲渡、貸与するときは、本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡しください。

# 各部の名前とはたらき

## 本体

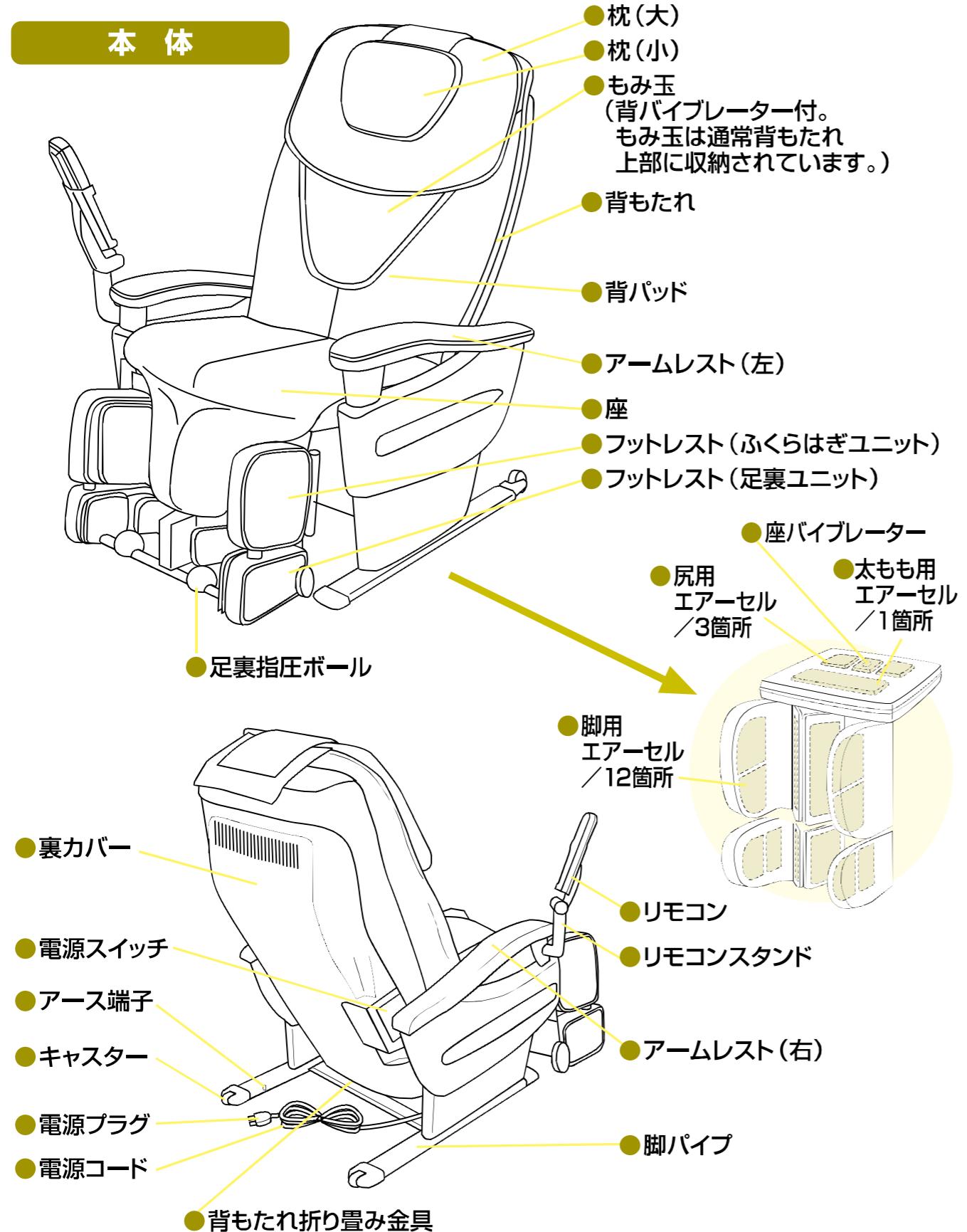

## リモコン

### 液晶表示大

動作中のコース、指圧点、背バイブ解除を表示します。下記「リモコン／液晶表示 大」参照。

### 入/切ボタン

リモコンの電源の入・切を行います。  
動作中に押すと、もみ玉が収納位置まで戻ってから停止します。

### 緊急停止ボタン

緊急時や動作中に異常を感じたときにその場で動作を停止します。

### 快適コースボタン

[おはよう] [おやすみ] [おしり] のボタンで3コースを選択できます。



### 液晶表示小

動作内容を文字またはイラストで表示します。  
自由選択コース動作時の表示の詳細についてはP17～18を参照してください。

### 肩位置調節ボタン

指圧点検出直後に[↑] [↓] ボタンで肩位置を調節します。(自動コースのみ)

### リクライニングボタン

[起こす] [倒す] ボタンでリクライニング角度を調節します。(フットレストが連動します。)

### メディカルコースボタン

[1] [2] [3] [4] [5] の番号ボタンで5コースを選択できます。

### 背バイブ解除

自動コース動作時、背バイブを解除したいときには使用します。

### 扉

扉内部は下記参照。

## リモコン／扉内部

### 自由選択コースボタン

もみ、手もみ、Wもみ、  
もみ＆たたき、リズム指圧1、  
リズム指圧2、たたき1、たたき2、  
部分ローラー、背筋ローラーを選択できます。

### 幅調節ボタン

リズム指圧1、  
たたき1、たたき2、  
部分ローラー、背筋ローラー、  
背バイブ動作時のもみ玉の幅を調節します。

### エアーボタン

[足裏] [脚] [座] を選択できます。  
[弱] [中] [強] ボタンでエアーマッサージの強さを調節します。エアーマッサージの強さ調節は、自動コース動作時にもご使用いただけます。



### リクライニングボタン

もみ、たたき1、もみ＆たたき動作時の動作の速度を調節します。


### 上下調節ボタン

[上] [下] ボタンでもみ玉位置を調節します。

### バイブボタン(背・座)

バイブの強さは強弱2段階で調節できます。

## リモコン／液晶表示大

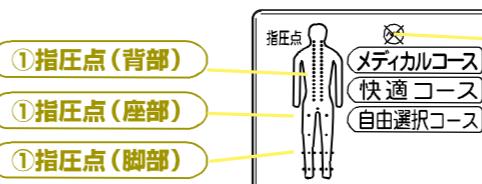

### ①指圧点(背部・座部・脚部)

マッサージが行われているときに、各点が点灯します。

### ②コース表示

### ③背バイブ解除

自動コースの動作中に背バイブ解除ボタンを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

## 警告

- 本体やリモコンに水などをこぼさないでください。
- ぬれた体で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。

- リモコンの上に座ったり、リモコンを落としたり、踏んだり、リモコンのコードを強く引っ張ったりしないでください。
- 先のとがったものやかたいものでボタンを押さないでください。
- 液晶表示部を押さないでください。  
→破損の原因になります。

# おもな特長と効能・効果

## 特長

### もみ玉、エアー、パイプを組み合わせた ハイブリッドマッサージ機能

上半身はもみ玉およびバイブレーター機能、下半身はエアーよりバイブルーター機能を採用しています。上半身は、4つのもみ玉が多彩な技法でマッサージ。上半身のコリをしっかりとほぐします。下半身はエアーセルとバイブルーターできめ細かいマッサージを行います。

### 光センサーによる 自動指圧点検出機能

マッサージ前に、その人の体型に応じて指圧点を自動的に検出。体型や目的に合わせて効果的なマッサージが行えるよう工夫しています。  
(一部自由選択コース含む)

### わかりやすいガイドメッセージ付き リモコン液晶ディスプレイ

リモコンには2つの液晶ディスプレイを採用。実行中の動作内容などがわかりやすく確認できるようになっています。

### バイブルーター機能

座(おしり部)および背にバイブルーター機能を内蔵。心地よい振動で疲れをほぐします。

## 効能・効果

あんま・マッサージの代用として、以下の効能・効果があります。

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

# ご使用の前に

- この製品は、背もたれが折り畳まれた状態で梱包してお届けしています。ご使用前には、必ず背もたれをカチッと音がするところまで起こしてください。
- 冷えきった室内的温度を上げて使用するときは、室温を急に上げず、徐々に上げてください。本機を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1時間ほど待ってから使用してください。  
→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。

## 設置場所について

リクライニングをしたときに壁や物に当たらないように、本体後ろのスペースは50cm以上、本体前のスペースは40cm以上確保してください。

### △ 注意

- 浴室やサウナなど、湿気の多い場所では使用しないでください。
- 床面の水平な場所に置いて使用してください。
- ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所(40°C以上)では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。

- 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。(ホットカーペットは敷かないでください。)
- 重量物ですので、下ろすとき床面を傷つけないように注意してください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。




## 移動の仕方

本体に移動用キャスターがついています。背もたれを起こし電源スイッチを「切」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いてから図のように前側を浮かせてキャスターで移動してください。

### △ 注意


- 人をのせたまま移動させないでください。
- 足裏指圧ボールをはずしてから移動させてください。

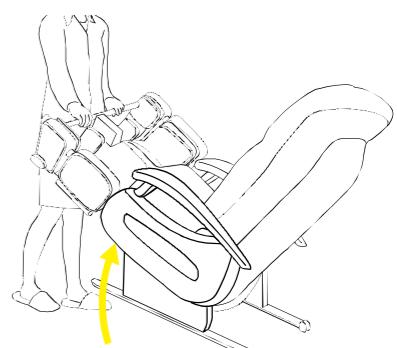

# ご使用の前に


## 背もたれの折り畳み方

背もたれ折り畳み金具を上にあげて、背もたれをコンパクトに折り畳めます。

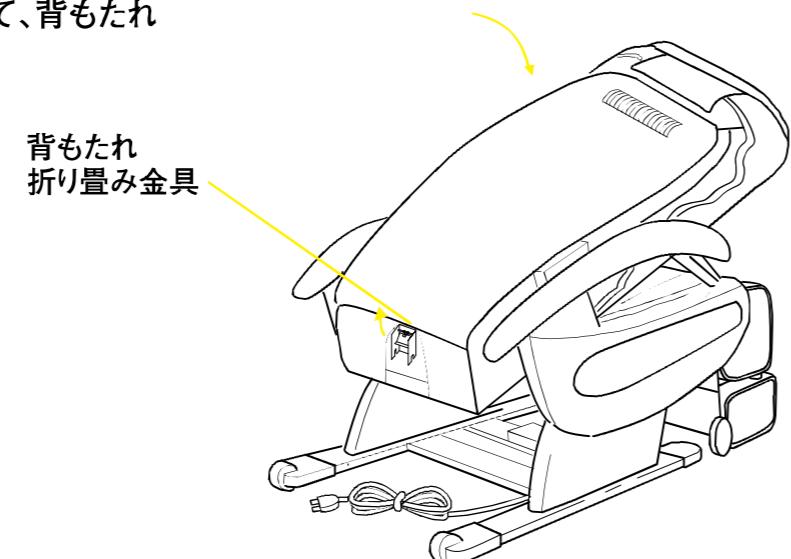

## 背パッド・枕の取り付け方

- ① 背パッド裏面のファスナーと背もたれ上部のファスナーをつなぎます。
- ② 枕裏面のマジックテープと背もたれ上部のマジックテープを合わせます。

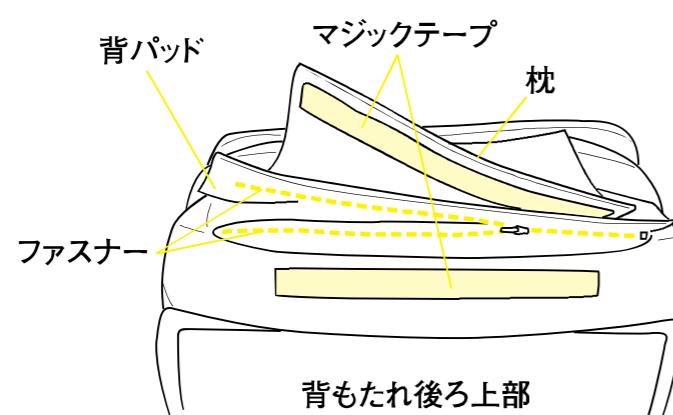


## アースの取り付け方

万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。

- ① 電源コンセントにアース端子がある場合  
脚パイプの後部にあるアース端子のネジに付属のアース線を接続し、他端部の先端の皮をむき、電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでいないか、ときどき点検してください。
- ② 電源コンセントにアース端子がない場合  
お買い上げの販売店にご相談ください。

## リモコンスタンドの取り付け方

右の図のように、アームレスト(右)の裏側に付属のネジで、しっかりと取り付けてください。  
取りはずしは、取り付けと逆の順序で行います。

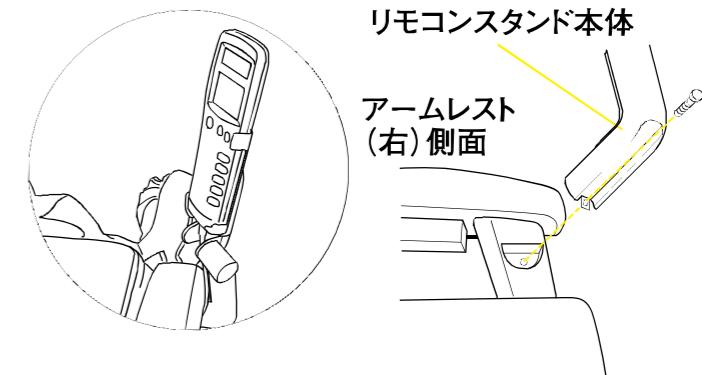

## 布地の確認

図のように、背パッドを上げて、本体の布地が破れていないか確認してください。

### ⚠ 警告


- ご使用前には必ず背パッドを上げて、本体の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないかどうかも確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、サービスセンター（裏表紙に記載）にご連絡ください。



## 主電源の入れ方

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ② 本体右側面の電源スイッチを「入」にします。

※もみ玉が途中で止まっているとき電源スイッチを「入」にすると、もみ玉は自動的に収納位置（背もたれ上部）まで移動して停止します。

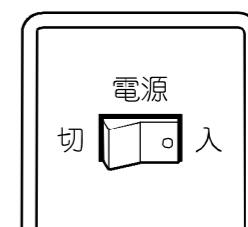

### ⚠ 警告

- 変圧器を用いた使用はしないでください。  
→故障や感電の原因になります。

### ⚠ 注意

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。
- 電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。
- ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。

# 椅子の調節

## 椅子への座り方

背もたれが完全に起きているのを確認してください。もみ玉は通常、背もたれの上部に左右に広がって引っ込んだ状態になっています（収納状態）。安全のため、もみ玉の位置を確認し、上記以外の場所にももみ玉がある場合は、すぐに座らず、電源スイッチを入れてももみ玉を収納状態に戻してから、ゆっくりと椅子の中央に座ってください。

**△注意** ●ご使用前は背もたれを完全に起こし、体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。

●フットレストを上げたまま、椅子に座らないでください。フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。

## リクライニングの使い方

### 背もたれの角度調節の仕方

#### ■背もたれを倒す場合

周囲に人（特にお子様）やペットがないことを確認してから、リモコンのリクライニングボタンの【倒す】側をお好みの角度になるまで押し続けてください。フットレストが連動して上がります。



#### ■背もたれを起こす場合

リモコンのリクライニングボタンの【起こす】側をお好みの角度になるまで押し続けてください。フットレストが連動して下がります。

### △警告

●背もたれを倒すときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがないことを確認してください。  
また、背もたれを倒すときは、背もたれの後ろに体や物をはさまないようにしてください。  
●フットレストのすき間やフットレストと本体の間に指や物をはさまないようにしてください。  
●フットレストを手で持ち上げた状態で急に手を離さないでください。

### △注意


●フットレストは脚部以外には使用しないでください。

●背もたれの角度調節は、リモコンの電源が入っていない場合でも、ご使用いただけます。ただし、本体右側面の電源スイッチが「入」になっている場合に限ります。

## 緩衝パッドの使い方

背パッドの裏には緩衝パッド（薄）が入っています。

マッサージが弱いと感じられる場合は緩衝パッドを抜き取ってマッサージを行なってください。強いと感じられる場合は同梱の緩衝パッド（厚）に入れ換えてマッサージを行なってください。


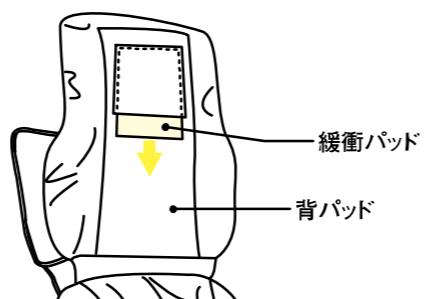


## 枕（小）の使い方

本機には大小2つの枕がついています。この2つの枕によってマッサージ中に頭を楽に、自然な位置にすることができます。枕（小）は裏側についているマジックテープで位置の調節ができます。

あらかじめ、頭の位置に合わせておいてからマッサージを行なってください。

●枕（小）は正しい位置でご使用ください。枕の位置によっては、指圧点自動検出がうまくいかない場合があります。

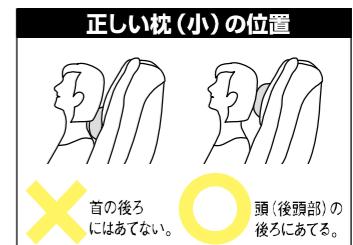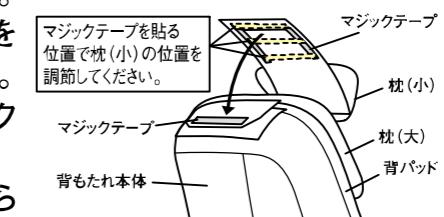

## 足裏指圧ボールの使い方


足をのせる部分には球形の足裏指圧ボール（A）が付いています。

お好みにあわせて同梱の足裏指圧ボール（B）に付け換えてマッサージを行なってください。

●使用するときは必ず足裏指圧ボールを取り付けてください。



足裏指圧ボール裏側の突起をパイプの穴に合わせて取り付けてください。  
→突起が穴からはずれた状態で使用すると破損の原因となります。

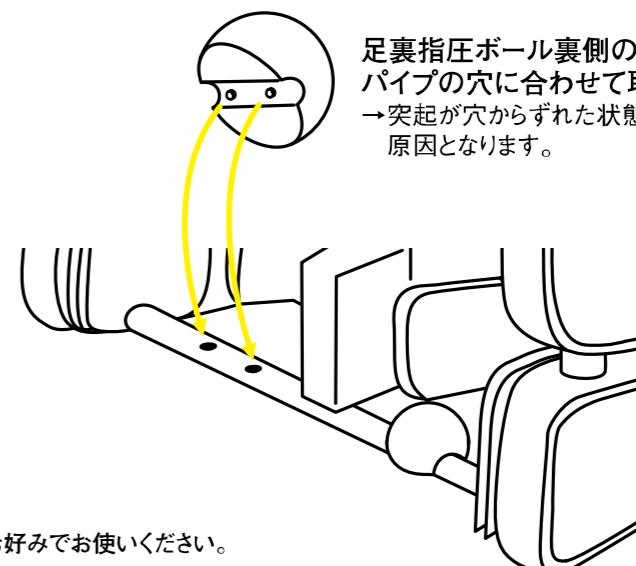

※足裏指圧ボール（B）の前後は自由です。お好みでお使いください。

### △注意

●足裏指圧ボールを取り付けているパイプと足裏ユニットとの間に足を入れないでください。  
→ケガの原因になります。

## 使い終わったら

●使用後は必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
→お子様やペットのいたずら等による事故やケガのおそれがあります。

●使用後は、必ず背もたれを完全に起こしてください。

●使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。

●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。

### △注意

# マッサージの種類と特長

## 自動コース

リモコンのコースボタンにより、お好みのコース機能を選んで、お使いいただけます。

●各コースの時間は身長や体格、リクライニング角度などによって異なります。

## メディカルコース

### 全身疲労回復コース（約13分）

●元気がでない、疲れやすいなどの症状がある方におすすめするマッサージコースです。

### 肩・筋肉疲労改善コース（約11分）

●首から肩にかけての筋肉が疲労した方におすすめするマッサージコースです。

### 腰・筋肉疲労改善コース（約10分）

●腰の筋肉が疲労した方におすすめするマッサージコースです。

### 脚座・筋肉疲労改善コース（約10分）

●腰から脚にかけての筋肉が疲労した方におすすめするマッサージコースです。

### 指圧（疲労回復）コース（約13分）

●指圧動作に重点をおいた、疲労回復のためのマッサージコースです。

## 快適コース

### おはようコース（約8分）

●朝の目覚めがすっきりしない、前日の疲れがまだ残っているという方におすすめするマッサージコースです。

### おやすみコース（約10分）

●就寝前のご使用をおすすめするマッサージコースです。

### おしりコース（約12分）

●バイブレーションとエアマッサージの組み合わせ動作により、おしり部分に使用するマッサージコースです。

## 自由選択コース

リモコン扉内部のボタンにより、お好みのマッサージ機能を選んで、お使いいただけます。

# 自動コースのマッサージ

- あらかじめ設定されたメニューで自動マッサージを行います。
- メディカルコース5種類と快適コース3種類があります。

## 下半身エアーマッサージの強さ調節

下半身エアーマッサージの強さははじめは【中】に設定されていますが、お好みに応じて、リモコン扉内部の調節ボタンで3段階に調節できます。



## 背バイブ解除

コース動作のなかに含まれている背バイブは、お好みにより【背バイブ解除】ボタンで解除できます。もう一度押すと再開します。



## コースの変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切り替えられます。ただし、タイマーはリセットされますが定格時間の30分になるとマッサージは一度終了するようになっています。

### ●自動コース→自動コース

自動コース動作中に他の自動コースのボタンを押すと、もみ玉が一度収納状態にもどり、再度、自動指圧点検出動作から開始します。

### ●自動コース→自由選択コース

自動コース動作中にリモコンの扉を開けて、自由選択コースのボタンを押すと、押した時点で自動コースを中断し、選択した動作を実行します。

※途中で終了する場合、動作中に【入/切】ボタンを押してください。収納動作を行なった後停止します。  
緊急時や動作中に異常を感じたときは、【緊急停止】ボタンを押してください。その場で動作が停止します。  
安全確認後、【入/切】ボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。




- もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れないでください。  
また頭部に髪飾りなどのかたいものをつけて使用しないでください。  
●脚部のエアーマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。



液晶表示大  
肩位置調節ボタン  
メディカルコースボタン  
背バイブ解除ボタン

# 自動コースのマッサージ

## 自動コースの操作方法

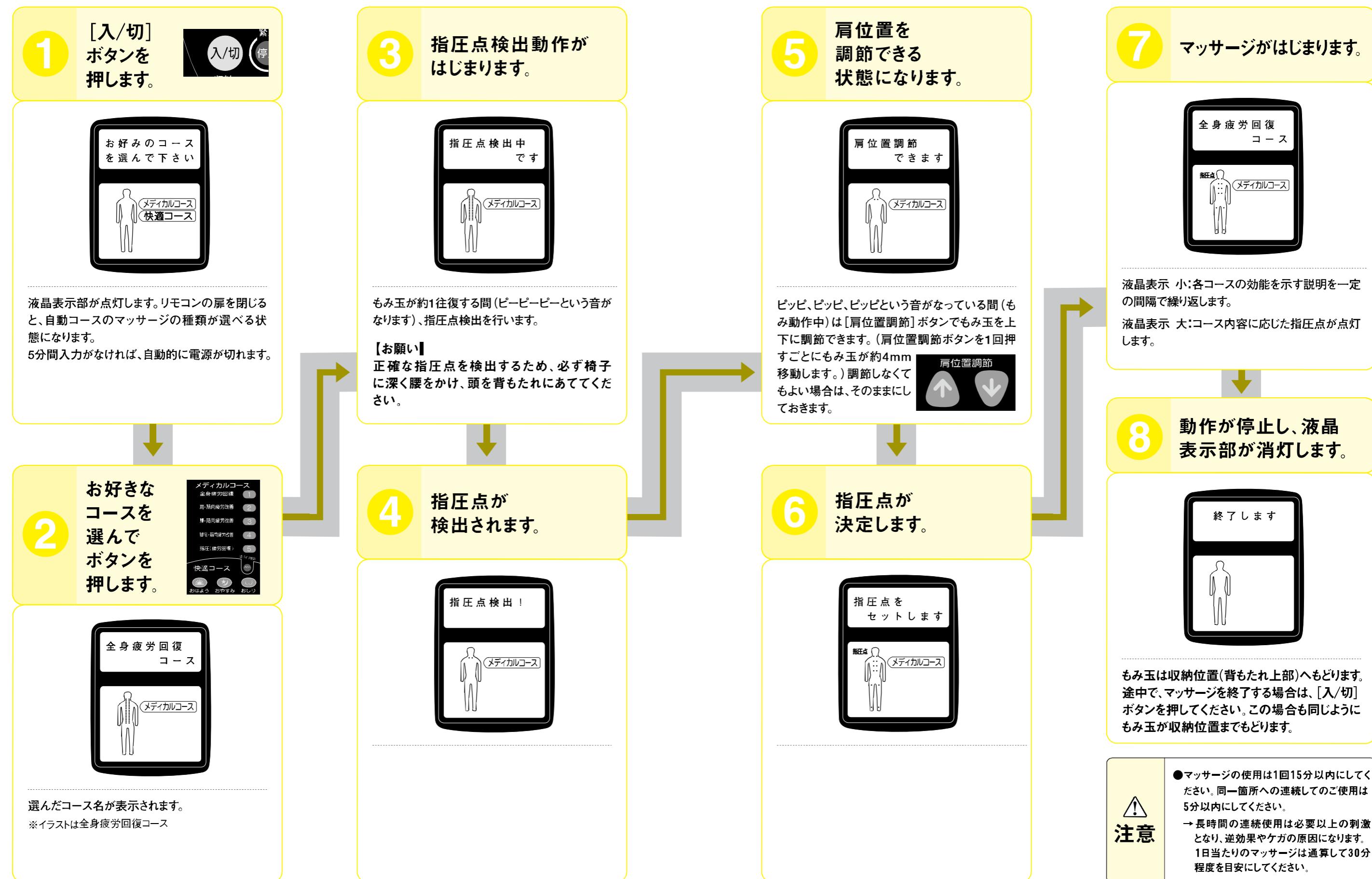

# 自由選択コースのマッサージ

- もみ、手もみ、Wもみ、もみ&たたき、リズム指圧1、リズム指圧2、たたき1、たたき2、部分ローラー、背筋ローラー、バイブレーター（背・座）、下半身エアーマッサージ（足裏・脚・座）からお好みのマッサージを選ぶことができます。  
また、速さや強さ、上下調節など、マッサージ動作の調節も行えます。
- ローラーではメディカルコース時のように自動指圧点検出を行いますが、指圧点検出直後の肩位置調節はできません。

## ■ 基本動作

ボタン選択により、お好みのマッサージが行えます。動作の途中で別のボタンを押して、動作を変更することもできます。

| 動作     | 表示 | 内容   |
|--------|----|--|
| もみ     |    | もみ動作を行います。<br>ボタンを一度押すごとに正転⇒逆転⇒切と切り換えることができます。       |
| 手もみ    |    | 手もみ感覚に近い動作を行います。<br>ボタンを一度押すごとに正転⇒逆転⇒切と切り換えることができます。 |
| Wもみ    |    | 自動的に、正逆転、速さ調節を繰り返すもみ動作を行います。                         |
| もみ&たたき |    | もみとたたきを同時に行います。<br>ボタンを一度押すごとに正転⇒逆転⇒切と切り換えることができます。  |
| リズム指圧1 |    | 指圧動作をリズミカルに繰り返します。                                   |
| リズム指圧2 |    | 指圧位置を変えながら指圧動作をリズミカルに繰り返します。                         |
| たたき1   |    | たたき動作を行います。  |
| たたき2   |    | 自動的に速さ調節を繰り返すたたき動作を行います。                             |

## ■ ローラーの種類


メディカルコース時のように自動指圧点検出を行いますが、指圧点検出直後の肩位置調節はできません。

| 動作     | 表示 | 内容            |
|--------|----|---------------|
| 背筋ローラー |    | 背筋のばしを行います。   |
| 部分ローラー |    | 部分背筋のばしを行います。 |

## ■ 下半身エアーマッサージ

足裏・脚・座のエアーマッサージが選べます。動作中でも、弱・中・強のボタンでマッサージの強さを調節できます。

| 動作 | 表示 | 内容                  |
|----|----|---------------------|
| 足裏 |    | 足裏のエアーマッサージ動作を行います。 |
| 脚  |    | 脚部のエアーマッサージ動作を行います。 |
| 座  |    | 座部のエアーマッサージ動作を行います。 |

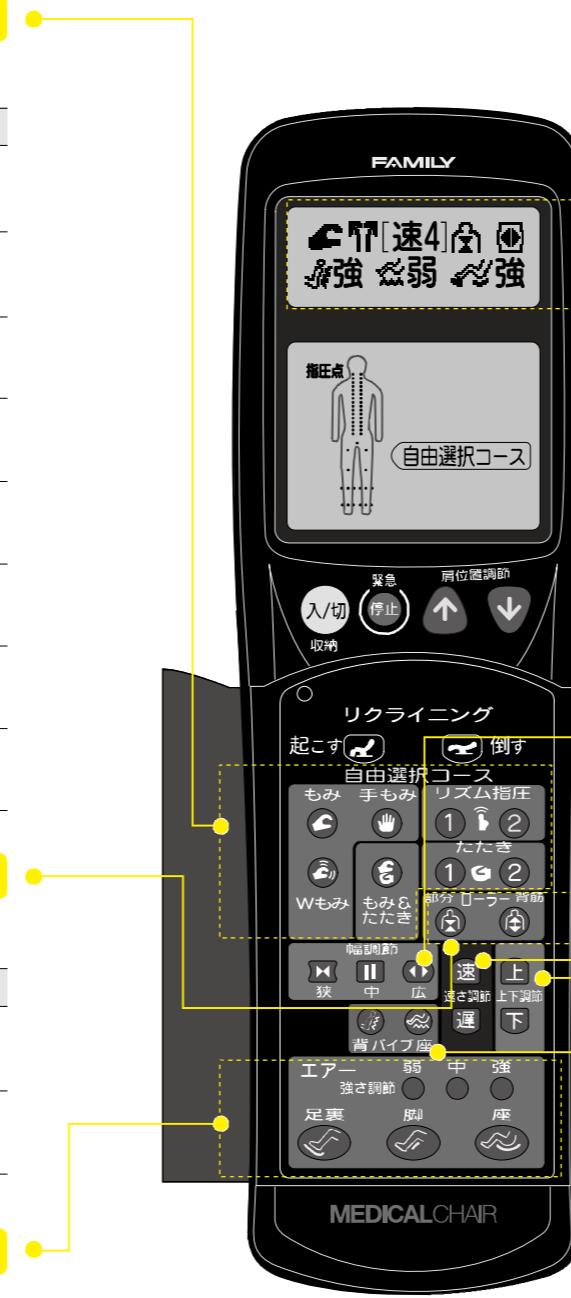


※リモコンの扉を開いた状態

## ■ 自由選択コース動作中の液晶表示

選択した動作と、設定した速さ、強さ、幅、正逆転などは、「液晶表示 小」に文字表示として3秒間表示された後、以下の位置にイラスト表示されます。

- I マッサージの種類 II 正転、逆転
- III 速さ IV ローラー V 幅調節
- VI 背バイブ(強さ) VII 座バイブ(強さ)
- VIII 下半身(強さ)

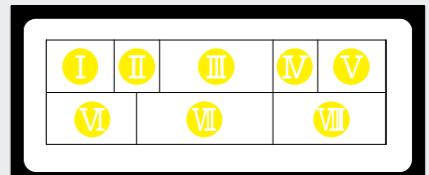

【左の表示は、下記の動作を実行していることを表します】

- もみ(正転・速度4) ●部分ローラー ●ローラー幅「広」
- 背バイブ「強」 ●座バイブ「弱」 ●下半身エアーマッサージ「座・足裏・強」

## ■ 幅調節

リズム指圧1・たたき1・たたき2・背筋ローラー・部分ローラー・背バイブの動作中に、もみ玉の幅を [狭] [中] [広] の3段階に調節できます。動作中にも幅を変更することができます。

※ただし、幅調節できない動作（もみ・手もみ・もみ&たたき・Wもみ・リズム指圧2）とローラーや背バイブを組み合わせた場合は幅調節はできません。

| 動作 | 表示 |
|----|----|
| 狭  |    |
| 中  |    |
| 広  |    |

## ■ 速さ調節

もみ、もみ&たたき、たたき1の動作中に、マッサージの速さを [速] [遅] のボタンで段階的に調節できます。動作中にも速度を変えることができます。

| 動作 | 表示 | 内容   |
|----|----|--|
| 速さ | 速4 | 左の表示は、速さ4に設定した場合です。<br>●速さ調節範囲:もみ 6段階(速さ1~6)<br>もみ&たたき・たたき1 4段階(速さ1~4) |

## ■ 上下調節

もみ・手もみ・Wもみ・もみ&たたき・リズム指圧1・リズム指圧2・たたき1・たたき2・部分ローラー・背バイブの動作中、[上] [下] ボタンの操作でマッサージしたいところにもみ玉の位置を調節できます。

※部分ローラーは、部分ローラー範囲の中心位置が調節できます。背筋ローラー使用時に上下調節ボタンを押した場合、上昇・下降が入れ替わります。

| 動作 | ボタン | 内容     | 動作 | ボタン | 内容     |
|----|-----|--------|----|-----|--------|
| 上  | 上   | もみ玉が上に | 下  | 下   | もみ玉が下に |


## ■ 背・座バイブ

背と座のバイブレーションマッサージを行います。  
ボタンを一度押すごとに、弱⇒強⇒切と切り換えることができます。

| 動作   | 表示 | 内容                     |
|------|----|------------------------|
| 背バイブ |    | 背中のバイブレーションマッサージを行います。 |
| 座バイブ |    | 座部のバイブレーションマッサージを行います。 |

# 自由選択コースのマッサージ

## 自由選択コースの操作方法

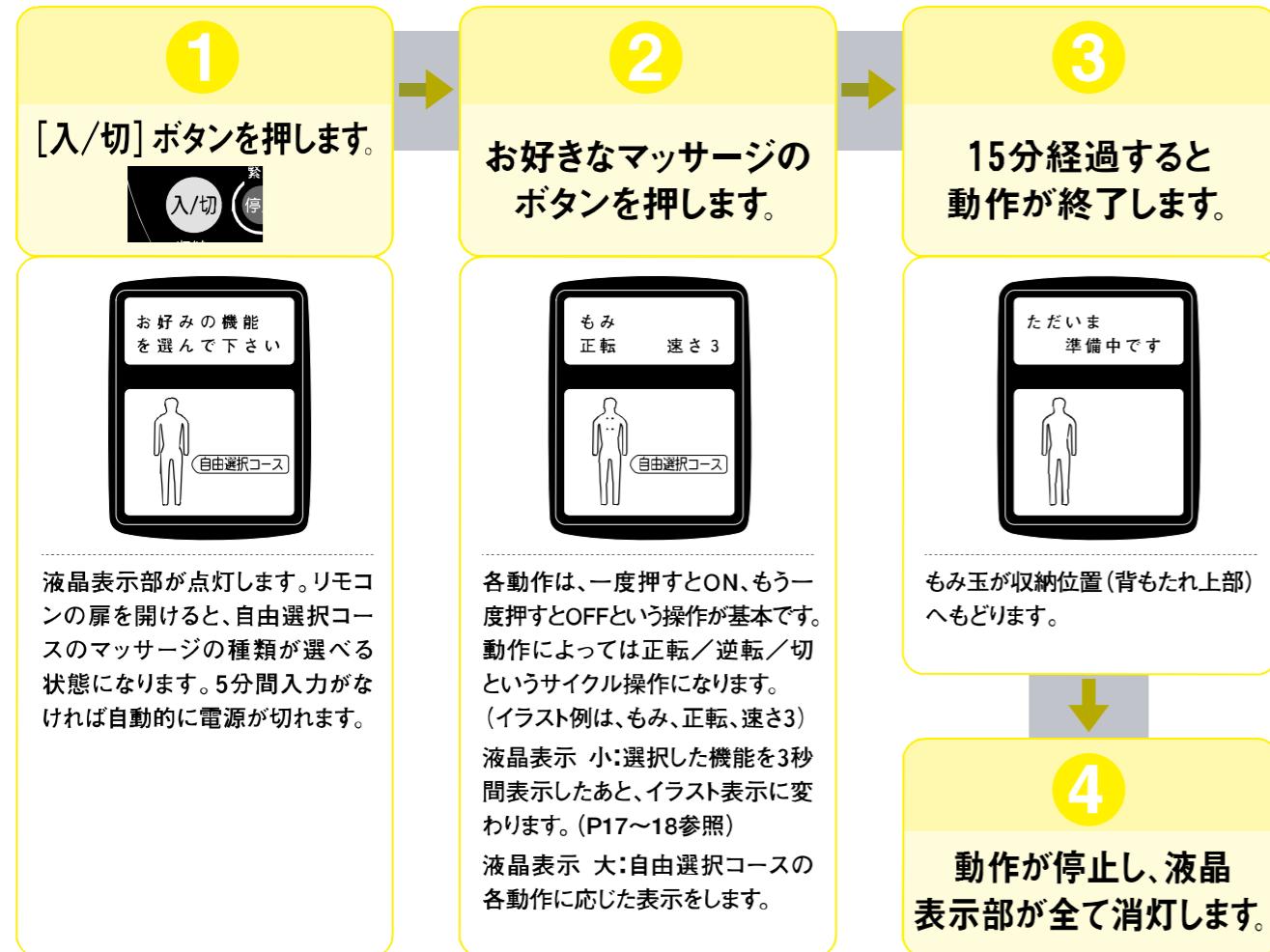

## コース変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切り替えられます。ただし、タイマーはリセットされますが定格時間の30分になるとマッサージは一度終了するようになっています。

### 自由選択コース→自動コース

自由選択コース動作中にリモコンの扉を閉じて、自動コースのボタンを押すと、もみ玉が一度、収納状態にもどり、自動指圧点検出動作から開始し、自動コースを行います。

\*途中で終了する場合、動作中に[入/切]ボタンを押してください。収納動作を行なった後停止します。

緊急時や動作中に異常を感じたときは、[緊急停止]ボタンを押してください。その場で動作が停止します。

安全確認後、[入/切]ボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。

- △ 注意**
- もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れないでください。  
また頭部に髪飾りなどのかたいものをつけて使用しないでください。
  - マッサージの使用は1回15分以内にしてください。同一箇所へのご使用は5分以内にしてください。  
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。
  - 1日当たりのマッサージは通算して30分程度を目安にしてください。
  - 脚部のエアーマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。

## 動作メニューの組み合わせ方と調節可能項目一覧

- ①～⑤のマッサージメニューの中からそれぞれ好みのマッサージ動作を選択し、組み合わせることができます。
- 実行中の動作調節が可能なものについては動作調節の欄に○印をつけています。
  - 幅調節できない動作(もみ、手もみ、もみ&たたき、Wもみ、リズム指圧2)と、ローラーや背バイブを組み合わせた場合、幅調節はできません。

### ① 基本動作 (8種類の動作の中から1つを選んでください。)

| 動作     | 動作調節 | 正転/逆転変更     | 速さ調節        | 幅調節 | 上下調節 | 強さ調節 |
|--------|------|-------------|-------------|-----|------|------|
| もみ     | ○    | ○           | 速さ1～6 6段階   | —   | ○    | —    |
| 手もみ    | ○    | —           | —           | —   | ○    | —    |
| Wもみ    | —    | —           | —           | —   | ○    | —    |
| もみ&たたき | ○    | ○           | 速さ1～4 4段階   | —   | ○    | —    |
| リズム指圧1 | —    | —           | ○ 狹・中・広 3段階 | ○   | —    | —    |
| リズム指圧2 | —    | —           | —           | ○   | —    | —    |
| たたき1   | —    | ○ 速さ1～4 4段階 | ○ 狹・中・広 3段階 | ○   | —    | —    |
| たたき2   | —    | —           | ○ 狹・中・広 3段階 | ○   | —    | —    |



### ② ローラー (2種類の動作の中から1つを選んでください。)

| 動作     | 動作調節 | 正転/逆転変更 | 速さ調節        | 幅調節          | 上下調節      | 強さ調節 |
|--------|------|---------|-------------|--------------|-----------|------|
| 背筋ローラー | —    | —       | ○ 狹・中・広 3段階 | ○(上昇・下降入れ替え) | —         | —    |
| 部分ローラー | —    | —       | —           | ○ 狹・中・広 3段階  | ○(中心位置調節) | —    |



### ③ 背バイブ

| 動作   | 動作調節 | 正転/逆転変更 | 速さ調節 | 幅調節         | 上下調節 | 強さ調節      |
|------|------|---------|------|-------------|------|-----------|
| 背バイブ | —    | —       | —    | ○ 狹・中・広 3段階 | ○    | ○ 弱・強 2段階 |



### ④ 座バイブ

| 動作   | 動作調節 | 正転/逆転変更 | 速さ調節 | 幅調節 | 上下調節 | 強さ調節      |
|------|------|---------|------|-----|------|-----------|
| 座バイブ | —    | —       | —    | —   | —    | ○ 弱・強 2段階 |



### ⑤ 下半身エアーマッサージ

| 動作 | 動作調節 | 正転/逆転変更 | 速さ調節 | 幅調節 | 上下調節 | 強さ調節        |
|----|------|---------|------|-----|------|-------------|
| 足裏 | —    | —       | —    | —   | —    | ○ 弱・中・強 3段階 |
| 脚  | —    | —       | —    | —   | —    | ○ 弱・中・強 3段階 |
| 座  | —    | —       | —    | —   | —    | ○ 弱・中・強 3段階 |

# 保管とお手入れの仕方

## 保管の仕方

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない場所に保管してください。
- ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないようにしてください。

### ⚠ 注意

- 直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

## お手入れの仕方

### ⚠ 注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

## 背パッド・枕・各カバー

- 汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしほってから拭き取ってください。

### ⚠ 注意

- ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。
- アイロン掛けはしないでください。

## 本体

- プラスチック、パイプ、布部の汚れは中性洗剤をひたし、かたくしほった布で拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
- アルコール、その他の溶剤やみがき粉などでのお手入れはキズ、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

## リモコン

- リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。
- 絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。故障の原因となります。

# 故障かな?と思ったら



サービスマン以外の人は、分解や修理をしないでください。

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは、事故防止のために  
だちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店  
またはお近くのサービスセンター（裏表紙に記載）までご相談ください。

### 状態

- #### 動作時の音
- たたき動作と、もみ&たたき動作時の音（ゴトゴト音）
  - エアーポンプの音（ブーン音）
  - 背もたれが最大リクライニングして止まっているときのポンプの音（ブーン音）
  - もみ動作時のもみ玉と布のする音（キュッキュッ、ギュウギュウ音）
  - バイブレーターの音（ブーンブーン音）
  - リクライニング時の音（ウーン音）
  - リクライニング時にフットレストが上下した後になる音（コン音）
  - エアーマッサージ中の音（コツコツ音）

### 原因と 直し方

構造上やむを得ず発生するもので、性能等に影響はありません。

### 状態

リモコンのボタンを押しても正常に動作しない。

### 原因と 直し方

次の点検を行なってください。  
①電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。  
②本体右側面の電源スイッチは「入」になっていますか。  
③リモコンの扉がしっかりと閉められていますか。

### 状態

液晶表示部に「主電源を入れ直してください」という表示が出た。

### 原因と 直し方

本体右側面の電源スイッチを「切」にし、  
5秒ほどしてから電源スイッチを入れ直してください。  
①正常に戻ればそのままお使いください。  
②再度、同じメッセージが表示される場合は、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、  
お買い上げの販売店またはお近くのサービスセンターに連絡してください。

### 状態

自動指圧点検出がうまくいかない。（もみ玉が肩の高さに合っていない。）

### 原因と 直し方

椅子に深く腰をかけて頭を背もたれにあててください。また、指圧点検出直後に肩位置調節ボタンで肩位置を調節できます。  
(自由選択コースでは部分ローラー・背筋ローラーで自動指圧点検出を行いますが、  
このときは指圧点検出直後の肩位置調節はできません。)

# 故障かな?と思ったら

## Q&A

状態

マッサージ動作が途中で止まる。

原因と  
直し方

本体右側面の電源スイッチを「切」にし、5秒ほどしてから電源スイッチを入れ直してください。  
①正常に戻ればそのままお使いください。  
②正常に戻らない場合は事故防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、  
サービスセンターに連絡してください。

状態

マッサージ中に、もみ玉が途中で止まる。

原因と  
直し方

もみ玉に必要以上の力が加わると、動きが止まることがあります。  
故障ではありません。体を浮かせぎみにしてください。  
(特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。)

状態

もみ玉が上部へ移動して止まってしまった。

原因と  
直し方


オートタイマー機能によりマッサージ終了時に、もみ玉が体に干渉しないように上部へ移動する構造になっています。

状態

左右のもみ玉の位置がずれている。

原因と  
直し方

交互たたき機構を採用しているため、  
構造上やむを得ず発生するもので故障ではありません。

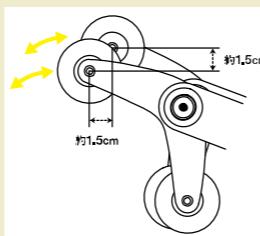

状態

エアーマッサージ中、リクライニングさせるとエアーマッサージが止まってしまう。

原因と  
直し方

安全のため、背もたれの角度調節中はエアーマッサージが止まるようになっています。  
故障ではありません。

Q

リモコンの扉がはずれてしまった。直せますか?

A

リモコンの扉を必要以上に開くと、破損防止のため扉がはずれるようになっています。  
故障ではありませんので、もう一度扉をリモコンにはめ込んでください。

Q

マッサージをより強くするにはどうすればいいですか?

A

背もたれを倒し、深く腰をかけ、背もたれに体重がかかるようにしてください。  
それでも弱い場合は背パッド裏の緩衝パッドを抜き取ってマッサージしてください。

Q

マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか?

A

背パッド裏の緩衝パッドを同梱の緩衝パッド(厚)に入れ換えてください。  
それでも刺激が強い場合は背もたれを起こして使用してください。

Q

誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか?

A

ただちに本体右側面の電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店またはお近くのサービスセンターにご相談ください。

Q

体重が重くてもだいじょうぶですか?

A

体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。体重100kg以上の方がご使用になる場合は、少し体を浮かせぎみにしてご使用ください。

Q

電気代はいくらぐらいかかりますか?

A

1日15分、毎日ご使用いただいた場合、1ヵ月で約33円です。(2005年6月現在、当社調べ)

# アフターサービスについて

## 1.保証書について

この製品には保証書を別途添付しております。

保証書は販売店にて「販売店・購入日」などの所定事項を記入してお渡ししていますので、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。(修理の際、必要となります。) 保証期間はお買い上げ日より1年間です。ただし、この製品は日本国内専用ですので、海外でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外(業務用など)でご使用の場合は、保証期間中でも有料修理とさせていただきます。

## 2.修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、22~23ページをよくお読みください。

点検後、まだ異常がありましたらお買い上げの販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

1.お名前・ご住所・お電話番号

2.販売名…26ページをご覧ください。

3.製造番号…裏カバーに貼ってあるラベルをご覧ください。

4.お買い上げ日

5.故障の状態(できるだけ詳しくお知らせください。)

●保証期間中は

修理の際、保証書をご提示ください。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

●保証期間が過ぎている場合は

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

●販売店にご依頼になれない場合は

サービスセンター(この取扱説明書の裏表紙に記載)にご連絡ください。

●補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの電気マッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。(ただし、縫製部品は除きます。)

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店、またはサービスセンターにお問い合わせください。

## 安全のために商品の点検を

### 長期ご使用の場合は商品の点検を

こんな症状はありませんか?



■左記のような症状があれば故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

本体布地(もみ布)は消耗品であり、耐用年数は3年です(使用条件:1日15分コースを2回、毎日使用した場合)。

安全にお使いいただくために、お買い上げ後、耐用年数が過ぎる前にお買い上げの販売店、またはサービスセンターでの定期点検をおすすめします。

※ただし使用条件が上記と異なる場合には、耐用年数が変わります。

※お買い上げ後5年ほど経ちましたら、安全のために椅子全体の点検をおすすめします。

点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、またはサービスセンターにご相談ください。

# 仕様

|             |  |
|-------------|--|
| 販売名         | FMC-810  |
| 使用電源        | AC100V   |
| 定格消費電力      | 140W   |
| 定格周波数       | 50-60Hz  |
| 定格時間        | 30分  |
| もみ速さ        | 6段階 最小約12回/分、最大約33回/分  |
| たたき速さ       | 4段階 最小約280回/分、最大約600回/分  |
| もみ玉の幅       | 3段階(狭、中、広)   |
| 上半身         | 上下移動速さ<br>50Hz:約25秒で1往復<br>60Hz:約21秒で1往復                           |
| マッサージ範囲     | 約59cm(部分ローラーのとき約15cmの範囲で自動反復)                                      |
| 自動コース       | メディカルコース 5種類 快適コース 3種類 (自動指圧点検出機能付き)                               |
| 自由選択コース     | 15種類 (一部自動指圧点検出機能付き)   |
| 下半身マッサージ    | エアー圧力 強:約31kPa 中:約26kPa 弱:約21kPa                                   |
| オートタイマー     | 約15分(自動コースは異なります)  |
| バイブレーター機能   | 背・座 強弱2段階切り換え式   |
| フットレストの位置   | 調節範囲:約28cm   |
| リクライニング角度   | 水平面に対し、約120°~170°無段階(電動リクライニング)                                    |
| 本体の寸法       | 幅約74cm×奥行約125(182)cm×高さ約108(70)cm<br>( )内の数字は最大リクライニングおよびフットレスト水平時 |
| 重量          | 約75kg  |
| 付属品         | リモコンスタンド、アース線、緩衝パッド(厚)、足裏指圧ボール(B)                                  |
| 類別          | 器具器械(77)バイブルーター  |
| 一般的名称       | 家庭用電気マッサージ器  |
| 医療用具製造業許可番号 | 31BZ0017   |
| 製造元         | ファミリー株式会社 大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号   |