

手首式血圧計 FBM-100 接続(ペアリング設定)・測定方法

手首式血圧計で測定したデータについて

- ルピナスショルダーをお持ちのお客様は、ショルダー付属のタブレットと直接通信することができます。
※ルピナスショルダー出荷時は、ショルダー付属のタブレットと手首式血圧計を接続された状態(ペアリング状態)でお届けしています。
- ルピナス/ルピナスライトをお持ちのお客様は、お手持ちのスマートフォンで専用アプリ「ルピナスリンク 365」をご使用いただくことで、測定データを確認することができます。

1 アプリ「ルピナスリンク 365」のホーム画面から接続・測定画面に移動



ホーム画面を下に移動させると、
測定 ボタンが表示されますので押してください。

2 血圧計とスマートフォンの接続（ペアリング設定）

①接続・測定画面（未接続状態）

iPhone




Android



接続・測定画面が表示されます。

接続・測定画面に“未接続”と表示されている場合、ペアリング設定が必要です。 **接続** ボタンを押してください。

血圧計 接続(ペアリング設定)の準備

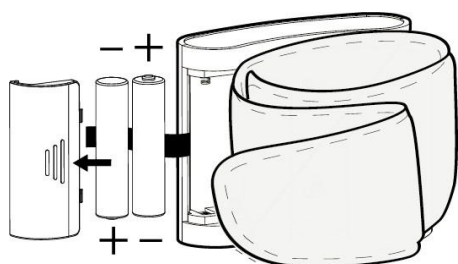

接続をおこなう前に、血圧計に電池を入れてください。

※血圧計に表示される時計の設定方法は、付属の取扱説明書をご確認ください。

③接続・測定画面（接続中画面）

iPhone



Android



接続 ボタンを押すと接続が開始されます。

接続中画面が表示されましたら、血圧計の START・STOP ボタンを長押しして、血圧計をペアリングモードにしてください。

- スマートフォンの Bluetooth 設定が OFF の場合は、血圧計との接続(ペアリング)ができませんので、Bluetooth 設定を ON にしてください。
- Android の場合は、血圧計との接続(ペアリング設定)時にスマートフォンの位置情報へのアクセスを「許可」に設定後、ペアリングを開始してください。位置情報へのアクセスを許可しない場合、血圧計との接続(ペアリング設定)ができません。

血圧計 ペアリングモード



血圧計の START・STOP ボタン

④接続・測定画面（接続中 機器に登録するユーザー選択画面）

iPhone



Android



ユーザー選択をおこないます。ルピナスリンク 365 の使用者毎にユーザーを分けて設定することで、測定のデータを自動で接続することができます。（例：A さん→ユーザー1、B さん→ユーザー2 ）

- iPhone の場合：選択中のユーザーは **ユーザ1** と青色で表示されます。ユーザーを選択後、**接続** ボタンを押してください。
- Android の場合：選択中のユーザーが  で表示されています。ユーザーを選択後、**INADA 手首式血圧計** の表示を押してください。（ユーザーは灰色の丸枠  を押すことで切り替わります）

血圧計 ペアリングモード



⑤接続・測定画面（ペアリング接続済み画面）

iPhone



Android



ペアリング接続が完了すると、接続・測定画面に **ペアリング済み** が表示され、選択したユーザーが **INADA 手首式血圧計 ユーザ 1** と表示されます。また、測定ボタンの色が灰色から紫色に **測定** 変化します。

血圧計 ペアリング完了時



3 血圧計の測定方法・データ転送方法

①接続・測定画面（ペアリング接続済み画面）

iPhone




Android




接続・測定画面に表示される **測定** を押してください。

血圧計の START・STOP ボタンを押して、接続(ペアリング設定)時に登録したユーザーを選択してください。

血圧計 ユーザー選択画面

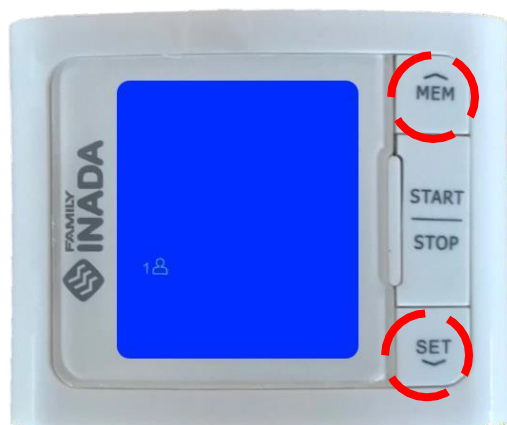

1. START・STOP ボタンを押すと電源が入ります。
2. ペアリング設定時に登録したユーザーを
MEM ボタン または、SET ボタンで選択します。

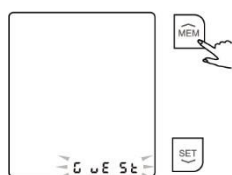

※ゲストユーザーを選択すると、測定結果は血圧計の画面に表示されますが、データは送信されません。

②接続・測定画面（測定中画面）

iPhone




Android



測定が始まります。血圧計で測定をおこなってください。

※血圧計の詳しい測定方法は付属の取扱説明書をご確認ください。

血圧計 測定中画面

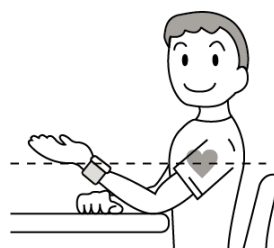


血圧計を測定するときは、血圧計が心臓の高さと同じになるようなテーブルなどにひじをつけておこなってください。リラックスした状態でおこなってください。

③ホーム画面（測定画面）



測定が終了すると結果のデータが転送され、ホーム画面に測定結果が表示されます。

血圧計 測定結果画面

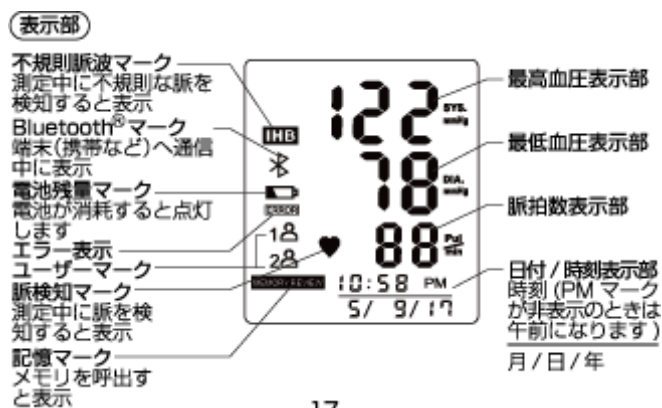

血圧計 測定結果のデータ転送画面



血圧計の測定が終了すると、測定結果のデータがブルピナス リンク 365 に転送されます。転送中は血圧計の画面に Bluetooth マークが表示され、点滅します。転送後、血圧計の画面右下に「done」が表示されます。